

VITA Linearguide 3D-MASTER

Die neue Leichtigkeit der Farbnahme




VITA Farbnahme

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 10.08

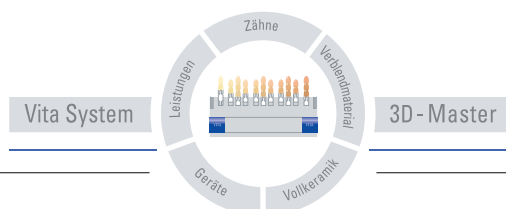

VITA

Produktbeschreibung

Mit dem VITA Linearguide 3D-MASTER bestimmen Sie zügig und präzise die korrekte Zahnfarbe. Das moderne Design und der systematische Aufbau des VITA Linearguide ermöglichen das schnelle Auffinden der passenden 3D-MASTER Farbe.

Der VITA Linearguide 3D-MASTER erleichtert die Umstellung von herkömmlichen Farbnahmesystemen auf eine präzise Farbbestimmung und Farbkommunikation im VITA SYSTEM 3D-MASTER. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Linearguide 3D-MASTER Einfach effizient



Nehmen Sie aus dem geöffneten Linearguide den VITA Valueguide 3D-MASTER heraus.



Treffen Sie mit dem VITA Valueguide eine erste Vorauswahl. Sie bestimmen damit die richtige Helligkeitsstufe 0 bis 5.



Nehmen Sie nun innerhalb der gefundenen Helligkeitsstufe aus Schritt 1 die Feinbestimmung mit dem entsprechenden VITA Chroma-/Hueguide vor.



Sie bestimmen so schnell und mit Sicherheit die richtige Zahnfarbe.

Vorteile

- Klassische lineare Handhabung
- Selbsterklärend, einfache Anwendung
- Sichere, schnelle und präzise Farbbestimmung für zufriedene Kunden
- Modernes Design als Ausdruck von perfekter Ästhetik und Übersichtlichkeit

Profitieren Sie von den Vorteilen des VITA SYSTEM 3D-MASTER und der Möglichkeit, alle Zahnfarben sicher und systematisch zu bestimmen.

Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA Linearguide 3D-MASTER	1 Box	B363

Drucksachen	Best.-Nr.
VITA Linearguide 3D-MASTER	1532D

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA