

VITA Linearguide 3D-MASTER

La toma del color, ahora más sencilla



Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Edición 02.12

VITA shade, VITA made.

VITA

Descripción del producto

La guía VITA Linearguide 3D-MASTER permite determinar el color dental correcto de forma rápida y precisa. Gracias al diseño ergonómico y a la estructura sistemática de VITA Linearguide, se localiza con agilidad el color adecuado del sistema 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER simplifica el cambio de los sistemas de toma del color convencionales a la determinación y la comunicación del color precisas con el VITA SYSTEM 3D-MASTER. Para más información consultar nuestra web: www.vita-zahnfabrik.com

VITA Linearguide 3D-MASTER Simplemente eficaz



Una vez abierta la Linearguide se debe extraer la guía de claridad Valueguide 3D-MASTER.



Se realiza una selección previa con la VITA Valueguide, que ayudará a determinar el nivel de claridad entre 0 al 5.



A continuación, dentro del nivel de claridad determinado, se delimita la selección con la guía Chroma-/Hueguide correspondiente.



Con estos pasos se habrá conseguido determinar de forma rápida y segura el color dental correcto.

Ventajas

- Manipulación lineal clásica para una utilización habitual
- Uso sencillo e intuitivo
- Resultados óptimos gracias a una determinación del color segura, rápida y precisa
- Un diseño estructurado para una orientación intuitiva

Aproveche las ventajas del VITA SYSTEM 3D-MASTER y la posibilidad de determinar de forma sistemática y segura todos los colores dentales.

Denominación	Contenido	Ref.
VITA Linearguide 3D-MASTER	1 caja	B363

Documentación	Denominación	Ref.
VITA Linearguide 3D-MASTER	Ficha de producto	1532SP

US 5498157 A - AU 659964 B2 - EP 0591958 B1

VITA