

Informazione prodotto

Individualizzazione di restauri in VITA ENAMIC®

Per l'individualizzazione intra- ed extraorale ad es. l'applicazione successiva di punti di contatto e piccole correzioni di forma, ecc., sono indicati compositi fotopolimerizzabili, a base di metacrilato, in particolare compositi di otturazione a bassa viscosità, in quanto si applicano e adattano bene sul restauro. E' possibile anche l'uso indiretto extra-orale di compositi per rivestimento estetico, come ad es. VITA VM LC. Si raccomanda di condizionare previamente la superficie del restauro ENAMIC da individualizzare con un idoneo adesivo. Soprattutto con l'uso di VITA VM LC silanizzare previamente la superficie ENAMIC e quindi stendervi VITA VM LC Modelling Liquid.

Condizionamento delle superfici da individualizzare

La superficie del restauro ENAMIC da individualizzare deve essere ruvida e priva di grasso, per ottimizzare il legame col composito.

Sulla superficie non devono permanere residui di liquido di fresaggio e lubrificante (ad es. Dentatec). Eliminarli con un getto d'acqua oppure mediante immersione in bagno ad ultrasuoni.

La rugosità superficiale che residua immediatamente dopo il processo CAM è sufficiente per l'individualizzazione. Se la superficie è già stata sottoposta a finitura, è possibile ripristinare la rugosità con uno dei seguenti metodi:

- Irruvidimento con una diamantata.
- Sabbiatura con Al_2O_3 , max. 50 μm ed una pressione di max. 1 bar.
- Esclusivamente extra-orale: mordanatura con acido fluoridrico in gel al 5%, come ad es. VITA CERAMICS ETCH, nel modo seguente:

Con un pennellino monouso applicare VITA CERAMICS ETCH sulle superfici da mordanare.

Tempo di mordanatura: 60 sec.

Dopo aver lasciato agire per il tempo indicato eliminare completamente qualsiasi residuo di acido dalla superficie mordanata ülen con un getto abbondante di acqua, un intenso getto di vapore o immergendo in bagno ad ultrasuoni in acqua distillata priva di grasso.

Non spazzolare, perchè questa operazione comporta eccessive impurità sulla superficie.

- Pulire accuratamente anche superfici sabbiate con Al_2O_3 .
- Dopo la detersione non toccare più la superficie.

Stendere l'adesivo sulla superficie irruvidita.

Applicare il composito.

- Stendere l'adesivo sulla superficie irruvidita.
- Applicare il composito.

Prodotti consigliati per l'individualizzazione di restauri in VITA ENAMIC*

Produttore	Composito di otturazione/rivestimento fotopolimerizzabile	Adesivo
Kuraray	Clearfil Majesty Flow	Clearfil Ceramic Primer
Ivoclar Vivadent	Tetric EvoFlow	Monobond plus
3M ESPE	Filtek Supreme XTE Flowable	Scotchbond Universal
VITA	VITA VM LC	Silanizzazione (ad es. con VITASIL), quindi VM LC Modelling Liquid

***Attenersi alle istruzioni d'uso dei rispettivi produttori ed accertarsi che il fotopolimerizzatore usato abbia la luminosità e la lunghezza d'onda necessarie per un indurimento completo del materiale.**

Clearfil Majesty e Clearfil sono marchi registrati della Kuraray Medical Inc., Giappone. Tetric EvoFlow è marchio registrato della Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein. 3M, ESPE, Filtek, Scotchbond sono marchi registrati della 3M Company o 3M Deutschland GmbH

VITA shade, VITA made.

VITA