

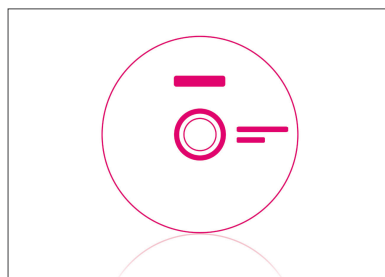
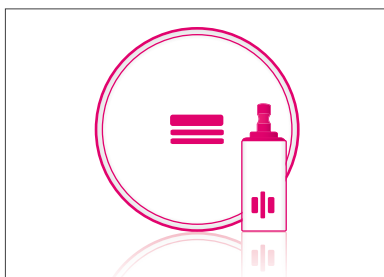
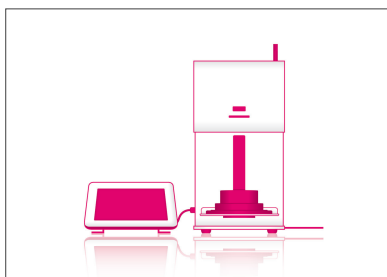


Compendio VITA Gennaio 2026

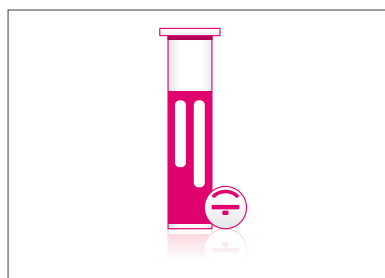

VITA – perfect match.

VITA

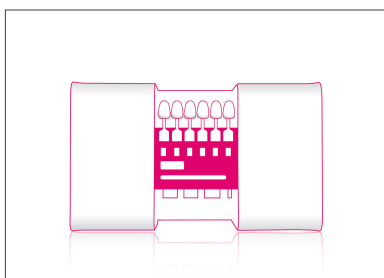

VITA – perfect match.

VITA

VITA Easyshade® V

Determinazione ottimale del colore. Massima sicurezza.



Descrizione

Lo spettrofotometro VITA Easyshade V è stato sviluppato per la determinazione precisa, rapida e affidabile del colore dei denti naturali e di restauri ceramici. Diversi programmi di applicazione consentono, ad esempio, di monitorare anche i trattamenti sbiancanti e rappresentano inoltre un importante strumento di comunicazione con i pazienti.

Vantaggi

Efficiente

Determinazione del colore semplice e precisa in pochi secondi.

Versatile

Utilizzabile con denti naturali, restauri ceramici e per la pianificazione di trattamenti di sbiancamento.

Sicuro

Processo e comunicazione più efficienti tra studio e laboratorio.

VITA Easyshade® V

- Spettrofotometro, intervallo di misura 400 – 700 nm
- Concetto di carica induttiva con batterie AA di lunga durata
- Filtri spettrali analizzano lo spettro di riemissione
- Visualizzazione di tutti i colori dei denti naturali nei collaudati standard cromatici VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA classical A1–D4®, indicazione dei colori VITABLOCS® e dei colori Bleached secondo lo standard della ADA (American Dental Association)
- Interfaccia Bluetooth® per la comunicazione col software per PC VITA Assist e con la App per smartphone VITA mobileAssist

VITA Easyshade® LITE

La scala colori in un clic.



Descrizione

IL VITA Easyshade LITE consente una determinazione digitale semplice del colore dei denti naturali nel sistema cromatico consolidato VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Vantaggi

Veloce

Risultati disponibili in pochi secondi per processi efficienti.

Semplice

Determinazione digitale del colore del dente con un solo clic, senza necessità di conoscenze o requisiti particolari.

Preciso

La tecnologia con spettrofotometro ad alta precisione consente la misurazione esatta del colore del dente e un processo sicuro.

VITA Easyshade® LITE

- Spettrofotometro, intervallo di misura 400 – 700 nm
- Visualizzazione di tutti i colori dei denti naturali nei collaudati standard cromatici VITA classic A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 2 batterie AA

VITA Easyshade® LITE Articoli

VITA Easyshade® LITE

Denominazione	Cod.
VITA Easyshade® LITE , 100-230V * Contenuto: 1 Stazione di calibrazione VITA Easyshade LITE 1 Manipolo VITA Easyshade LITE 2 Batterie usa e getta AA 1 Istruzioni d'uso	DEASYL

VITA Assist

PC Software zur Kommunikation von Zahnfarben



Descrizione

VITA Assist comprende attualmente i moduli **VITA ShadeAssist** e **VITA ToothConfigurator**.

Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA Easyshade vengono documentati e comunicati professionalmente. Il software per PC basato su Windows combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente. Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le basi per lo scambio intensivo di informazioni tra studio e laboratorio.

VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio

VITA Assist supporta attivamente nella scelta degli idonei materiali

CAD/CAM, nella stratificazione di restauri ceramici e nell'elaborazione di soluzioni riabilitative complesse anche nei casi più difficili. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Trasmissione senza fili dei dati del VITA Easyshade
- Elaborazione professionale delle fotografie dei pazienti per ottimizzare la documentazione
- Integrazione opzionale di radiografie digitali, fotografie di dettaglio e immagini dei contorni
- Molteplici funzioni di commento
- Funzioni attive di supporto per la scelta dei materiali più adatti agli specifici casi clinici

VITA ShadeAssist

- **Interfaccia perfetta** tra studio e laboratorio
- **Consente una comunicazione del colore priva di errori**
- **Minimizza i costi** per successive determinazioni del colore e correzioni

VITA ToothConfigurator

- **Modulo di consulenza interattiva**
- **Coinvolgimento del paziente** nella fase di progettazione della protesi

Accessori



Descrizione

Cappucci di protezione

- Protezioni igieniche monouso per uso singolo paziente

Valigetta di trasporto

- Trasporto sicuro di VITA Easyshade® V nella pratica valigetta

Accessori Articoli**Accessori VITA Easyshade®**

Denominazione	Cod.
VITA Easyshade V cappucci di protezione, 9 x 18 pz.	D58000S
Valigia di trasporto per VITA Easyshade V	DEASY5K

Scala colori VITA classical A1-D4®

L'originale per il PERFECT MATCH nella scelta cromatica.



Descrizione

La scala VITA classical A1 – D4 serve per la determinazione sicura del colore dei denti. I colori della scala VITA classical seguono il seguente raggruppamento:

A1 - A4 (rosso-marrone), B1 - B4 (rosso-giallo), C1 - C4 (grigio), D2 - D4 (rosso-grigio)

Vantaggi

Confortevole

Le pratiche scale colori consentono la misurazione esatta del colore del dente in pochi passaggi.

Veloce

Grazie a scale colori standard è possibile visualizzare in tempi molto ridotti il colore del dente per il paziente.

Efficiente

I campioni colore permettono di controllare in modo semplice la fedeltà cromatica dei restauri.

Contenuto

Scala colori VITA classical A1-D4®

Cod. G027C

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

La scala colori per la determinazione del colore (colori Bleach inclusi).



Descrizione

I VITA Bleached Shades offrono all'odontotecnico uno strumento pratico per determinare in modo affidabile anche i colori Bleach. Con i VITA Bleached Shades aggiuntivi, in questa scala colori originale sono inclusi anche i colori dei denti sottoposti a sbiancamento.

I VITA Bleached Shades comprendono i colori 0M1, 0M2 e 0M3 (VITA SYSTEM 3D-MASTER). I Bleached Shades, comprensivi di supporto, sono disponibili anche separatamente come accessorio per la scala colori VITA classical A1 - D4 e per VITAPAN classical.

Vantaggi

Confortevole

Le pratiche scale colori consentono la misurazione esatta del colore del dente in pochi passaggi.

Veloce

Grazie a scale colori standard è possibile visualizzare in tempi molto ridotti il colore del dente per il paziente.

Efficiente

I campioni colore permettono di controllare in modo semplice la fedeltà cromatica dei restauri.

Contenuto

Scala colori VITA classical A1-D4® con VITA Bleached Shades

Cod. G027CBS

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades Articoli

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

Denominazione	Cod.
Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades	G027CBS

VITA Toothguide 3D-MASTER®

La soluzione premium per la determinazione sistematica di tutti i colori dei denti.



Descrizione

Grazie alla suddivisione dei campioni colore secondo luminosità, intensità cromatica e tonalità, la VITA Toothguide 3D-MASTER consente una determinazione sistematica e sicura di tutti i colori dei denti.

Vantaggi

- Determinazione del colore del dente in tre fasi
- Determinazione del colore del dente univoca
- Possibilità di confronto: sì/no – meglio/peggio
- Colori dei denti definiti esattamente su base matematica (miscelabili)
- Apprendibile

VITA Toothguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Denominazione	Cod.
VITA Toothguide 3D-MASTER con BLEACHED SHADES	G360

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

La scala colori per il monitoraggio dei trattamenti sbiancanti.



Descrizione

La VITA Bleachedguide 3D-MASTER è la scala cromatica per il monitoraggio dei trattamenti sbiancanti. Grazie alla suddivisione di facile lettura per livelli di luminosità, la VITA Bleachedguide 3D-MASTER è lo strumento di comunicazione con i pazienti raccomandato per ogni studio che esegue trattamenti sbiancanti.

Vantaggi

Chiara comunicazione

La chiara suddivisione per livelli di luminosità supporta la comunicazione tra odontoiatra e paziente.

Livelli di luminosità precisi


I 29 livelli di luminosità definiti consentono di catturare con precisione anche le più sottili sfumature di luminosità e di renderle visibili al paziente.

Riconosciuto a livello mondiale

L'uso di questa guida per colori Bleached è raccomandato dall'American Dental Association (ADA).

VITA Bleachedguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

Denominazione		Cod.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER		B361



VITA – perfect match.

VITA

VITAPAN EXCELL® Anterior

I denti anteriori di qualità superiore per protesi dall'aspetto naturale.



Descrizione

VITAPAN EXCELL è un dente anteriore in composito MRP che convince grazie all'equilibrio complessivo e unisce criteri estetici come forme naturali, buona trasmissione della luce e un vivace gioco di colori.

Vantaggi

Autenticamente naturale

Le grand assortiment de couleurs et de formes offre personnalisation et liberté de choix absolues.

Autenticamente vitale

La transmission lumineuse équilibrée conduit à une dynamique de la lumière fidèle à la nature. La fluorescence naturelle vient toujours de la profondeur, c'est aussi le cas pour les dents VITA Premium.

Autenticamente forte

Les dents VITA Premium en résine composite MRP de qualité supérieure sont synonymes de longévité, de polissage amélioré et d'esthétique naturelle.

Caratteristiche dei denti

- geometria dentale corposa e naturale
- caratteristiche incisali marcate
- liste palatali larghe
- quota di smalto pronunciata
- tessitura superficiale ricca di sfaccettature
- mammelloni / opalescenza integrati
- stratificazione 3D per una transizione cromatica armoniosa

Indicazioni

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi provvisorie
- Protesi su impianti
- Lavori telescopici e conometrici
- Lavori con attacchi e protesi scheletrate

Concetti di protesi

Ideale in combinazione con i posteriori VITAPAN LINGOFORM per tutti i concetti protesici comuni di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC.

Colori e File

29 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER®: 0M1, 0M2, 0M3, 1M1–5M3

16 x colori VITA classical A1–D4® A1 – D4

- 21 x forme anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 6 x forme anteriori inferiori

VITAPAN EXCELL® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN EXCELL

- X-Small: 67 file / 402 anteriori
- Small: 134 file / 804 anteriori
- Medium: 268 file / 1.608 anteriori
- Large: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

Campionario forme VITAPAN EXCELL:

Caso con tutte le forme da VITAPAN EXCELL per la scelta dei denti.

VITAPAN® LINGOFORM Posterior

I denti posteriori premium abbinano perfettamente funzionalità ed estetica.



Descrizione

VITAPAN LINGOFORM è un robusto dente posteriore in composito MRP che combina perfettamente funzionalità ed estetica. Le superfici occlusali nell'arcata inferiore presentano un'inclinazione funzionale delle cuspidi. Nell'arcata superiore, i rilievi occlusali sono riprodotti realisticamente in maniera più profonda, senza per questo compromettere la funzione.

Vantaggi

Autenticamente funzionale

Le zone occlusali, progettate in modo funzionale, favoriscono l'allineamento statico ottimale della protesi, proteggono la materia dentale e offrono un elevato comfort.

Autenticamente semplice

VITAPAN LINGOFORM è adatto a tutte le possibilità di configurazione, inclusa l'occlusione lingualizzata. Il principio VITA Easy Centric consente un montaggio semplice e intuitivo con individuazione automatica della centrica.

Autenticamente estetico

La stratificazione multipla e la morfologia della superficie, identica a quella naturale, creano una riflessione della luce viva e armoniosa.

Caratteristiche dei denti

- geometria corposa con dimensioni lingo-buccali simili al modello naturale
- design della superficie occlusale multifunzionale con contatti di centrica definiti
- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci naturale
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Indicazioni

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi provvisorie
- Protesi su impianti
- Lavori telescopici e conometrici
- Lavori con attacchi e protesi scheletrate

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC. Particolarmente indicati per concetti di occlusione lingualizzata.

Colori e File

29 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M2, 0M3, 1M1–5M3
16 x colori VITA classical A1–D4® A1 – D4

- 4 x forme posteriori superiori
- 4 x forme posteriori inferiori

VITAPAN® LINGOFORM Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN LINGOFORM

- X-Small: 50 file / 400 posteriori
- Small: 100 file / 800 posteriori
- Medium: 200 file / 1.600 posteriori
- Large: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

I magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

Campionario forme VITAPAN LINGOFORM:

Caso con tutte le forme da VITAPAN LINGOFORM per la scelta dei denti.

VITA PHYSIODENS®

I denti premium per una protesi.



Descrizione

I VITA PHYSIODENS sono denti protesici in composito MRP di classe premium caratterizzati da elevata fedeltà del dettaglio, forme pluristrato e vivace gioco di luci per un'integrazione armoniosa nella dentatura naturale residua.

Vantaggi

Gioco di luci vitale

Gioco di luci naturale grazie ad una tessitura superficiale ricca di sfaccettature.

Morfologia naturale

Semplice ripristino della funzione masticatoria naturale grazie a superfici occlusali con morfologia naturale.

Affidabile

Mascheramento sicuro di strutture secondarie/terziarie grazie all'elevato volume dentale (basale).

Eccellente stabilità

Grazie all'elevata caricabilità e stabilità all'abrasione.

Caratteristiche dei denti

- geometria corposa come in natura per una buona integrazione nella dentatura residua
- caratteristiche incisali marcate e vitali e curvatura labiale simile al dente naturale
- area cervicale larga per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali
- elevato volume (basale) per il mascheramento di strutture secondarie/terziarie
- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci naturale e configurazione delle fessure fedele nel dettaglio
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale
- rilievi delle superfici occlusali/cuspidi completamente anatomici secondo il modello naturale (inclinazione delle cuspidi superiori: circa $> 30^\circ$)

Indicazioni

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr. E. End.

Colori e File

Anteriori

VITA PHYSIODENS® Assortimenti

Magazzini denti VITA PHYSIODENS Anteriori:

- X-Small: 67 file / 402 anteriori
- Small: 134 file / 804 anteriori
- Medium: 268 file / 1.608 anteriori
- Large: 400 file / 2.400 anteriori

Magazzini denti VITA PHYSIODENS Posteriori:

- X-Small: 50 file / 400 posteriori
- Small: 100 file / 800 posteriori
- Medium: 200 file / 1.600 posteriori
- Large: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

I magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

Campionario forme VITA PHYSIODENS:

Caso con tutte le forme da VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori per la scelta dei denti.

VITAPAN®

Il denti universali con forme pronunciate e funzionali all'età.

**Descrizione**

VITAPAN Anteriori sono denti anteriori universali con forme pronunciate e funzionali all'età, in composito MRP.

VITAPAN CUSPIFORM Posteriori sono denti posteriori sottili con rilievo occlusale pronunciato.

VITAPAN SYNOFORM sono denti posteriori sottili con rilievo occlusale piatto per gerontoprotesi.

Vantaggi**Funzionale all'età**

La varietà delle forme consente la realizzazione di protesi totali / parziali funzionali all'età.

Effetto cromatico naturale

Andamento cromatico 3D integrato dal colletto al bordo incisale.

Morfologia naturale

Semplice ripristino della funzione masticatoria naturale grazie alla morfologia naturale delle superfici occlusali.

Eccellente stabilità

Grazie all'elevata caricabilità e stabilità all'abrasione.

Indicazioni

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC.

Colori e File**Anteriori**

28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3

15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

- 31 x forme anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 13 x forme anteriori inferiori

Posteriori

27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3

15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

- 6 x forme posteriori Cuspiform superiori
- 6 x forme posteriori Cuspiform inferiori
- 5 x forme posteriori Synoform superiori
- 5 x forme posteriori Synoform inferiori

VITAPAN® Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN

- X-Small: 67 file / 402 anteriori
- Small: 134 file / 804 anteriori
- Medium: 268 file / 1.608 anteriori
- Large: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

Magazzini denti VITAPAN CUSPIFORM

- X-Small: 50 file / 400 posteriori
- Small: 100 file / 800 posteriori
- Medium: 200 file / 1.600 posteriori
- Large: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.

Magazzini denti VITAPAN SYNOFORM

- X-Small: 50 file / 400 posteriori
- Small: 100 file / 800 posteriori
- Medium: 200 file / 1.600 posteriori
- Large: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4®.

I magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

Campionario forme VITAPAN

Caso con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN Anteriori e Posteriori
- VITAPAN CUSPIFORM Posteriori
- VITAPAN SYNOFORM Posteriori

VITA MFT®

Straordinaria efficienza e qualità convincente: il dente preconfezionato VITA con Easy Centric.



Descrizione

Denti anteriori e posteriori in polimero HC con superfici occlusali funzionalmente ottimizzate per solide protesi standard.

Vantaggi

Risparmio di tempo

Montaggio semplice ed efficiente grazie al principio VITA Easy Centric. Indicato per tutti i comuni concetti di montaggio.

Risparmio di denaro

Il dente preconfezionato multifunzionale ed economico in una vasta gamma di colori e forme. Disponibile in 16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e 16 colori VITA classical A1-D4.

Si evitano inconvenienti

Risultati affidabili e rapidi di qualità convincente che entusiasmano non solo voi come utilizzatori ma anche i pazienti.

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentaria universale con conformazione secondo il modello naturale
- design occlusale multifunzionale con punti di contatto predefiniti
- design incisale di forma elegante e conformazione secondo il modello naturale

Caratteristiche particolari

- rapporto equilibrato smalto-dentina per un gioco di luce naturale
- tessitura superficiale ricca di sfumature con mammelloni integrati
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Indicazioni

- solide soluzioni standard per protesi totale / parziale

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per: concetti di occlusione buccale e lingualizzata

VITA MFT® Assortimenti

Magazzini denti VITA MFT

Magazzino 2S:

- 72 file / 432 anteriori*
- 48 file / 384 posteriori*

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: Si possono realizzare magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITA MFT

Caso con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA MFT Anteriori e Posteriori

Adesivo VITACOLL®

Per un legame sicuro tra denti protesici e base.



Descrizione

VITACOLL realizza l'adesione affidabile tra denti in resina e materiale per basi. Per la molteplicità dei diversi materiali per basi di protesi, l'odontotecnico responsabile ha spesso difficoltà a riconoscere se questi materiali si uniscono in modo ineccepibile con i denti in resina di sua scelta. Con l'uso di VITACOLL si ha questa sicurezza.

Vantaggi

Affidabile

L'adesivo VITACOLL realizza un legame chimico affidabile tra denti in resina e materiali polimerizzabili a caldo e a freddo, nonché materiali iniettabili a base di polimetilmetacrilato, evitando il distacco dei denti dalla base della protesi.

Adesivo VITACOLL® Articoli

Adesivo VITACOLL®

Denominazione	Cod.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

Isolante al silicone VITAFOL® H

Per isolare i denti durante il montaggio in cera.



Descrizione

VITAFOL H è un isolante al silicone per la protezione di denti in resina e ceramica in fase di realizzazione della protesi.

Vantaggi

Protegge

VITAFOL H serve per la protezione di denti in resina e ceramica. Fini modellazioni gengivali restano integre, parti ricoperte con VITAFOL H pulite e non devono più essere rifinite.

Efficiente

Le parti ricoperte con VITAFOL H non devono più essere isolate rispetto al gesso. In tal modo si evita che l'isolante possa giungere sulle superfici basali dei denti. Nei denti in resina è così possibile evitare la formazione di uno strato **di separazione tra denti e materiale per basi.**

Delicato

Con VITAFOL H i denti sono protetti durante la pressatura e lo smuffolamento.

Isolante al silicone VITAFOL® H Assortimenti

Isolante al silicone VITAFOL® H



Assortimento triplo VITAFOL H A9FG*

Quantità	Contenuto	Materiale
3	70 ml	VITAFOL H pasta
3	15 ml	VITAFOL H indurente
3	80 g	VITAFOL H cristalli adesivi
1	pz.	blocco di miscelazione
1	pz.	pennello
		istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 300 protesi da 14 denti



Assortimento laboratorio VITAFOL H A9FL*

Quantità	Contenuto	Materiale
1	70 ml	VITAFOL H pasta
1	15 ml	VITAFOL H indurente
1	80 g	VITAFOL H cristalli adesivi
1	pz.	blocco di miscelazione
1	pz.	pennello
		istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 100 protesi da 14 denti

Isolante al silicone VITAFOL® H Articoli

Isolante al silicone VITAFOL® H

Denominazione	Cod.
VITAFOL H liquido indurente, 15 ml	A9F15
VITAFOL H cristalli adesivi, 80 g	A9F50
VITAFOL H pasta, 70 ml	A9F90
VITAFOL H blocco di miscelazione stampato, 50 fogli	A9FA
VITAFOL H pennello Nr. 11	A9FP

Mobiletto denti vario

Per la conservazione ottimale delle file di denti.



Descrizione

Il mobiletto denti VITA vario offre ampie possibilità di immagazzinaggio, occupa poco spazio ed è la soluzione ottimale per la conservazione di tutti i magazzini di denti VITA.

Vantaggi

Flessibile

Il mobiletto si basa su un sistema modulare tipo, può essere ampliato in ogni momento con cassette supplementari ed è realizzato in un polimero color grigio neutro, di elevata qualità e resistenza.

Scorrevolezza

I cassette scorrono agevolmente e possono essere estratti completamente grazie alle guide telescopiche bilaterali.

Compatibile

Il mobiletto denti VITA vario è parte del sistema VITA Modulbox, e quindi compatibile con tutti gli elementi modulari.

Contenuto


Capacità per ogni cassetto:

72 x 6 = 432 Anteriori in file da 6

48 x 8 = 384 Posteriori in file da 8

Mobiletto denti vario Articoli**Mobiletto denti vario**

Denominazione	Cod.
Mobiletto S10 con 10 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Mobiletto S12 con 12 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Mobiletto S2 con 2 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Mobiletto S4 con 4 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Mobiletto S6 con 6 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Mobiletto S8 con 8 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8

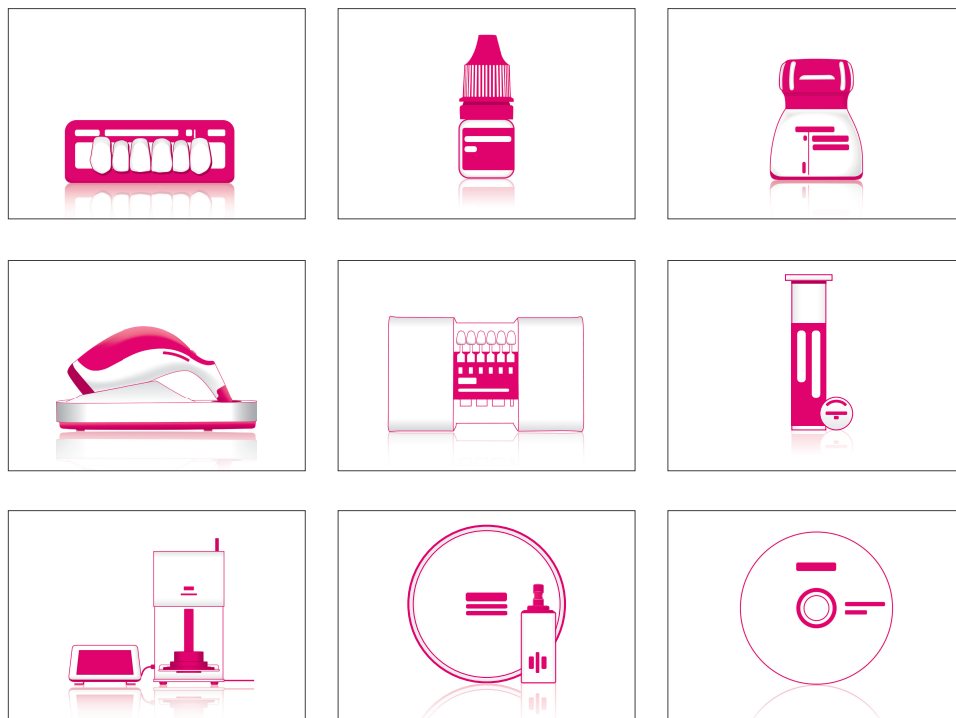

VITA – perfect match.

VITA

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Disco in composito da fresare per la realizzazione di elementi dentali per protesi totali e parziali



Descrizione

Il VITA VIONIC DENT DISC multiColor, un disco in composito MRP in PMMA caricato con sostanze inorganiche per la fresatura di elementi dentali per protesi mobili totali e parziali. Il disco in composito convince grazie alle caratteristiche del materiale e alla qualità dei denti preconfezionati premium VITA.

Vantaggi

Qualità merceologica.

Stabili all'abrasione per denti protesici duraturi.

Estetica.

Gradiente cromatico integrato per una maggiore naturalezza.

Buona lucidabilità.

Flessibilità.

Lavorazione semplice e sicura. Compatibili con i più comuni sistemi di fresaggio.

Indicazioni

I VITA VIONIC DENT DISC multiColor sono dischi in composito da fresare per la realizzazione di elementi dentali per protesi parziali e totali.

Colori

VITA classical A1–D4® -/colori Bleach: 0 M1, 0 M3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Geometrie

Confezione da 1 pz.

Ø 98,4 x h 20 mm

Compatibilità di sistema

Adatto a tutte le macchine **fresatrici aperte** con attacco universale del disco.

VITA VIONIC DENT DISC multiColor è stato convalidato con i seguenti produttori di sistemi partner:

- Arum Dental (5x series)
- Axsys Dental Solutions (Versamill Milling Systems 500, 500L)
- Dentsply Sirona (inLab MC X5)
- DGSHAPE/Roland DGA (DWX Linie)
- imes-icore GmbH (CORiTEC® one+, 150i series, 250i series, 350i series, 650i series)
- Orangedental (EASY MILL 5)
- TECNO-GAZ (Vector)
- Up3D (P53, P55D)
- vhf camfacture AG (R5, S5, K5+, K5, E5)

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor Articoli

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor VITA c

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA19820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA29820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA359820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA39820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, B3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADB39820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, D3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADD39820

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor VITA S

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, 0M1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	AD0M19820

VITA VIONIC VIGO®

Lo specialista delle protesi totali digitali.



Descrizione

VITA VIONIC VIGO è una generazione completamente nuova di denti realizzati in polimero composito SE con un design perfezionato per la realizzazione digitale di protesi.

Vantaggi

Estetica.

Stratificazione cromatica tridimensionale e forme vive.

Qualità merceologica.

Denti di altissima qualità con materiali dalle proprietà convincenti.

Sicurezza di processo.

Design dentale perfezionato per il workflow digitale.

Maggiore produttività grazie al minor tempo necessario per il processo produttivo.

Caratteristiche dei denti

- design corposo e simile al dente originario per un aspetto naturale ed una funzione ottimale
- dimensioni ridotte, superficie di incollaggio precondizionata e configurazione basale priva di sottosquadri per un'efficiente lavorazione digitale
- forma conico-ovale della parte cervicale con protezione antirotazione integrata per un corretto posizionamento e un fissaggio adesivo preciso
- intercuspidação automatica e centrica guidata grazie a punti di contatto predefiniti e a un design Easy-Centric funzionalmente ottimizzato
- buona dinamica di luce con eccellente traslucenza, opalescenza e fluorescenza grazie alla stratificazione con struttura 3D
- gioco di luci naturale grazie a una tessitura superficiale ricca di sfaccettature

Indicazioni

Per una produzione digitale ad alta efficienza di protesi totali con i consueti sistemi aperti CAM e di stampa 3D

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
Concetti di protesi

Opzioni di design personalizzato grazie alle biblioteche VITA con la più ampia gamma di concetti di montaggio che includono classe/posizione (buccale, linguale, morso incrociato, Prof. Dr. A. Gerber).

Colori e File

VITA classical A1–D4®-/colori Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

- 8 x forme anteriori superiori
- 4 x forme anteriori inferiori
- 4 x forme posteriori superiori & inferiori



VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disco in PMMA di elevata qualità per la realizzazione di basi di protesi definitive.



Descrizione

VITA VIONIC BASE sono Disco in PMMA precolorati di elevata qualità per la realizzazione.

Vantaggi

Stabile.

Elevata stabilità grazie al materiale resistente agli urti.

Precisa.

Straordinario adattamento alla cresta alveolare.

Estetica rosa.

Nuova gamma di colori gengivali.

Indicazioni

Per la fabbricazione di basi per protesi rimovibili.

Colori


- classic pink
- classic pink translucent
- soft pink
- dark pink

VITA VIONIC® BASE DISC HI Articoli
VITA VIONIC® BASE DISC HI

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® BASE DISC HI, classic pink, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADCLP9830
VITA VIONIC® BASE DISC HI, classic pink translucent, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADCLPT9830
VITA VIONIC® BASE DISC HI, dark pink, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADDAP9830
VITA VIONIC® BASE DISC HI, soft pink, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADSOP9830

VITA VIONIC® WAX

Dischi in cera sintetica indeformabili, resistenti alla temperatura

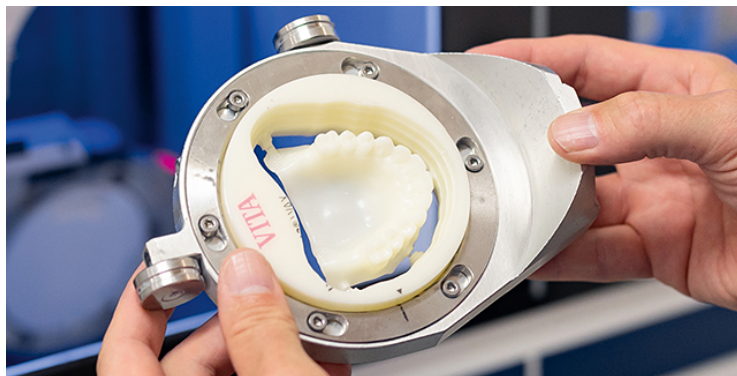

Descrizione

VITA VIONIC WAX sono dischi in cera sintetica indeformabili, resistenti alla temperatura per l'esecuzione del montaggio in cera.

Vantaggi

Confortevole.

Montaggio in cera confortevole grazie alla realizzazione CAD/CAM di protesi a pieno formato, in cera.

Precisa.

Montaggio in cera preciso grazie a cavità fresate esattamente secondo la progettazione digitale.

Semplice.

Correzione agevole perché il montaggio in cera può essere modificato durante la prova.

Indicazioni

Si usa per la produzione di try-in e montaggi in cera.

Colori

- Pink (rosa)
- White (bianco)


VITA VIONIC® WAX Articoli
VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADP9830
White, Ø 98.4 x h 30 mm	ADW9830

VITA VIONIC® FRAME

Per l'efficiente realizzazione CAD/CAM di protesi con Ceramill® Motion 2

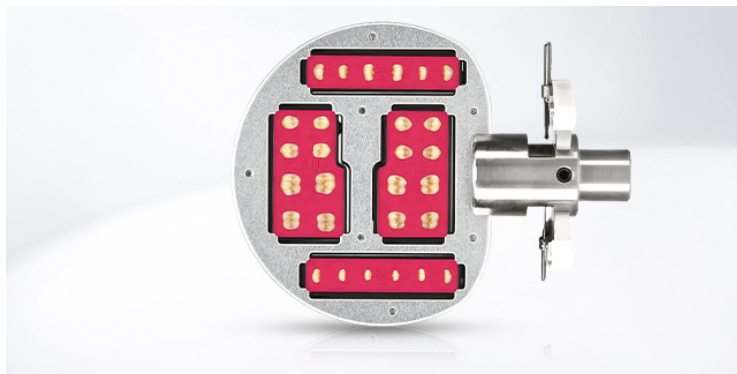

Descrizione

VITAPAN EXCELL DD FRAME e VITAPAN LINGOFORM DD FRAME sono Denti protesici per il workflow in protesi digitale per la modifica CAM con Amann Girrbach Full Denture System (FDS)

Vantaggi

Semplice

Semplice ricostruzione digitale della funzione individualizzata secondo diversi concetti e con integrazione delle classi di Angle.

Efficiente

Completamento efficiente di protesi totali grazie alla modifica basale dei denti con un semplice clic, come per la progettazione protesica.

Sicurezza di processo

Realizzazione CAD/CAM completamente digitale, sicura grazie al sistema di materiali coordinati incl. soluzione di fissaggio.

Indicazioni

I denti VITAPAN EXCELL DD FRAME e VITAPAN LINGOFORM DD FRAME vanno lavorati con le unità di fresaggio Amann Girrbach per:

- Protesi totali e parziali

Caratteristiche dei denti

DD FRAME per sistema di supporto Ceramill D-Set

- serve per la lavorazione CAM di denti protesici posizionati in un apposito telaio
- consente la tecnica fresaggio per le parti dentali basali e circolari

Colori

- 6 x colori VITA classical A1–D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Colori e File

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 x forme anteriori superiori*
- 4 x forme anteriori inferiori*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 x forme posteriori superiori*
- 4 x forme posteriori inferiori*

*) Per ogni fila sup./inf. è previsto uno speciale telaio con denti integrati.

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Materiale di stampa 3D per la realizzazione di try-in.



Vantaggi

Economico

Produzione rapida, a risparmio di materiale e a basso costo di try-in funzionali.

Facile lavorabilità

Controllo senza sforzo di adattamento, funzionalità, occlusione e fonetica, oltre a una buona lucidabilità.

Possibilità di individualizzazione semplice per i try-in estetici.

Inodore e a lunga durata di conservazione

La resina è inodore e si distingue dai competitor per la lunga durata di conservazione, pari a 3 anni (rispetto a una media di 2 anni).

Indicazioni

Per la realizzazione di campioni funzionali individuali di protesi totali

Colori

A2

Compatibilità di sistema

Stampanti convalidate:

- ASIGA Max/Mini
- ASIGA Max 2
- ASIGA Ultra
- ASIGA Pico2
- ASIGA PRO2
- ASIGA PRO 4K
- Carbon 3D M2
- Rapid Shape PRO 20, D20+, D30+, D50+
- Rapid Shape D70/D90 Series
- MICROLAY Versus
- Straumann P Series
- W2P SolFlex

Unità di polimerizzazione finale convalidate:

- Asiga Cure
- Dentalfarm Photopol
- NK Optik Otoflash G171 N2
- NK Optik Otoflash 250
- Rapid Shape RS cure
- Rapid Shape RS cure XL
- Straumann P Cure

Unità di lavaggio convalidate:

- Ultrasonic Bath Bandelin Sonorex
- Rapid Shape RS wash

VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT

Materiale per stampa 3D resistente agli urti per la realizzazione di basi protesiche definitive.



Descrizione

Con il materiale per stampa resistente agli urti VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT per basi protesiche mobili si raggiunge il livello successivo di qualità nella stampa 3D. L'eccellente resistenza agli urti del prodotto riduce il rischio di rottura sotto carico.

Oltre alla resistenza a rottura, l'elevata resistenza a flessione e i valori del modulo di elasticità ottimizzati per un profilo delle proprietà bilanciato forniscono la base per protesi durevoli.

Vantaggi

Duratura

I pazienti ottengono protesi durature grazie alla resistenza agli urti del materiale, che riduce il rischio di rottura sotto carico. La ridotta adesione della placca contribuisce al comfort.

Equilibrata

Il profilo bilanciato delle caratteristiche meccaniche convince per quanto riguarda lavoro di rottura, resistenza a flessione e modulo di elasticità.

Eccellente lavorabilità

Il prodotto convince grazie ai brevi tempi di stampa, al ridotto restringimento e pertanto all'elevata precisione, così come la buona lucidabilità.

Indicazioni

Per la realizzazione di basi protesiche

Colori

- pink
- pink translucent

Compatibilità di sistema

Stampanti convalidate:

- ASIGA Max/Mini
- ASIGA Max 2
- ASIGA Ultra
- ASIGA PRO 4K
- Carbon 3D M2
- Formlabs Form4B (È necessaria la modalità materiale aperto)
- Rapid Shape ONE, PRO 20, D20+, D30+, D50+
- W2P SolFlex
- RAYSHAPE: Edge E2
- Shining 3D: AccuFab L4D, AccuFab CEL
- Straumann P Series

Unità di polimerizzazione finale convalidate:

- Asiga Cure
- Dreve PCU LED N2
- NK Optik Otoflash G171 N2
- NK Optik Otoflash 250
- Rapid Shape RS cure
- Rapid Shape RS cure XL
- Straumann P Cure

Unità di lavaggio convalidate:

- Ultrasonic Bath Bandelin Sonorex
- Rapid Shape RS wash

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

3D-Druckmaterial zur Herstellung flexibler Prothesenbasen



Descrizione

Die digitale Prothetik bietet heute mehr als nur Totalprothesen: Mit VITA VIONIC BASE RESIN FLEX wird die Herstellung flexibler Teilprothesen für den temporären Einsatz möglich – präzise, effizient und komfortabel. Bringen Sie neue Leichtigkeit in Ihren Laboralltag.

Vantaggi

Wirtschaftlich

Effiziente, materialsparende und kostengünstige Fertigung flexibler Teilprothesen für den temporären Einsatz – mit reproduzierbarer Qualität und spürbarer Zeitersparnis.

Komfortabel

Flexibles, metallfreies Material mit natürlicher Ästhetik und hohem Tragekomfort. Die transparente Farbgebung lässt die individuelle Zahnfleischfarbe durchscheinen – zugleich bleibt die Prothese reparier- und erweiterbar.

Einfach

Sichere Workflows dank chemischem Haftverbund zwischen Basis und Zähnen, guter Fräsbarkeit und brillanter Hochglanzpolitur.

Compatibilità di sistema

Stampanti convalidate:

- ASIGA Max/Mini
- ASIGA Max 2
- ASIGA Ultra
- ASIGA PRO 4K
- Formlabs Form4B (È necessaria la modalità materiale aperto)
- Rapid Shape ONE, PRO 20, D20+, D30+, D50+
- Straumann P Series

Unità di polimerizzazione finale convalidate:

- NK Optik Otoflash G171 N2
- NK Optik Otoflash 250
- Rapid Shape RS cure
- Rapid Shape RS cure XL
- Straumann P Cure

Unità di lavaggio convalidate:

- Ultrasonic Bath Bandelin Sonorex
- Rapid Shape RS wash

VITA VIONIC® DENT RESIN

Materiale per stampa 3D per gli elementi dentali nelle protesi totali e parziali definitive.



Descrizione

Arcate ed elementi dentali stampati dal costo ridotto che offrono un'elevata stabilità all'abrasione e soddisfano anche le moderne esigenze estetiche – con VITA VIONIC DENT RESIN questo è possibile.

Risultati stabili dal punto di vista cromatico con VITA PERFECT MATCH:

si può scegliere tra 8 colori VITA classical e il colore Bleach OM3. Utilizzate VIONIC DENT RESIN con la sicurezza della fedeltà cromatica e una scarsa tendenza allo scolorimento. Offre infine una buona lucidabilità.

Caricabili e affi dabili:

grazie alla composizione del materiale accuratamente studiata, le resine presentano una resistenza all'abrasione paragonabile e una notevole stabilità.

Non deve quindi stupire che VITA VIONIC DENT RESIN possa essere utilizzata sia per le protesi permanenti che per corone/ ponti temporanei.

Svariate possibilità di impiego:

la flessibilità in termini di opzioni di utilizzo deriva sia dall'elevata qualità dei materiali che dall'ampia scelta di flussi di lavoro convalidati con numerose stampanti e unità di polimerizzazione finale comunemente disponibili in ambito odontotecnico.

Vantaggi

Estetico

Disponibile in nove colori naturali resistenti con PERFECT MATCH alla scala colori VITA, che soddisfano in modo affidabile esigenze elevate grazie all'elevata lucidabilità.

Caricabile

I bassi valori di usura confermano la qualità dei restauri stabili e resistenti all'abrasione.

Versatile

È adatto a denti protesici permanenti, ponti e corone temporanee e pertanto può essere utilizzato in modo versatile per le protesi totali e parziali mobili.

Indicazioni

Per la realizzazione di protesi temporanee e permanenti così come di corone e ponti provvisori a lungo termine.

Colori

8 VITA classical A1–D4® e una tonalità Bleach: OM3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D3

Compatibilità di sistema

Stampanti convalidate:

VITA VIONIC® BOND

Fissaggio adesivo efficiente dei denti protesici con basi protesiche



Descrizione

VITA VIONIC BOND sistema di fissaggio bicomponente, autopolimerizzante a base MMA per il fissaggio dei denti VITA VIONIC nelle basi per protesi durante il processo. Ha un consistenza fluida per un'applicazione precisa sulle superfici di adesione e crea uno strato reattivo all'interfaccia con le superfici di adesione per un legame sicuro.

VITA VIONIC BOND è disponibile come sistema monodose (per il fissaggio di due arcate dentali) e come multiDose VITA VIONIC BOND (per il fissaggio di ca. 25 arcate dentali).

Vantaggi

Legame sicuro.

Sistema adesivo bicomponente autopolimerizzante per incollaggi sicuri.

Fissaggio preciso e privo di fessure.

Uno spessore ridotto del film nella cavità rende possibile un fissaggio preciso e privo di fessure.

Semplice e veloce.

Un lavoro rapido e pulito per incollaggi sicuri.

Indicazioni

Per il fissaggio definitivo dei denti della linea di prodotti VITA VIONIC nelle corrispondenti cavità delle basi protesiche realizzate in idonei materiali compatibili.

Contenuto

VITA VIONIC BOND KIT

Contenuto

1 x 2 ml VITA VIONIC BOND I

1 x 1 ml VITA VIONIC BOND II

3 x Microbrush

Sufficiente per incollare circa 28 denti artificiali

VITA VIONIC BOND multiDose COMPLETE

Contenuto

1 x VITA VIONIC BOND multiDose KIT

1 x VITA VIONIC BOND multiDose misurino, 3 ml

1 x Pennellimonouso, 50 pz.

Sufficiente per incollare circa 25 x 14 denti artificiali

VITA VIONIC BOND multiDose KIT

Contenuto

1 x 20 ml VIONIC BOND I multiDose

1 x 10 ml VIONIC BOND II multiDose

1 x Pennellimonouso, 50 pz.

Sufficiente per incollare circa 25 x 14 denti artificiali


VITA VIONIC BOND multiDose misurino, 3 ml

VITA VIONIC® BOND Assortimenti**VITA VIONIC® BOND****VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush

Database di denti protesici digitali VITA VIONIC DIGITAL VIGO

Geometrie dentali multifunzionali per la progettazione di protesi.

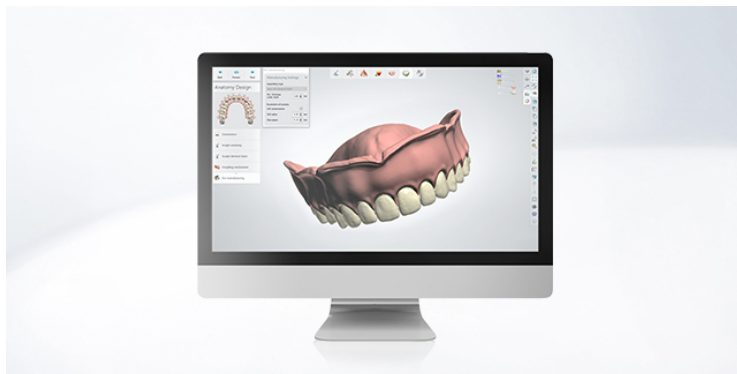

Descrizione

Il database di denti protesici VITA VIONIC DIGITAL VIGO è la versione estesa del database di denti protesici VITA VIONIC. Oltre alla funzione di esportazione dei dati STL delle protesi montate come monoblocco (protesi try-in) e dei disegni di basi protesiche, consente l'esportazione dei dati STL degli elementi protesici. A scelta, questi elementi possono essere fresati da dischi o prodotti in una stampante 3D.

Vantaggi

Flessibile

Per protesi totale o parziale rimovibili e per restauri fresati e stampati.

La più ampia selezione

7 concetti protesici, incl. morso incrociato, tutte e 4 le classi di morsi

Efficiente

Una libreria per tutte le possibilità di posizionamento - è quindi impossibile scambiare le linee di denti. Facile selezione di forme adatte grazie al design dentale multifunzionale adattamento rapido e semplice delle proposte iniziali.

Indicazioni

Database di denti protesici digitali per la progettazione di protesi nel software (modulo Denture per protesi complete, 28/14)

Compatibilità di sistema

Il database di denti protesici digitali VITA VIONIC DIGITAL VIGO è disponibile in 3Shape ed exocad.

Database di denti protesici digitali VITA VIONIC DIGITAL VIGO Articoli
VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® DIGITAL VIGO 2.0 for 3Shape Licenza dell'utente finale per l'utilizzo della libreria digitale VITA (VITA VIONIC DIGITAL VIGO) per l'indicazione di restauri protesici rimovibili. Condizioni di utilizzo disponibili all'indirizzo https://hs.vita-zahnfabrik.com/it/vita-vionic-digital-vigo-terms-of-use .	ADVDV3SV20
VITA VIONIC® DIGITAL VIGO 2.0 for exocad Licenza dell'utente finale per l'utilizzo della libreria digitale VITA (VITA VIONIC® DIGITAL VIGO) per l'indicazione di restauri protesici rimovibili. Condizioni di utilizzo disponibili all'indirizzo https://hs.vita-zahnfabrik.com/vita-vionic-digital-vigo-terms-of-use .	ADVDVEXV20



VITA – perfect match.

VITA



VITA ENAMIC®

La prima ceramica ibrida con struttura reticolare duale a livello mondiale.



Descrizione

VITA ENAMIC è un blocchetto CAD/CAM monocromatico, disponibile in tre livelli di traslucenza (T, HT, ST). Quando si ricerca il materiale perfetto per inlay, onlay o tavolati occlusali per la prassi quotidiana non si può non prendere in considerazione VITA ENAMIC ST.

Vantaggi

Delicata

Le caratteristiche del materiale, che assorbe la forza di masticazione, garantiscono sollecitazioni ridotte sugli antagonisti.

Non invasiva/minimamente invasiva

La ceramica ibrida consente una modellazione non invasiva/minimamente invasiva con pareti di spessore ridotto.

Affidabile

Ricostruzioni precise, sicure e con stabilità marginale grazie alla struttura sicura a reticolo duale.

Indicazioni

- Corone frontali e posteriori supportate da impianti
- Corone frontali e posteriori
- Inlays / onlays / corone parziali
- Tavolati occlusali
- Faccette

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti. Modes d'emploi

VITA ENAMIC® Articoli**VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYST**

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-HT, EM-10	EC40M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
0M1-HT, EM-14	EC40M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EC40M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EC41M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EC41M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EC41M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EM-10	EC41M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EC41M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EC41M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EC42M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EC42M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EC42M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EC43M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EC43M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EC43M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M1-T, EM-14	EC4EM3112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-T, EM-14	EC4EM3132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-T, EM-14	EC4EM3192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-T, EM-14	EC4EM3212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EC4EM3282765 12 x 14 x 18 mm
2M1-HT, EM-10	EC4EM4112645 8 x 10 x 15 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M1-HT, EM-14	EC4EM4112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-HT, EM-10	EC4EM4132645 8 x 10 x 15 mm
2M3-HT, EM-14	EC4EM4132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-HT, EM-10	EC4EM4192645 8 x 10 x 15 mm
3M1-HT, EM-14	EC4EM4192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-HT, EM-10	EC4EM4212645 8 x 10 x 15 mm
3M3-HT, EM-14	EC4EM4212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EC4EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EC4EM4282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EC4EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EC4EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EC4EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EC4EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EC4EM7282765 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MA

VITA ENAMIC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-HT, EM-10	EN1EM4022645 8 x 10 x 15 mm
0M1-HT, EM-14	EN1EM4022765 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EN1EM3022765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EN1EM4062645 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EN1EM4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EN1EM3062765 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2-HT, EM-10	EN1EM4072645 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EN1EM4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EN1EM3072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EN1EM4122645 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EN1EM4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EN1EM3122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EN1EM4202645 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EN1EM4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EN1EM3202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EN1EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EN1EM4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EN1EM3282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EN1EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EN1EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EN1EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EN1EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EN1EM7282765 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA S

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm



VITA ENAMIC® multiColor

L'unica ceramica ibrida al mondo con struttura a doppia rete.



Descrizione

VITA ENAMIC multiColor è un grezzo CAD/CAM multicromatico con un gradiente cromatico e di traslucenza integrato per ricostruzioni estetiche semplicemente premendo un pulsante. Questo materiale all'avanguardia, che presenta una struttura a reticolo duale unica, offre diversi vantaggi in termini di lavorabilità.

Vantaggi

Delicata

Le caratteristiche del materiale, che assorbe la forza di masticazione, garantiscono sollecitazioni ridotte sugli antagonisti.

Non invasiva/minimamente invasiva

La ceramica ibrida consente una modellazione non invasiva/minimamente invasiva con pareti di spessore ridotto.

Affidabile

Ricostruzioni precise, sicure e con stabilità marginale grazie alla struttura sicura a reticolo duale.

Indicazioni

- Corone frontali e posteriori supportate da impianti
- Corone frontali e posteriori
- Faccette

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITA ENAMIC® multiColor Articoli**VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab**

VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EC4EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EC4EC4062885 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EC4EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EC4EC4072885 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EC4EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EC4EC4122885 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EC4EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EC4EC4202885 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EC4EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EC4EC4282885 18 x 16 x 18 mm

VITA ENAMIC® multiColor UNIVERSAL VITA S

VITA ENAMIC multiColor UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EN1EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EN1EC4062885 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EN1EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EN1EC4072885 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EN1EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EN1EC4122885 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EN1EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EN1EC4202885 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EN1EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EN1EC4282885 18 x 16 x 18 mm



VITABLOCS® Mark II

Affermato in milioni di casi.



Descrizione

I VITABLOCS Mark II sono blocchetti monocromatici in ceramica feldspatica del colore dei denti naturali, che si integrano in modo convincente nel restauro e sono perfettamente adatti per la lavorazione di riabilitazioni estetiche.

Vantaggi

Resistente

Preparazione di restauri affidabili in materiale resistente con eccellenti prestazioni cliniche.

Altamente estetico

Consente riabilitazioni altamente estetiche con giochi brillanti di colori e luci.

Efficiente

Produzione veloce e lucidatura dei restauri senza cotture aggiuntive.

Indicazioni

- inlay
- onlay
- corone parziali

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITABLOCS® Mark II Articoli**VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VIT**

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, I-10	EC4A1CI105 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EC4A1CI125 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EC4A1CI14 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EC4A2CI105 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EC4A2CI125 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EC4A2CI14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, I-10	EC4A35CI105 8 x 10 x 15 mm
A3.5C, I-12	EC4A35CI125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, I-14	EC4A35CI14 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EC4A3CI105 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EC4A3CI125 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EC4A3CI14 12 x 14 x 18 mm
A4C, I-10	EC4A4CI105 8 x 10 x 15 mm
A4C, I-12	EC4A4CI125 10 x 12 x 15 mm
A4C, I-14	EC4A4CI14 12 x 14 x 18 mm
B2C, I-10	EC4B2CI105 8 x 10 x 15 mm
B2C, I-12	EC4B2CI125 10 x 12 x 15 mm
B2C, I-14	EC4B2CI14 12 x 14 x 18 mm
B3C, I-10	EC4B3CI105 8 x 10 x 15 mm
B3C, I-12	EC4B3CI125 10 x 12 x 15 mm
B3C, I-14	EC4B3CI14 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
C2C, I-10	EC4C2CI105 8 x 10 x 15 mm
C2C, I-12	EC4C2CI125 10 x 12 x 15 mm
C2C, I-14	EC4C2CI14 12 x 14 x 18 mm
C3C, I-10	EC4C3CI105 8 x 10 x 15 mm
C3C, I-12	EC4C3CI125 10 x 12 x 15 mm
C3C, I-14	EC4C3CI14 12 x 14 x 18 mm
D3C, I-10	EC4D3CI105 8 x 10 x 15 mm
D3C, I-12	EC4D3CI125 10 x 12 x 15 mm
D3C, I-14	EC4D3CI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VIT

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, I-12	EC40M1CI125 10 x 12 x 15 mm
0M1C, I-14	EC40M1CI14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EC41M1CI105 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EC41M1CI125 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EC41M1CI14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, I-10	EC41M2CI105 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EC41M2CI125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EC41M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EC42M1CI105 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EC42M1CI125 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EC42M1CI14 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M2C, I-10	EC42M2CI105 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EC42M2CI125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EC42M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M3C, I-10	EC42M3CI105 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EC42M3CI125 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EC42M3CI14 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EC43M1CI105 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EC43M1CI125 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EC43M1CI14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EC43M2CI105 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EC43M2CI125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EC43M2CI14 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EC43M3CI105 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EC43M3CI125 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EC43M3CI14 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EC44M2CI105 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EC44M2CI125 10 x 12 x 15 mm
4M2C, I-14	EC44M2CI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Techn

VITABLOCS Mark II for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M1C, I-40/19	EC41M1CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, I-40/19	EC41M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, I-40/19	EC42M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, I-40/19	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm

VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA SYSTEM

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, I-10	EN1M0202360 8 x 10 x 15 mm
0M1C, I-12	EN1M0202372 10 x 12 x 15 mm
0M1C, I-14	EN1M0202384 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EN1M0206360 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EN1M0206372 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EN1M0206384 12 x 14 x 18 mm
1M2C, I-10	EN1M0207360 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EN1M0207372 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EN1M0207384 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EN1M0211360 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EN1M0211372 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EN1M0211384 12 x 14 x 18 mm
2M2C, I-10	EN1M0212360 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EN1M0212372 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EN1M0212384 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M3C, I-10	EN1M0213360 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EN1M0213372 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EN1M0213384 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EN1M0219360 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EN1M0219372 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EN1M0219384 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EN1M0220360 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EN1M0220372 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EN1M0220384 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EN1M0221360 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EN1M0221372 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EN1M0221384 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EN1M0228360 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EN1M0228372 10 x 12 x 15 mm
4M2C, I-14	EN1M0228384 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA classi

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, I-10	EN1M0236360 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EN1M0236372 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EN1M0236384 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EN1M0237360 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EN1M0237372 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EN1M0237384 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EN1M0238360 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EN1M0238372 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EN1M0238384 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte

Il blocchetto policromatici in ceramica feldspatica: molaggio. Lucidatura. Fatto.



Descrizione

VITABLOCS TriLuxe forte con andamento cromatico in 4 strati integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali nel settore estetico. Un trattamento in un'unica seduta alla poltrona può essere eseguito in modo semplice ed efficiente. Grazie all'andamento cromatico in 4 strati, il risultato è altamente estetico.

Vantaggi

Altamente estetico

Quattro strati per un andamento cromatico naturale e un'estetica unica.

Efficiente

Semplice lucidatura per una lucentezza ottimale.

Resistente

Elevata stabilità grazie a caratteristiche di abrasione analoghe a quelle dello smalto.

Indicazioni

- corone e faccette altamente estetiche in zone visibili

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITABLOCS® TriLuxe forte Articoli**VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLa**

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, TF-12	EC4A1CTF125 10 x 12 x 15 mm
A1C, TF-14	EC4A1CTF14 12 x 14 x 18 mm
A1C, TF-14/14	EC4A1CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A2C, TF-12	EC4A2CTF125 10 x 12 x 15 mm
A2C, TF-14	EC4A2CTF14 12 x 14 x 18 mm
A2C, TF-14/14	EC4A2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-12	EC4A35CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, TF-14	EC4A35CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-14/14	EC4A35CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3C, TF-12	EC4A3CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3C, TF-14	EC4A3CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3C, TF-14/14	EC4A3CTF1414 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLa

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, TF-12	EC40M1CTF125 10 x 12 x 15 mm
0M1C, TF-14	EC40M1CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, TF-12	EC41M1CTF125 10 x 12 x 15 mm
1M1C, TF-14	EC41M1CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, TF-12	EC41M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, TF-14	EC41M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, TF-14/14	EC41M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-12	EC42M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, TF-14	EC42M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-14/14	EC42M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-12	EC43M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, TF-14	EC43M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-14/14	EC43M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, TF-12	EN1MU2366845 10 x 12 x 15mm
A1C, TF-14	EN1MU2366965 12 x 14 x 18mm
A1C, TF-14/14	EN1MU2367085 14 x 14 x 18mm
A2C, TF-12	EN1MU2376845 10 x 12 x 15mm
A2C, TF-14	EN1MU2376965 12 x 14 x 18mm
A2C, TF-14/14	EN1MU2377085 14 x 14 x 18mm
A3C, TF-12	EN1MU2386845 10 x 12 x 15mm
A3C, TF-14	EN1MU2386965 12 x 14 x 18mm
A3C, TF-14/14	EN1MU2387085 14 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-12	EN1MU2396845 10 x 12 x 15mm
A3.5C, TF-14	EN1MU2396965 12 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-14/14	EN1MU2397085 14 x 14 x 18mm

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2C, TF-12	EN1MU2076845 10 x 12 x 15mm
1M2C, TF-14	EN1MU2076965 12 x 14 x 18mm
1M2C, TF-14/14	EN1MU2077085 14 x 14 x 18mm
2M2C, TF-12	EN1MU2126845 10 x 12 x 15mm
2M2C, TF-14	EN1MU2126965 12 x 14 x 18mm
2M2C, TF-14/14	EN1MU2127085 14 x 14 x 18mm
3M2C, TF-12	EN1MU2206845 10 x 12 x 15mm
3M2C, TF-14	EN1MU2206965 12 x 14 x 18mm
3M2C, TF-14/14	EN1MU2207085 14 x 14 x 18mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M2C, TF-40/19	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, TF-40/19	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, TF-40/19	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm



VITABLOCS RealLife®

Affermato in milioni di casi.



Descrizione

I VITABLOCS RealLife sono blocchetti policromatici in ceramica feldspatica del colore del dente e con una struttura dello strato 3D integrata che riproduce l'andamento cromatico naturale.

Vantaggi

Resistente

Riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica

Altamente estetico

Riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci

Efficiente

Ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

Indicazioni

– corone frontali altamente estetiche

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITABLOCS RealLife® Articoli**VITABLOCS RealLife® for CEREC®/inLab®**

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, RL-14/14	EC40M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M1C, RL-14/14	EC41M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M2C, RL-14/14	EC41M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M1C, RL-14/14	EC42M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, RL-14/14	EC42M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, RL-14/14	EC43M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm



VITA SUPRINITY® PC

Vetroceramica. In estetica naturale.



Descrizione

VITA SUPRINITY PC è una generazione di vetroceramiche rinforzate con biossido di carbonio ad alta resistenza. La vetroceramica è contraddistinta da una struttura a granulometria particolarmente fine ed omogenea che offre un'eccellente qualità del materiale e pertanto una caricabilità costantemente elevata e un'affidabilità duratura.

Vantaggi

Altamente estetico

Grazie a traslucenza, opalescenza e fluorescenza si crea un eccellente gioco di luci e di colori.

Preciso

Semplice lavorazione ed elevata stabilità di cottura per risultati adatti.

Sicuro

La matrice vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio garantisce un'elevata sicurezza delle ricostruzioni.

Indicazioni

- corone posteriori
- corone frontali
- corone su impianti
- faccette

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITA SUPRINITY® PC Assortimenti

VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA SYSTEM 3D-MASTER® EC4S0STSETC3D

Quantità	Contenuto	Materiale
12	PC	inLab 0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT, 0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

VITA SUPRINITY® PC Starter Set technical VITA SYSTEM 3D-MASTER® EC4S0STSETT3D

Quantità	Contenuto	Materiale
12	PC	inLab 0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT, 0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®



VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA classical A1-D4® EC4S0STSETC

Quantità	Contenuto	Materiale
16	PC	inLab A1-T - 0M1-HT
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

**VITA SUPRINITY® PC STARTER SET technical VITA classical A1-D4®
EC4S0STSETT**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	PC	inLab A1-T - 0M1-HT
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

VITA SUPRINITY® PC Articoli**VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER**

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-T, PC-14	EC4S010001 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, PC-14	EC4S010004 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, PC-14	EC4S010005 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, PC-14	EC4S010009 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, PC-14	EC4S010016 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, PC-14	EC4S010023 12 x 14 x 18 mm
0M1-HT, PC-14	EC4S010101 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, PC-14	EC4S010104 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, PC-14	EC4S010105 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, PC-14	EC4S010109 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, PC-14	EC4S010116 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, PC-14	EC4S010123 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EC4S010030 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EC4S010031 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EC4S010032 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EC4S010033 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EC4S010036 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EC4S010040 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EC4S010043 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EC4S010130 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EC4S010131 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EC4S010132 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EC4S010133 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EC4S010136 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EC4S010140 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EC4S010143 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA SYSTEM

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-T, PC-14	EN1S03024445 12 x 14 x 18 mm
0M1-HT, PC-14	EN1S04024445 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA classi

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EN1S03364445 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EN1S03374445 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EN1S03384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EN1S03394445 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EN1S03424445 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EN1S03464445 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EN1S03494445 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EN1S04364445 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EN1S04374445 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EN1S04384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EN1S04394445 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EN1S04424445 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EN1S04464445 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EN1S04494445 12 x 14 x 18 mm



VITA YZ® MULTI TRANSLUCENT

Il biossido di zirconio Premium. Estetica perfetta con tecnologia multi-gradiente



Descrizione

VITA YZ MULTI TRANSLUCENT è un biossido di zirconio Premium di nuova generazione.

Unisce il meglio di due materie prime in biossido di zirconio e possiede un ottimo gradiente cromatico, di traslucenza e di resistenza dal colletto fino alla zona incisale. Gli utilizzatori non devono più scegliere tra diversi materiali. L'ampia gamma di applicazioni permette di ottenere la massima efficienza e flessibilità.

Vantaggi

Versatile

Questo prodotto versatile e dall'elevata resistenza è la scelta ideale per numerose indicazioni, compresi i ponti a 14 elementi.

Tecnologia multi-gradiente

La tecnologia multi-gradiente consente di ottenere un gradiente cromatico e di traslucenza naturale con PERFECT MATCH con la scala colori VITA originale.

Materiale multi-performance

L'innovativo materiale garantisce una sinterizzazione senza tensioni, un'elevata precisione e una stabilità dei bordi straordinaria.

Indicazioni

- corone singole parzialmente e completamente anatomiche
 - ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi su protesi implantari nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

* Per ulteriori informazioni consultate le istruzioni d'uso.



VITA YZ® XT Multicolor

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ XT sono blanks in ZrO_2 extra-traslucente per la realizzazione di riabilitazioni frontali monolitiche e con rivestimento estetico parziale.

VITA YZ XT è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ XT^{White} (non cromatizzato)
- VITA YZ XT^{Color} (monocromatico, colore naturale)
- VITA YZ XT^{Multicolor} (policromatico, colore naturale)

Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

Indicazioni

- corone singole e ponti fino a 3 elementi completamente anatomici
- strutture per corone singole e ponti fino a 3 elementi in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

Avvertenza

Altre varianti

Il materiale VITA YZ XT è disponibile in altre varianti differenti, tra cui:

- White (non cromatizzato)
- Color (monocromatico, colore naturale)

VITA YZ® XT Multicolor Articoli**VITA YZ® XT Disc**

VITA YZ XT White, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYX6981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYX6981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYX6982000
Ø 98.4 x h 25 mm	EDWYX6982500

VITA YZ XTColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981840
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981846

Denominazione	Cod. 1 pc.
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982051
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982547
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982551

VITA YZ XTMulticolor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981439
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981442
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981839
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981842
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981846
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982239
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982242
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982249

VITA YZ® ST Multicolor

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ ST sono blanks in ZrO_2 super-traslucente per la realizzazione di riabilitazioni posteriori monolitiche e con rivestimento estetico parziale.

VITA YZ ST è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ ST^{White} (non cromatizzato)
- VITA YZ ST^{Color} (monocromatico, colore naturale)
- VITA YZ ST^{Multicolor} (policromatico, colore naturale)

Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

Indicazioni

- corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi** nel settore frontale e posteriore
- strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi** nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

* ponti e strutture per ponti con max. due elementi intermedi contigui

** In Canada VITA YZ ST è autorizzato limitatamente per ponti con max. 6 elementi e max. due elementi intermedi contigui.

Avvertenza

Altre varianti

Il materiale VITA YZ XT è disponibile in altre varianti differenti, tra cui:

- White (non cromatizzato)
- Color (monocromatico, colore naturale)

VITA YZ® ST Multicolor Articoli**VITA YZ® ST Disc**

VITA YZ STWhite, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYS7981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYS7981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYS7982000
Ø 98.4 x h 25 mm	EDWYS7982500

VITA YZ STColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
1M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981406
2M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981411
3M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981419
1M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981806
2M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981811
3M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981819
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981840

Denominazione	Cod. 1 pc.
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981846
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982051
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982547

Denominazione	Cod. 1 pc.
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982551

VITA YZ STMulticolor, 1 pc / 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc	Cod. 1 pc.
0M1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981402
0M2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981403
0M3, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981404
1M1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981406
1M2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981407
2M1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981411
2M2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981412
3M1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981419
3M2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981420
4M1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981427
4M2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981428
0M1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981802
0M2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981803
0M3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981804	-
1M1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981806
1M2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981807
2M1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981811
2M2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981812
3M1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981819
3M2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981820
4M1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981827
4M2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981828
0M1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982202
0M2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982203
0M3, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982204
1M1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982206
1M2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982207
2M1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982211
2M2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982212
3M1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982219
3M2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982220
4M1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982227

Denominazione	Cod. 1 pc	Cod. 1 pc.
4M2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982228
0M1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982502
0M2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982503
0M3, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982504
1M1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982506
1M2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982507
2M1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982511
2M2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982512
3M1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982519
3M2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982520
4M1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982527
4M2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982528
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	-	EDMYS7981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981840
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981846

Denominazione	Cod. 1 pc	Cod. 1 pc.
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	-	EDMYS7981851
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982239
A4, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982240
B1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982241
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982242
B3, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982243
B4, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982244
C1, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982245
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982246
C3, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982247
C4, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982248
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982249
D3, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982250
D4, Ø 98.4 x h 22 mm	-	EDMYS7982251
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982547
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	-	EDMYS7982551

VITA YZ® HT

Il biossido di zirconio per ricostruzioni in precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ HT sono blanks in ZrO_2 -altamente traslucente per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.

- White (non cromatizzato)
- Color (monocromatico, colore naturale)

Vantaggi

Riprodurre

Riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati.

Perfetta vestibilità

Realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate.

Efficiente

Conseguire solidi risultati estetici grazie a grezzi precromatizzati di colore naturale con PERFECT MATCH alla scala colori VITA.

Indicazioni

- corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- telescopi primari

* ponti e strutture per ponti con max. due elementi intermedi contigui

Selezione

VITA YZ HT è disponibile in diverse varianti:

VITA YZ® HT Articoli**VITA YZ® HTWhite**

VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4Y14007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4Y14008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55/19	-	EC4Y14009842 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4Y14008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

VITA YZ® HT Disc

Denominazione	Cod.
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDY14981200
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY14981400
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 16 mm, 1 pc.	ECDY14981600
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY14981800
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY14982000
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY14982500
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981407
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981412
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981420
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981807
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981812
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981820
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982007
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982012
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982020
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982507
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982512
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982520
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981436
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981437
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981438
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981836
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981837
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981838

Denominazione	Cod.
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982036
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982037
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982038
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982536
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982537
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982538

VITA YZ® T

Il biossido di zirconio per ricostruzioni in precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ HT sono blanks in ZrO_2 -traslucente per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.

- White (non cromatizzato)
- Color (monocromatico, colore naturale)

Vantaggi

Riprodurre

Riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati.

Perfetta vestibilità

Realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate.

Efficiente

Conseguire solidi risultati estetici grazie a grezzi precromatizzati di colore naturale con PERFECT MATCH alla scala colori VITA.

Indicazioni

- corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- telescopi primari

* ponti e strutture per ponti con max. due elementi intermedi contigui

Selezione

VITA YZ T è disponibile in diverse varianti:

VITA YZ® T Articoli**VITA YZ® TWhite**

VITA YZ TWhite for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3008162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

VITA YZ® TColor

VITA YZ TColor LL1/light for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3617804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3618042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3618162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3618401 65 x 25 x 22 mm	-	-

VITA YZ® T Disc

VITA YZ TWhite, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 12 mm	ECDYW3981200
Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYW3981400
Ø 98.4 x h 16 mm	ECDYW3981600
Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYW3981800
Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYW3982000
Ø 98.4 x h 25 mm	ECDYW3982500

VITA YZ TColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
LL1/light, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981461
LL1/light, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981861
LL1/light, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982061
LL2/medium, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981462
LL2/medium, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981862
LL2/medium, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982062
LL3/intense, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981463
LL3/intense, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981863

VITA CAD-Temp® monoColor VITA CAD-Temp® monoColor DISC

Soluzioni ottimali per provvisori di riabilitazione.



Descrizione

VITA CAD-Temp monoColor è un affermato composito monocromatico in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione. Consente di produrre ponti provvisori con un massimo di due elementi intermedi e corone provvisorie nel settore posteriore.

Vantaggi

Stabile a lungo

Buone caratteristiche superficiali che garantiscono un'elevata stabilità e resistenza alla rottura.

Estetico

Creazione di un effetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche del materiale.

Economico

La realizzazione CAD/CAM efficiente consente una produzione economica di provvisori.

Indicazioni

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi
- corone provvisorie nel settore posteriore

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITA CAD-Temp® monoColor,
VITA CAD-Temp® monoColor DISC Articoli

VITA CAD-Temp® monoColor for CEREC®/inLa

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EC40M1TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC40M1TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-40	-	EC41M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-55	EC41M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EC42M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CT-55	EC42M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EC43M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CT-55	EC43M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-

VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm

VITA CAD-Temp® monoColor Universal

VITA CAD-Temp monoColor Universal, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EN1CB2021682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20216810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-40	-	EN1CB2071682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20716810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-55	EN1CB2071801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EN1CB2121682 15,5 x 19 x 39mm	-
2M2T, CT-55	EN1CB2121801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EN1CB2201682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB22016810 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CT-55	EN1CB2201801 15,5 x 19 x 55mm	-	-

VITA CAD-Temp® monoColor DISC

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp monoColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC1M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC2M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC3M2TD98201



VITA CAD-Temp® multiColor VITA CAD-Temp® multiColor DISC

Soluzioni ottimali per provvisori di riabilitazione.



Descrizione

I VITA CAD-Temp multiColor sono affermati blocchetti e dischi in composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione. I grezzi VITA CAD-Temp del colore del dente convincono grazie a un aspetto cromatico naturale, oltre che per la loro resistenza alla rottura e stabilità di lungo periodo.

Vantaggi

Stabile a lungo

Buone caratteristiche superficiali che garantiscono un'elevata stabilità e resistenza alla rottura.

Estetico

Creazione di un effetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche del materiale.

Economico

La realizzazione CAD/CAM efficiente consente una produzione economica di provvisori.

Indicazioni

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi
- corone provvisorie nel settore frontale

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITA CAD-Temp® multiColor,
VITA CAD-Temp® multiColor DISC Articoli

VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inL

VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	-	EC41M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CTM-85/40	EC41M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
2M2T, CTM-40	-	EC42M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CTM-85/40	EC42M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
3M2T, CTM-40	-	EC43M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CTM-85/40	EC43M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-

VITA CAD-Temp® multiColor Universal

VITA CAD-Temp multiColor Universal, 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	EN1CA2071922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA20719210 15,5 x 19 x 39mm
2M2T, CTM-40	EN1CA2121922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA21219210 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CTM-40	EN1CA2201922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA22019210 15,5 x 19 x 39mm

VITA CAD-Temp® multiColor DISC

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp multiColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC1M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC2M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC3M2TMD98181



VITA ENAMIC® IS

Soluzioni convincenti per riabilitazioni dentali su impianti.



Descrizione

VITA ENAMIC IS sono blocchetti in ceramica ibrida, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio. Disponibili come ceramica ibrida VITA ENAMIC IS (T/HT) per ricostruzioni definitive.

Vantaggi

Sicuro

Sicurezza per corone implanto-supportate e mesostrutture con caratteristiche di assorbimento della forza di masticazione.

Efficiente

Con interfaccia integrata per una base in titanio/di adesione per un utilizzo più rapido e sicuro.

Indicazioni

Corone-abutment sostenute da impianto (AC) e mesostrutture (MS) definitive

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.

VITA ENAMIC® IS Articoli**VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA S**

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm



VITA CAD-Temp® IS

Soluzioni convincenti per riabilitazioni dentali su impianti.



Descrizione

VITA CAD-Temp IS sono blocchetti in composito, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio. Disponibili in composito VITA CAD-Temp IS per riabilitazioni provvisorie.

Vantaggi

Efficiente

Un processo completamente digitale consente di produrre provvisori efficienti.

Naturale

Grazie alle buone caratteristiche ottiche si ottiene un effetto cromatico naturale.

Indicazioni

Riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli

Queste sono indicazioni suggerite. In generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso dei singoli prodotti.


VITA CAD-Temp® IS Articoli**VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab**

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm



VITA Powder Scan Spray

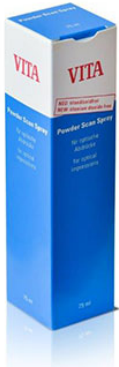

Descrizione

VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio, di colore blu, nebulizzabile, al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto-elettroniche con la tecnica CAD/CAM.

Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner.

VITA Powder Scan Spray Articoli**Accessori Machinable Materials**

Denominazione	Cod.
VITA Powder Scan Spray (priva di biossido di titanio), 75 ml	ECSCAN75V2



VITA Firing Paste



Descrizione

VITA Firing Paste è una pasta refrattaria, pronta per l'uso per la realizzazione semplice e rapida di supporti di cottura individuali soprattutto per la tecnica di pittura e di stratificazione senza struttura, per evitare deformazioni dei restauri in fase di cottura. La consistenza cremosa e morbida assicura una eccellente lavorabilità.

Inlays, onlays, faccette e corone possono essere fissati senza problemi sui perni di platino o direttamente sui supporti di cottura o il cotone refrattario.

Dopo la cottura il materiale si elimina agevolmente dal lavoro.

VITA Firing Paste Articoli**Accessori universali**

VITA Firing Paste, 3 x 12 ml / 12 ml

Denominazione		Cod. 3 x 12 ml	Cod. 12 ml
Confezione economica		EFP123V2	-
Confezione normale		-	EFP12V2



VITA ADIVA® IA-CEM

Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari.



Descrizione

VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments individuali in titanio e biossido di zirconio.

Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.

Vantaggi

Versatile

Adesivo per il fissaggio specifico per il materiale.

Semplice

Set disposto in modo sistematico per un'applicazione in studio sicura, con codifica cromatica.

Efficiente

Maneggevole set composto da due parti per l'utilizzo quotidiano razionale in formato standard tray.

VITA ADIVA® IA-CEM Assortimenti**VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET
FAIACEMSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Articoli**VITA ADIVA® IA-CEM**

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

VITA Modulbox

Sistema modulare in resina.



Descrizione

VITA MODULBOX è un sistema modulare nel formato base A3 per la conservazione duratura, chiara e merceologicamente corretta dei prodotti VITA in laboratorio e studio.

VITA Modulbox Articoli**VITA Modulbox**

Denominazione		Cod.
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 20 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB20
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 55 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB55
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 80 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB80
VITA Modulbox base /coperchio senza guide completo di accessori		ZMBBD
Box die scorta VITABLOCS for CEREC con 1 cassetto altezza 80 mm ed 1 inserto Nr. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 1 con 1 cassetto, altezza 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 2 con 2 cassette, altezza 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 3 con 1 cassetto, altezza 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 4 con 2 cassette, altezza 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox elemento intermedio senza guide, completo di 3 tappi per montaggio		ZMBZ

VITA YZ HT Shade Liquids

Per la cromatizzazione di restauri in ZrO₂.



Descrizione

VITA YZ XT SHADE LIQUIDS sono liquidi per la cromatizzazione individuale di restauri monolitici in VITA YZ HT prima del processo di sinterizzazione.

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS sono disponibili in 7 colori VITA classical A1 – D4, 7 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER VITA YZ EFFECT LIQUIDS per le aree gengivali, cervicali e incisali.

VITA YZ HT Shade Liquids Assortimenti**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set classical
EZ0CC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®
EZ0CYC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER
EZ0C3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER®
EZ0CY3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®
EZ0CYCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

VITA YZ HT Shade Liquids Articoli**VITA YZ HT Shade Liquids**

Denominazione	Cod.
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0650
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0750
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2L1.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0850
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY1250
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2050
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2150
VITA YZ HT SHADE LIQUID 4M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3650
VITA YZ HT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3750
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID A4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B1, 50ml, 1pc.	EZ0CY4150
VITA YZ HT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4250
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B3, 50ml, 1pc.	EZ0CY4350
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4450
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C1, 50ml, 1pc.	EZ0CY4550
VITA YZ HT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4650
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C3, 50ml, 1pc.	EZ0CY4750
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4850
VITA YZ HT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D3, 50ml, 1pc.	EZ0CY5050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D4, 50ml, 1pc.	EZ0CY5150
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13



VITA YZ® EFFECT LIQUID

Per individualizzazione universale di restauri cromatizzati in ZrO₂.



Descrizione

VITA YZ EFFECT LIQUID sono Liquidi effetto per la caratterizzazione individuale di restauri in VITA YZ HT White, VITA YZ ST White e VITA YZ XT White. Disponibili in 11 colori.

Con Blue e Grey è possibile personalizzare le aree incisali e delle cuspidi. Orange e Brown possono essere usati per la configurazione di fessure o nelle zone interdentali e dei bordi coronali.

Le tre tonalità Light Pink, Pink e Dark Pink permettono di ottimizzare la transizione alla gengiva.

VITA YZ® EFFECT LIQUID Assortimenti**VITA YZ® EFFECT LIQUID SET classical
EZ0C1AS**

Quantità	Contenuto	Materiale
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Light Pink, Dark Pink
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Grey, Blue
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Orange, Brown
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
2	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

VITA YZ® EFFECT LIQUID Articoli**VITA YZ® EFFECT LIQUID**

Denominazione	Cod.
VITA YZ® EFFECT LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17420
VITA YZ® EFFECT LIQUID Grey, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17820
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17920
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18020
VITA YZ® EFFECT LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.	EZ0C18110
VITA YZ® EFFECT LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.	EZ0C18350
VITA YZ® EFFECT LIQUID Light Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Dark Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Orange, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Brown, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18820
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13



VITA – perfect match.

VITA

VITA AMBRIA®

La brillante ceramica pressata.



Descrizione

VITA AMBRIA® Press è una ceramica pressabile altamente estetico per risultati naturali e vitali. Oltre alle ottime fedeltà cromatica e dinamica della luce, la ceramica pressabile si distingue anche per la lavorazione efficiente.

Vantaggi

Estetica brillante

Riprodurre un gioco di colori e luci brillante e ricco di sfaccettature grazie ad un materiale dalla traslucenza, opalescenza e fluorescenza naturali.

Cromaticamente fedele

Riproduzione affidabile dei colori dei denti grazie a grezzi di pressatura dall'ottima fedeltà cromatica e a componenti di sistema perfettamente coordinati tra loro.

Efficiente

Risparmio di tempo grazie a fasi di lavoro ridotte e a risultati di pressatura accurati, grazie all'interazione ideale tra il materiale e la massa di rivestimento.

Resistente

L'elevata resistenza (> 550 MPa) grazie alla ceramica di disilicato di litio rinforzata con biossido di zirconio garantisce una grande stabilità delle protesi.

Indicazioni

- faccett
- inlays/onlays
- corone integrali/parziali
- ponti a tre elementi fino al 2. premolare

VITA AMBRIA® Assortimenti

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

**VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®
LAMSKC**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	A2-T S
1	5 pcs.	A3-T S
4	100 g	VITA AMBRIA® INVEST P (Massa di rivestimento polvere)
1	100 ml	VITA AMBRIA® INVEST F (Liquido per massa di rivestimento)
4		VITA AMBRIA® PLUNGER, pistone monouso Ø 13 mm, 1 pz.
1	100 g	VITA AMBRIA® MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessimetro e base)
2	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		Cotone refrattario, 2 pz.
1	60 ml	misurino
1	12 ml	VITA Firing Paste Confezione normale

VITA AMBRIA® Articoli

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0363
VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0373
VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0383
VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0413
VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0423
VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0463
VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0493
VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0365
VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0375
VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0385
VITA AMBRIA®, A3.5-T, S, 5 pcs.	LAM030S0395
VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0415
VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0425
VITA AMBRIA®, B3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0435
VITA AMBRIA®, C1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0455
VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0465
VITA AMBRIA®, C3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0475
VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0495
VITA AMBRIA®, D3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0505
VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0363
VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0373
VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0383
VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0413
VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0423
VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0463
VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0493
VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0365
VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0375
VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0385
VITA AMBRIA®, A3.5-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0395
VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0415
VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0425
VITA AMBRIA®, B3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0435
VITA AMBRIA®, C1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0455
VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0465

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, C3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0475
VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0495
VITA AMBRIA®, D3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0505

VITA AMBRIA® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0045
VITA AMBRIA®, 1M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0065
VITA AMBRIA®, 1M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0075
VITA AMBRIA®, 2M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0115
VITA AMBRIA®, 2M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0125
VITA AMBRIA®, 3M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0195
VITA AMBRIA®, 3M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0205
VITA AMBRIA®, 4M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0275
VITA AMBRIA®, 4M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0285
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0045
VITA AMBRIA®, 1M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0065
VITA AMBRIA®, 1M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0075
VITA AMBRIA®, 2M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0115
VITA AMBRIA®, 2M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0125
VITA AMBRIA®, 3M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0195
VITA AMBRIA®, 3M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0205
VITA AMBRIA®, 4M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0275
VITA AMBRIA®, 4M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0285

VITA AMBRIA® ST

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, ENL-ST, S, 5 pcs.	LAM070S0705
VITA AMBRIA®, ENM-ST, S, 5 pcs.	LAM070S0715
VITA AMBRIA®, ENI-ST, S, 5 pcs.	LAM070S0725

VITA AMBRIA® M0

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, M00, S, 5 pcs.	LAM130S0915
VITA AMBRIA®, M01, S, 5 pcs.	LAM130S0925
VITA AMBRIA®, M02, S, 5 pcs.	LAM130S0935

Accessori per Ceramica pressabile



Descrizione

Massa di rivestimento/Liquido

Massa di rivestimento con legante fosfatico idonea per speed con liquido specifica per pellets di pressatura VITA AMBRIA, per un esatto controllo dell'espansione e fluidità.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: confezione da 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: flacone da 1 litro

Pistone di pressatura

Pistone di pressatura monouso per un semplice impiego, senza perdite di tempo per sabbiatura e preriscaldamento.

- VITA AMBRIA PLUNGER: confezione da 50 pz. (diametro 13 mm)

Sistema Cilindri

Per la messa in rivestimento usare l'idoneo cilindro VITA AMBRIA MUFFLE SYSTEM.

VITA AMBRIA MUFFLE BASE, composto da 3 ricambi, 100 g e composto da 3 ricambi, 200 g

VITA AMBRIA MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessore e base), 100 g

VITA AMBRIA MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessore e base), 200 g

Accessori per Ceramica pressabile Articoli

Accessori per Ceramica pressabile

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA® MUFFLE BASE, composto da 3 ricambi, 100 g	LAM3MB100
VITA AMBRIA® MUFFLE BASE, composto da 3 ricambi, 200 g	LAM3MB200
VITA AMBRIA® MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessimetro e base), 100 g	LAM3MS100
VITA AMBRIA® MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessimetro e base), 200 g	LAM3MS200
VITA AMBRIA® INVEST F (Liquido per massa di rivestimento), 1000 ml	LAMIF1000
VITA AMBRIA® INVEST P (Massa di rivestimento polvere), 50 x 100 g	LAMIP10050
VITA AMBRIA® PLUNGER (pistone monouso Ø 13 mm), 50 pz.	LAMP1350



VITA – perfect match.

VITA

VITA LUMEX® UNIQUE

Un Ceramica Liquida. Possibilità uniche.



Descrizione

Rende uniche le applicazioni monolitiche. La nuova ceramica liquida pronta all'uso VITA LUMEX UNIQUE consente di ottenere una caratterizzazione tridimensionale, nonché una micro-stratificazione veloce e ultrasottile su ossido di zirconio, disilicato di litio e ceramica feldspatica.

Vantaggi

Semplicità d'uso

Forma, colore ed effetti sono immediatamente visibili dopo l'applicazione delle paste e restano invariati anche dopo la cottura. Per risultati affidabili.

Estetica unica

Restauri monolitici con un'estetica affascinante, un effetto di profondità tridimensionale e una lucentezza naturale.

Elevatissima flessibilità

Sottili sfumature cromatiche, strutture complesse e dettagli delicati possono essere realizzati con precisione grazie alle consistenze flessibili. Ideale per la caratterizzazione 3D e microveneering ultrasottili.

Indicazioni

Finalizzazione estetica di restauri monolitici (CET da circa 9,0 a 10,5 x 10⁻⁶ K-1*) in:

- Biossido di zirconio
- Disilicato di litio
- Ceramica feldspatica

Caratterizzazione di rivestimenti ceramici parziali e completi con le ceramiche di rivestimento estetico dentale idonee** su strutture nei seguenti materiali (CET da circa 9,0 a 10,5 x 10⁻⁶ K-1):

- Biossido di zirconio (rivestito parzialmente e completamente, ad esempio con VITA LUMEX AC)
- Disilicato di litio (rivestito parzialmente e completamente, ad esempio con VITA LUMEX AC)
- Titanio (grado 1-5) (rivestito completamente, ad esempio con VITA LUMEX AC)
- Ceramica feldspatica (rivestita parzialmente, ad esempio con VITA LUMEX AC)

* VITA LUMEX UNIQUE è approvato anche per la combinazione con DD CubeY HL e DD Cube One ML.

** Reperibili nel documento: 10887 VITA LUMEX UNIQUE - ceramiche di rivestimento estetico approvate.

VITAVM®13

Per il rivestimento estetico di strutture metalliche con CET convenzionale.



Descrizione

VITA VM 13 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, altamente estetica, perfettamente idonea per il CET delle classiche leghe ceramizzabili (ca. 13,8 – 15,2 $\mu\text{m/mK}$). Indipendentemente dal fatto che le leghe classiche vengano fuse, fresate o sinterizzate.

VITA VM 13 è una reale alternativa alla ceramica integrale – indicata per tutti i casi in cui occorre un'azione di mascheramento della struttura metallica.

Vantaggi

Estetico

Vivace gioco di colori grazie al comportamento di rifrazione e riflessione della luce simile allo smalto naturale.

Affidabile

La struttura microfine estremamente omogenea riduce la formazione di crepe e garantisce una superficie levigata e ad elevata densità.

Preciso

Eccellenti capacità di modellazione e stabilità per un'applicazione rapida e mirata della ceramica.

VITAVM®13 Assortimenti

VITAVM®13 VITA classical A1-D4®



VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®

Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP
BV13BUK12CV1

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®13 ONE COLOR KIT A2 POWDER

Assortimento un solo colore per i primi test
BV13OCKA2V3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A2
1	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA astina colore A2

VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP
BV13BUK12V1

Quantità	Contenuto	Materiale
26	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®13 ONE COLOR KIT 2M2 POWDER
Assortimento un solo colore per i primi test
BV130CK2M2V3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA astina colore 2M2

VITAVM®13 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER
Assortimento un solo colore per i primi test
BV130CK3M2V3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA astina colore 3M2

VITAVM®13 masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®13 GINGIVA KIT
Masse gengivali di aspetto naturale
BV13GKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 MARGIN KIT

Per la realizzazione di spalle in ceramica
BV13MKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA VM 13 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 PROFESSIONAL KIT

Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
BV13PKV2

Quantità	Contenuto	Materiale
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 13 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 13 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 13 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Guida colori VITA VM EFFECT CHROMA
1		Guida colori VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Guida colori VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®13 Articoli
VITAVM®13 VITA classical A1-D4®

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
A1	B453015
A2	B453025
A3	B453035
A3.5	B453045
A4	B453055
B1	B453065
B2	B453075
B3	B453085
B4	B453095
C1	B453105
C2	B453115
C3	B453125
C4	B453135
D2	B453145
D3	B453155
D4	B453165

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B4540112	B4540150
A2	B4540212	B4540250
A3	B4540312	B4540350
A3.5	B4540412	B4540450
A4	B4540512	B4540550
B1	B4540612	B4540650
B2	B4540712	B4540750
B3	B4540812	B4540850
B4	B4540912	B4540950
C1	B4541012	B4541050
C2	B4541112	B4541150
C3	B4541212	B4541250
C4	B4541312	B4541350
D2	B4541412	B4541450
D3	B4541512	B4541550
D4	B4541612	B4541650

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4543112	B4543150
A2	ENL	B4543212	B4543250
A3	ENL	B4543312	B4543350
A3.5	END	B4543412	B4543450
A4	END	B4543512	B4543550
B1	END	B4543612	B4543650
B2	END	B4543712	B4543750
B3	END	B4543812	B4543850
B4	END	B4543912	B4543950
C1	END	B4544012	B4544050
C2	END	B4544112	B4544150
C3	ENL	B4544212	B4544250
C4	ENL	B4544312	B4544350
D2	END	B4544412	B4544450
D3	END	B4544512	B4544550
D4	END	B4544612	B4544650

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4545112	B4545150
A2	ENL	B4545212	B4545250
A3	ENL	B4545312	B4545350
A3.5	END	B4545412	B4545450
A4	END	B4545512	B4545550
B1	END	B4545612	B4545650
B2	END	B4545712	B4545750
B3	END	B4545812	B4545850
B4	END	B4545912	B4545950
C1	END	B4546012	B4546050
C2	END	B4546112	B4546150
C3	ENL	B4546212	B4546250
C4	ENL	B4546312	B4546350
D2	END	B4546412	B4546450
D3	END	B4546512	B4546550
D4	END	B4546612	B4546650

VITAVM® 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
0M1	ENL	B4503112	B4503150	-
0M2	ENL	B4503212	B4503250	-
0M3	ENL	B4503312	B4503350	-
1M1	ENL	B4503412	B4503450	-
1M2	ENL	B4503512	B4503550	-
2L1.5	ENL	B4503612	B4503650	-
2L2.5	ENL	B4503712	B4503750	-
2M1	ENL	B4503812	B4503850	-
2M2	ENL	B4503912	B4503950	B45039250
2M3	ENL	B4504012	B4504050	B45040250
2R1.5	ENL	B4504112	B4504150	-
2R2.5	ENL	B4504212	B4504250	-
3L1.5	ENL	B4504312	B4504350	-
3L2.5	ENL	B4504412	B4504450	-
3M1	ENL	B4504512	B4504550	-
3M2	ENL	B4504612	B4504650	B45046250
3M3	ENL	B4504712	B4504750	B45047250

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
3R1.5	ENL	B4504812	B4504850	-
3R2.5	ENL	B4504912	B4504950	-
4L1.5	END	B4505012	B4505050	-
4L2.5	END	B4505112	B4505150	-
4M1	END	B4505212	B4505250	-
4M2	END	B4505312	B4505350	-
4M3	END	B4505412	B4505450	-
4R1.5	END	B4505512	B4505550	-
4R2.5	END	B4505612	B4505650	-
5M1	END	B4505712	B4505750	-
5M2	END	B4505812	B4505850	-
5M3	END	B4505912	B4505950	-

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
0M1	ENL	B4506112	B4506150	-
0M2	ENL	B4506212	B4506250	-
0M3	ENL	B4506312	B4506350	-
1M1	ENL	B4506412	B4506450	-
1M2	ENL	B4506512	B4506550	-
2L1.5	ENL	B4506612	B4506650	-
2L2.5	ENL	B4506712	B4506750	-
2M1	ENL	B4506812	B4506850	-
2M2	ENL	B4506912	B4506950	B45069250
2M3	ENL	B4507012	B4507050	B45070250
2R1.5	ENL	B4507112	B4507150	-
2R2.5	ENL	B4507212	B4507250	-
3L1.5	ENL	B4507312	B4507350	-
3L2.5	ENL	B4507412	B4507450	-
3M1	ENL	B4507512	B4507550	-
3M2	ENL	B4507612	B4507650	B45076250
3M3	ENL	B4507712	B4507750	B45077250
3R1.5	ENL	B4507812	B4507850	-
3R2.5	ENL	B4507912	B4507950	-
4L1.5	END	B4508012	B4508050	-
4L2.5	END	B4508112	B4508150	-
4M1	END	B4508212	B4508250	-
4M2	END	B4508312	B4508350	-
4M3	END	B4508412	B4508450	-

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
4R1.5	END	B4508512	B4508550	-
4R2.5	END	B4508612	B4508650	-
5M1	END	B4508712	B4508750	-
5M2	END	B4508812	B4508850	-
5M3	END	B4508912	B4508950	-

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
OP0	B4525012	-
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	-

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

VITAVM®13 masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EE1	B4509112
EE2	B4509212
EE3	B4509312
EE4	B4509412
EE5	B4509512
EE6	B4509612
EE7	B4509712
EE8	B4509812
EE9	B4509912
EE10	B4510012
EE11	B4510112

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EC1	B4512112
EC2	B4512212
EC3	B4512312
EC4	B4512412
EC5	B4512512
EC6	B4512612
EC7	B4512712
EC8	B4512812
EC9	B4512912
EC10	B4513012
EC11	B4513112

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EL1	B4514112
EL2	B4514212
EL3	B4514312
EL4	B4514412
EL5	B4514512
EL6	B4514612

VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EP1	B4515112
EP2	B4515212
EP3	B4515312

VITA VM 13 MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MM1	B4516112
MM2	B4516212
MM3	B4516312

VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
E01	B4517112
E02	B4517212
E03	B4517312
E04	B4517412
E05	B4517512

VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
COR1	B4522112
COR2	B4522212
COR3	B4522312

VITA VM 13 GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
G1	B4523112
G2	B4523212
G3	B4523312
G4	B4523412
G5	B4523512

VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
CP1	B4524112
CP2	B4524212
CP3	B4524312
CP4	B4524412
CP5	B4524512

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
W0	B4525912	B4525950

VITA VM 13 MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
M1	B4526112
M4	B4526412
M5	B4526512
M7	B4526712
M8	B4526812
M9	B4526912

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
GOL	B4527112
GOD	B4527312

VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
C01	B4528112
C02	B4528212
C03	B4528312

VITA VM 13 SUN OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
S01	B4529112
S02	B4529212
S03	B4529312

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominazione	Cod. 7 g
W0	B453597

VITA VM 13 SUN DENTINE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
SD1	B4536112
SD2	B4536212
SD3	B4536312

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
G0L	B453715
G0D	B453735

VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
C01	B453815
C02	B453825
C03	B453835

VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
S01	B453915
S02	B453925
S03	B453935

VITA VMK Master®

Per il rivestimento estetico di strutture metalliche con CET convenzionale.



Descrizione

VITA VMK Master è una ceramica feldspatica naturale per il rivestimento estetico delle classiche leghe ceramizzabili (ca. 13,8 – 15,2 $\mu\text{m/mK}$).

Indipendentemente dal fatto che le leghe classiche vengano fuse, fresate o sinterizzate.

Vantaggi

Preciso

Materiale senza compromessi in termini di sicurezza e lavorazione.

Intuitivo

Classico schema di stratificazione dentina-smalto.

Estetico

Restauri altamente estetici grazie ai colori brillanti.

VITA VMK Master® Assortimenti

VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT A2 Assortimento un solo colore per i primi test BVMKCOA2V2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA VMK Master® STARTER SET classical Assortimento due colori BVMKSSC

Quantità	Contenuto	Materiale
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2 - A3
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA astina colore A2
1		VITA astina colore A3

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT 2M2 Assortimento un solo colore per i primi test BVMK0CS2M2V2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER® Assortimento due colori BVMKSS3D

Quantità	Contenuto	Materiale
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2 - OP3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA astina colore 2M2
1		VITA astina colore 3M2

VITA VMK Master® Additional Powder

utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITA VMK Master® ADDITIONAL SET

Masse aggiuntive per restauri altamente individualizzati
BVMKAS

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T1 - T8
8	12 g	VITA VMK Master DENTINE MODIFIER DM1 - DM8
6	12 g	VITA VMK Master LUMINARY LM1 - LM6
6	12 g	VITA VMK Master MARGIN MN, M1 - M5
1	12 g	VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	12 g	VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT OT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1		Guida colori VITA VMK MASTER TRANSLUCENT
1		Guida colori VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA
1		Guida colori VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY



VITA VMK Master® GINGIVA SET POWDER

Masse gengivali di aspetto naturale
BVMKGS

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA VMK Master GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Guida colori VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA

VITA VMK Master® Articoli
VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
A1	B483015
A2	B483025
A3	B483035
A3.5	B483045
A4	B483055
B1	B483065
B2	B483075
B3	B483085
B4	B483095
C1	B483105
C2	B483115
C3	B483125
C4	B483135
D2	B483145
D3	B483155
D4	B483165

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
A1	B4840112	B4840150	B48401250
A2	B4840212	B4840250	B48402250
A3	B4840312	B4840350	B48403250
A3.5	B4840412	B4840450	-
A4	B4840512	B4840550	-
B1	B4840612	B4840650	-
B2	B4840712	B4840750	-
B3	B4840812	B4840850	-
B4	B4840912	B4840950	-
C1	B4841012	B4841050	-
C2	B4841112	B4841150	-
C3	B4841212	B4841250	-
C4	B4841312	B4841350	-
D2	B4841412	B4841450	-
D3	B4841512	B4841550	-
D4	B4841612	B4841650	-

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B4843112	B4843150
A2	B4843212	B4843250
A3	B4843312	B4843350
A3.5	B4843412	B4843450
A4	B4843512	B4843550
B1	B4843612	B4843650
B2	B4843712	B4843750
B3	B4843812	B4843850
B4	B4843912	B4843950
C1	B4844012	B4844050
C2	B4844112	B4844150
C3	B4844212	B4844250
C4	B4844312	B4844350
D2	B4844412	B4844450
D3	B4844512	B4844550
D4	B4844612	B4844650

VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
A1	EN1	B4845112	B4845150	B48451250
A2	EN1	B4845212	B4845250	B48452250
A3	EN1	B4845312	B4845350	B48453250
A3.5	EN2	B4845412	B4845450	B48454250
A4	EN2	B4845512	B4845550	-
B1	EN2	B4845612	B4845650	B48456250
B2	EN2	B4845712	B4845750	B48457250
B3	EN2	B4845812	B4845850	-
B4	EN2	B4845912	B4845950	-
C1	EN2	B4846012	B4846050	B48460250
C2	EN2	B4846112	B4846150	B48461250
C3	EN1	B4846212	B4846250	B48462250
C4	EN1	B4846312	B4846350	-
D2	EN2	B4846412	B4846450	B48464250
D3	EN2	B4846512	B4846550	-
D4	EN2	B4846612	B4846650	-

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
0M1	EN1	B4803112	B4803150	-
0M2	EN1	B4803212	B4803250	-
0M3	EN1	B4803312	B4803350	-
1M1	EN1	B4803412	B4803450	B48034250
1M2	EN1	B4803512	B4803550	B48035250
2L1.5	EN1	B4803612	B4803650	B48036250
2L2.5	EN1	B4803712	B4803750	-
2M1	EN1	B4803812	B4803850	B48038250
2M2	EN1	B4803912	B4803950	B48039250
2M3	EN1	B4804012	B4804050	-
2R1.5	EN1	B4804112	B4804150	-
2R2.5	EN1	B4804212	B4804250	B48042250
3L1.5	EN1	B4804312	B4804350	-
3L2.5	EN1	B4804412	B4804450	-
3M1	EN1	B4804512	B4804550	-
3M2	EN1	B4804612	B4804650	B48046250
3M3	EN1	B4804712	B4804750	-

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
3R1.5	EN1	B4804812	B4804850	-
3R2.5	EN3	B4804912	B4804950	-
4L1.5	EN1	B4805012	B4805050	-
4L2.5	EN1	B4805112	B4805150	-
4M1	EN1	B4805212	B4805250	-
4M2	EN3	B4805312	B4805350	-
4M3	EN3	B4805412	B4805450	-
4R1.5	EN1	B4805512	B4805550	-
4R2.5	EN3	B4805612	B4805650	-
5M1	EN1	B4805712	B4805750	-
5M2	EN3	B4805812	B4805850	-
5M3	EN3	B4805912	B4805950	-

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	B4806112	B4806150
0M2	B4806212	B4806250
0M3	B4806312	B4806350
1M1	B4806412	B4806450
1M2	B4806512	B4806550
2L1.5	B4806612	B4806650
2L2.5	B4806712	B4806750
2M1	B4806812	B4806850
2M2	B4806912	B4806950
2M3	B4807012	B4807050
2R1.5	B4807112	B4807150
2R2.5	B4807212	B4807250
3L1.5	B4807312	B4807350
3L2.5	B4807412	B4807450
3M1	B4807512	B4807550
3M2	B4807612	B4807650
3M3	B4807712	B4807750
3R1.5	B4807812	B4807850
3R2.5	B4807912	B4807950
4L1.5	B4808012	B4808050
4L2.5	B4808112	B4808150
4M1	B4808212	B4808250
4M2	B4808312	B4808350
4M3	B4808412	B4808450

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
4R1.5	B4808512	B4808550
4R2.5	B4808612	B4808650
5M1	B4808712	B4808750
5M2	B4808812	B4808850
5M3	B4808912	B4808950

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
OP0	B4825012	B4825050	-
OP1	B4825112	B4825150	B48251250
OP2	B4825212	B4825250	B48252250
OP3	B4825312	B4825350	B48253250
OP4	B4825412	B4825450	-
OP5	B4825512	B4825550	-

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
OP0	B483505
OP1	B483515
OP2	B483525
OP3	B483535
OP4	B483545
OP5	B483555

VITA VMK Master® Additional Powder
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VMK Master TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
T1	B4809112	-	-
T2	B4809212	-	-
T3	B4809312	-	-
T4	B4809412	B4809450	B48094250
T5	B4809512	-	-
T6	B4809612	-	-
T7	B4809712	-	-
T8	B4809812	-	-

VITA VMK Master DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
DM1	B4812112
DM2	B4812212
DM3	B4812312
DM4	B4812412
DM5	B4812512
DM6	B4812612
DM7	B4812712
DM8	B4812812

VITA VMK Master LUMINARY, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
LM1	B4814112
LM2	B4814212
LM3	B4814312
LM4	B4814412
LM5	B4814512
LM6	B4814612

VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
PLT1	B4815112

VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
OT1	B4817112

VITA VMK Master WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
WIN	B4818112	B4818150	B48181250

VITA VMK Master ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

VITA VMK Master CERVICAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
CE1	B4820112
CE2	B4820212
CE3	B4820312

VITA VMK Master CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
COR1	B4822112
COR2	B4822212

VITA VMK Master GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
G1	B4823112
G2	B4823212
G3	B4823312
G4	B4823412
G5	B4823512

VITA VMK Master NECK, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
N1	B4824112
N2	B4824212
N3	B4824312
N4	B4824412
N5	B4824512

VITA VMK Master WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
W0	B4825912	B4825950

VITA VMK Master MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MN	B4826012
M1	B4826112
M2	B4826212
M3	B4826312
M4	B4826412
M5	B4826512

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
GOL	B4827112
GOD	B4827312

VITA VMK Master WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominazione	Cod. 7 g
WO	B483597

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
GOL	B483715
GOD	B483735

VITA NP BOND

Efficace ammortizzatore CET tra ceramica e lega metallica.



Descrizione

VITA NP BOND migliora il legame tra struttura metallica e ceramica specialmente nel caso di leghe non nobili e conferisce maggior sicurezza all'odontotecnico nella realizzazione di rivestimenti stabili nel lungo periodo e altamente estetici.

Vantaggi

Efficace

Efficace ammortizzatore CET tra ceramica e lega metallica, soprattutto nel caso di leghe non nobili, per un legame stabile tra struttura e ceramica.

Sicurezza

Legame affidabile e la pasta pronta per l'uso.

Semplice

Facilità di impiego ed elevata produttività.

VITA NP BOND Articoli

VITA NP BOND

Denominazione	Cod.
VITA NP BOND PASTE, 5 g	BNPB5

VITA LUMEX® AC

La ceramica di rivestimento estetico moderna e affidabile per tutte le comuni ceramiche strutturali e il titanio.



Descrizione

VITA LUMEX AC è un sistema di rivestimento costituito da vetroceramica rinforzata con leucite e con una innovativa formula merceologica per risultati cromaticamente fedeli, vitali e affidabili.

Vantaggi

Versatile

Semplifica il lavoro quotidiano grazie all'ampia gamma di indicazioni.

Affidabile

Riproduzione affidabile del colore dei denti con la FORMULA VITA COLOR-MATCH.

Efficiente

Processi sicuri ed efficienti grazie a un'elevata stabilità alla cottura e una comprovata resistenza.

Indicazioni

Settori di impiego:

- Rivestimento totale e parziale di biossido di zirconio
- Rivestimento totale e parziale di disilicato di litio
- Rivestimento totale e parziale di titanio grado 1 - 5
- Rivestimento parziale di ceramica feldspatica
- Ricostruzioni senza struttura

Materiali:

- Strutture in biossido di zirconio
(CET ca. 10,0 -10,5 x 10-6 K-1)
- Strutture in vetroceramica
(CET ca. 9,0 -10,5 x 10-6 K-1)
- Strutture in biossido di zirconio
(CET ca. 9,0 -10,5 x 10-6 K-1)

VITA LUMEX® AC Assortimenti

VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®

VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA classical A1-D4® BLPWKC

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH A1 - D4
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4® Per stratificazione standard BLSKCV1

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - D4
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blond
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pennello Nr. 3/0 sintetico
1		pennello stratificante Nr. 8 sintetico
1		Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni)

VITA LUMEX® AC STARTER KIT VITA classical A1-D4®
Per il primo approccio
BLSTKCV1

Quantità	Contenuto	Materiale
4	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
4	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, waterdrop, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino
2	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pennello Nr. 3/0 sintetico
1		pennello stratificante Nr. 8 sintetico
1		Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni)

VITA LUMEX® AC masse aggiuntive

VITA LUMEX® AC CUT-BACK KIT
Per Cut-back e microrivestimenti
BLCBK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA LUMEX® AC EXPERT KIT

Per stratificazione individualizzata
BLEK

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut
5	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino, sand, sesame
5	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER cloudy-white, caramel, honey, copper, brown
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC MAMELON saffron, honey-melon
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA LUMEX® AC GINGIVA KIT

Per la ricostruzione di parti gengivali
BLGK

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA LUMEX AC GINGIVA pale-papilla, light-rose, nectarine, grapefruit, rosewood, purple, deep-red, dark-red
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

BLPWK3D

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH LL 1 - LL 5
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Per stratificazione standard
BLSKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
29	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
29	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pennello Nr. 3/0 sintetico
1		pennello stratificante Nr. 8 sintetico
1		Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni)

VITA LUMEX® AC Articoli
VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B5343112	B5343150
A2	B5343212	B5343250
A3	B5343312	B5343350
A3.5	B5343412	B5343450
A4	B5343512	B5343550
B1	B5343612	B5343650
B2	B5343712	B5343750
B3	B5343812	B5343850
B4	B5343912	B5343950
C1	B5344012	B5344050
C2	B5344112	B5344150
C3	B5344212	B5344250
C4	B5344312	B5344350
D2	B5344412	B5344450
D3	B5344512	B5344550
D4	B5344612	B5344650

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B5345112	B5345150
A2	B5345212	B5345250
A3	B5345312	B5345350
A3.5	B5345412	B5345450
A4	B5345512	B5345550
B1	B5345612	B5345650
B2	B5345712	B5345750
B3	B5345812	B5345850
B4	B5345912	B5345950
C1	B5346012	B5346050
C2	B5346112	B5346150
C3	B5346212	B5346250
C4	B5346312	B5346350
D2	B5346412	B5346450
D3	B5346512	B5346550
D4	B5346612	B5346650

VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B5346712	B5346750
A2	B5346812	B5346850
A3	B5346912	B5346950
A3.5	B5347012	-
A4	B5347112	-
B1	B5347212	B5347250
B2	B5347312	-
B3	B5347412	-
B4	B5347512	-
C1	B5347612	-
C2	B5347712	-
C3	B5347812	-
C4	B5347912	-
D2	B5348012	-
D3	B5348112	-
D4	B5348212	-

VITA LUMEX® AC masse aggiuntive

VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
smoky-white	B5309112
light-blonde	B5309212
misty-rose	B5309312
sunlight	B5309412
sun-intense	B5309512
waterdrop	B5309612
deep-blue	B5309712
foggy-grey	B5309812

VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
cloudy-white	B5312112
caramel	B5312212
honey	B5312312
copper	B5312412
brown	B5312512

VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
arctic-white	B5314112
cream	B5314212
cappuccino	B5314312
sand	B5314412
sesame	B5314512

VITA LUMEX AC PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
shell	B5315112

VITA LUMEX AC MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
saffron	B5316112
honey-melon	B5316212

VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
opal-neutral	B5317112
opal-sky	B5317212
opal-azure	B5317312

VITA LUMEX AC ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
clear	B5318112	B5318150
light	B5319112	B5319150
medium	B5319212	B5319250
intense	B5319312	B5319350
fog	B5320112	B5320150

VITA LUMEX AC CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
neutral	B5322112
desert	B5322212

VITA LUMEX AC GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
pale-papilla	B5323112
light-rose	B5323212
nectarine	B5323312
grapefruit	B5323412
rosewood	B5323512
purple	B5323612
deep-red	B5323712
dark-red	B5323812

VITA LUMEX AC MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
straw-yellow	B5326112
corn-yellow	B5326212

VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
ivory	B5351112

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	B5303112	B5303150
0M2	B5303212	B5303250
0M3	B5303312	B5303350
1M1	B5303412	B5303450
1M2	B5303512	B5303550
2L1.5	B5303612	B5303650
2L2.5	B5303712	B5303750
2M1	B5303812	B5303850
2M2	B5303912	B5303950
2M3	B5304012	B5304050
2R1.5	B5304112	B5304150
2R2.5	B5304212	B5304250
3L1.5	B5304312	B5304350
3L2.5	B5304412	B5304450
3M1	B5304512	B5304550
3M2	B5304612	B5304650
3M3	B5304712	B5304750
3R1.5	B5304812	B5304850
3R2.5	B5304912	B5304950
4L1.5	B5305012	B5305050
4L2.5	B5305112	B5305150
4M1	B5305212	B5305250
4M2	B5305312	B5305350
4M3	B5305412	B5305450
4R1.5	B5305512	B5305550
4R2.5	B5305612	B5305650
5M1	B5305712	B5305750
5M2	B5305812	B5305850
5M3	B5305912	B5305950

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	B5306112	B5306150
0M2	B5306212	B5306250
0M3	B5306312	B5306350
1M1	B5306412	B5306450

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
1M2	B5306512	B5306550
2L1.5	B5306612	B5306650
2L2.5	B5306712	B5306750
2M1	B5306812	B5306850
2M2	B5306912	B5306950
2M3	B5307012	B5307050
2R1.5	B5307112	B5307150
2R2.5	B5307212	B5307250
3L1.5	B5307312	B5307350
3L2.5	B5307412	B5307450
3M1	B5307512	B5307550
3M2	B5307612	B5307650
3M3	B5307712	B5307750
3R1.5	B5307812	B5307850
3R2.5	B5307912	B5307950
4L1.5	B5308012	B5308050
4L2.5	B5308112	B5308150
4M1	B5308212	B5308250
4M2	B5308312	B5308350
4M3	B5308412	B5308450
4R1.5	B5308512	B5308550
4R2.5	B5308612	B5308650
5M1	B5308712	B5308750
5M2	B5308812	B5308850
5M3	B5308912	B5308950

VITA LUMEX AC OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
opaque-0	B5325012
opaque-1	B5325112
opaque-2	B5325212
opaque-3	B5325312
opaque-4	B5325412
opaque-5	B5325512

VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
LL 0	B5353012	B5353050
LL 1	B5353112	B5353150
LL 2	B5353212	B5353250
LL 3	B5353312	B5353350
LL 4	B5353412	-
LL 5	B5353512	-

VITAVM®11

Ceramica a struttura microfine per l'individualizzazione di VITA SUPRINITY PC.



Descrizione

VITA VM 11 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, a basso punto di fusione, sviluppata specialmente per l'individualizzazione di restauri in ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio.*

Il perfetto adattamento dei coefficienti di espansione termica del materiale strutturale e di rivestimento estetico garantisce un legame eccellente e risultati sicuri per un rivestimento privo di distorsioni e soggetto a tensioni minime.

Vantaggi

Altamente estetici:

L'elevata traslucenza e la calda colorazione di VITA VM 11 insieme all'effetto palescente di VITA SUPRINITY PC assicurano risultati altamente estetici e giochi cromatici vivaci.

Sicuro

L'adattamento ottimale dei due CET garantisce un legame sicuro e privo di tensioni.

Efficiente

Grazie all'affermata struttura microfine si conseguono superfici lisce, compatte, facilmente molabili e rapidamente lucidabili.

Avvertenza

* utilizzabile anche per CELTRA® e CELTRA® CAD FC.
CELTRA è un marchio registrato della DeguDent GmbH.

VITAVM®11 Assortimenti

VITAVM®11 VITA classical A1-D4®



VITAVM®11 DENTINE KIT VITA classical A1-D4® BV11DKC

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, A1 - A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®11 DENTINE KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER® BV11DK

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1 - 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 Articoli

VITAVM®11 VITA classical A1-D4®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g
A1	ENL	B4945112
A2	ENL	B4945212
A3	ENL	B4945312
A3.5	END	B4945412
B2	END	B4945712
C2	END	B4946112
D2	END	B4946412

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g
0M1	ENL	B4906112
1M1	ENL	B4906412
1M2	ENL	B4906512
2M2	ENL	B4906912
3M2	ENL	B4907612
4M2	END	B4908312

VITAVM®11 masse aggiuntive

utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM 11 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EE1	B4909112
EE3	B4909312
EE5	B4909512
EE7	B4909712
EE8	B4909812
EE9	B4909912
EE11	B4910112

VITA VM 11 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EC1	B4912112
EC5	B4912512
EC11	B4913112

VITA VM 11 EFFECT PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EP1	B4915112

VITA VM 11 MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MM1	B4916112
MM3	B4916312

VITA VM 11 EFFECT OPAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
E01	B4917112
E02	B4917212
E03	B4917312
E05	B4917512

VITA VM 11 WINDOW, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
WIN	B4918112

VITA VM 11 ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
ENL	B4919112
END	B4919212

VITA VM 11 NEUTRAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
NT	B4920112

VITA VM 11 SUN DENTINE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
SD1	B4936112
SD2	B4936212
SD3	B4936312

VITAVM®9

Ceramica feldspatica naturale a struttura microfine per il rivestimento estetico di strutture in biossido di zirconio e VITABLOCS Mark II



Descrizione

VITA VM 9 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, altamente estetica, perfettamente idonea al CET di strutture in biossido di zirconio (ca. 10,5, con ad es. VITA YZ) – indipendentemente dal fatto che sia bianco, cromatizzato o traslucido.

È indicata inoltre per l'individualizzazione dei restauri in VITABLOCS MARK II.

Vantaggi

Estetico

Vivace gioco di colori grazie al comportamento di rifrazione e riflessione della luce simile allo smalto naturale.

Sicuro

Eccellente legame per risultati sicuri

Stabilità

La struttura microfine estremamente garantisce una superficie levigata e ad elevata densità.

VITAVM®9 Assortimenti

VITAVM®9 VITA classical A1-D4®



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®

Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP
BV9BUK12CV1

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT A2

Assortimento un solo colore per i primi test
BV90CKA2V4

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITAVM®9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP
BV9BUK12V1

Quantità	Contenuto	Materiale
26	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT 2M2

Assortimento un solo colore per i primi test
BV90CK2M2V5

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITAVM®9 masse aggiuntive

utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC

Masse aggiuntive per l'individualizzazione di VITABLOCS
BV9EKC2V2

Quantità	Contenuto	Materiale
1		VITABLOCS Mark II Sample Set VITA SYSTEM 3D-MASTER
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO2
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Supporto di cottura W a nido d'ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)



VITAVM®9 GINGIVA KIT

Masse gengivali di aspetto naturale
BV9GKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA VM 9 GINGIVA G1 - G5
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 MARGIN KIT

Solo per piccole correzioni nella zona marginale
BV9MKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA VM 9 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 PROFESSIONAL KIT

Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
BV9PKV2

Quantità	Contenuto	Materiale
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 9 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Guida colori VITA VM EFFECT CHROMA
1		Guida colori VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Guida colori VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®9 Articoli
VITAVM®9 VITA classical A1-D4®

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4243112	B4243150
A2	ENL	B4243212	B4243250
A3	ENL	B4243312	B4243350
A3.5	END	B4243412	B4243450
A4	END	B4243512	B4243550
B1	END	B4243612	B4243650
B2	END	B4243712	B4243750
B3	END	B4243812	B4243850
B4	END	B4243912	B4243950
C1	END	B4244012	B4244050
C2	END	B4244112	B4244150
C3	ENL	B4244212	B4244250
C4	ENL	B4244312	B4244350
D2	END	B4244412	B4244450
D3	END	B4244512	B4244550
D4	END	B4244612	B4244650

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4245112	B4245150
A2	ENL	B4245212	B4245250
A3	ENL	B4245312	B4245350
A3.5	END	B4245412	B4245450
A4	END	B4245512	B4245550
B1	END	B4245612	B4245650
B2	END	B4245712	B4245750
B3	END	B4245812	B4245850
B4	END	B4245912	B4245950
C1	END	B4246012	B4246050
C2	END	B4246112	B4246150
C3	ENL	B4246212	B4246250
C4	ENL	B4246312	B4246350
D2	END	B4246412	B4246450
D3	END	B4246512	B4246550
D4	END	B4246612	B4246650

VITAVM® 9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	ENL	B4203112	B4203150
0M2	ENL	B4203212	B4203250
0M3	ENL	B4203312	B4203350
1M1	ENL	B4203412	B4203450
1M2	ENL	B4203512	B4203550
2L1.5	ENL	B4203612	B4203650
2L2.5	ENL	B4203712	B4203750
2M1	ENL	B4203812	B4203850
2M2	ENL	B4203912	B4203950
2M3	ENL	B4204012	B4204050
2R1.5	ENL	B4204112	B4204150
2R2.5	ENL	B4204212	B4204250
3L1.5	ENL	B4204312	B4204350
3L2.5	ENL	B4204412	B4204450
3M1	ENL	B4204512	B4204550
3M2	ENL	B4204612	B4204650
3M3	ENL	B4204712	B4204750

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
3R1.5	ENL	B4204812	B4204850
3R2.5	ENL	B4204912	B4204950
4L1.5	END	B4205012	B4205050
4L2.5	END	B4205112	B4205150
4M1	END	B4205212	B4205250
4M2	END	B4205312	B4205350
4M3	END	B4205412	B4205450
4R1.5	END	B4205512	B4205550
4R2.5	END	B4205612	B4205650
5M1	END	B4205712	B4205750
5M2	END	B4205812	B4205850
5M3	END	B4205912	B4205950

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	ENL	B4206112	B4206150
0M2	ENL	B4206212	B4206250
0M3	ENL	B4206312	B4206350
1M1	ENL	B4206412	B4206450
1M2	ENL	B4206512	B4206550
2L1.5	ENL	B4206612	B4206650
2L2.5	ENL	B4206712	B4206750
2M1	ENL	B4206812	B4206850
2M2	ENL	B4206912	B4206950
2M3	ENL	B4207012	B4207050
2R1.5	ENL	B4207112	B4207150
2R2.5	ENL	B4207212	B4207250
3L1.5	ENL	B4207312	B4207350
3L2.5	ENL	B4207412	B4207450
3M1	ENL	B4207512	B4207550
3M2	ENL	B4207612	B4207650
3M3	ENL	B4207712	B4207750
3R1.5	ENL	B4207812	B4207850
3R2.5	ENL	B4207912	B4207950
4L1.5	END	B4208012	B4208050
4L2.5	END	B4208112	B4208150
4M1	END	B4208212	B4208250
4M2	END	B4208312	B4208350
4M3	END	B4208412	B4208450

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
4R1.5	END	B4208512	B4208550
4R2.5	END	B4208612	B4208650
5M1	END	B4208712	B4208750
5M2	END	B4208812	B4208850
5M3	END	B4208912	B4208950

VITAVM®9 masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EE1	B4209112
EE2	B4209212
EE3	B4209312
EE4	B4209412
EE5	B4209512
EE6	B4209612
EE7	B4209712
EE8	B4209812
EE9	B4209912
EE10	B4210012
EE11	B4210112

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EC1	B4212112
EC2	B4212212
EC3	B4212312
EC4	B4212412
EC5	B4212512
EC6	B4212612
EC7	B4212712
EC8	B4212812
EC9	B4212912
EC10	B4213012
EC11	B4213112

VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EL1	B4214112
EL2	B4214212
EL3	B4214312
EL4	B4214412
EL5	B4214512
EL6	B4214612

VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EP1	B4215112
EP2	B4215212
EP3	B4215312

VITA VM 9 MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MM1	B4216112
MM2	B4216212
MM3	B4216312

VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
E01	B4217112
E02	B4217212
E03	B4217312
E04	B4217412
E05	B4217512

VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

VITA VM 9 EFFECT BONDER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB3	B4221312
EB4	B4221412
EB5	B4221512

VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
COR1	B4222112
COR2	B4222212
COR3	B4222312

VITA VM 9 GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
G1	B4223112
G2	B4223212
G3	B4223312
G4	B4223412
G5	B4223512

VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
CP1	B4224112
CP2	B4224212
CP3	B4224312
CP4	B4224412
CP5	B4224512

VITA VM 9 MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
M1	B4226112
M4	B4226412
M5	B4226512
M7	B4226712
M8	B4226812
M9	B4226912

VITA VM 9 ADD-ON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
ADD1	B4229112
ADD2	B4229212
ADD3	B4229312
ADD4	B4229412
ADD5	B4229512
ADD6	B4229612
ADD7	B4229712
ADD8	B4229812

VITA VM 9 SUN DENTINE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
SD1	B4236112
SD2	B4236212
SD3	B4236312

VITAVM® LC & VITAVM® LC flow

Composito fotopolimerizzabile a microparticelle per uso extra-orale in protesi fissa e mobile.



Descrizione

Il flusso di VITA VM LC e VITA VM LC sono una Composito fotopolimerizzabile a microparticelle per uso extra-orale in protesi fissa e mobile.

La linea di prodotti VITA VM LC soddisfa tutti i requisiti per la realizzazione extraorale di restauri con un composito di rivestimento estetico. Che si usi l'affermato composito in pasta, le masse flow a bassa viscosità o una combinazione di masse: con VITA VM LC si ottengono sempre risultati brillanti.

Vantaggi

Efficiente

Modellabile in modo semplice, individuale e controllato.

Sicuro

Elevata resistenza del materiale, legame sicuro e superfici di qualità.

Estetica

Determinazione e riproduzione sicura del colore.

Indicazioni

- Rivestimento totale e parziale di strutture metalliche
- corone, ponti
- corone telescopiche
- sovrastrutture su impianti
- Inlay, faccette

Settori di impiego

- Individualizzazione e stratificazione di VITA ENAMIC
- Rivestimento di strutture in ZrO2 parzialmente stabilizzato con ittrio (CET ca. 10,5 · 10-6 · K-1) come ad es. VITA YZ
- Individualizzazione di denti in resina VITA
- Riproduzione di parti gengivali
- Rivestimento estetico di protesi fisse e parzialmente mobili (secondo indicazioni del produttore) in
 - polietereeterchetone caricato con max. 20% di ceramica (PEEK), ad es. BioHPP/Bredent
 - polimero PEEK-OPTIMA® LT1, ad es. Juvora, InnoBlanc Medical

Provvisori di riabilitazione:

- Individualizzazione e stratificazione di provvisori di riabilitazione in VITA CAD-Temp
- Corone e ponti frontali a 3 elementi in VITA VM LC privi di metallo

Colori

Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER® e VITA classical A1-D4®

VITAVM®LC & VITAVM®LC flow Assortimenti

VITAVM®LC VITA classical A1-D4®



VITAVM®LC combi TEST KIT A3

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE paste / ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCCTKA3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		VITA astina colore A3



VITAVM®LC flow TEST KIT A3

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCFTKA3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		VITA astina colore A3



VITAVM®LC paste TEST KIT A3

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive paste)

CVLCPTKA3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		VITA astina colore A3

VITAVM®LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®LC combi TEST KIT 2M2

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE paste / ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCCTK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		VITA astina colore 2M2
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa

VITAVM®LC flow TEST KIT 2M2

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCFTK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		VITA astina colore 2M2



VITAVM®LC paste TEST KIT 2M2

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive paste)

CVLCPTK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		VITA astina colore 2M2
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL

VITAVM®LC masse aggiuntive

utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®LC flow CHROMA KIT

Kit per intensificazione cromatica cervicale/corpo

CVLCFCHK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC flow GINGIVA KIT
Kit per ricostruzione gengivale
CVLCFGK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1 - G5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
CVLCFPKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1 - EE2, EE5 - EE7, EE9, EE11 - EE12
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC paste GINGIVA KIT
Kit per ricostruzione gengivale
CVLCPGK

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
4	4 g	VITA VM LC GINGIVA G1 - G2, G4 - G5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL

VITAVM®LC PRIMER

VITA VM LC PRIMER I, 5 ml
CVMLP014

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

VITA VM LC PRIMER II, 5 ml
CVMLP024

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITA VM®LC PRIMER SET
CVMLPSET

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITAVM® LC & VITAVM® LC flow Articoli
VITAVM® LC VITA classical A1-D4®

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
A1	ENL	C444314
A2	ENL	C444324
A3	ENL	C444334
A3.5	END	C444344
A4	END	C444354
B2	ENL	C444374
B3	END	C444384
B4	END	C444394
C1	END	C444404
C2	ENL	C444414
C3	END	C444424
C4	END	C444434
D2	END	C444444
D3	END	C444454
D4	END	C444464

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
A1	ENL	C44431F4
A2	ENL	C44432F4
A3	ENL	C44433F4
A3.5	END	C44434F4
A4	END	C44435F4
B2	END	C44437F4
B3	END	C44438F4
B4	END	C44439F4
C1	END	C44440F4
C2	ENL	C44441F4
C3	END	C44442F4
C4	END	C44443F4
D2	END	C44444F4
D3	END	C44445F4
D4	END	C44446F4

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
A1	C443013
A2	C443023
A3	C443033
A3.5	C443043
A4	C443053
B2	C443073
B3	C443083
B4	C443093
C1	C443103
C2	C443113
C3	C443123
C4	C443133
D2	C443143
D3	C443153
D4	C443163

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
0M1	ENL	C440314
1M1	ENL	C440344
1M2	ENL	C440354
2L1.5	ENL	C440364
2L2.5	ENL	C440374
2M1	ENL	C440384
2M2	ENL	C440394
2M3	ENL	C440404
2R1.5	ENL	C440414
2R2.5	ENL	C440424
3L1.5	ENL	C440434
3L2.5	ENL	C440444
3M1	ENL	C440454
3M2	ENL	C440464
3M3	ENL	C440474
3R1.5	ENL	C440484
3R2.5	ENL	C440494
4L1.5	END	C440504

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
4L2.5	END	C440514
4M1	END	C440524
4M2	END	C440534
4M3	END	C440544
4R1.5	END	C440554
4R2.5	END	C440564
5M1	END	C440574
5M2	END	C440584
5M3	END	C440594

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
0M1	ENL	C44031F4
1M1	ENL	C44034F4
2M1	ENL	C44038F4
2M2	ENL	C44039F4
2M3	ENL	C44040F4
3M2	ENL	C44046F4
3M3	ENL	C44047F4
3R2.5	ENL	C44049F4

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
0M1	C445013
1M1	C445043
1M2	C445053
2L1.5	C445063
2M1	C445083
2M2	C445093
2M3	C445103
3L1.5	C445133
3M2	C445163
3M3	C445173
3R2.5	C445193
4M2	C445233

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Denominazione	Cod. 10 g
---------------	-----------

Denominazione	Cod. 10 g
0M1	C4400110
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

VITAVM®LC masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
CP1	C442414
CP2	C442424
CP3	C442434
CP4	C442444
CP5	C442454

VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
EE12	C441024
EE2	C440924
EE6	C440964
EE9	C440994

VITA VM LC ENAMEL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
END	C441924
ENL	C441914

VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
CP1	C44241F3
CP2	C44242F3
CP3	C44243F3
CP4	C44244F3
CP5	C44245F3

VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
EE1	C44091F3
EE11	C44101F3
EE12	C44102F3
EE2	C44092F3
EE5	C44095F3
EE6	C44096F3
EE7	C44097F3
EE9	C44099F3

VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
END	C44192F4
ENL	C44191F4

VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
G1	C44231F3
G2	C44232F3
G3	C44233F3
G4	C44234F3
G5	C44235F3

VITA VM LC flow NEUTRAL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
NT	C44201F4

VITA VM LC flow WINDOW, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
WIN	C44181F3

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g


Denominazione	Cod. 3 g
GOL	C443713

VITA VM LC GINGIVA, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
G1	C442314
G2	C442324
G4	C442344
G5	C442354

VITA VM LC NEUTRAL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
NT	C442014


Denominazione		Cod.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID, 5 ml Liquido per opaco		CVML0L5

VITA VM LC PAINT, 2 g

Denominazione	Cod. 2 g
PT1	C444012
PT12	C444122
PT13	C444132
PT15	C444152
PT17	C444172
PT19	C444192
PT3	C444032
PT5	C444052
PT8	C444082
PT9	C444092

VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
PRE	C445913

Denominazione		Cod.
VITAVM®LC PAINT KIT Masse ad alta intensità cromatica		CVLCPAKV4

VITAVM® LC PRIMER

Il adesivo per compositi fotopolimerizzanti da rivestimento estetico.



Descrizione

VITA VM LC PRIMER è un adesivo per il extraorale condizionamento della superficie. Come sistema adesivo a due fasi, VITA VM LC PRIMER offre un'adesione affidabile tra materiali compositi e materiali per restauri dentali.

VITA VM LC PRIMER I & II possono essere utilizzati anche singolarmente, a seconda dei materiali. Il loro potenziale adesivo si sviluppa però pienamente quando vengono utilizzati in combinazione. A questo proposito si rimanda alle nostre indicazioni raccomandate.

Vantaggi

Economico

Vantaggio economico grazie alla varietà delle indicazioni.

Affidabile

Affidabilità grazie all'elevata adesione.

Sicuro

Sicurezza di processo grazie alla facilità d'uso.

Indicazioni

- Adesione di superfici di strutture in metallo (leghe non nobili, leghe nobili, titanio) a resine/compositi a base di (met)acrilato
- Adesione di superfici di strutture in ZrO₂ a resine/compositi a base di (met)acrilato
- Adesione di compositi/resine reticolate come VITA CAD Temp o di polimeri ad alte prestazioni (PEEK, PEKK)

VITAVM® LC PRIMER Assortimenti

VITAVM® LC PRIMER

VITA VM LC PRIMER I, 5 ml

CVMLP014

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

VITA VM LC PRIMER II, 5 ml

CVMLP024

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITA VM® LC PRIMER SET

CVMLPSET

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITAVM® CC

Materiale polimerizzabile a freddo, autopolimerizzante, privo di sostanze di carica per la realizzazione extraorale.



Descrizione

VITA VM CC è un materiale polimerizzabile a freddo, privo di sostanze di carica per uso extraorale di protesi provvisorie e riparazioni.

Indicazioni

- Corone e ponti provvisori
- Fissaggio di denti protesici ad es. su scheletrati
- Riparazioni
- Copertura di attacchi in protesi combinata

Colori

Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1-D4

VITAVM® CC Assortimenti

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®



VITA VM CC ONE COLOR KIT A2

Assortimento un solo colore per i primi test

CVCCOCKA2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE A2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA astina colore A2

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM® CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Assortimento introduzione per la stratificazione BASIC

CVCCBK16

Quantità	Contenuto	Materiale
16	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM® CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Assortimento introduzione Small per la stratificazione BASIC

CVCCBK5

Quantità	Contenuto	Materiale
5	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITA VM CC ONE COLOR KIT 2M2
Assortimento un solo colore per i primi test
CVCCOCK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 2M2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA astina colore 2M2

VITAVM®CC masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
CVCCPK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	30 g	VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6

VITAVM® CC Articoli
VITAVM® CC VITA classical A1-D4®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 30 g	Cod. 100 g
A1	ENL	C4743130	C47431100
A2	ENL	C4743230	C47432100
A3	ENL	C4743330	C47433100
A3.5	END	C4743430	C47434100
A4	END	C4743530	C47435100
B2	END	C4743730	C47437100
B3	END	C4743830	C47438100
B4	END	C4743930	-
C1	END	C4744030	-
C2	END	C4744130	C47441100
C3	ENL	C4744230	C47442100
C4	ENL	C4744330	-
D2	END	C4744430	-
D3	END	C4744530	C47445100
D4	END	C4744630	-

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 30 g	Cod. 100 g
0M1	ENL	C4703130	C47031100
1M1	ENL	C4703430	C47034100
2L1.5	ENL	C4703630	C47036100
2M1	ENL	C4703830	C47038100
2M2	ENL	C4703930	C47039100
2M3	ENL	C4704030	C47040100
3L1.5	ENL	C4704330	C47043100
3L2.5	ENL	C4704430	C47044100
3M1	ENL	C4704530	C47045100
3M2	ENL	C4704630	C47046100
3M3	ENL	C4704730	C47047100
3R1.5	ENL	C4704830	C47048100
3R2.5	ENL	C4704930	C47049100
4L1.5	END	C4705030	C47050100
4M2	END	C4705330	C47053100
5M1	END	C4705730	C47057100

VITAVM® CC masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g

Denominazione	Cod. 30 g
EL2	C4714230
EL3	C4714330
EL4	C4714430
EL5	C4714530
EL6	C4714630

VITA VM CC WINDOW, 30 g

Denominazione	Cod. 30 g
WIN	C4718130

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g

Denominazione	Cod. 30 g	Cod. 100 g
ENL	C4719130	C47191100
END	C4719230	C47192100

Denominazione	Cod.
VITA VM CC LIQUID, 100 ml	CVCCCL100
VITA VM CC LIQUID, 30 ml	CVCCCL30

Accessori per Rivestimento estetico



Descrizione

Gi accessori per ceramica di rivestimento facilitano la lavorazione di questi materiali.

Accessori per Rivestimento estetico Assortimenti

Accessori per Rivestimento estetico










VITA CERAMIC SAMPLE KIT



BCST

Quantità	Contenuto	Materiale
1		Supporti di cottura G, 1 pezzo
1	5 ml	VITA quarzo in polvere
1		VITA Ceramic Sample Tool

Accessori per Rivestimento estetico Articoli

Accessori per Rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni) 56 x 45 x 6 mm, con 52 fori per perni		B009N
Cotone refrattario, 2 pz.		B017N
Perni, per supporto di cottura G (confezione da 50 pz.)		B023
Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione		B055
VITA Modisol® Pennarello isolante con 2 punte (ceramica contro gesso)		B075N
Pennello di applicazione Nr. 3, in martora rossa		B087
Pennello per colori di caratterizzazione Nr. E 0		B093
Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti		B201N
Perni di platino per supporto di cottura W, 6 pz.		B207N
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230
Piastra di miscelazione VITA INTERNO in resina (Ø 144 mm, con incavi) Deckel ohne Bedruckung		B252
Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)		B255V1
Pennello piatto, per PASTE OPAQUE		B297
Guida colori VITA VM EFFECT CHROMA EC1-EC11		B414
Guida colori VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL EE1-EE11, EP1-EP3		B416
Guida colori VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11		B419
Guida colori VITA VM INDIVIDUAL per la realizzazione di campioni colore individuali		B423
Guida colori VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T1-T8, OT1, PLT1		B431

Denominazione		Cod.
Guida colori VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD		B432
Guida colori VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY DM1-DM8, LM1-LM6		B433
Guida colori VITA VMK MASTER STANDARD N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2		B434
Guida colori VITA VM 9 ADD-ON ADD1 - ADD8		B435
VITA AKZENT Plus Campionario colori		B436
Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in resina (Ø 144 mm con incavi)		B437
Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN G1-G5, GOL, GOD, M1-M9		B439
Guida colori VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON EL1-EL6, E01-E05, MM1-MM3		B440
VITA INTERNO Campionario colori		B444

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical	B455
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore 3D-MASTER	B458

Liquidi per Rivestimento estetico









Descrizione

Liquidi per modellare per una stabilità ottimale durante la stratificazione di ceramiche dentali.





Liquidi per Rivestimento estetico Articoli

Liquidi per Rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
VITA MODELLING LIQUID 30M, 250 ml Per impastare le masse dentina e smalto delle ceramiche VITA con temperature di cottura superiori a 900°C per tempi di modellazione prolungati		B30M250
VITA MODELLING LIQUID 30M, 50 ml Per impastare le masse dentina e smalto delle ceramiche VITA con temperature di cottura superiori a 900°C per tempi di modellazione prolungati		B30M50
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID, 50 ml Liquido Anti-Greening per leghe ad elevato tenore d argento (Ag > 30%)		BHSML50
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 250 ml		BLML250
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 50 ml		BLML50
VITA MODELLING FLUID, 250 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse VITA VM 13, VMK Master e TITANKERAMIK		BMF250
VITA MODELLING FLUID, 50 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse VITA VM 13, VMK Master e TITANKERAMIK		BMF50
VITA MODELLING FLUID RS, 250 ml Liquido speciale per tempi di modellazione lunghi Per impastare tutte le masse dentine, smalto e aggiuntive. La sua consistenza oleosa consente una modellazione prolungata di masse umide assicurando nel contempo una buona stabilità. Questo liquido è l'ideale per restauri estesi e ponti a più elementi.		BMFRS250
VITA MODELLING FLUID RS, 50 ml Liquido speciale per tempi di modellazione lunghi Per impastare tutte le masse dentine, smalto e aggiuntive. La sua consistenza oleosa consente una modellazione prolungata di masse umide assicurando nel contempo una buona stabilità. Questo liquido è l'ideale per restauri estesi e ponti a più elementi.		BMFRS50
VITA VM MODELLING LIQUID, 250 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL e EFFECT VITA VM 7, VM 9, VM 13		BML250N
VITA VM MODELLING LIQUID, 50 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL e EFFECT VITA VM 7, VM 9, VM 13		BML50N
VITA OPAQUE FLUID, 250 ml Per mescolare opachi e bonder Per impastare gli opachi VITA VMK Master e TITANKERAMIK		BOF250

Denominazione		Cod.
VITA OPAQUE FLUID, 50 ml Per mescolare opachi e bonder Per impastare gli opachi VITA VMK Master e TITANKERAMIK		BOF50
VITA VM PASTE FLUID, 15 ml Per modificare la consistenza di OPAQUE PASTE e COLOR OPAQUE PASTE Per impastare OPAQUE PASTE VITA VM 13 e VM 15		BPF15V1
VITA PASTE OPAQUE LIQUID, 15 ml Per modificare la consistenza degli opachi e bonder in pasta VITA		BPOL15
Isolante per monconi VITA, 16 ml Isolante (ceramica verso gesso) per le tecniche ceramiche VITA (eccetto Titankeramik)		BSI16
VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID, 50 ml liquido speciale per miscelare ceramica a basso punto di fusione Liquido per miscelare VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, SUN DENTINE, ENAMEL e masse aggiuntive		BVMLF50
VITA VM OPAQUE FLUID, 250 ml Per impastare opaque powder Per impastare le masse VITA VM 13 e VM 15 OPAQUE		BVMOF250
VITA VM OPAQUE FLUID, 50 ml Per impastare opaque powder Per impastare le masse VITA VM 13 e VM 15 OPAQUE		BVMOF50

Liquidi per Resina per rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
VITA AKZENT LC CLEANER, 25 ml		CALCC25
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Liquido detergente		CVMLC50
VITA VM LC GEL, 20 ml Dispersione strato bloccante		CVMLG20
VITA VM LC MODELLING LIQUID, 10 ml Liquido per modellare		CVMLM10
Modeling liquid Liquido per modellare		CVMLM30
VITA VM LC SEPARATOR, 30 ml Isolante per modelli		CVMLS30

Accessori per Resina per rivestimento estetico





Descrizione

Gi accessori per composito di rivestimento facilitano la lavorazione di questi materiali.

Accessori per Resina per rivestimento estetico Articoli

Accessori per Resina per rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
Misurino, in plastica		C006
VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 8,5 x 11 cm		C014
Misurino, 0,1 ml / Spatola di miscelazione 2 facciate		C017
VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm		C018
Manico portapennelli bianco		FCPHW
Pennellini monouso, 50 pz.		FCPS

VITA SPRAY-ON



Descrizione

VITA SPRAY-ON viene utilizzato per la nebulizzazione di opachi in polvere per ceramiche dentali su strutture in leghe di metallo e in titanio. L'opaco viene applicato in modo uniforme mediante una pistola nebulizzatrice collegata ad aria compressa. Opachi già approntati possono essere conservati negli appositi flaconi fino ad esaurimento. Sono compresi raccordi di diverso diametro per l'allacciamento ad impianti di aria compressa.

Vantaggi

Efficiente

Notevole risparmio di tempo e notevole riduzione dei costi

Resistente

Strato di opaco uniforme e complessivamente molto sottile

Affidabile

Adesione ottimale dell'opaco alle strutture metalliche

VITA SPRAY-ON Assortimenti

VITA SPRAY-ON

VITA SPAY-ON Sortiment / Assortment B101V3

Quantità	Contenuto	Materiale
13		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP0
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP1
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP2
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP3
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP4
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP5
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, W0
1		Etichettas VITA classical A1-D4 (16 pz.)
1		VITA SPRAY-ON Coperchi adattatori completi di guarnizioni, 6 pz.
1		VITA SPRAY-ON Pistola nebulizzatrice con cappuccio di protezione
1		VITA SPRAY-ON Ago di ricambio per pistola nebulizzatrice
1		VITA SPRAY-ON guide in teflon per ago, 2 pz.
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		VITA SPRAY-ON Supporto combinato per pistola nebulizzatrice
1		VITA SPRAY-ON Tubo aria compressa con anima flessibile
1		VITA SPRAY-ON Tubo di collegamento, a spirale
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Flacone dispensatore vuoto
1		VITA SPRAY-ON Pennarello (resistente all'alcool)
1		VITA SPRAY-ON Riduttore di pressione completo di supporto a muro

VITA SPRAY-ON Articoli**VITA SPRAY-ON**

Denominazione	Cod.
VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto	B103
VITA SPRAY-ON Coperchi adattatori completi di guarnizioni, 6 pz.	B104
VITA SPRAY-ON Pistola nebulizzatrice con cappuccio di protezione	B105N
VITA SPRAY-ON Ago di ricambio per pistola nebulizzatrice	B106
VITA SPRAY-ON Riduttore di pressione completo di supporto a muro	B107N
VITA SPRAY-ON Supporto combinato per pistola nebulizzatrice	B108
VITA SPRAY-ON guide in teflon per ago, 2 pz.	B109N
VITA SPRAY-ON Tubo aria compressa con anima flessibile	B110
VITA SPRAY-ON Tubo di collegamento, a spirale	B111
VITA SPRAY-ON Liquid, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid, 250 ml	B113
VITA SPRAY-ON Flacone dispensatore vuoto, 250 ml	B114
VITA SPRAY-ON Cappuccio di protezione per pistola nebulizzatrice	B115N
VITA SPRAY-ON Pennarello (resistente all'alcool)	B116
VITA SPRAY-ON Guarnizioni per cavo adattatore, 10 pz.	B210

VITA Modulbox

Sistema modulare in resina.



Descrizione


VITA MODULBOX è un sistema modulare nel formato base A3 per la conservazione duratura, chiara e merceologicamente corretta dei prodotti VITA in laboratorio e studio.

VITA Modulbox Articoli

VITA Modulbox



Denominazione		Cod.
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 20 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB20
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 55 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB55
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 80 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB80
VITA Modulbox base /coperchio senza guide completo di accessori		ZMBBD
Box die scorta VITABLOCS for CEREC con 1 cassetto altezza 80 mm ed 1 inserto Nr. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 1 con 1 cassetto, altezza 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 2 con 2 cassette, altezza 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 3 con 1 cassetto, altezza 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 4 con 2 cassette, altezza 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox elemento intermedio senza guide, completo di 3 tappi per montaggio		ZMBZ

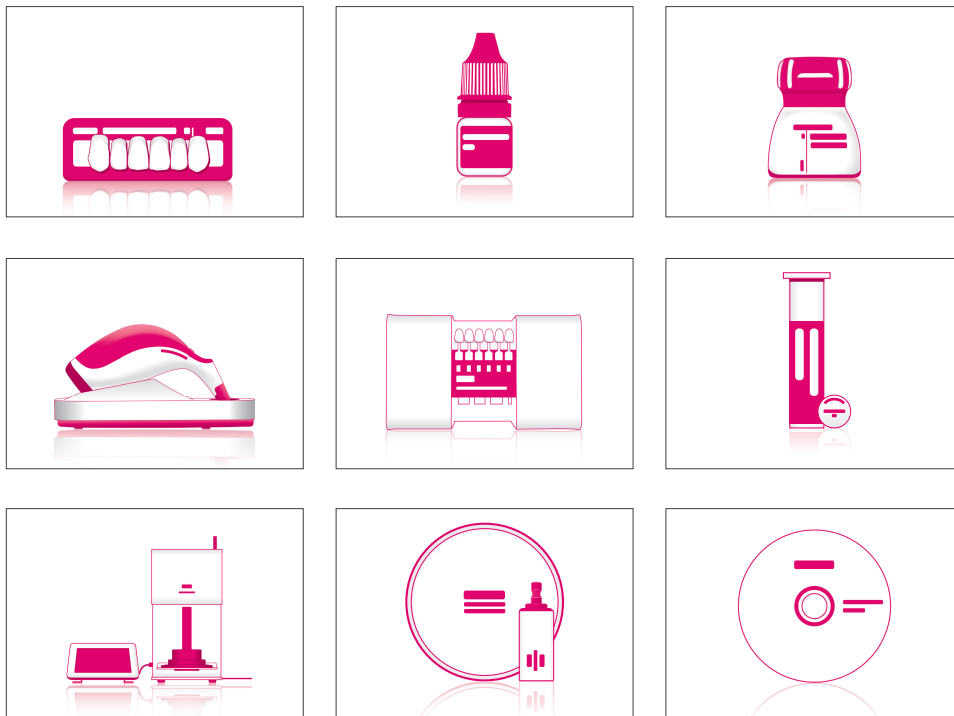

VITA – perfect match.

VITA

VITA LUMEX® UNIQUE

Un Ceramica Liquida. Possibilità uniche.



Descrizione

Rende uniche le applicazioni monolitiche. La nuova ceramica liquida pronta all'uso VITA LUMEX UNIQUE consente di ottenere una caratterizzazione tridimensionale, nonché una micro-stratificazione veloce e ultrasottile su ossido di zirconio, disilicato di litio e ceramica feldspatica.

Vantaggi

Semplicità d'uso

Forma, colore ed effetti sono immediatamente visibili dopo l'applicazione delle paste e restano invariati anche dopo la cottura. Per risultati affidabili.

Estetica unica

Restauri monolitici con un'estetica affascinante, un effetto di profondità tridimensionale e una lucentezza naturale.

Elevatissima flessibilità

Sottili sfumature cromatiche, strutture complesse e dettagli delicati possono essere realizzati con precisione grazie alle consistenze flessibili. Ideale per la caratterizzazione 3D e microveneering ultrasottili.

Indicazioni

Finalizzazione estetica di restauri monolitici (CET da circa 9,0 a 10,5 x 10⁻⁶ K-1*) in:

- Biossido di zirconio
- Disilicato di litio
- Ceramica feldspatica

Caratterizzazione di rivestimenti ceramici parziali e completi con le ceramiche di rivestimento estetico dentale idonee** su strutture nei seguenti materiali (CET da circa 9,0 a 10,5 x 10⁻⁶ K-1):

- Biossido di zirconio (rivestito parzialmente e completamente, ad esempio con VITA LUMEX AC)
- Disilicato di litio (rivestito parzialmente e completamente, ad esempio con VITA LUMEX AC)
- Titanio (grado 1-5) (rivestito completamente, ad esempio con VITA LUMEX AC)
- Ceramica feldspatica (rivestita parzialmente, ad esempio con VITA LUMEX AC)

* VITA LUMEX UNIQUE è approvato anche per la combinazione con DD CubeY HL e DD Cube One ML.

** Reperibili nel documento: 10887 VITA LUMEX UNIQUE - ceramiche di rivestimento estetico approvate.

VITA AKZENT® Plus

Ottimizzato. Semplice. Completo.



Descrizione

Le masse VITA AKZENT PLUS sono supercolori ceramici fluorescenti che possono essere utilizzati indipendentemente dal CET per coloriture interne durante la stratificazione oppure come velatura esterna o glasura. Che si tratti di polvere, pasta o spray, i supercolori e gli smalti sono disponibili in diverse presentazioni.

- Per modifiche cromatiche interne e caratterizzazioni esterne
- Da utilizzare allo stato puro, o miscelabili tra loro e diluibili a piacere.
- Per adattamenti e correzioni cromatiche
- Per temperature di cottura tra 750 °C e 950 °C.

Vantaggi

Semplice

Il sistema di colori per tutte le indicazioni di lasura, accentuazione e glasura in studio e laboratorio.

Sicuro

Risultati di riproduzione affidabili, visibili già prima della cottura.

Brillante

Superfici dei restauri brillanti, omogenei grazie a masse glasura in ceramica con una microstruttura particolarmente fine.

Economico

Elevata flessibilità ed economicità grazie all'adattamento più rapido e semplice di effetto cromatico, cromaticità e intensità cromatica.

Indicazioni

Indipendente dal CET - Compatibili con tutti i materiali ceramici dentali:

- Materiali CAD/ CAM (ad es. VITABLOCKS, VITA YZ SOLUTIONS)
- Ceramica integrale (ad es. VITA LUMEX AC)
- Metallo-ceramica (ad es. VITA VM 13)
- Ceramica pressabile (ad es. VITA AMBRIA)

Possibili applicazioni:

VITA AKZENT® Plus Assortimenti

VITA AKZENT® Plus Powder



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER BAPKCS3D

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical BAPKCS

Quantità	Contenuto	Materiale
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

VITA AKZENT® PLUS MINI KIT BAPKSKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

**VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
BAPKV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Piastra di miscelazione inkl. campionario colori VITA AKZENT Plus
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		Misurino, 0,1 ml / Spatola di miscelazione 2 facciate
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA AKZENT® Plus Paste

**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER
BAPKPCS3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER


**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical
BAPKPCSC**

Quantità	Contenuto	Materiale
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

**VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKPV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pennello piatto, per PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA AKZENT® Plus Articoli
VITA AKZENT® Plus Powder

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
BS01	B505013
BS02	B505023
BS03	B505033
BS04	B505043
BS05	B505053

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
CHROMA A	B5050A3
CHROMA B	B5050B3
CHROMA C	B5050C3
CHROMA D	B5050D3
CHROMA IO	B5050IO3
CHROMA L	B5050L3
CHROMA M2	B5050M23
CHROMA M3	B5050M33
CHROMA R	B5050R3

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
ES01	B505513
ES02	B505523
ES03	B505533
ES04	B505543
ES05	B505553
ES06	B505563
ES07	B505573
ES08	B505583
ES09	B505593
ES10	B505603
ES11	B505613
ES12	B505623
ES13	B505633
ES14	B505643

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20

VITA AKZENT® Plus Paste

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
BS01	B505014
BS02	B505024
BS03	B505034
BS04	B505044
BS05	B505054

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A4
CHROMA B	B5050B4
CHROMA C	B5050C4
CHROMA D	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO4
CHROMA L	B5050L4
CHROMA M2	B5050M24
CHROMA M3	B5050M34
CHROMA R	B5050R4

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
ES01	B505514
ES02	B505524
ES03	B505534
ES04	B505544
ES05	B505554
ES06	B505564
ES07	B505574
ES08	B505584
ES09	B505594
ES10	B505604
ES11	B505614
ES12	B505624
ES13	B505634
ES14	B505644

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA AKZENT® Plus Spray

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

VITA INTERNO®

Per la riproduzione di effetti cromatici in profondità.



Descrizione

Con le masse VITA INTERNO il ceramista ha una nuova e sofisticata metodica per una riproduzione ancora più perfetta degli effetti cromatici di profondità. Le masse VITA INTERNO hanno una granulometria fine, elevata intensità cromatica e sono fortemente fluorescenti. Con le masse VITA INTERNO l'utilizzatore ha la possibilità di riprodurre effetti cromatici naturali ed adattare in maniera ottimale il colore dei lavori in ceramica all'esempio naturale.

Vantaggi

Granulometria fine

Le masse VITA INTERNO si inseriscono in modo ottimale nelle masse ceramiche.

Intensità cromatica

La loro intensità consente effetti cromatici, che agiscono attraverso le masse sovrastanti conferendo al rivestimento estetico croma in profondità.

Elevata fluorescenza

La fluorescenza genera luminosità dei colori e rafforza il trasporto della luce all'interno della ceramica.

Miscelabilità

Le masse INTERNO possono essere attenuate miscelandole con altre masse INTERNO o ulteriormente individualizzate.

Indicazioni

Miscelabilità con tutte le ceramiche VITA: VITA VM 9, VITA VM 11, VITA VM 13, VITA VMK Master, VMK 95 und VITA LUMEX AC.

VITA INTERNO® Articoli

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Denominazione	Cod.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA AKZENT® LC

Riprodurre in sicurezza effetti cromatici individuali.



Descrizione

VITA AKZENT LC sono supercolori fotopolimerizzabili in composito per la riproduzione di effetti cromatici individuali e correzioni cromatiche.

Il sistema convince per la sua poliedricità, per l'applicazione efficiente e precisa dei colori e la buona stabilità cromatica e di lucentezza.

Vantaggi

Affidabilità

Riproduzione affidabile fedele al modello naturale delle sfaccettature cromatiche della dentatura naturale residua grazie a colori effetto versatili e brillanti.

Semplice

Modifiche cromatiche estremamente semplici grazie alle masse Chroma per la gestione programmabile e sistematica della cromaticità.

Efficiente

Lavorazione efficiente grazie a effetti cromatici puntuali e all'efficace applicazione di colori su intere superfici, caratterizzata da viscosità ottimali.

Indicazioni

Sistema universale di supercolori/glasura fotopolimerizzabile per la caratterizzazione extraorale di:

- Restauri in ceramica ibrida (VITA ENAMIC)
- Restauri in materiale di rivestimento fotopolimerizzabile (es. VITA VM LC)
- Restauri in compositi CAD/CAM (es. VITA CAD-Temp, VITA VIONIC DENT DISC multiColor)
- Denti preconfezionati
- Basi protesiche (es. VITA VIONIC BASE)
- Restauri e basi protesiche in polimeri acrilici per la stampa 3D (es. VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT, VITA VIONIC DENT RESIN)

Colori

Disponibile in 14 colori Effetto e 4 colori Chroma

VITA AKZENT® LC Assortimenti
VITA AKZENT® LC
VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKIT3D

Quantità	Contenuto	Materiale
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA classical A1-D4®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKITC

Quantità	Contenuto	Materiale
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC STANDARD KIT
Supercolori per la riproduzione di effetti
CALCSKIT

Quantità	Contenuto	Materiale
6	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC Articoli
VITA AKZENT® LC

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2.5 ml	B5150A25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2.5 ml	B5150B25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2.5 ml	B5150C25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2.5 ml	B5150D25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2.5 ml	B5150L25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2.5 ml	B5150M225
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2.5 ml	B5150M325
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2.5 ml	B5150R25
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, white, 2.5 ml	B5155125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, cream, 2.5 ml	B5155225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, lemon, 2.5 ml	B5155325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, sun, 2.5 ml	B5155425
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, orange, 2.5 ml	B5155525
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, russet, 2.5 ml	B5155625
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, khaki, 2.5 ml	B5155725
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, pink, 2.5 ml	B5155825
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2.5 ml	B5155925
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, purple, 2.5 ml	B5156025
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, blue, 2.5 ml	B5156125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2.5 ml	B5156225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey, 2.5 ml	B5156325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, black, 2.5 ml	B5156425
VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml	B515905



VITA – perfect match.

VITA

VITA VACUMAT® 6100 M

Cottura affidabili di tutti i materiali disponibili sul mercato.



Descrizione

VITA VACUMAT 6100 M è un forno di cottura completamente automatico con controllo a microprocessore. E' idonea per tutte le cotture ceramiche. Il forno conquista per qualità ed estetica di altissimo livello. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e confort al massimo grado. La costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. Due piani di raffreddamento integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori.

Vantaggi

Tecnologia di cottura moderna

Tecnica di cottura innovativa e materiali di alta tecnologia nella camera di cottura per una trasmissione ancora più omogenea del calore.

Durevole e affidabile

Muffola di cottura di lunga durata - made in Germany - e unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti.

Comfort e sicurezza

Versatili programmi di monitoraggio e di assistenza per il massimo del comfort operativo, sicurezza e risparmio di tempo.

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre l'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

VITA VACUMAT® 6100 M**Funzioni tecniche**

- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contatore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili
- raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by

Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	325 mm
Altezza	445 mm
Peso	15,4 kg
Esecuzione	laccato antracite
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200 °C
Allacciamento di rete	100/110V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- VITA vPad excellence / VITA vPad comfort
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un'unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D65000).
Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto o pompa per vuoto II
- VITA MultiPump per l'alimentazione fino a quattro forni con un'unica pompa per vuoto

VITA V60 i-Line® PLUS

Senza compromessi. Potente.



Descrizione

Il forno VITA V60 i-Line PLUS si concentra su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e semplicità d'impiego. Con il suo design intramontabile, il nuovo forno coniuga qualità comprovata e tecnologia moderna a un prezzo interessante.

Vantaggi

Ad alta produttività e velocità

Il VITA V60 i-Line PLUS aiuta a ridurre i costi. Il suo design robusto e la chiara attenzione alla funzionalità aumentano la produttività e fanno risparmiare tempo prezioso.

Utilizzo intuitivo

Il reattivo schermo touch da 7 pollici con software operativo intuitivo rende l'utilizzo semplice e rapido.

Design durevole

Grazie al robusto telaio in metallo e alla resistente muffola in quarzo VITA, sono garantiti risultati di cottura costanti per molti anni. Il design senza tempo del forno brilla in ogni laboratorio.

VITA V60 i-Line® PLUS**Funzioni tecniche**


- Massima precisione della temperatura (più / meno 2°C) per risultati di cottura ottimali
- Confort d'uso per risparmiare tempo, ingombro contenuto
- 2 piani di appoggio laterali
- Camera di cottura equipaggiata con materiale isolante di alta qualità
- Muffola in quarzo
- Termosonda (platino / rodio)
- Taratura automatica della temperatura


Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	420 mm
Altezza	570 mm
Peso	18 kg
Custodia	lamiera d'acciaio, laccata
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura cottura massima	Max. 1200°C
Allacciamento elettrico	100/110V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Potenza assorbita	Max. 1,5 kW
Classificazione	Classe di sicurezza 1
Display	7 Pollici

Accessori (a pagamento):

- Pompa per vuoto: 230/240 Volt, 50/60Hz, 115 Volt, 50/60 Hz o 100 Volt, 50/60 Hz.
- VITA V60 i-Line TOOLBOX (DTOOL)
- Wifi Dongle V60 i-Line PLUS

VITA V60 i-Line® PLUS Articoli**VITA V60 i-Line®**

Denominazione		Cod.
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230

Denominazione		Cod.
VITA V60 i-Line® PLUS (230 V) Accessori: 1 zoccolo di cottura 1 cavo di rete 1 cavo di collegamento per pompa per vuoto 1 tubo per vuoto 2 piani di appoggio laterali 1 Istruzioni d uso		DV60IP220

VITA V60 i-Line® accessori

Denominazione	Cod.
VITA V60 i-Line® TOOLBOX * Scatola di metallo con: 1 foglio di lavagna bianca 1 matita stagnola 1 Pinza (25 cm) 1 confezione di supporti di cottura G 1 confezione di supporti di cottura A+B+C	DT00L

VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Il design incontra l'efficienza. Il forno di cottura compatto per ponti fino a 14 elementi.



Descrizione

Il forno VITA SMART.FIRE ADVANCED combina un design moderno con un'affidabile qualità di cottura. Nonostante la sua struttura compatta, offre spazio sufficiente addirittura per ponti fino a 14 elementi, ed è quindi ideale non solo per il vostro studio, ma anche per qualsiasi laboratorio. Scopritene il funzionamento intuitivo e facile da usare e tenete sempre a portata di mano tutto ciò che vi serve grazie al pratico cassetto.

Vantaggi

Bello

Design moderno e uso intuitivo.

Compatto

Struttura a ingombro ridotto con un'ampia camera di cottura.

Efficiente

Sicurezza nel processo di cottura grazie al raffreddamento lineare controllato.

Indicazioni

Il forno VITA SMART.FIRE ADVANCED è adatto a temperature di cottura fino a 1.200 °C per

- Cotture di ceramica, di supercolori e di correzione
- Cottura di glasura
- Cotture di cristallizzazione, con e senza vuoto

I programmi di cottura preimpostati, adattati in modo ottimale a tutti i materiali ceramici più comuni, garantiscono non solo una lavorazione efficiente, ma anche risultati esteticamente gradevoli.

VITA SMART.FIRE® ADVANCED**Funzioni tecniche**

- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contatore di esercizio della muffola
- Raffreddamento lineare controllato con gradienti di raffreddamento liberamente selezionabili
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili

Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	310 mm
Altezza	330 mm
Peso	12,4 kg
Esecuzione	Polyurethan
Diametro camera di cottura	80 mm
Altezza camera di cottura	43 mm
Temperatura camera di cottura	1200°C
Allacciamento di rete	100/110V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Potenza assorbita	950 W (230 V), max. 1100 W (100 V, 110 V)
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori VITA SMART.FIRE ADVANCED


- 4 x Perni in ceramica
- 2 x Perni a quattro estremità
- 1 x Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm)
- 1 x supporto di cottura
- 1 x pinza
- 2 x tavoli di raffreddamento

Accessori (a pagamento):

- VITA vPad excellence
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un'unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D65000).
Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto o pompa per vuoto II

VITA VACUMAT® 6000 MP

Forno combinato di cottura e pressatura di livello premium.

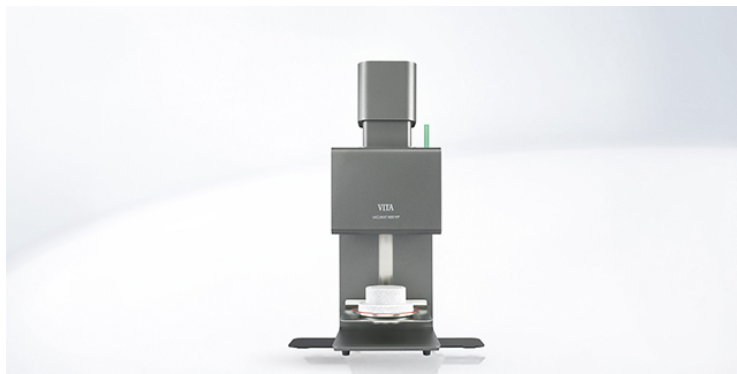

Descrizione

VITA VACUMAT 6000 MP è progettato per fornire risultati di pressatura sicuri e affidabili. Questa unità di cottura e pressatura combinata riunisce tutti i pregi di un moderno forno di cottura e di pressatura e le sue dimensioni compatte dettano un nuovo standard. VITA VACUMAT 6000 MP comprende tutti i programmi e funzioni del VITA VACUMAT 6000 M.

E' inoltre indicato per tutti i materiali pressabili presenti sul mercato e per i diversi sistemi di cilindri. Il riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti impedisce pressature errate e danni alla resistenza dovuti all'insufficiente inserimento di pellet (VITA PressControl).

Vantaggi

- La muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed un'unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti
- protezione automatica contro la formazione di acqua di condensa nella camera di cottura (**VITA AntiCon**)
- taratura automatica della temperatura con una precisione di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ad ogni avvio di programma (**VITA AutoAdjust**)
- funzione automatica di decontaminazione (**VITA SpecialClean**)
- tecnica di pressatura sicura **VITA CPress** sviluppata da VITA
- controllo automatico della corsa di pressatura e riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti con **VITA PressControl**
- raffreddamento rapido controllato e programma notturno a basso consumo energetico
- Archiviazione e gestione dei dati di processo con il **FDS (Firing Data System) di VITA**.
- Con un'unica unità di comando **VITA vPad** gestione di fino a **quattro forni**
- Con **VITA MultiPump** alimentazione del vuoto fino a **quattro forni** con un'unica pompa - assolutamente unico - un sistema brevettato da VITA

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre l'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

VITA VACUMAT® 6000 MP**Funzioni tecniche**


- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contatore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili
- raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by


Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	370 mm
Altezza	630 mm
Peso	19 kg
Esecuzione	laccato antracite
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200 °C
Allacciamento di rete	100/110V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- VITA vPad excellence / VITA vPad comfort
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un'unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D65000).
Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto o pompa per vuoto II
- VITA MultiPump alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa

VITA VACUMAT® 6000 MP Articoli**VITA VACUMAT® 6000 MP**

Denominazione		Cod.
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d'argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230

Denominazione		Cod.
VITA VACUMAT 6000 MP laccata (230 V) * Accessori 1 zoccoli di cottura 1 zoccolo di cottura-pressatura 1 inserto di pressatura universale 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 regolatore di pressione da installare sulla pompa per vuoto 1 tubo per dispositivo di pressatura, tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MP220

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS



Descrizione

Sviluppato e prodotto integralmente in Germania, il forno di sinterizzazione VITA ZYRCOMAT 6100 MS garantisce la consueta qualità e affidabilità VITA. Offre tre diverse modalità di sinterizzazione liberamente selezionabili: HighSpeed, convenzionale e definita dall'utilizzatore, assicurando quindi flessibilità. Studiato per i materiali VITA e per tutti i materiali strutturali a base di ZrO_2 e Al_2O_3 presenti sul mercato, questo forno ad alta temperatura detta parametri per quanto riguarda funzionamento orientato all'utilizzatore ed ergonomia. Un indicatore di stato a LED e segnali acustici liberamente regolabili informano a distanza e con sicurezza sullo stato di cottura. Anche il sistema di aerazione è innovativo: grazie alla costruzione intelligente il calore è convogliato in modo da evitare la parte elettronica. Nel lungo periodo termoelementi e parte elettronica sono così soggetti a minori sollecitazioni.

Vantaggi

- **distribuzione termica omogenea** nella camera di sinterizzazione
- **taratura completamente automatica** e precisione garantita della temperatura (**VITA Autoadjust**)
- lunga durata ed esercizio con consumo di corrente durevolmente contenuto
- sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali più diffusi, come biossido di zirconio bianco e ad elevata traslucenza, cromatizzato industrialmente o manualmente in tutte le modalità per risultati di cottura costanti e convincenti
- sinterizzazione HighSpeed meno di 60 minuti (**VITA HighSpeed**)
- sinterizzazione HighSpeed di strutture per ponti fino a 14 elementi
- sinterizzazione di tutti i materiali strutturali dentali a base di ZrO_2 e Al_2O_3
- sinterizzazione rispettosa dei materiali grazie al raffreddamento controllato a 400 °C in tutte le modalità
- preessiccazione a bassa temperatura integrata (**VITA PreDry**) con passaggio fluido al processo di sinterizzazione
- possibilità di ampliamento modulare del sistema per maggiore **flessibilità e produttività**
- sinterizzazione fino a 80 unità su due livelli
- Archiviazione e gestione dei dati di processo con il **FDS (Firing Data System) di VITA**.

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre l'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS**Funzioni tecniche**


- Programmi Service e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura all'avvio di ogni programma , controllo della temperatura
- Protezione contro le interruzioni di corrente, Controllo lift
- 4 termoelementi in silicio di molibdeno ad alte prestazioni per una distribuzione omogenea della temperatura - sostituibili singolarmente
- Taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma
- Precisione della temperatura +/- 2 °C
- Elettronica di alta qualità che garantisce tempi e programmi di sicuri
- Camera di cottura dotata di materiali isolanti di alta qualità

Dati tecnici	
Larghezza	315 mm
Profondità	500 mm
Altezza	470 mm
Peso	34,8 kg
Esecuzione	laccato antracite
Diametro camera di cottura	Diametro utile 90 mm
Altezza camera di cottura	Altezza utile 70 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1600 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- VITA vPad excellence / VITA vPad comfort
- Per la gestione multiforno con un'unità di comando VITA vPad (a partire dal 2. forno) occorre 1 Switchbox (Cod. D65000). Lo Switchbox è indicato per il collegamento di max. 4 forni.
- Set controllo temperatura per VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS Articoli**VITA ZYRCOMAT® 6100 MS**

Denominazione		Cod.
VITA ZYRCOMAT 6100 MS laccato (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Pinza (25 cm) 1 Base di sinterizzazione MS 1 Confezione da 150 g sfere di ZrO2 1 LED indicatore di stato da inserire 1 Istruzioni d'uso		DZY6100MS220

VITA vPad LITE

Controllo intuitivo, avvio semplice.



Descrizione

Il dispositivo di comando compatto VITA vPad LITE per i forni di cottura e sinterizzazione VITA convince grazie a una navigazione intuitiva, una chiara struttura dei menu e una solida base tecnica. Ideale per le applicazioni standard nel lavoro quotidiano in laboratorio.

Vantaggi

Utilizzo intuitivo

Menu autoesplicativo per iniziare subito l'utilizzo senza dedicare tempo a conoscere il sistema.

Controllo efficiente

Procedure automatizzate e un controllo centrale consentono di risparmiare tempo e spazio, in modo da potersi dedicare ad attività a maggior valore aggiunto.

Comodità operativa

Superficie reattiva per un utilizzo fluido, una chiara navigazione e un controllo preciso nel lavoro quotidiano.

VITA vPad LITE**Funzioni tecniche**

- Desktop configurabili a livello individuale per un ambiente di lavoro personalizzato ed efficiente.
- Trasmissione online dei dati di cottura per un rapido supporto e processi ottimizzati.
- Connessione WLAN per l'integrazione wireless nell'infrastruttura digitale.
- Numerose funzionalità di assistenza e monitoraggio: regolazione automatica della temperatura, sonda di temperatura, monitoraggio del vuoto, raffreddamento rapido, programma notturno, protezione contro le cadute di tensione, indicatore del numero di ore di funzionamento per il dispositivo e la muffola, detersione automatica.
- Aggiornamenti software e trasferimento dei dati dei profili utente, di cottura e del dispositivo su altri componenti di comando o PC.

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	150 mm
Altezza	200 mm
Peso	1,6 kg
Esecuzione	plastica
Classificazione	classe di protezione1

Temperatura di esercizio: 10° C - 35° C

Umidità dell'aria per l'esercizio: max. 80% umidità relativa

Settore di impiego: omologato solo per uso all'interno di locali

VITA vPad PRO

Possibilità ampliate, maggiore controllo.



Descrizione

Oltre a una navigazione intuitiva, il dispositivo di comando VITA vPad PRO per VITA per i forni di cottura e sinterizzazione VITA offre funzionalità ampliate come un avvio del programma pianificabile e possibilità di connessione flessibili. Ideale per processi complessi in cui sono richiesti efficienza e controllo totale, senza compromessi in termini di facilità d'uso.

Vantaggi

Controllo flessibile

Utilizzare fino a quattro forni con un solo dispositivo, per la massima efficienza in laboratorio.

Utilizzo intuitivo

Menu autoesplicativo per iniziare subito l'utilizzo senza dedicare tempo a conoscere il sistema.

Comodità extra

Massima efficienza nel lavoro quotidiano in laboratorio grazie a funzionalità individuali.

VITA vPad PRO

Funzioni tecniche

- Gestione di un massimo di quattro unità di cottura con un unico dispositivo di comando.
- Desktop configurabili a livello individuale per un ambiente di lavoro personalizzato ed efficiente.
- Funzione timer per poter avviare il programma in modo ritardato o pianificato con precisione, in base al workflow individuale.
- Connessione wireless al forno per maggiore flessibilità e comfort.
- Web browser integrato per l'accesso diretto a contenuti online e risorse digitali.
- Trasmissione online dei dati di cottura per un rapido supporto e processi ottimizzati.
- Connessione WLAN per l'integrazione wireless nell'infrastruttura digitale.
- Numerosi programmi di assistenza e monitoraggio: regolazione automatica della temperatura prima dell'avvio di ogni programma, sonda di temperatura e monitoraggio del vuoto, raffreddamento rapido, programma notturno, protezione contro le cadute di tensione, indicatore del numero di ore di funzionamento per il dispositivo e la muffola, detersione automatica
- Aggiornamento software e trasferimento dei dati dei profili utente, di cottura e del dispositivo su altri componenti di comando e PC

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	150 mm
Altezza	200 mm
Peso	1,6 kg
Esecuzione	plastica
Classificazione	classe di protezione1

Temperatura di esercizio: 10° C - 35° C


Umidità dell'aria per l'esercizio: max. 80% umidità relativa

Settore di impiego: omologato solo per uso all'interno di locali

Accessori (a pagamento):

Per l'utilizzo di 2 o più forni VITA con un unico VITA vPad PRO è necessaria una Switchbox (codice D65000). In alternativa, quando si controllano più apparecchi è possibile connettere in wireless i dispositivi VITA VACUMAT 6100 M e VITA SMART.FIRE ADVANCED; in questo caso non è necessario utilizzare una Switchbox.

Pompa per vuoto

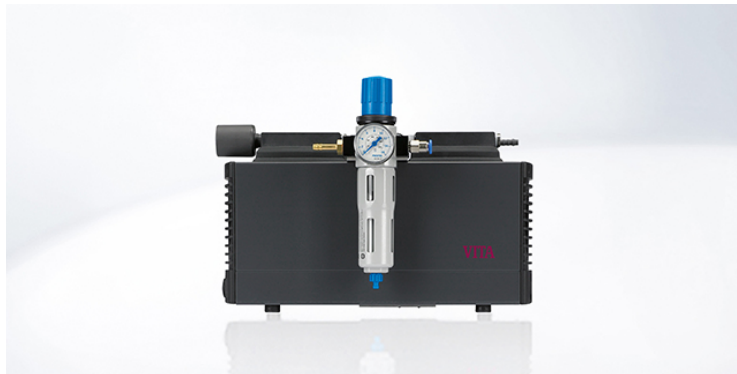


Descrizione

Pompa per vuoto VITA con custodia insonorizzante per un vuoto stabile e aria compressa costante.

Pompa per vuoto

Dati tecnici	220 V / 50 Hz
Potenza	130 W
Peso	6,9 kg
Vuoto finale	20 mbar
portata	22 l/min
livello di rumore	50 dB
Larghezza	110 mm
Profondità	390 mm
Altezza	210 mm
Garanzia	2 Anni

Pompa per vuoto Articoli**Pompa per vuoto**

Denominazione		Cod.
Pompa per vuoto (220 V)		DVPU220

Pompa per vuoto II

Denominazione	Cod.
Pompa per vuoto II (200-240V)	DVPURM220

VITA MultiPump



Descrizione

Per l'alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa.


Da ordinare come accessorio per la pompa per vuoto a partire dal secondo forno. Da utilizzare solo in combinazione con VITA vPad excellence.

Contenuto set base:

2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per due unità di cottura.

Dimesnioni: 244,5 x 172,0 x 73,0 mm

VITA MultiPump Articoli**VITA MultiPump**

Denominazione		Cod.
VITA MultiPump		D61000

VITA MultiPump accessori

Denominazione	Cod.
VITA MultiPump ausiliare accessori 2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per 3. e 4. unità di cottura	D61004

VITA SWITCHBOX




Descrizione

Per la gestione di 2 o più forni.

Fino ad un massimo di 4 forni.

VITA SWITCHBOX Articoli**VITA SWITCHBOX**

Denominazione		Cod.
VITA SWITCHBOX II * Per la gestione di 2 o più forni. Fino ad un massimo di 4 forni		D65000



VITA – perfect match.

VITA

VITA CERAMICS Polishing Set

Per la prelucidatura e la lucidatura a specchio di tutti i materiali ceramici.



Descrizione

I VITA CERAMICS Polishing Set sono stati appositamente sviluppati per la lucidatura in due fasi di tutti i materiali ceramici dentali in studio e laboratorio. I set contengono rispettivamente 6 gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.

Vantaggi

Per tutte le ceramiche

Ceramica feldspatica, vetroceramica, ossidoceramica: con un unico set si possono lucidare tutti i tipi di ceramica.

Lucidatura semplice, prestazione eccellente

Questi strumenti convincono per le buone prestazioni di rimozione e lucidatura, anche in presenza di fessure pronunciate. Per maggiore sicurezza gli strumenti Clinical sono sterilizzabili.

Utilizzo prolungato

VITA CERAMICS Polishing Set sono particolarmente performanti e duraturi grazie all'elevato contenuto in diamante e all'ampio volume utile.

Contenuto

VITA CERAMICS Polishing Set clinical:

Comprende complessivamente sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio. Tutti gli strumenti sono sterilizzabili.

VITA CERAMICS Polishing Set technical:

Comprende complessivamente sei strumenti per manipolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.


VITA CERAMICS Polishing Set Articoli

VITA CERAMICS Polishing Set

Denominazione	Cod.
VITA CERAMICS Polishing Set clinical	ECEPSETC
VITA CERAMICS Polishing Set technical	ECEPSETT
Gommino a lenticolare technical, VI-H16D Lucidatura a specchio (crema), 3 pz.	ERHH16D3
Gommino a lenticolare technical, VI-H16Dmf Prelucidatura (grigio), 3 pz.	ERHH16DMF3
Gommino a Brush technical, VI-DT-H17D Lucidatura a specchio (crema), 3 pz.	ERHH17D3
Gommino a Brush technical, VI-DT-H17Dmf Prelucidatura (grigio), 3 pz.	ERHH17DMF3
Gommino a fiamma technical, VI-H1D Lucidatura a specchio (crema), 6 pz.	ERHH1D6
Gommino a fiamma technical, VI-H1Dmf Prelucidatura (grigio), 6 pz.	ERHH1DMF6
Gommino a Brush clinical, VI-DT-W14D Lucidatura a specchio (crema), 3 pz.	ERWW14D3
Gommino a Brush clinical, VI-DT-W14Dmf Prelucidatura (grigio), 3 pz.	ERWW14DMF3
Gommino lenticolare clinical, VI-W18D Lucidatura a specchio (crema), 6 pz.	ERWW18D6
Gommino lenticolare clinical, VI-W18Dmf Prelucidatura (grigio), 6 pz.	ERWW18DMF6
Gommino a calice clinical, VI-W7D Lucidatura a specchio (crema), 6 pz.	ERWW7D6
Gommino a calice clinical, VI-W7Dmf Prelucidatura (grigio), 6 pz.	ERWW7DMF6

VITA ENAMIC® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio della ceramica ibrida VITA ENAMIC.

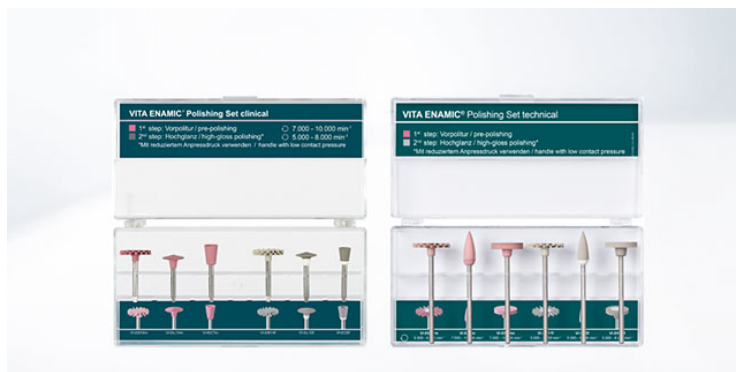

Descrizione

I VITA ENAMIC Polishing Sets sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in ceramica ibrida in studio e laboratorio. I sets contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio. Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza eccellente.

Vantaggi

Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano elevata capacità di asportazione. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA ENAMIC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

Contenuto

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:



Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Comprende sei strumenti per manipolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA ENAMIC® Polishing Set Articoli

VITA ENAMIC® Polishing Set

Denominazione		Cod.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Gommino a Brush technical, VI-EB17f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.		ERHEB17F3
Gommino a Brush technical, VI-EB17m Prelucidatura (rosa), 3 pz.		ERHEB17M3
Gommino a ruota technical, VI-ER15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHER15F6
Gommino a ruota technical, VI-ER15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHER15M6
Gommino a fiamma technical, pointe, VI-ES5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHES5F6
Gommino a fiamma technical, VI-ES5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHES5M6
Gommino a Brush clinical, VI-EB14f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.		ERWEB14F3
Gommino a Brush clinical, VI-EB14m Prelucidatura (rosa), 3 pz.		ERWEB14M3
Gommino a calice clinical, VI-EC6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWEC6F6
Gommino a calice clinical, VI-EC7m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWEC7M6
Gommino lenticolare clinical, VI-EL10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWEL10F6
Gommino lenticolare clinical, VI-EL10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWEL10M6

Paste lucidanti VITA

Paste diamantate per la lucidatura a specchio extraorale di materiali ceramici e a base polimerica.



Descrizione

VITA Polish Hybrid è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC, composito e polimero.

VITA Polish Cera è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio.

Vantaggi

- Con entrambe le paste per lucidare si conseguono risultati rapidi e sicuri di lucidatura a specchio. La tessitura superficiale non viene modificata.
- Le particelle diamantate sono specifiche per le rispettive classi di materiali. Il tal modo si tempera la superficie e riducono i depositi di placca.

Contenuto

VITA Polish Hybrid:



La pasta per lucidare VITA Polish Hybrid è ottimale per la lucidatura della ceramica ibrida VITA ENAMIC in combinazione con i gommini dei VITA ENAMIC Polishing Set clinical e technical.

VITA Polish Cera:

La pasta per lucidare VITA Polish Cera è ottimale per la lucidatura di VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA e VITA YZ in combinazione con i gommini dei VITA CERAMICS Polishing Set clinical e technical.

Paste lucidanti VITA Articoli

Paste lucidanti VITA

Denominazione		Cod.
VITA Polish Cera, 18 g		B459
VITA Polish Hybrid, 12 g		C020



VITA – perfect match.

VITA

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

Il sistema di fissaggio completamente adesivo con componenti perfettamente abbinati per la cementazione sicura e specifica di restauri realizzati con vari materiali.



Descrizione

Il sistema di fissaggio adesivo per il fissaggio di tutti i restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

Vantaggi

Affidabile

Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.

Sicurezza di processo

Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.

Razionale

Set a doppio tray, in formato standard per avere tutti i componenti a portata di mano.

Contenuto

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH

Un gel di mordenzatura al 37% di acido fosforico per mordenzare lo smalto come preparazione per il fissaggio adesivo. Adatto per le tecniche a mordenzatura totale e selettiva.

VITA ADIVA® T-BOND I+II

Sistema Bonding a indurimento duale. VITA ADIVA T-BOND consente un buon legame tra composito di fissaggio e smalto nonché dentina mordenzata.

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5% per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida per realizzare un ancoraggio micromeccanico tra restauro e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® C-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sinterizzati in biossido di zirconio e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in titanio, leghe non nobili, leghe nobili e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® F-CEM

Composito di fissaggio adesivo, a indurimento duale, per il fissaggio definitivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE Assortimenti**VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET****VITA ADIVA FULL-ADHESIVE SET
FAFASV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA F-CEM A2 Universal
1	trasparen- te	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso
1	3 ml	VITA ADIVA TOOTH-ETCH
2	20 pz.	Cannule di applicazione monouso blu per TOOTH-ETCH, rosse per CERA ETCH
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND I
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND II
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSION

VITA ADIVA F-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
A2 Universal	FAFCEMA25
A3	FAFCEMA35
Translucent	FAFCEMT5
White opaque	FAFCEMW05

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Ceramic primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer per metalli	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 pz.

Denominazione	Cod. 10 pz.
3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso, trasparente	FAOP3V1

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adesivo a indurimento duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) acido fosforico in gel al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer per biossido di zirconio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente abbinati per la cementazione sicura e specifica di restauri realizzati con vari materiali.



Descrizione

Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento del materiale di restauro.

Per il fissaggio di tutti i restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

Vantaggi

Affidabile

Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.

Sicurezza di processo

Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.

Razionale

Set a doppio tray, in formato standard per avere tutti i componenti a portata di mano.

Contenuto

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5 % per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida per realizzare un ancoraggio micromeccanico tra restauro e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® C-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sinterizzati in biossido di zirconio e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in titanio, leghe non nobili, leghe nobili e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® S-CEM

Composito di fissaggio autoadesivo, a indurimento duale, per il fissaggio definitivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Assortimenti**VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET****VITA ADIVA SELF-ADHESIVE SET
FASASV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA S-CEM A2 Universal
1	trasparen- te	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	20 pz.	Cannule di applicazione monouso rosse per CERA ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 4:1

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSION

VITA ADIVA S-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
A2 Universal	FASCEMA25
Translucent	FASCEMT5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Ceramic primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer per metalli	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 pz.

Denominazione	Cod. 10 pz.
3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso, trasparente	FAOP3V1

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adesivo a indurimento duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) acido fosforico in gel al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer per biossido di zirconio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® TE-CEM



Descrizione

VITA ADIVA TE-CEM è un cemento-resina a indurimento duale per il fissaggio provvisorio.

E' disponibile nel colore Translucent.

VITA ADIVA® TE-CEM Articoli**VITA ADIVA® TE-CEM**

VITA ADIVA TE-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Translucent	FATECEM5

VITA ADIVA® IA-CEM

Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari.



Descrizione

VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments individuali in titanio e biossido di zirconio.

Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.

Vantaggi

Versatile

Adesivo per il fissaggio specifico per il materiale.

Semplice

Set disposto in modo sistematico per un'applicazione in studio sicura, con codifica cromatica.

Efficiente

Maneggevole set composto da due parti per l'utilizzo quotidiano razionale in formato standard tray.


VITA ADIVA® IA-CEM Assortimenti**VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET
FAIACEMSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Articoli**VITA ADIVA® IA-CEM**

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

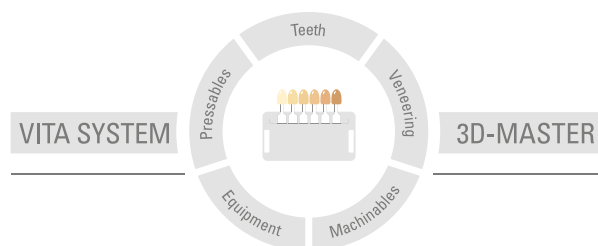

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 01/2026

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik