
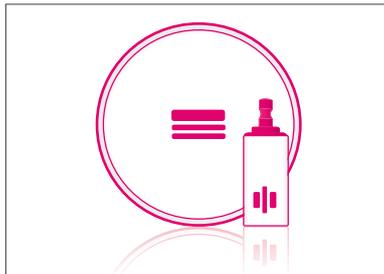
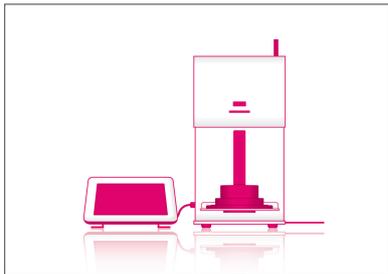


VITA Kompendium Februar 2021

Charakterisierung

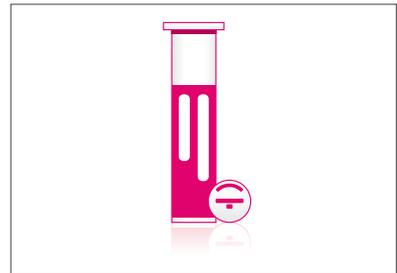

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus

Optimiert. Einfach. Alles.



Produktbeschreibung

Neue Einsatzgebiete erfordern neue, vielseitige Materialien. Mit VITA AKZENT Plus Malfarben können Anwender unabhängig vom WAK der Restauration einfach und effizient alle Arten von dentalkeramischen Werkstoffen farblich optimieren.

Egal ob Sie Ihre Restauration intern kolorieren oder oberflächlich charakterisieren und fein lasieren: Mit den neuen fluoreszierenden VITA AKZENT Plus Malfarben gelingt dies leicht und ohne großen Aufwand.

Die VITA AKZENT Plus Malfarben sind je nach Verarbeitungspräferenz, Gewohnheit und Einsatzgebiet als Pulver und gebrauchsfertige Pasten erhältlich.

Die lasierenden BODY STAINS und GLAZE gibt es zusätzlich als Spray, welches durch gleichmäßiges Auftragen eine großflächige, einheitliche Oberflächenbehandlung ohne Streuverlust sicherstellt. Der neue, spezielle Sprühkopf steht für gezieltes Applizieren.

Vorteile

Für alle Arten von dentalkeramischen Werkstoffen, von Schicht- und Presskeramiken, Feldspatkeramikblocks wie z.B. VITABLOCS bis hin zu monolithischen Restaurationen. Es eignet sich für alle dentalkeramischen Werkstoffe und für jeden WAK.

Verfügbar in drei Anwendungsformen:

POWDER:

für uneingeschränkte Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

PASTE:

gebrauchsfertige Pasten mit gleichmäßiger Konsistenz und homogener Pigmentierung

SPRAY:

gebrauchsfertige, leicht zu applizierende Glasur- und Lasurfarben

VITA AKZENT® Plus Sortimente

VITA AKZENT® Plus



**VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
BAPK**

Anzahl	Inhalt	Material
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Anmischplatte inkl. Farbmusterscheibe
1		VITA Glasspatel für Malfarben
1		Messlöffel, 0,1 ml / Anrührspatel 2-seitig
1		Pinself Nr. 3/0 a & e



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER
BAPKCS3D**

Anzahl	Inhalt	Material
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical
BAPKCS**

Anzahl	Inhalt	Material
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster classical



**VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKP**

Anzahl	Inhalt	Material
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Flachpinsel, für PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Farbmusterscheibe
1		VITA AKZENT Plus Anmischplatte-Kristallglas (70 x 95 mm)
1		VITA Glasspatel für Malfarben
1		Pinsel Nr. 3/0 a & e



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER
BAPKPCS3D**

Anzahl	Inhalt	Material
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical
BAPKPCSC**

Anzahl	Inhalt	Material
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster classical



**VITA AKZENT® Plus MINI KIT
BAPKSK**

Anzahl	Inhalt	Material
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Farbmusterscheibe
1		VITA AKZENT Plus Anmischplatte-Kristallglas (70 x 95 mm)
1		Pinsel Nr. 3/0 a & e



**VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT
BAPKSV1**

Anzahl	Inhalt	Material
5	75 ml	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		VITA AKZENT Plus Farbmusterscheibe



**VITA AKZENT® Plus STARTER KIT SPRAY / PASTE
BAPKSM**

Anzahl	Inhalt	Material
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Pinsel Nr. 1 Korrekturpinsel, Rotmarder
1		Anrührspatel, Kunststoff für PASTE OPAQUE
2	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B
2	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES11
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE

VITA AKZENT® Plus Artikel

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste) / 75 ml (Spray)

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g (Powder)	Art.-Nr. 4 g (Paste)	Art.-Nr. 75 ml (Spray)
BS01	B505013	B505014	B5050175
BS02	B505023	B505024	B5050275
BS03	B505033	B505034	B5050375
BS04	B505043	B505044	B5050475
BS05	B505053	B505054	B5050575

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g (Powder)	Art.-Nr. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A3	B5050A4
CHROMA B	B5050B3	B5050B4
CHROMA C	B5050C3	B5050C4
CHROMA D	B5050D3	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO3	B5050IO4
CHROMA L	B5050L3	B5050L4
CHROMA M2	B5050M23	B5050M24
CHROMA M3	B5050M33	B5050M34
CHROMA R	B5050R3	B5050R4

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g (Powder)	Art.-Nr. 4 g (Paste)
ES01	B505513	B505514
ES02	B505523	B505524
ES03	B505533	B505534
ES04	B505543	B505544
ES05	B505553	B505554
ES06	B505563	B505564
ES07	B505573	B505574
ES08	B505583	B505584
ES09	B505593	B505594
ES10	B505603	B505604
ES11	B505613	B505614
ES12	B505623	B505624
ES13	B505633	B505634
ES14	B505643	B505644

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA INTERNO®

Zur Wiedergabe von Charakteristika im Inneren des Zahnes



Produktbeschreibung

Die im natürlichen Zahn vorkommenden Anomalien sind farbliches Vorbild für die VITA INTERNO Farben. Mit diesen Massen lassen sich natürliche Farbeffekte nachgestalten und keramische Arbeiten farblich dem natürlichen Vorbild perfekt angleichen.

Besonders die im Inzisalbereich natürlicher Zähne auftretenden Farbeffekte lassen sich mit VITA INTERNO naturnah reproduzieren.

Sie können entweder pur oder eingemischt in Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel oder in die Transluzenzmassen eingesetzt werden.

Für folgende Produkte sind VITA INTERNO Massen universell einsetzbar: VITA VM 7, VM 9, VM 11, VM 13, VM 15, VITA VMK Master und VITA TITANKERAMIK.

Vorteile

- Feinkörnig: Dadurch lassen sich VITA INTERNO Massen hervorragend in die Keramikmassen einschwemmen
- Farbintensiv: Ihre Farbintensität ermöglicht Farbeffekte, die durch die darüberliegenden Massen hindurch wirken und ein Chroma aus der Tiefe der Verblendung erzeugen
- Stark fluoreszierend: Die Fluoreszenz erzeugt die hohe Leuchtkraft der Farben und verstärkt den Lichttransport innerhalb der Keramik
- Untereinander mischbar: Durch Mischen lassen sich INTERNO Massen mit anderen INTERNO Massen abtönen und zusätzlich farblich individualisieren
- Mit allen VITA Keramikmassen mischbar: Gemischt mit den Keramikmassen erhöhen sie deren Fluoreszenz und damit die natürliche Leuchtkraft der Keramik bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen

VITA INTERNO® Sortimente

VITA INTERNO®



**VITA INTERNO® KIT
BISETV2**

Anzahl	Inhalt	Material
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO Farbmusterscheibe
1		VITA INTERNO Anmischplatte-Kunststoff (Ø 144 mm, mit Mulden)
1		VITA Glasspatel für Malfarben
1		Pinsel Nr. 3/0 a & e

VITA INTERNO® Artikel

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA ENAMIC® STAINS

Jetzt schnell und einfach natürliche Farbnuancen reproduzieren



Produktbeschreibung

Das VITA ENAMIC STAINS KIT umfasst sechs Malfarben plus Zubehör für die Reproduktion natürlicher Farbnuancen von Restaurationen aus Hybridkeramik. Der Verbund der Malfarben zur Restauration erfolgt mittels Polymerisationsprozess. Für die Oberflächenversiegelung ist die chemische Glasur VITA ENAMIC GLAZE erhältlich. Damit werden Haltbarkeit und Brillanz der Farben im Mundmilieu erhöht. Die Verarbeitung erfolgt nach einem einfachen 5-Schritte-Prinzip: Restaurationsoberfläche konditionieren, Farben abmischen und auftragen, Zwischenpolymerisation, chemische Glasur auftragen sowie Endpolymerisation durchführen.

Vorteile

Schnelle Verarbeitung:

Einfach die VITA ENAMIC-Malfarben auf die Restauration auftragen, polymerisieren und fertig! So lassen sich VITA ENAMIC Versorgungungen schnell farblich charakterisieren.

Hohe Individualität:

Mit den sechs VITA ENAMIC Malfarben lassen sich ganz individuell die Farbnuancen und Anomalien natürlicher Zähne reproduzieren.

Einfache Verarbeitung:

Über das Verhältnis von Liquid zu Farbpulver lässt sich die Farbintensität der VITA ENAMIC Malfarben gut steuern. Dies ermöglicht sowohl einen punktuellen als auch fließenden Farbauftrag.

Indikation

VITA ENAMIC Malfarben sind zur Charakterisierung (okklusal/zervikal) von Restaurationen aus VITA ENAMIC Hybridkeramik geeignet.

Farben

Erhältlich in den sechs Farbnuancen white, corn, brown, khaki, blue und black.

Systemkompatibilität

Für die Zwischen- und Endpolymerisation werden folgende zahnärztliche und zahntechnische Polymerisationsgeräte empfohlen: Bluephase C8 (Fa. Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Fa. Ivoclar Vivadent), Valo LED (Fa. Ultradent), Speed Labolight (Fa. Hager & Werken), Heraflash (Fa. Heraeus Kulzer) und Polyflux PT (Fa. Dreve).

VITA ENAMIC® STAINS Sortimente

VITA ENAMIC® STAINS



**VITA ENAMIC® STAINS KIT
EENSTKIT**


Anzahl	Inhalt	Material
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 1 white
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 2 corn
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 3 brown
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 4 khaki
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 5 blue
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 6 black
1	20 ml	VITA ENAMIC STAINS LIQUID
1	20 ml	VITA ENAMIC GLAZE
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
2		Pinzel Nr. 1 Korrekturpinzel, Rotmarder
1		VITA Porzellan Anmischplatte schwarz mit Deckel, 8,5 x 11 cm
1		Anmischspatel, doppelendig

VITA ENAMIC® STAINS Artikel

VITA ENAMIC® STAINS

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Reinigungslösung		CVMLC50
Pinsel Nr. 1 Korrekturpinsel, Rotmarder		B085

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA Porzellan Anmischplatte schwarz mit Deckel, 8,5 x 11 cm		C014
Anmischspatel, doppelendig		C013
VITA ENAMIC STAIN 1, white, 2 g		EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2, corn, 2 g		EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3, brown, 2 g		EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4, khaki, 2 g		EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5, blue, 2 g		EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6, black, 2 g		EENST062
Microbrush Einwegapplikatoren, 25 Stück		EENSTMB20

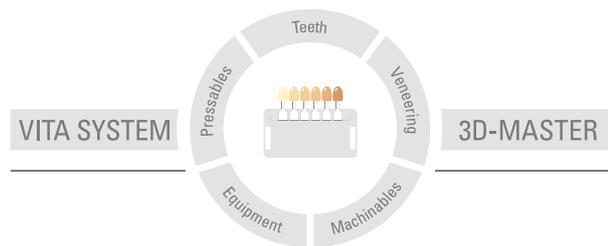

Stand dieser Information: 02-2021

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik