
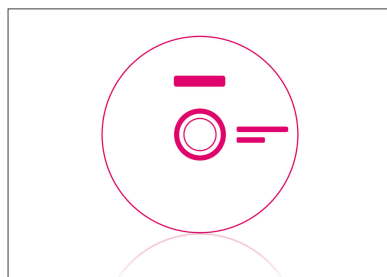
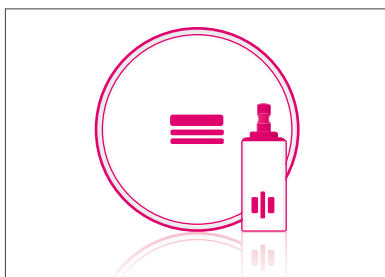
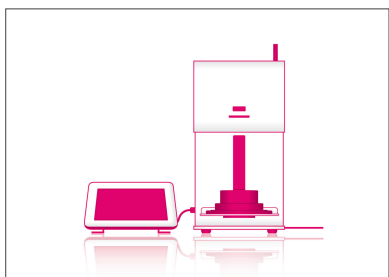
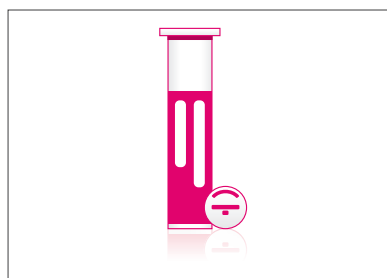
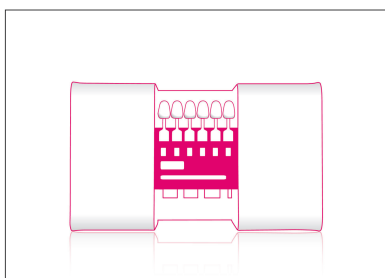


# Compendio VITA

Febbraio 2021

Lucidatura

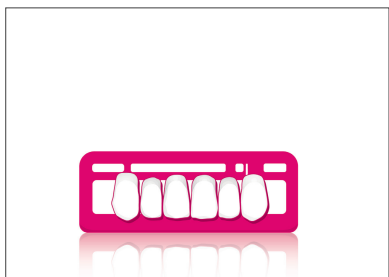

VITA – perfect match.

**VITA**




VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA ENAMIC® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio della ceramica ibrida VITA ENAMIC

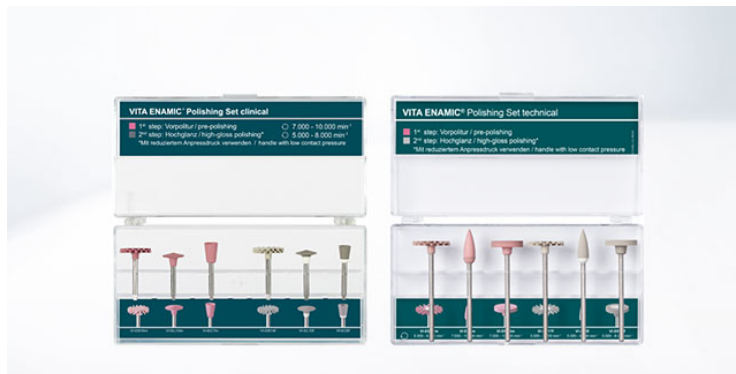

### Descrizione

I VITA ENAMIC Polishing Sets sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in ceramica ibrida in studio e laboratorio. I sets contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio. Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza eccellente.

### Vantaggi

#### Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

#### Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano elevata capacità di asportazione. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

#### Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA ENAMIC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

### Contenuto

#### VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

#### VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Comprende sei strumenti per manipolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

**VITA ENAMIC® Polishing Set Articoli**

**VITA ENAMIC® Polishing Set**

| Denominazione                                                                     |                                                                                     | Cod.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VITA ENAMIC Polishing Set clinical                                                |  | EENPSETCV1 |
| VITA ENAMIC Polishing Set technical                                               |  | EENPSETTV1 |
| Gommino a Brush technical, VI-EB17f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.         |                                                                                     | ERHEB17F3  |
| Gommino a Brush technical, VI-EB17m Prelucidatura (rosa), 3 pz.                   |                                                                                     | ERHEB17M3  |
| Gommino a ruota technical, VI-ER15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.         |                                                                                     | ERHER15F6  |
| Gommino a ruota technical, VI-ER15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.                   |                                                                                     | ERHER15M6  |
| Gommino a fiamma technical, pointe, VI-ES5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz. |                                                                                     | ERHES5F6   |
| Gommino a fiamma technical, VI-ES5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.                   |                                                                                     | ERHES5M6   |
| Gommino a Brush clinical, VI-EB14f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.          |                                                                                     | ERWEB14F3  |
| Gommino a Brush clinical, VI-EB14m Prelucidatura (rosa), 3 pz.                    |                                                                                     | ERWEB14M3  |
| Gommino a calice clinical, VI-EC6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.          |                                                                                     | ERWEC6F6   |
| Gommino a calice clinical, VI-EC7m Prelucidatura (rosa), 6 pz.                    |                                                                                     | ERWEC7M6   |
| Gommino lenticolare clinical, VI-EL10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.      |                                                                                     | ERWEL10F6  |
| Gommino lenticolare clinical, VI-EL10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.                |                                                                                     | ERWEL10M6  |

## VITA SUPRINITY® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio di VITA SUPRINITY PC



### Descrizione

I VITA SUPRINITY Polishing Set sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio. I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.

Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza brillante.

### Vantaggi

#### Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

#### Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

#### Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA SUPRINITY PC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

### Contenuto

#### VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.


#### VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Comprende otto strumenti per manipolo, di cui quattro per la prelucidatura e quattro per la lucidatura a specchio.

**VITA SUPRINITY® Polishing Set Articoli**

**VITA SUPRINITY® Polishing Set**

| Denominazione                                                             |                                                                                     | Cod.     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VITA SUPRINITY Polishing Set clinical                                     |  | ELSPSETC |
| VITA SUPRINITY Polishing Set technical                                    |  | ELSPSETT |
| Gommino lenticolare technical, L16f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz. |                                                                                     | ERHL16F6 |
| Gommino lenticolare technical, L16m Prelucidatura (rosa), 6 pz.           |                                                                                     | ERHL16M6 |
| Gommino Longpin technical, LPf Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.      |                                                                                     | ERHLPF6  |
| Gommino Longpin technical, LPm Prelucidatura (rosa), 6 pz.                |                                                                                     | ERHLPM6  |
| Gommino a ruota technical, R15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.     |                                                                                     | ERHR15F6 |
| Gommino a ruota technical, R15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.               |                                                                                     | ERHR15M6 |
| Gommino a fiamma technical, S5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.     |                                                                                     | ERHS5F6  |
| Gommino a fiamma technical, S5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.               |                                                                                     | ERHS5M6  |
| Gommino a calice clinical, C6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.      |                                                                                     | ERWC6F6  |
| Gommino a calice clinical, C6m Prelucidatura (rosa), 6 pz.                |                                                                                     | ERWC6M6  |
| Gommino lenticolare clinical, L10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.  |                                                                                     | ERWL10F6 |
| Gommino lenticolare clinical, L10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.            |                                                                                     | ERWL10M6 |
| Gommino a fiamma clinical, S4f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.      |                                                                                     | ERWS4F6  |
| Gommino a fiamma clinical, S4m Prelucidatura (rosa), 6 pz.                |                                                                                     | ERWS4M6  |

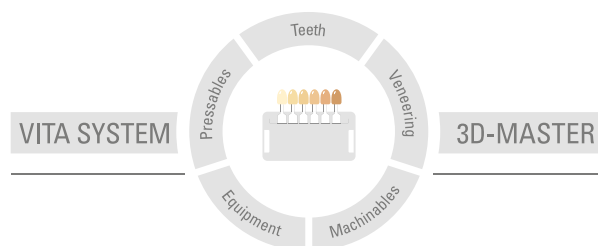

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 02/2021

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)