
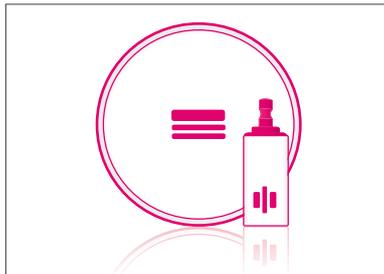
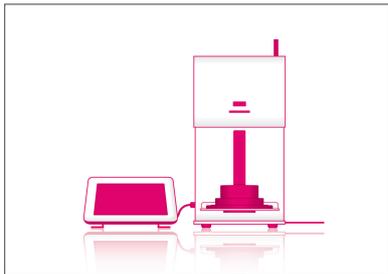


VITA Kompendium Februar 2021

Presstechnik

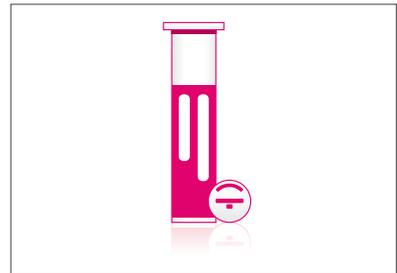

VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AMBRIA®



Produktbeschreibung

- Zirkondioxidverstärktes Lithiumdisilikat-Presskeramiksystem für hochästhetische und beständige Ergebnisse bei gleichzeitig effizienter Verarbeitung
- Das Presskeramiksystem umfasst Presskeramikrohlinge in zwei Transluzenzstufen (T/HT) und zwei Größen (S, L), Muffensystem, Einbettmasse und Flüssigkeit sowie Pressstempel

Vorteile

- Brillantes, facettenreiches Farb- und Lichtspiel nachbilden dank Werkstoff mit naturnaher Transluzenz, Opaleszenz und Fluoreszenz
- Zahnfarben verlässlich reproduzieren dank Pressrohlingen mit sehr guter Farbtreue sowie ideal abgestimmten Systemkomponenten
- Effizient passgenaue Pressergebnisse erzielen durch minimierte Reaktionsschicht, da Werkstoff und Einbettmasse ideal abgestimmt sind
- Hochbeständige Versorgungen herstellen dank zirkondioxidverstärkter Lithiumdisilikatkeramik mit sehr hoher Festigkeit (> 500 MPa)

Indikation

Zur Herstellung von grazilen Rekonstruktionen wie Veneers, Inlays/Onlays sowie hochästhetischen Voll-/Teilkronen und dreigliedrigen Brücken bis zum 2. Prämolaren.

VITA AMBRIA® Sortimente

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

**VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®
LAMSKC1**

| Anzahl | Inhalt | Material |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 5 pcs | A2-T S |
| 1 | 5 pcs | A3-T S |
| 4 | 100 g | VITA AMBRIA® INVEST P (Einbettmasse Pulver) |
| 1 | 100 ml | VITA AMBRIA® INVEST F (Einbettmasse Flüssigkeit) |
| 4 | | VITA AMBRIA® PLUNGER, Einweg-Pressstempel Ø 13 mm, 1 Stück |
| 2 | 12 g | VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog |
| 1 | 50 ml | VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID |
| 1 | 5 g | VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER |
| 1 | 20 ml | VITA AKZENT Plus POWDER FLUID |
| 1 | | Wabenbrennuntersatz W für Kronen und Brücken |
| 1 | | 2 Platinpins (1 Front- und 1 Seitenzahn-Pin) |
| 1 | | Wattebrenngutträger, 2 Stück |
| 1 | 60 ml | Messbecher |
| 1 | 12 ml | VITA Firing Paste Normalpackung |

VITA AMBRIA® Artikel

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|--------------------------------|-------------|
| VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs. | LAM030L0363 |
| VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs. | LAM030L0373 |
| VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs. | LAM030L0383 |
| VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs. | LAM030L0413 |
| VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs. | LAM030L0423 |
| VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs. | LAM030L0463 |
| VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs. | LAM030L0493 |
| VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs. | LAM030S0365 |
| VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs. | LAM030S0375 |
| VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs. | LAM030S0385 |
| VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs. | LAM030S0415 |
| VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs. | LAM030S0425 |
| VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs. | LAM030S0465 |
| VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs. | LAM030S0495 |
| VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0363 |
| VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0373 |
| VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0383 |
| VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0413 |
| VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0423 |
| VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0463 |
| VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0493 |
| VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0365 |
| VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0375 |
| VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0385 |
| VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0415 |
| VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0425 |
| VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0465 |
| VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0495 |

VITA AMBRIA® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---------------------------------|-------------|
| VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs. | LAM030L0023 |
| VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs. | LAM030L0043 |
| VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs. | LAM030S0025 |
| VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs. | LAM030S0045 |
| VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0023 |
| VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs. | LAM040L0043 |
| VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0025 |
| VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs. | LAM040S0045 |

VITA PM®9



Produktbeschreibung

VITA PM 9 (Pressable Material) ist eine "All-in-One"-Presskeramik und basiert auf der millionenfach bewährten Feinstruktur-Verblendkeramik VITA VM 9. VITA PM 9 ermöglicht die wirtschaftliche Versorgung eines breiten Indikationsspektrums. Sie ist sowohl für die gerüstfreie Presstechnik (Inlay/Onlay, Veneer und Kronen) als auch für das Überpressen von Zirkoniumdioxidgerüsten geeignet.

Vorteile

Rationelle Fertigung:

Das breite Indikationsspektrum (gerüstfreie Presstechnik sowie Überpresstechnik) von VITA PM 9 ermöglicht die wirtschaftliche und sichere Herstellung unterschiedlicher Restaurationen mit einem identischen Pressprogramm bei gleichzeitig effizienter Lagerhaltung.

Klinische Sicherheit:

VITA PM 9 wurde auf Basis der millionenfach bewährten Feinstruktur-Verblendkeramik VITA VM 9 entwickelt und garantiert damit höchste klinische Sicherheit.

Natürliches Farbspiel:

Insbesondere die hochtransluzenten VITA PM 9 HT-Pellets überzeugen durch ihren Chamäleoneffekt und garantieren damit eine ganz natürliche Farbwirkung.

Zahntypische Eigenschaften:

Die natürlichen Zahneigenschaften der VITA PM 9-Keramik zeigen sich beispielsweise durch homogene Oberflächen, hohe Plaqueresistenz sowie schmelzähnliches Werkstoffverhalten.

Indikation

Gerüstfreie Presstechnik:

Herstellung von Inlays, Onlays, Veneers und Kronen.

Überpresstechnik:

Überpressen von eingefärbten und uneingefärbten Yttrium-teilstabilisierten Zirkoniumdioxidgerüsten.

Farben

Opaque-/Translucent-Pellets:

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P und 3M3P

High Translucent-Pellets:

Dentinfarben: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Schmelzfarben: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITA PM®9 Sortimente

VITA PM®9



**VITAPM®9 ACCESSORY KIT
EPM9ACCKIT**

| Anzahl | Inhalt | Material |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | | VITA PM Einbettmasse, 56 x 100 g |
| 1 | 60 ml | Messbecher |
| 1 | 900 ml | VITA PM Einbettmasse-Anmischflüssigkeit |
| 1 | 200 g | VITA PM Einbett-System, 3-teilig (Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre) |
| 1 | | VITA PM Einweg-Pressstempel, 50 Stück |



**VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9HTKIT**

| Anzahl | Inhalt | Material |
|--------|--------|----------------------------------------------|
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT |
| 1 | | VITA PM 9 High Translucent Farbmusterschiene |



**VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9TKIT**

| Anzahl | Inhalt | Material |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T |
| 1 | 5 pcs. | VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T |
| 1 | | VITA PM 9 Translucent Farbmusterschiene |

VITA PM®9 Artikel

VITA PM®9

| Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------|------------|
| VITA PM 9 Opak, 0M1P-O, 5 pcs. | EPM90M1PO |
| VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T, 5 pcs. | EPM90M1PT |
| VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT, 5 pcs. | EPM90M2PHT |
| VITA PM 9 Opak, 0M2P-O, 5 pcs. | EPM90M2PO |
| VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T, 5 pcs. | EPM90M2PT |
| VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT, 5 pcs. | EPM91M1PHT |
| VITA PM 9 Opak, 1M1P-O, 5 pcs. | EPM91M1PO |
| VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T, 5 pcs. | EPM91M1PT |
| VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT, 5 pcs. | EPM91M2PHT |
| VITA PM 9 Opak, 1M2P-O, 5 pcs. | EPM91M2PO |
| VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T, 5 pcs. | EPM91M2PT |
| VITA PM 9 Opak, 2M1P-O, 5 pcs. | EPM92M1PO |
| VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T, 5 pcs. | EPM92M1PT |
| VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT, 5 pcs. | EPM92M2PHT |
| VITA PM 9 Opak, 2M2P-O, 5 pcs. | EPM92M2PO |
| VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T, 5 pcs. | EPM92M2PT |
| VITA PM 9 Opak, 2M3P-O, 5 pcs. | EPM92M3PO |
| VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T, 5 pcs. | EPM92M3PT |
| VITA PM 9 Opak, 3M1P-O, 5 pcs. | EPM93M1PO |
| VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T, 5 pcs. | EPM93M1PT |
| VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT, 5 pcs. | EPM93M2PHT |
| VITA PM 9 Opak, 3M2P-O, 5 pcs. | EPM93M2PO |
| VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T, 5 pcs. | EPM93M2PT |
| VITA PM 9 Opak, 3M3P-O, 5 pcs. | EPM93M3PO |
| VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T, 5 pcs. | EPM93M3PT |
| VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT, 5 pcs. | EPM9EN0PHT |
| VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT, 5 pcs. | EPM9EN1PHT |
| VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT, 5 pcs. | EPM9EN2PHT |
| VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT, 5 pcs. | EPM9ENDPHT |
| VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT, 5 pcs. | EPM9ENLPHT |

Zubehör Presskeramik



Produktbeschreibung

Einbettmasse/Flüssigkeit

Ideal auf VITA AMBRIA Pressrohlinge abgestimmte, phosphatgebundene und speedfähige Einbettmasse mit Flüssigkeit für eine exakte Expansionssteuerung und Fließfähigkeit.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: erhältlich als 50 x 100 g-Packung
- VITA AMBRIA INVEST F: erhältlich als 1-Liter-Flasche

Presstempel


Einwegpresstempel für ein einfaches Handling, ohne zeitraubendes Abstrahlen und Vorwärmen.

- VITA AMBRIA PLUNGER: erhältlich als Packung à 50 Stück (Durchmesser 13 mm)

Zubehör Presskeramik Artikel

Zubehör Presskeramik

| Bezeichnung | | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VITA PM Einweg-Pressstempel, 50 Stück |  | E001 |
| VITA PM Einbett-System, 3-teilig (Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre), 100 g |  | E003 |
| VITA PM Einbett-System, 3-teilig (Muffelring, Muffelbasis und Muffellehre), 200 g | | E004 |
| VITA PM 9 Opak Farbmusterschiene |  | E005 |
| VITA PM 9 High Translucent Farbmusterschiene | | E009 |
| VITA PM 9 Translucent Farbmusterschiene | | E010 |
| VITA PM Einbettmasse-Anmischflüssigkeit, 900 ml |  | EEF900 |
| VITA PM Einbettmasse, 56 x 100 g |  | EEM100 |
| VITA AMBRIA® INVEST F (Einbettmasse Flüssigkeit), 1000 ml |  | LAMIF1000 |
| VITA AMBRIA® INVEST P (Einbettmasse Pulver), 50 x 100 g |  | LAMIP10050 |
| VITA AMBRIA® PLUNGER (Einweg-Pressstempel Ø 13 mm), 50 Stück |  | LAMP1350 |

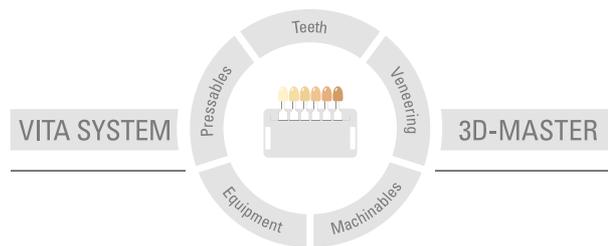

Stand dieser Information: 02-2021

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik