
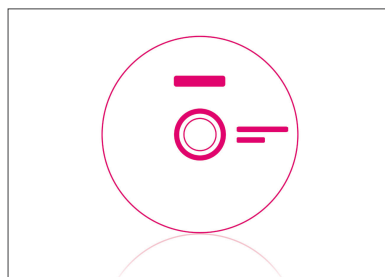
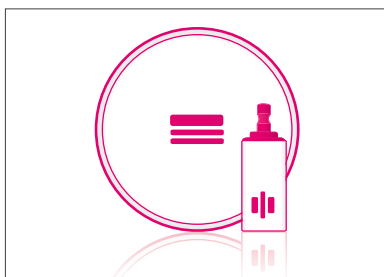
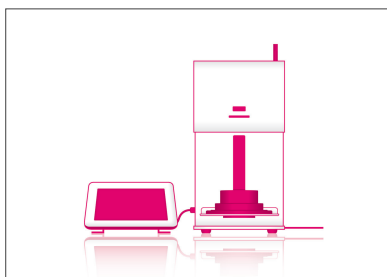
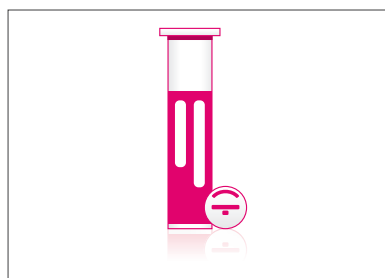
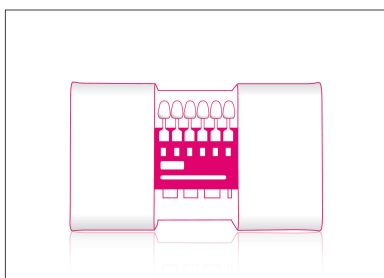



Compendio VITA Septiembre 2021

Pulido

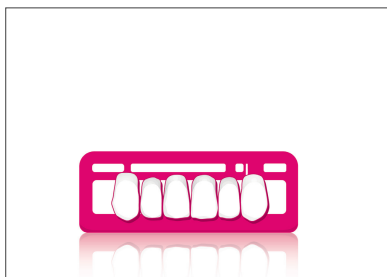

VITA – perfect match.

VITA

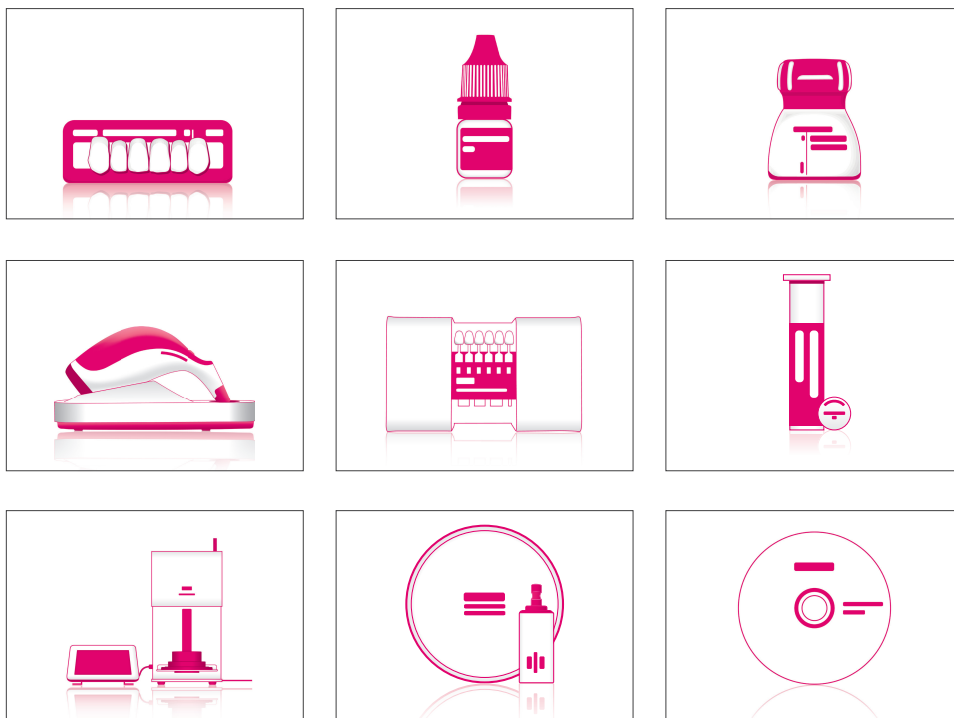


VITA – perfect match.

VITA

VITA ENAMIC® Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la cerámica híbrida VITA ENAMIC

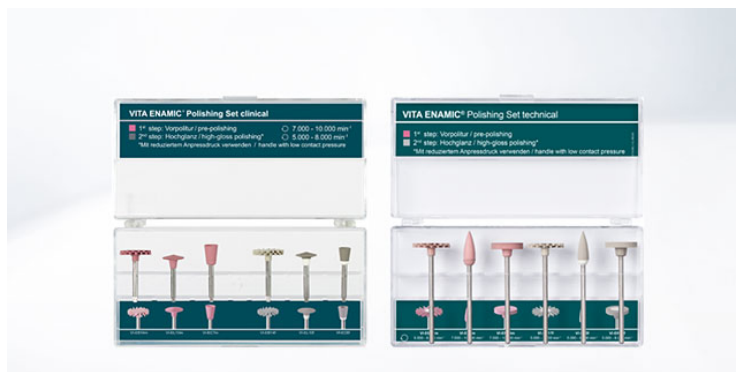

Descripción del producto

Los kits de Instrumento de pulidoes VITA ENAMIC se han desarrollado para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen diversos Instrumento de pulidoes para el pulido previo y el pulido de alto brillo. Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies masticatorias, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

Ventajas

Resultados finales excelentes:

Con estos instrumentos se consiguen unas extraordinarias superficies finales resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

Manipulación sencilla y segura:

Los instrumentos garantizan un elevado rendimiento de pulido. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse, lo que garantiza la seguridad.

Tratamiento respetuoso con el material:

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA ENAMIC se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

Contenido

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza de mano. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC® Polishing Set Productos

VITA ENAMIC® Polishing Set

Denominación		Ref.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-EB17f Pulido de alto brillo (gris), 3 uds.		ERHEB17F3
Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-EB17m Pulido previo (rosa), 3 uds.		ERHEB17M3
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, VI-ER15f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHER15F6
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, VI-ER15m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHER15M6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-ES5f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHES5F6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-ES5m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHES5M6
Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-EB14f Pulido de alto brillo (gris), 3 uds.		ERWEB14F3
Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-EB14m Pulido previo (rosa), 3 uds.		ERWEB14M3
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-EC6f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWEC6F6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-EC7m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWEC7M6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-EL10f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWEL10F6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-EL10m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la VITA SUPRINITY PC



Descripción del producto

Los kits de pulido VITA SUPRINITY han sido desarrollados para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica de silicato de litio reforzada con dióxido de circonio (ZLS) de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen diversos Instrumento de pulidoes para el pulido previo y el pulido de alto brillo.

Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies oclusales, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

Ventajas

Resultados finales excelentes:

Con estos instrumentos se consiguen unas superficies finales impecables y resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

Manipulación sencilla y segura:

Los instrumentos permiten un control excelente del rendimiento de pulido, acompañado de un escaso desgaste propio. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Además, los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse, garantizándose así la seguridad.

Tratamiento respetuoso con el material:

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA SUPRINITY PC se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

Contenido

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.


VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Incluye un total de ocho instrumentos para la pieza de mano. Incluye cuatro instrumentos para el pulido previo y cuatro para el pulido de alto brillo.

VITA SUPRINITY® Polishing Set Productos

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Denominación		Ref.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Instrumento de pulido technical, lenticular, L16f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHL16F6
Instrumento de pulido technical, lenticular, L16m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHL16M6
Instrumento de pulido technical, longpin, LPf Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHLPF6
Instrumento de pulido technical, longpin, LPm Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHLPM6
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, R15f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHR15F6
Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, R15m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHR15M6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, S5f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERHS5F6
Instrumento de pulido technical, en forma de punta, S5m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERHS5M6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, C6f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWC6F6
Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, C6m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWC6M6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, L10f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWL10F6
Instrumento de pulido clinical, lenticular, L10m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWL10M6
Instrumento de pulido clinical, en forma de punta, S4f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.		ERWS4F6
Instrumento de pulido clinical, en forma de punta, S4m Pulido previo (rosa), 6 uds.		ERWS4M6

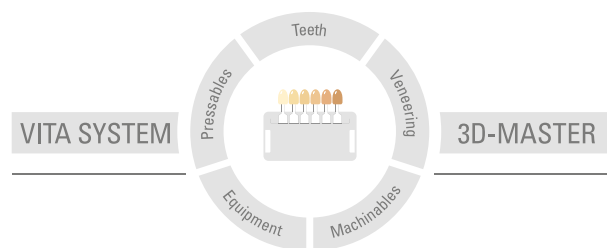

Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 09.2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik