
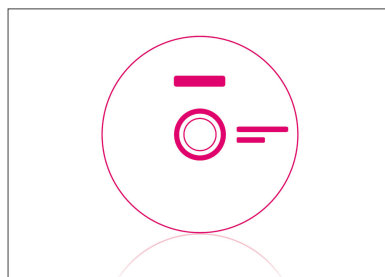
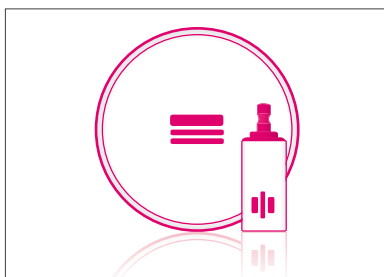
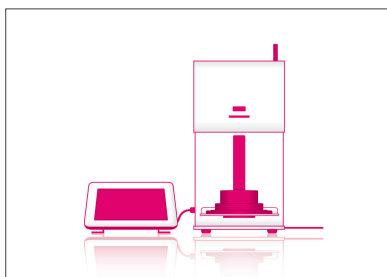
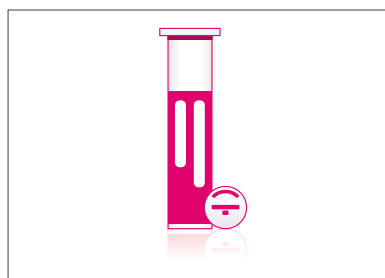
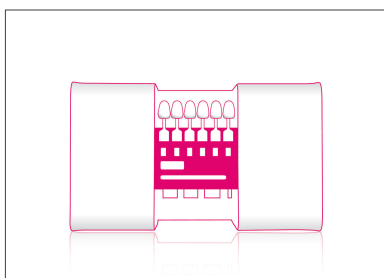


Compendio VITA


Novembre 2022

Caratterizzazione

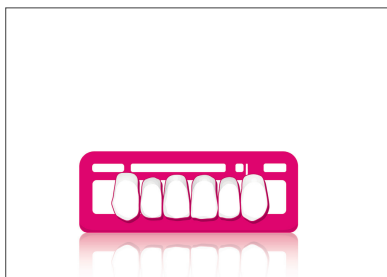

VITA – perfect match.

VITA

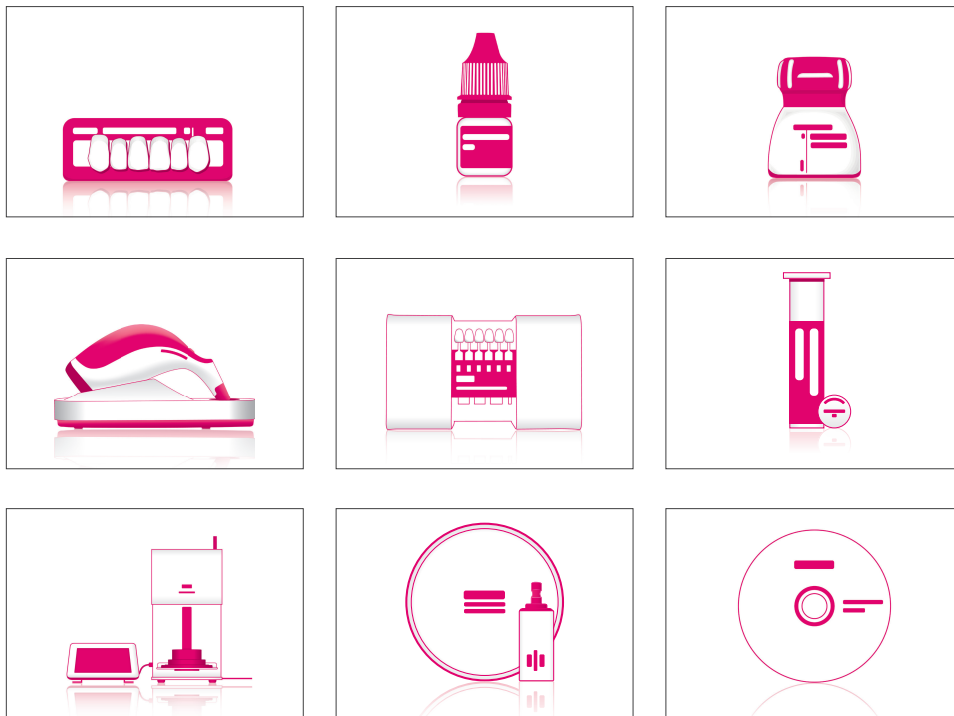

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus

Ottimizzato. Semplice. Completo.



Descrizione

Nuovi settori di impiego richiedono materiali nuovi e versatili. Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente e caratterizzare in modo semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.

Che si tratti della cromatizzazione interna di un restauro, di una caratterizzazione superficiale o di una leggera velatura - con i nuovi supercolori fluorescenti VITA AKZENT Plus il lavoro riesce sicuro e semplice.

I supercolori VITA AKZENT Plus offrono differenti opzioni di lavorazione e settori di impiego.

I supercolori BODY STAINS per lasura e GLAZE sono disponibili anche come spray, che assicura una stesura uniforme e omogenea su ampie superfici senza dispersioni. La nuova speciale testina nebulizzatrice consente un'applicazione mirata.

Vantaggi

Per tutti i tipi di materiali ceramici dentali, dalle ceramiche di stratificazione e pressatura, ai blocchetti in ceramica feldspatica come ad es. VITABLOCS fino a restauri monolitici. E' indicato per tutti i materiali ceramici dentali e per tutti i CET.

Disponibile in tre versioni:

POWDER:

per flessibilità ed economia illimitate

PASTE:

Paste pronte per l'uso di consistenza uniforme e pigmentazione omogenea

SPRAY:

masse glasura e per lasura pronte per l'uso, facili da applicare

VITA AKZENT® Plus Assortimenti

VITA AKZENT® Plus Powder



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER BAPKCS3D

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical BAPKCSC

Quantità	Contenuto	Materiale
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

VITA AKZENT® PLUS MINI KIT BAPKSKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

**VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
BAPKV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Piastra di miscelazione inkl. campionario colori VITA AKZENT Plus
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		Misurino, 0,1 ml / Spatola di miscelazione 2 facciate
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA AKZENT® Plus Paste

**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER
BAPKPCS3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER


**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical
BAPKPCSC**

Quantità	Contenuto	Materiale
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

**VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKPV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pennello piatto, per PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA AKZENT® Plus Spray



**VITA AKZENT® Plus STARTER KIT SPRAY / PASTE
BAPSKSM**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Spatola di miscelazione, in plastica per PASTE OPAQUE
2	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B
2	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES11
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE

VITA AKZENT® Plus Articoli
VITA AKZENT® Plus Powder

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
BS01	B505013
BS02	B505023
BS03	B505033
BS04	B505043
BS05	B505053

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
CHROMA A	B5050A3
CHROMA B	B5050B3
CHROMA C	B5050C3
CHROMA D	B5050D3
CHROMA IO	B5050IO3
CHROMA L	B5050L3
CHROMA M2	B5050M23
CHROMA M3	B5050M33
CHROMA R	B5050R3

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
ES01	B505513
ES02	B505523
ES03	B505533
ES04	B505543
ES05	B505553
ES06	B505563
ES07	B505573
ES08	B505583
ES09	B505593
ES10	B505603
ES11	B505613
ES12	B505623
ES13	B505633
ES14	B505643

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20

VITA AKZENT® Plus Paste

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
BS01	B505014
BS02	B505024
BS03	B505034
BS04	B505044
BS05	B505054

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A4
CHROMA B	B5050B4
CHROMA C	B5050C4
CHROMA D	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO4
CHROMA L	B5050L4
CHROMA M2	B5050M24
CHROMA M3	B5050M34
CHROMA R	B5050R4

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
ES01	B505514
ES02	B505524
ES03	B505534
ES04	B505544
ES05	B505554
ES06	B505564
ES07	B505574
ES08	B505584
ES09	B505594
ES10	B505604
ES11	B505614
ES12	B505624
ES13	B505634
ES14	B505644

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA AKZENT® Plus Spray

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

VITA INTERNO®

Per la riproduzione di effetti cromatici in profondità



Descrizione

Con le masse VITA INTERNO il ceramista ha una nuova e sofisticata metodica per una riproduzione ancora più perfetta degli effetti cromatici di profondità. Soprattutto i contrasti cromatici presenti nel bordo incisale del dente naturale possono essere riprodotti in maniera eccellente con le masse INTERNO. Grazie all'elevata fluorescenza - come in natura - i colori risultano più luminosi ed il trasporto della luce viene incrementato.

Le masse VITA INTERNO sono indicate per **tutte** le ceramiche di rivestimento VITA.

Vantaggi

- di impiego universale per tutte le ceramiche di rivestimento VITA
- miscelabili tra loro
- le anomalie presenti nei denti naturali sono la matrice cromatica di queste masse, ed è pertanto possibile usarle in larga misura senza complicate miscele
- resistenti e cromaticamente stabili

VITA INTERNO® Assortimenti

VITA INTERNO®

**VITA INTERNO KIT
BISETV3**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA INTERNO in resina (Ø 144 mm, con incavi)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA INTERNO® Articoli

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Denominazione	Cod.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA AKZENT® LC

Riprodurre in sicurezza effetti cromatici individuali



Descrizione

- VITA AKZENT LC è un sistema fotopolimerizzabile di supercolori / glasura per la caratterizzazione di tutti i restauri indiretti in composito, polimero e ceramica ibrida.
- I VITA AKZENT LC EFFECT STAINS comprendono 14 colori per una riproduzione di effetti individuali.
- I VITA AKZENT LC CHROMA STAINS sono supercolori su misura per un'attuazione sicura delle correzioni cromatiche.
- Il sistema comprende inoltre una massa glasura, pennello, piastra di miscelazione e liquido detergente.

Vantaggi

- Riprodurre in modo sicuro e naturale tutte le sfaccettature cromatiche della dentatura naturale residua grazie a colori effetto versatili e brillanti
- I colori Chroma consentono modifiche cromatiche semplici col solo pennello per un controllo sistematico e pianificabile della cromaticità del manufatto protesico
- Applicare effetti cromatici individuali in modo preciso e su superfici estese in modo altamente efficiente grazie ai colori effetto e Chroma con viscosità specifiche
- Realizzare manufatti protesici con una resa cromatica duratura e brillante ed un'elevata brillantezza grazie a colori con resistenti all'abrasione e alle decolorazioni

Indicazioni

VITA AKZENT LC

- è di uso universale per la caratterizzazione di restauri in ceramica ibrida, compositi CAD/CAM e per rivestimento estetico, basi protesiche in poliacrilati per stampa 3D, nonché denti protesici in composito
- impiego versatile per tutti i restauri indiretti realizzati nei materiali sopra citati
ad es. corone e faccette CAD/CAM, ponti con rivestimento estetico in composito, protesi parziali/totali e provvisori

Colori

Disponibile in 14 colori Effetto e 4 colori Chroma

VITA AKZENT® LC Assortimenti

VITA AKZENT® LC

VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKIT3D

Quantità	Contenuto	Materiale
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA classical A1-D4®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKITC


Quantità	Contenuto	Materiale
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC STANDARD KIT
Supercolori per la riproduzione di effetti
CALCSKIT

Quantità	Contenuto	Materiale
6	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC Articoli
VITA AKZENT® LC

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2.5 ml	B5150A25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2.5 ml	B5150B25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2.5 ml	B5150C25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2.5 ml	B5150D25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2.5 ml	B5150L25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2.5 ml	B5150M225
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2.5 ml	B5150M325
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2.5 ml	B5150R25
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, white, 2.5 ml	B5155125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, cream, 2.5 ml	B5155225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, lemon, 2.5 ml	B5155325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, sun, 2.5 ml	B5155425
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, orange, 2.5 ml	B5155525
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, russet, 2.5 ml	B5155625
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, khaki, 2.5 ml	B5155725
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, pink, 2.5 ml	B5155825
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2.5 ml	B5155925
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, purple, 2.5 ml	B5156025
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, blue, 2.5 ml	B5156125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2.5 ml	B5156225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey, 2.5 ml	B5156325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, black, 2.5 ml	B5156425
VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml	B515905

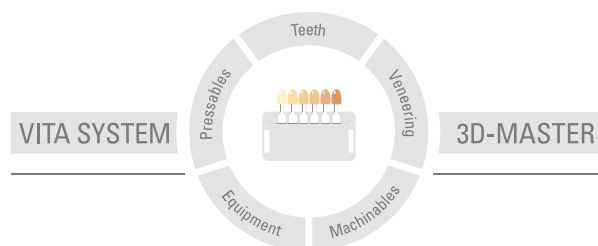

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 11/2022

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik