
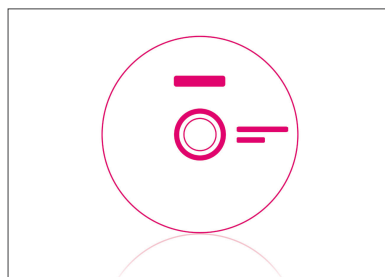
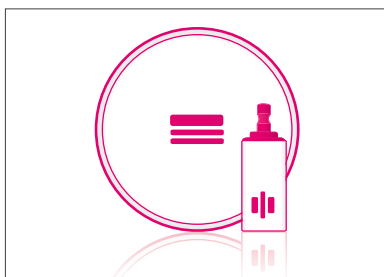
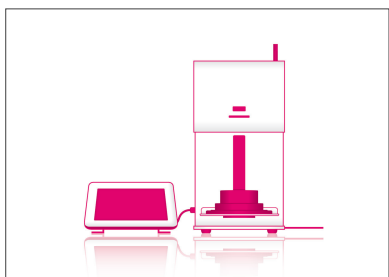
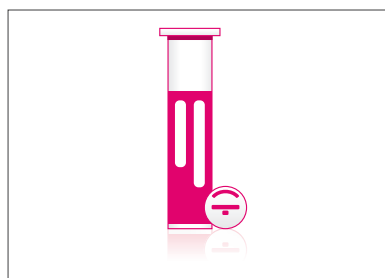
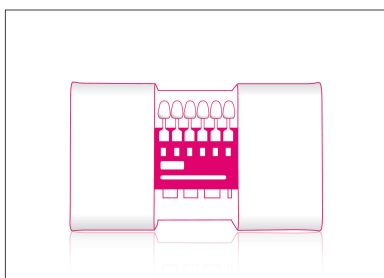


Compendio VITA


Novembre 2022

Lucidatura

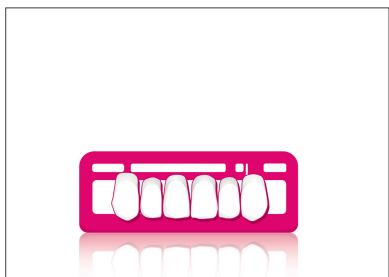

VITA – perfect match.

VITA

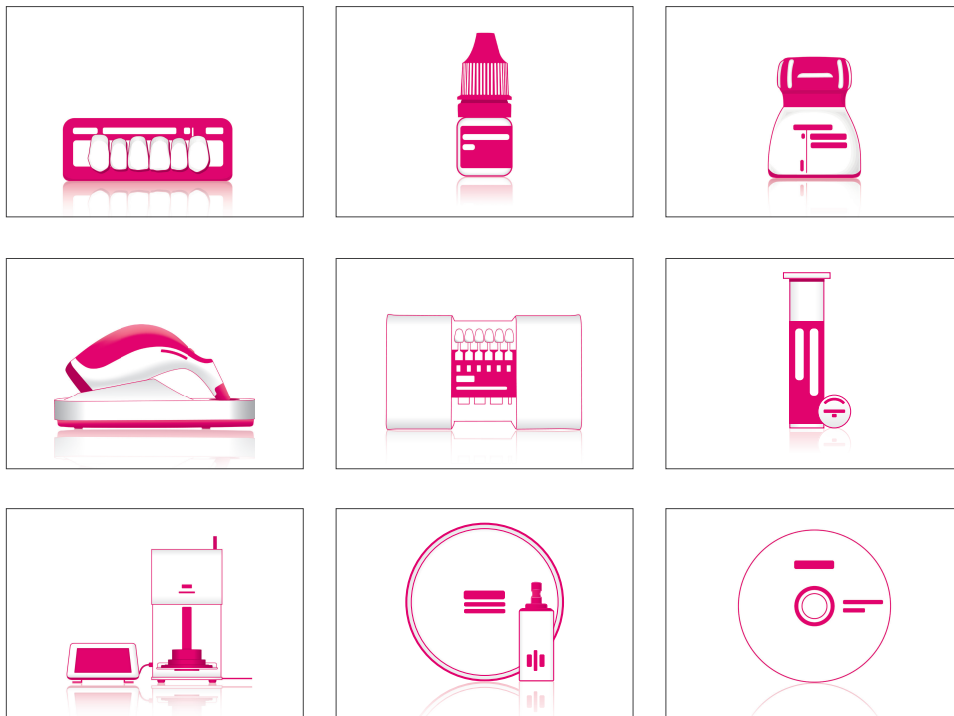


VITA – perfect match.

VITA

VITA ENAMIC® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio della ceramica ibrida VITA ENAMIC

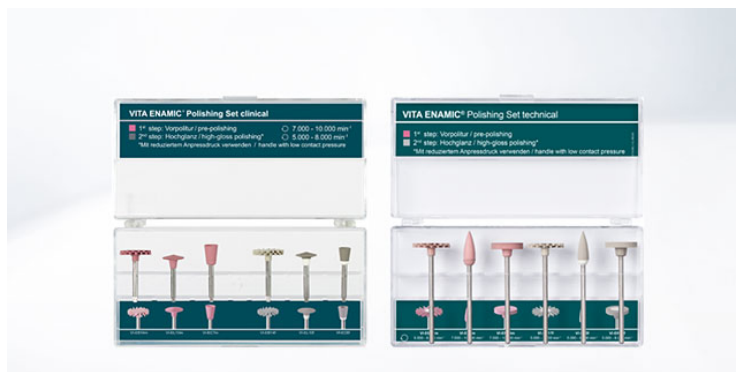

Descrizione

I VITA ENAMIC Polishing Sets sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in ceramica ibrida in studio e laboratorio. I sets contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio. Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza eccellente.

Vantaggi

Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano elevata capacità di asportazione. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA ENAMIC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

Contenuto

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Comprende sei strumenti per manipolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA ENAMIC® Polishing Set Articoli

VITA ENAMIC® Polishing Set

Denominazione		Cod.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Gommino a Brush technical, VI-EB17f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.		ERHEB17F3
Gommino a Brush technical, VI-EB17m Prelucidatura (rosa), 3 pz.		ERHEB17M3
Gommino a ruota technical, VI-ER15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHER15F6
Gommino a ruota technical, VI-ER15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHER15M6
Gommino a fiamma technical, pointe, VI-ES5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHES5F6
Gommino a fiamma technical, VI-ES5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHES5M6
Gommino a Brush clinical, VI-EB14f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.		ERWEB14F3
Gommino a Brush clinical, VI-EB14m Prelucidatura (rosa), 3 pz.		ERWEB14M3
Gommino a calice clinical, VI-EC6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWEC6F6
Gommino a calice clinical, VI-EC7m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWEC7M6
Gommino lenticolare clinical, VI-EL10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWEL10F6
Gommino lenticolare clinical, VI-EL10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio di VITA SUPRINITY PC



Descrizione

I VITA SUPRINITY Polishing Set sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio. I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.

Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza brillante.

Vantaggi

Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA SUPRINITY PC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

Contenuto

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Comprende otto strumenti per manipolo, di cui quattro per la prelucidatura e quattro per la lucidatura a specchio.

VITA SUPRINITY® Polishing Set Articoli

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Denominazione		Cod.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Gommino lenticolare technical, L16f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHL16F6
Gommino lenticolare technical, L16m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHL16M6
Gommino Longpin technical, LPf Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHLPF6
Gommino Longpin technical, LPm Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHLPM6
Gommino a ruota technical, R15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHR15F6
Gommino a ruota technical, R15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHR15M6
Gommino a fiamma technical, S5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHS5F6
Gommino a fiamma technical, S5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHS5M6
Gommino a calice clinical, C6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWC6F6
Gommino a calice clinical, C6m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWC6M6
Gommino lenticolare clinical, L10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWL10F6
Gommino lenticolare clinical, L10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWL10M6
Gommino a fiamma clinical, S4f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWS4F6
Gommino a fiamma clinical, S4m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWS4M6

Paste lucidanti VITA

Paste diamantate per la lucidatura a specchio extraorale di materiali ceramici e a base polimerica



Descrizione

VITA Polish Hybrid è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC, composito e polimero.

VITA Polish Cera è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio.

Vantaggi

- Con entrambe le paste per lucidare si conseguono risultati rapidi e sicuri di lucidatura a specchio. La tessitura superficiale non viene modificata.
- Le particelle diamantate sono specifiche per le rispettive classi di materiali. Il tal modo si tempera la superficie e riducono i depositi di placca.

Contenuto


La pasta per lucidare VITA Polish Hybrid è ottimale per la lucidatura della ceramica ibrida VITA ENAMIC in combinazione con i gommini dei VITA ENAMIC Polishing Set clinical e technical.

La pasta per lucidare VITA Polish Cera è ottimale per la lucidatura di VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA e VITA YZ in combinazione con i gommini dei VITA SUPRINITY Polishing Set clinical e technical.

Paste lucidanti VITA Articoli

Paste lucidanti VITA

Denominazione		Cod.
VITA Polish Cera, 18 g		B459
VITA Polish Hybrid, 12 g		C020

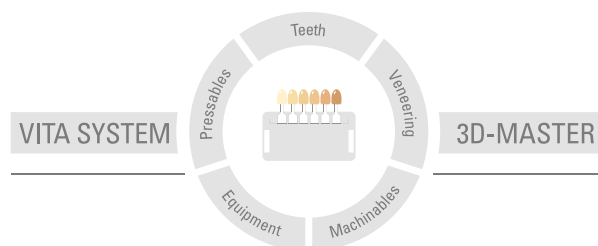

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 11/2022

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik