

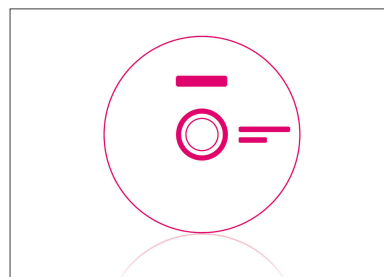
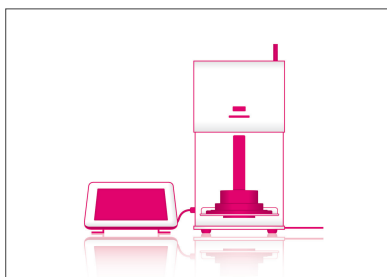
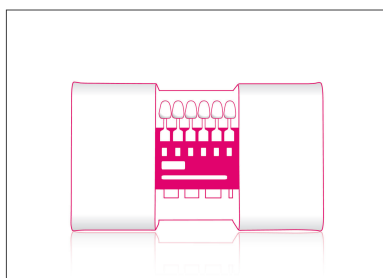


Compendio VITA Novembre 2023

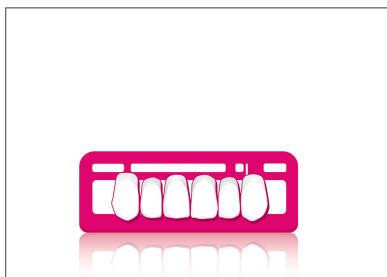

VITA – perfect match.

VITA

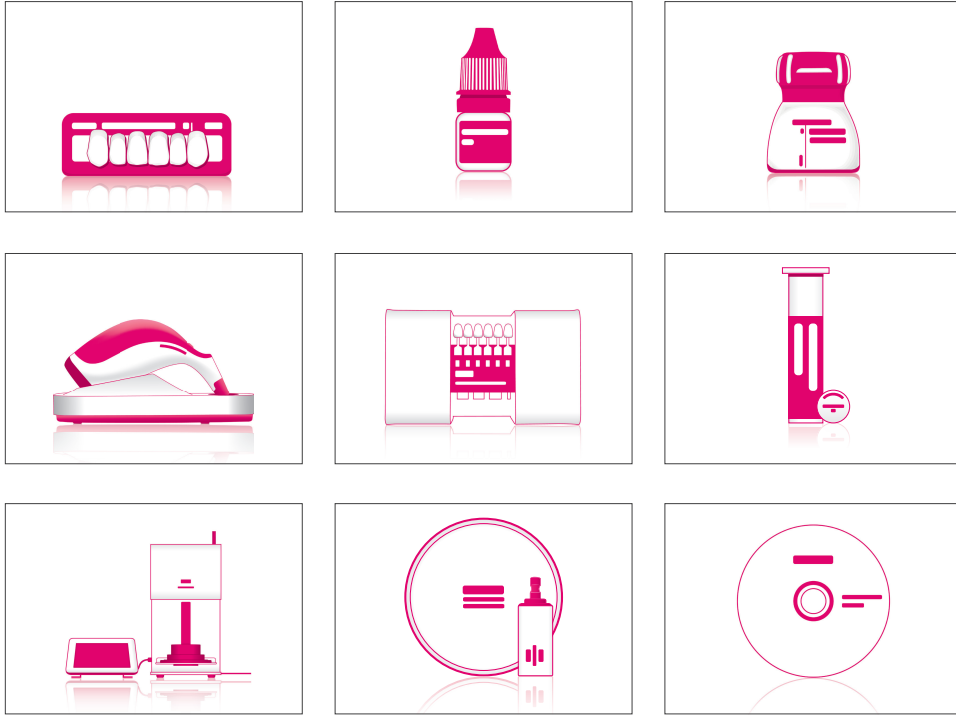

VITA – perfect match.

VITA

VITA Easyshade® LITE



Descrizione

Determinazione digitale del colore dei denti.

In entrambi i sistemi cromatici consolidati VITA classical A1 – D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Vantaggi

Risultato disponibile in pochi secondi

Il risultato sarà visibile sul display in modo chiaro e in pochi secondi. Anche le deviazioni del colore naturale dei denti rispetto agli standard cromatici vengono visualizzate a colpo d'occhio. Una determinazione del colore rapida permette di risparmiare tempo e denaro.

Utilizzo semplice e intuitivo

La determinazione digitale del colore con VITA Easyshade LITE, compatto ed ergonomico, avviene con un solo clic, senza necessità di conoscenze pregresse o di base.

Determinazione precisa del colore dei denti

La tecnologia basata su spettrofotometro ad alta precisione determina esattamente il colore dei denti. E lo fa in modo oggettivo e riproducibile, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientali. Per una maggiore sicurezza del processo e meno reclami.

VITA Easyshade® LITE

Dati tecnici:

- Spettrofotometro, intervallo di misura 400 – 700 nm
- Visualizzazione di tutti i colori dei denti naturali nei collaudati standard cromatici VITA classic A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 2 batterie AA

VITA Easyshade® LITE Articoli

VITA Easyshade® LITE

Denominazione	Cod.
VITA Easyshade® LITE , 100-230V * Contenuto: 1 Stazione di calibrazione VITA Easyshade LITE 1 Manipolo VITA Easyshade LITE 2 Batterie usa e getta AA 1 Istruzioni d'uso	DEASYL

VITA Easyshade® V

Determinazione del colore ottimale, massima sicurezza



Descrizione

Lo spettrofotometro VITA Easyshade V è stato sviluppato per la determinazione precisa, rapida e affidabile del colore dei denti naturali e di restauri ceramici.

- **Determinazione del colore precisa e riproducibile in pochi secondi** grazie a modernissime tecniche di misura
- **Risultati di misura oggettivi e affidabili** grazie alla tecnologia LED indipendente dall'ambiente
- **Sicurezza di processo ed economicità** grazie a informazioni esatte sul colore dei denti negli standard cromatici VITA per una riproduzione sicura del colore e quindi riduzione di correzioni cromatiche
- **Uso semplice ed intuitivo** grazie al touchdisplay con software autoesplicativo
- **Efficiente comunicazione digitale** per lo scambio dei dati relativi a informazioni sul colore dei denti e di fotografie tra studio e laboratorio

Compatibilità di sistema

VITA Assist

VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio

Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA Easyshade V vengono documentati e comunicati professionalmente. Il software per PC basato su Windows combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente. Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le basi per uno scambio proficuo di informazioni tra studio e laboratorio.

Combinazioni consigliate

VITA mobileAssist

Grazie alla pratica App VITA mobileAssist il trasferimento delle informazioni sul colore dei denti tra studio e laboratorio è semplice ed efficiente. Tramite l'interfaccia interna Bluetooth i dati del VITA Easyshade V si trasferiscono senza fili nella App, dove possono essere combinati con una fotografia del paziente e quindi spediti via e-mail. Tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti e fotografie dei pazienti possono essere trasmesse comodamente in modalità mobile con uno smartphone o un tablet.


VITA Easyshade® V

Dati tecnici

- Spettrofotometro, intervallo di misura 400 – 700 nm
- Concetto di carica induttiva con batterie AA di lunga durata
- Filtri spettrali analizzano lo spettro di riemissione
- Visualizzazione di tutti i colori dei denti naturali nei collaudati standard cromatici VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA classical A1–D4®, indicazione dei colori VITABLOCS® e dei colori Bleached secondo lo standard della ADA (American Dental Association)
- Interfaccia Bluetooth® per la comunicazione col software per PC VITA Assist e con la App per smartphone VITA mobileAssist

VITA Easyshade® V Articoli

VITA Easyshade® V

Denominazione		Cod.
VITA Easyshade V, 100-230V * Contenuto: 1 Base caricabatteria Easyshade V 1 Manipolo VITA Easyshade V (incl. 2x Batteria NIMH, ricaricabile) 1 Alimentatore 1 Cappucci di protezione (2 x 18 pz.) 1 Istruzioni d'uso ed istruzioni in breve		DEASY5

VITA Assist



Descrizione

VITA Assist comprende attualmente i moduli **VITA ShadeAssist** e **VITA ToothConfigurator**.

Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA Easyshade vengono documentati e comunicati professionalmente. Il software per PC basato su Windows combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente. Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le basi per lo scambio intensivo di informazioni tra studio e laboratorio.

VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio

VITA Assist supporta attivamente nella scelta degli idonei materiali

CAD/CAM, nella stratificazione di restauri ceramici e nell'elaborazione di soluzioni riabilitative complesse anche nei casi più difficili. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Trasmissione senza fili dei dati del VITA Easyshade
- Elaborazione professionale delle fotografie dei pazienti per ottimizzare la documentazione
- Integrazione opzionale di radiografie digitali, fotografie di dettaglio e immagini dei contorni
- Molteplici funzioni di commento
- Funzioni attive di supporto per la scelta dei materiali più adatti agli specifici casi clinici

VITA ShadeAssist

- **Interfaccia perfetta** tra studio e laboratorio
- **Consente una comunicazione del colore priva di errori**
- **Minimizza i costi** per successive determinazioni del colore e correzioni

VITA ToothConfigurator

- **Modulo di consulenza interattiva**
- **Coinvolgimento del paziente** nella fase di progettazione della protesi

Accessori



Descrizione

Cappucci di protezione

- **Protezioni igieniche monouso**

Valigetta di trasporto

- **Trasporto sicuro** di VITA Easyshade® V nella pratica valigetta

Accessori Articoli

Accessori VITA Easyshade®

Denominazione	Cod.
VITA Easyshade V cappucci di protezione, 9 x 18 pz.	D58000S
Valigia di trasporto per VITA Easyshade V	DEASY5K

Scala colori VITA classical A1-D4®



Descrizione

La scala VITA classical A1 – D4 serve per la determinazione sicura del colore dei denti.

I colori della scala VITA classical seguono il seguente raggruppamento:

- A1 - A4 (rosso-marrone)
- B1 - B4 (rosso-giallo)
- C1 - C4 (grigio)
- D2 - D4 (rosso-grigio)

Contenuto

Scala colori VITA classical A1-D4®

Cod. G027C

Suggerimenti per la presa del colore

- Determinare il colore dei denti possibilmente in luce diurna o con apposite lampade normalizzata e non con lampade normali.
- L'ambiente circostante deve essere di colore neutro. I pazienti vanno pregati di rimuovere rossetti o cosmetici che potrebbero influenzare la presa del colore. Coprire indumenti di colore vivace con un telo grigio.
- Procedere speditamente, accettare sempre la prima scelta, perché dopo ca. 5 – 7 secondi gli occhi si affaticano.

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades



Descrizione

I Bleached Shades VITA sono uno strumento affidabile perché l'odontoiatra possa determinare i colori Bleached anche nell'ambito del sistema cromatico VITA classical. Con i VITA Bleached Shades aggiuntivi anche i colori dei denti sottoposti a sbiancamento sono riprodotti nella scala colori originale.

I VITA Bleached Shades comprendono i colori 0M1, 0M2 e 0M3. Sono parte del VITA SYSTEM 3D-MASTER e sono in grado di completare sia la scala colori VITA classical A1 - D4 che VITAPAN classical.

I colori VITA Bleached sono anche disponibili come supplemento per la scala colori VITA classical A1-D4 così come per la scala colori VITAPAN classical.

Per una progettazione ed un controllo più dettagliato e preciso del procedimento di sbiancamento si può utilizzare l'apposita VITA Bleachedguide 3D-MASTER.

Suggerimenti per la presa del colore


- Determinare il colore dei denti possibilmente in luce diurna o con apposite lampade normalizzata e non con lampade normali.
- L'ambiente circostante deve essere di colore neutro. I pazienti vanno pregati di rimuovere rossetti o cosmetici che potrebbero influenzare la presa del colore. Coprire indumenti di colore vivace con un telo grigio.
- Procedere speditamente, accettare sempre la prima scelta, perché dopo ca. 5 – 7 secondi gli occhi si affaticano.

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades Articoli

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

Denominazione	Cod.
Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades	G027CBS

VITA Linearguide 3D-MASTER®

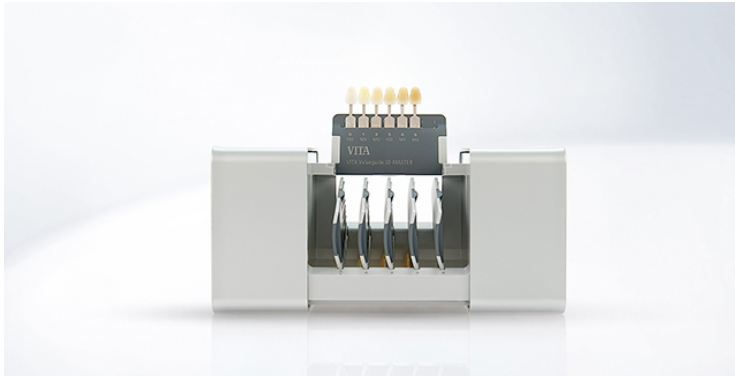

Descrizione

Con VITA Linearguide 3D-MASTER è possibile determinare in modo spedito e preciso il corretto colore dei denti. Il moderno design e la struttura sistematica di VITA Linearguide consentono di stabilire rapidamente l'idoneo colore 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER semplifica il passaggio dai sistemi cromatici convenzionali alla determinazione e comunicazione precisa del colore col sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER.


VITA Linearguide 3D-MASTER contiene gli stessi 29 campioni colore della VITA Toothguide 3D-MASTER.

Vantaggi

- classica procedura lineare
- autoesplicativo, di facile impiego
- determinazione del colore sicura, rapida e precisa
- design moderno come espressione di estetica e chiarezza perfette

VITA Linearguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Linearguide 3D-MASTER®

Denominazione		Cod.
VITA Linearguide 3D-MASTER		B363

VITA Toothguide 3D-MASTER®



Descrizione

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Con il VITA Toothguide 3D-MASTER è possibile determinare in modo sistematico e sicuro tutti i colori dei denti naturali.

BLEACHED SHADE GUIDE

Con VITA BLEACHED SHADE GUIDE è possibile determinare in modo sistematico e sicuro il colore di denti sottoposti a sbiancamento secondo il principio del VITA Toothguide.

Vantaggi


- Determinazione del colore del dente in tre fasi
- Determinazione del colore del dente univoca
- Possibilità di confronto: : sì/no – meglio/peggio
- Colori dei denti definiti esattamente su base matematica (miscelabili)
- Apprendibile

VITA Toothguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Denominazione	Cod.
VITA Toothguide 3D-MASTER con BLEACHED SHADES	G360

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

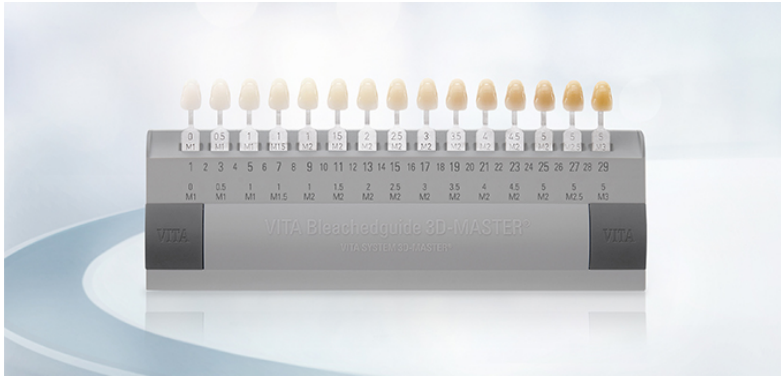

Descrizione

La VITA Bleachedguide 3D-MASTER è un ausilio per la progettazione ed il controllo dei processi di bleaching dei denti. Si basa sulla logica della scala colori VITA SYSTEM 3D-MASTER, costituita dai 3 parametri luminosità, croma e tinta.


Nella VITA Bleachedguide 3D-MASTER sono inoltre integrati i 29 livelli di luminosità definiti dalla American Dental Association (ADA). Con questa suddivisione la VITA Bleachedguide 3D-MASTER è conforme allo standard riconosciuto in tutto il mondo ed è quindi il prodotto di elezione per ogni terapeuta.

Vantaggi

- La chiara e semplice struttura - ora anche con sigle numeriche - agevola la comunicazione tra odontoiatra e paziente. La suddivisione della VITA Bleachedguide 3D-MASTER in sigle numeriche si basa sulla definizione dei livelli di luminosità della American Dental Association e identifica le variazioni durante il processo di sbiancamento.
- Odontoiatra e paziente possono discutere del risultato desiderato sulla base dei campioni colore e successivamente verificare se l'obiettivo è stato raggiunto.
- Il colore adatto per il trattamento restaurativo viene preso con la VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide e riprodotto con gli idonei materiali.

VITA Bleachedguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

Denominazione		Cod.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER		B361



VITA – perfect match.

VITA

VITAPAN EXCELL® Anterior

Forme, colori e gioco di luci vividi e brillanti



Descrizione

denti anteriori di classe Premium, traslucenti, corposi e di grande vitalità in composito MRP.

Vantaggi

- semplice realizzazione di protesi altamente estetiche grazie a forme vivaci con proporzioni „auree“
- brillante gioco di colori e di luci grazie alla luminosità dinamica e all'andamento cromatico armonioso
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- configurazione gengivale perfetta grazie all'area cervicale ampiamente dimensionata

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentale corposa e naturale per risultati brillanti
- caratteristiche incisali marcate per una vivacità particolare
- liste palatali larghe per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali

Caratteristiche particolari

- quota di smalto pronunciata per una buona trasmissione della luce
- tessitura superficiale ricca di sfaccettature per una distribuzione e riflessione naturale della luce.
- mammelloni / opalescenza integrati per faccette cromatiche naturali
- stratificazione 3D per una transizione cromatica armoniosa

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER®: 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1 – D4 (senza B1)

File

- 21 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 6 x anteriori inferiori

VITAPAN EXCELL® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN EXCELL

- X-Small*: 67 file / 402 anteriori
- Small*: 134 file / 804 anteriori
- Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
- Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN EXCELL

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN EXCELL Anterior

VITAPAN PLUS® Anterior

Per una protesi giovanile e vitale con un Plus di traslucenza



Descrizione

Denti anteriori di grande vitalità, classe Premium, in composito MRP con un Plus di traslucenza.

Vantaggi

- vivace gioco di luci
traslucenza straordinaria grazie all'elevata quota di smalto
- semplice riproduzione della giovinezza estetica
grazie a forme dei denti corpose, vitali e giovanili
- resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentale corposa e giovanile per una „protesi giovane“
- marcate caratteristiche incisali giovanili per un'elevata vivacità
- liste palatali larghe per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali

Caratteristiche particolari

- alta proporzione di smalto / liste marginali traslucenti per una buona dinamica luminosa
- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci vitale
- struttura dei mammelloni integrata e bordo incisale bianco per un effetto cromatico naturale
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 18 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 6 x forme anteriori inferiori

VITAPAN PLUS® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN PLUS

- X-Small*: 67 file / 402 anteriori
- Small*: 134 file / 804 anteriori
- Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
- Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN PLUS

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN PLUS Anteriori
- VITAPAN PLUS Anteriori e VITAPAN LINGOFORM Posteriori

VITAPAN® LINGOFORM Posterior

Per tutti i concetti protesici, grazie al design oclusale multifunzionale



Descrizione

Denti posteriori multifunzionali, classe Premium, in composito MRP.

Vantaggi

- montaggio semplice e intuitivo grazie all'individuazione „automatica“ della centrica per il design della superficie oclusale che segue il principio delle ruote dentate
- affidabilità universale utilizzabile per tutti i concetti protesici grazie al design oclusale multifunzionale
- montaggio veloce senza estesi interventi di molaggio selettivo grazie alla centrica definita esattamente
- resistenza eccellente grazie a elevata caricabilità, stabilità all'abrasione e funzione sostenuta dalla centrica
- buona lavorabilità grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria corposa con dimensioni lingo-buccali simili al modello naturale
- design della superficie oclusale multifunzionale con contatti di centrica definiti

Caratteristiche particolari

- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci naturale
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per: concetti di occlusione lingualizzata

Colori

- 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1 – 5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1 – D4 (senza B1)

File

- 4 x forme posteriori superiori
- 4 x forme posteriori inferiori

VITAPAN® LINGOFORM Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN LINGOFORM

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITAPAN LINGOFORM

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN LINGOFORM Posteriori

VITA PHYSIODENS® Anterior

Per una protesi fedele nei dettagli con gioco di forme multistrato



Descrizione

Denti anteriori di classe Premium, corposi come in natura, in composito MRP.

Vantaggi

- integrazione ottimale nella dentatura residua grazie a forme multistrato, fedeli nel dettaglio
- gioco di luci naturale grazie ad una tessitura superficiale ricca di sfaccettature
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua grazie alla corrispondenza ottimale con la scala colori e all'ampia gamma di colori
- mascheramento sicuro di strutture secondarie/terziarie grazie all'elevato volume dentale (basale)
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria corposa come in natura per una buona integrazione nella dentatura residua
- caratteristiche incisali marcate e vitali e curvatura labiale simile al dente naturale
- area cervicale larga per una configurazione ottimale di papille / spazi interdentali
- elevato volume (basale) per il mascheramento di strutture secondarie/terziarie

Caratteristiche particolari

- cromaticità esatta per un buon mascheramento di strutture terziarie
- tessitura superficiale ricca di sfumature per un gioco di luci naturale
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr. E. End

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 21 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 8 x forme anteriori inferiori

VITA PHYSIODENS® Anterior Assortimenti

VITA PHYSIODENS tooth storage

Anterior:

- X-small*: 67 Sets / 402 Anteriors
- Small*: 134 Sets / 804 Anteriors
- Medium*: 268 Sets / 1608 Anteriors
- Large*: 400 Sets / 2400 Anteriors

Available in VITA classical A1–D4® and VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades.**

*) Note: You will receive the most frequently used moulds and shades with the packaged tooth storage. We are also happy to put together storage systems according to your individual specifications.

**) see available shades

Campionario forme VITA PHYSIODENS

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori

VITA PHYSIODENS® Posterior

Per la riproduzione ottimale della funzione grazie alla morfologia naturale



Descrizione

Denti posteriori classe Premium, corposi come in natura, in composito MRP.

Vantaggi

- semplice ripristino della funzione masticatoria naturale grazie a superfici occlusali con morfologia naturale
- individuazione intuitiva della centrica e buona intercuspiazione grazie ad un design occlusale supportato dalla centrica
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
- mascheramento sicuro di strutture terziarie grazie all'elevato volume dentale (basale)
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria corposa basata sulle dimensioni dei denti naturali
- rilievi delle superfici occlusali/cuspidi completamente anatomici secondo il modello naturale

Caratteristiche particolari

- elevato volume (basale)
- inclinazione delle cuspidi superiori: circa $> 30^\circ$
- configurazione delle fessure fedele nel dettaglio

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Particolarmente indicati per: BLP (Protesi BIO-Logica) sec. Dr. E. End

Colori

- 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 6 x forme posteriori superiori
- 6 x forme posteriori inferiori

VITA PHYSIODENS® Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITA PHYSIODENS

Posteriori:

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili

Campionario forme VITA PHYSIODENS

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA PHYSIODENS Anteriori e Posteriori

VITA LUMIN® VACUUM Anterior



Descrizione

I denti in ceramica sono utilizzabili per tutte le indicazioni della protesi parziale e totale High Premium. Presentano un'elevata brillantezza grazie all'intrinseco effetto Lumin; conducibilità della luce, opalescenza e fluorescenza corrispondono a quelle dei denti naturali. I denti realizzati a mano in Germania sono dotati inoltre di elementi di ancoraggio meccanico per le basi di protesi, che conferiscono stabilità nel lungo periodo:

- Denti anteriori con perno rivestito d'oro inserito nel nucleo in ceramica dura

Materiale

I denti anteriori e posteriori sono realizzati nell'affermata ceramica feldspatica al quarzo VITA, presentano una elevata resistenza meccanica e all'abrasione, lunga durata e per le caratteristiche del materiale sono particolarmente indicati per pazienti con allergia al MMA.

Selezione

Anteriori

20 forme superiori:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 forme inferiori:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriori

3 forme SYNOFORM superiori / inferiori:

10S, 11S, 13S

3 forme CUSPIFORM superiori / inferiori:

40C, 41C, 44C

Colori

10 x colori VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Colori supplementari hanno un tempo di consegna.

Combinabilità

I denti anteriori VITA LUMIN VACUUM sono ottimali per entrambe le linee di denti posteriori VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Anterior Assortimenti

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Forme	Pz. per fila	Denominazione
20	6	Anteriores superiori
6	6	Anteriores inferiori

* nei colori VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

VITA LUMIN® VACUUM Posterior



Descrizione

I denti in ceramica sono utilizzabili per tutte le indicazioni della protesi parziale e totale High Premium. Presentano un'elevata brillantezza grazie all'intrinseco effetto Lumin; conducibilità della luce, opalescenza e fluorescenza corrispondono a quelle dei denti naturali. I denti realizzati a mano in Germania sono dotati inoltre di elementi di ancoraggio meccanico per le basi di protesi, che conferiscono stabilità nel lungo periodo:

- Denti posteriori con cavità in sottosquadro

Materiale

I denti anteriori e posteriori sono realizzati nell'affermata ceramica feldspatica al quarzo VITA, presentano una elevata resistenza meccanica e all'abrasione, lunga durata e per le caratteristiche del materiale sono particolarmente indicati per pazienti con allergia al MMA.

Selezione

Anteriori

20 forme superiori:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 forme inferiori:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Posteriori

3 forme SYNOFORM superiori / inferiori:

10S, 11S, 13S

3 forme CUSPIFORM superiori / inferiori:

40C, 41C, 44C

Colori

10 x colori VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Colori supplementari hanno un tempo di consegna.

Combinabilità

I denti anteriori VITA LUMIN VACUUM sono ottimali per entrambe le linee di denti posteriori VITA LUMIN VACUUM.

VITA LUMIN® VACUUM Posterior Assortimenti

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Forme	Pz. per fila	Denominazione
3	8	Posteriores Synoform superiori
3	8	Posteriores Synoform inferiori
3	8	Posteriores Cuspiform superiori
3	8	Posteriores Cuspiform inferiori

VITAPAN® Anterior

Per tutti i casi grazie all'ampia varietà di colori e forme



Descrizione

Denti anteriori universali con forme pronunciate e funzionali all'età, in composito MRP.

Vantaggi

- semplice realizzazione di protesi totali / parziali funzionali all'età
grazie alla varietà di forme pronunciate e funzionali all'età
- buona riproduzione cromatica in presenza di dentatura residua
grazie all'eccellente corrispondenza con la scala colori
- effetto cromatico naturale
grazie all'andamento cromatico 3D integrato dall'area cervicale al bordo incisale
- resistenza eccellente
grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti
grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria pronunciata e funzionale all'età per protesi totali / parziali
- bordo incisale piatto, con abrasioni come in natura
- area cervicale stretta

Caratteristiche particolari

- equilibrio armonioso tra croma e traslucenza
- tessitura superficiale uniforme, caratteristica dei pazienti anziani
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 28 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 31 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 13 x forme anteriori inferiori

VITAPAN® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN

- X-Small*: 67 file / 402 anteriori
- Small*: 134 file / 804 anteriori
- Medium*: 268 file / 1.608 anteriori
- Large*: 400 file / 2.400 anteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili


Campionario forme VITAPAN

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN Anteriori

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior

Per il semplice ripristino della funzione masticatoria in protesi totale / parziale

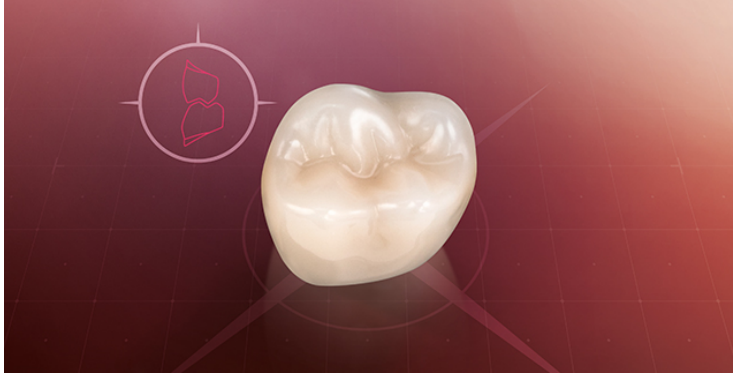

Descrizione

Denti posteriori sottili con rilievo occlusale pronunciato, in composito MRP.

Vantaggi

- semplice ripristino della funzione masticatoria in protesi totale / parziale grazie al pronunciato rilievo occlusale per una buona identificazione della centrica e intercuspidação
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria fine e sottile che lascia ampio spazio libero per la lingua e consente masticazione efficace
- rilievo pronunciato delle superfici occlusali / cuspidi per una buona identificazione della centrica e intercuspidação

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 23° - 28°
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per concetti di occlusione buccale

Colori

- 27 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1–5M3
- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 6 x anteriori superiori
- 6 x forme posteriori inferiori

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN CUSPIFORM

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili


Campionario forme VITAPAN CUSPIFORM

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN CUSPIFORM Posteriori

VITAPAN SYNOFORM® Posterior

Per una valida funzione in gerontoprotesi grazie al rilievo occlusale piatto

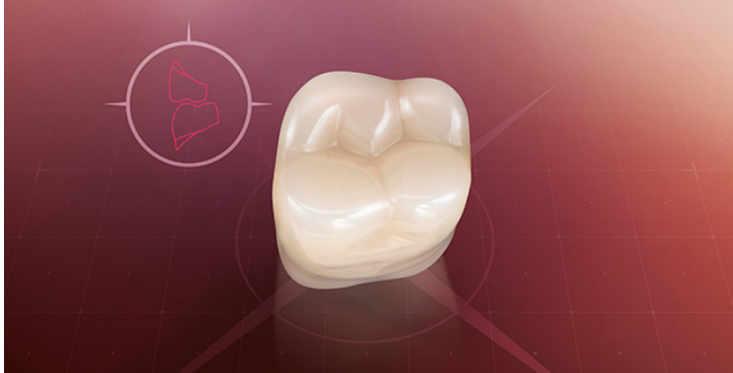

Descrizione

Denti posteriori sottili con rilievo occlusale piatto in composito MRP.

Vantaggi

- semplice ripristino della funzione masticatoria in gerontoprotesi grazie al rilievo occlusale piatto per un'ampia libertà di movimento
- resistenza eccellente grazie alla caricabilità elevata e alla stabilità all'abrasione
- molabilità e lucidabilità efficienti grazie all'ottima omogeneità merceologica e alla stabilità marginale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria fine e sottile che lascia uno spazio libero più ampio per la lingua
- rilievo delle superfici occlusali / cuspidi ridotto e piatto per ampie possibilità di movimento

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 6°
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas
- Prótesis parciales
- Prótesis provisionales
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis con ataches y esqueléticas

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 15 x colori VITA classical A1–D4® A1–D4 (senza B1)

File

- 5 x anteriori superiori
- 5 x forme posteriori inferiori

VITAPAN SYNOFORM® Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITAPAN SYNOFORM

- X-Small*: 50 file / 400 posteriori
- Small*: 100 file / 800 posteriori
- Medium*: 200 file / 1.600 posteriori
- Large*: 300 file / 2.400 posteriori

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4@**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

***) v. colori disponibili


Campionario forme VITAPAN SYNOFORM

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITAPAN SYNOFORM Posteriori

VITA MFT® Anterior

Per una solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale

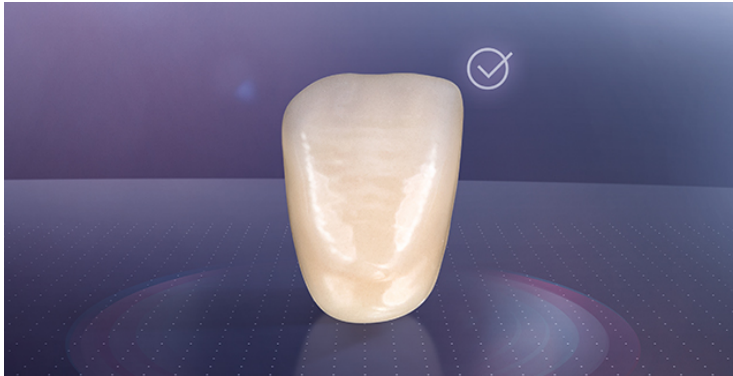

Descrizione

Denti anteriori Basic in polimero HC per solide protesi standard.

Vantaggi

- realizzazione sicura di una valida protesi estetica grazie a caratteristiche incisali e angolari con conformazione secondo il modello naturale
- agevole riproduzione di giochi di luci naturali grazie ad un rapporto equilibrato tra dentina e smalto, mammelloni e tessitura integrati
- riproduzione affidabile del colore grazie ad una buona fedeltà cromatica allo standard di colore VITA (VITA classical A1–D4®)

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentaria universale con conformazione secondo il modello naturale
- design incisale di forma elegante e conformazione secondo il modello naturale

Caratteristiche particolari

- rapporto equilibrato smalto-dentina per un gioco di luce naturale
- tessitura superficiale ricca di sfumature con mammelloni integrati
- struttura a stratificazione 3D per una transizione cromatica naturale

Indicazioni

- solide soluzioni standard per protesi totale / parziale

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Colori

- 15 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 16 x colori VITA classical A1–D4®*

* Alcuni dei colori VITA MFT classical sono il miglior avvicinamento possibile ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

File

- 12 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme)
- 5 x forme anteriori inferiori

VITA MFT® Anterior Assortimenti

Magazzini denti VITA MFT

Magazzino 2S:

- 72 file / 432 anteriori*
- 48 file / 384 posteriori*

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili


Campionario forme VITA MFT

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA MFT Anteriori

VITA MFT® Posterior

Per tutti i concetti protesici, grazie al design oclusale multifunzionale

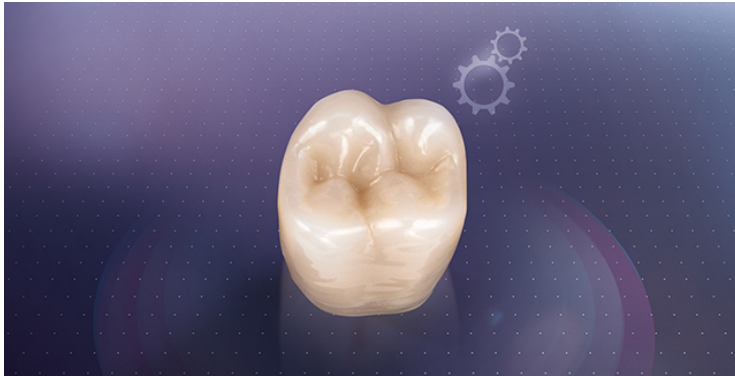

Descrizione

Denti posteriori Basic in polimero HC con superfici oclusali funzionalmente ottimizzate.

Vantaggi

- montaggio protesico semplificato grazie a punti di contatto predefiniti che assicurano un'intercuspidazione automatica
- elevata sicurezza di montaggio grazie alle superfici oclusali funzionalmente ottimizzate per una centrica guidata
- interventi di molaggio ridotti grazie al design basale ottimizzato
- uso universale e sicuro per tutti i concetti protesici, grazie al design oclusale multifunzionale

Caratteristiche dei denti

Forme

- geometria dentaria universale con estensione lingo-buccale naturale
- design oclusale multifunzionale con punti di contatto predefiniti

Caratteristiche particolari

- inclinazione delle cuspidi superiori: circa 15° - 20°

Indicazioni

- solide soluzioni standard per protesi totale / parziale

Concetti di protesi

Per tutti i correnti concetti protesici di occlusione linguale e bilanciata: ad es. secondo Gysi, Prof. A. Gerber, APF/TIF, ABC

Particolarmente indicati per: concetti di occlusione buccale e lingualizzata

Colori

- 13 x colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 16 x colori VITA classical A1–D4®*

* Alcuni dei colori VITA MFT classical sono il miglior avvicinamento possibile ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

File

- 3 x forme posteriori superiori
- 3 x forme posteriori inferiori

VITA MFT® Posterior Assortimenti

Magazzini denti VITA MFT

Magazzino 2S:

- 72 file / 432 anteriori*
- 48 file / 384 posteriori*

Disponibili in colorazione VITA classical A1–D4® e VITA SYSTEM 3D-MASTER®.**

*) Avvertenza: i magazzini denti preconfezionati contengono le forme ed i colori più diffusi. Si possono realizzare anche magazzini personalizzati.

**) v. colori disponibili

Campionario forme VITA MFT

Cofanetto in metallo con tutte le forme per la scelta dei denti:

- VITA MFT Posteriori

VITA VIONIC® WAX



Descrizione

Dischi in cera per l'esecuzione del montaggio in cera.

Vantaggi

- confortevole prova del montaggio in cera grazie alla realizzazione CAD/CAM di protesi a formato pieno, in cera bianca
- montaggio in cera preciso grazie a cavità fresate esattamente secondo la progettazione digitale
- correzione agevole perchè il montaggio in cera può essere modificato durante la prova

Caratterizzazione

VITA VIONIC WAX

- dischi in cera sintetica di forma stabile, resistenti alla temperatura

Indicazioni

Soluzione protesica ottimale per:

- protesi digitali

Colori

- Pink (rosa)
- White (bianco)

VITA VIONIC® WAX Articoli

VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADP9830
White, Ø 98.4 x h 30 mm	ADW9830

VITA VIONIC® BASE DISC



Descrizione

Disco in PMMA per la realizzazione di basi di protesi definitive.

Vantaggi

- efficiente realizzazione della base grazie al processo CAD/CAM senza messa in rivestimento manuale e pressatura
- semplice riproducibilità perchè il sistema consente il rifacimento della base con il solo clic del mouse
- eccellente adattamento alla cresta alveolare grazie alla realizzazione CAD/CAM della base senza fase di polimerizzazione

Caratterizzazione

VITA VIONIC BASE

- dischi in PMMA ad elevata reticolazione, polimerizzati industrialmente
- dischi in materiale omogeneo con stabilità di forma e colore ottimale

Indicazioni


Soluzione protesica ottimale per:

- protesi digitali

Colori

- Orange-Pink (arancio-rosa)
- Deep-Pink (rosa scuro)
- Light-Pink (rosa chiaro)

VITA VIONIC® BASE DISC HI

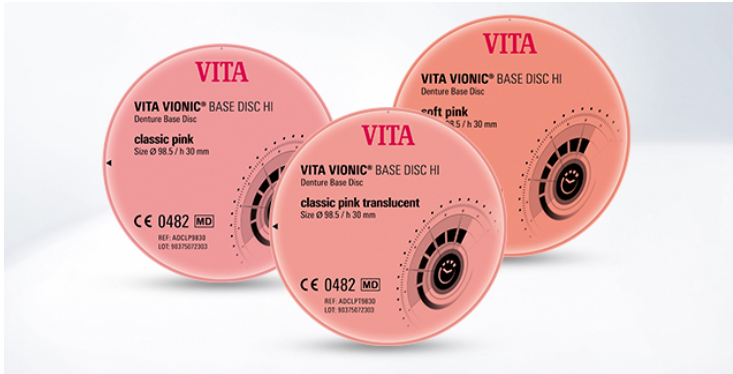

Descrizione

Migliora la tua qualità digitale con VITA VIONIC BASE DISC HI

Vantaggi

- Elevata stabilità grazie al materiale resistente agli urti
- Eccellente adesione alla cresta alveolare
- Nuova offerta di colori gengivali

Indicazioni

VITA VIONIC BASE DISC HI sono grezzi per fresatura dentali precolorati realizzati in PMMA resistente all'urto per la fabbricazione di basi per protesi rimovibili.

Colori

- classic pink
- classic pink translucent
- soft pink

VITA VIONIC® BASE DISC HI Articoli

VITA VIONIC® BASE DISC HI

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® BASE DISC HI, classic pink, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADCLP9830
VITA VIONIC® BASE DISC HI, classic pink translucent, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADCLPT9830
VITA VIONIC® BASE DISC HI, soft pink, Ø 98.5 x h 30 mm, 1 pc.	ADSOP9830

VITA VIONIC® BOND



Descrizione

Soluzione per il fissaggio di denti protesici nella VITA VIONIC BASE.

Vantaggi

- efficiente fissaggio adesivo di denti protesici senza dispendioso procedimento di polimerizzazione a caldo/freddo
- fissaggio preciso, privo di fessure dei denti nella cavità grazie al sistema di fissaggio a bassa viscosità, autopolimerizzante
- legame sicuro tra denti protesici e base grazie alla soluzione di fissaggio specifica

Caratterizzazione

VITA VIONIC BOND

- sistema di fissaggio bicomponente, autopolimerizzante a base MMA
- consistenza fluida per un'applicazione precisa sulle superfici di adesione
- crea uno strato reattivo all'interfaccia con le superfici di adesione per un legame sicuro

Indicazioni

Soluzione ottimale per:

- protesi digitali VITA VIONIC

Contenuto

Contenuto VITA VIONIC BOND Kit

- VITA VIONIC BOND I, vasetto, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, flacone, 1 ml
- Microbrush, 3 pz.

VITA VIONIC® BOND Assortimenti


VITA VIONIC® BOND

**VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush

VITA VIONIC® FRAME

Per l'efficiente realizzazione CAD/CAM di protesi con Ceramill® Motion 2

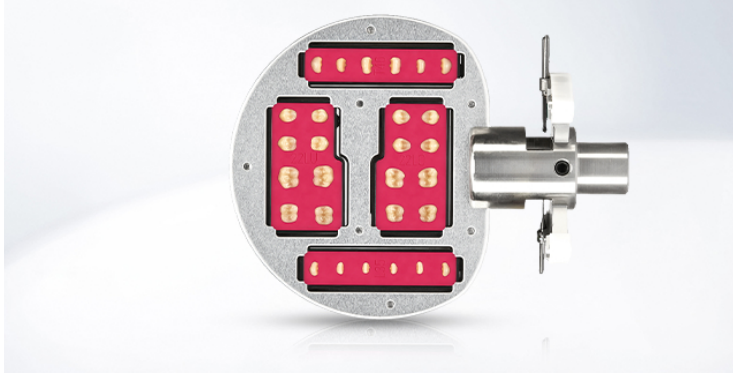

Descrizione

VITAPAN EXCELL DD FRAME
VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

Vantaggi

- semplice ricostruzione digitale della funzione individualizzata secondo diversi concetti e con integrazione delle classi di Angle
- completamento efficiente di protesi totali grazie alla modifica basale dei denti con un semplice clic, come per la progettazione protesica
- realizzazione CAD/CAM completamente digitale, sicura grazie al sistema di materiali coordinati incl. soluzione di fissaggio

Caratteristiche dei denti

DD FRAME per sistema di supporto Ceramill D-Set

- serve per la lavorazione CAM di denti protesici posizionati in un apposito telaio
- consente la tecnica fresaggio per le parti dentali basali e circolari

Indicazioni

I denti VITAPAN EXCELL DD FRAME e VITAPAN LINGOFORM DD FRAME vanno lavorati con le unità di fresaggio Amann Girrbach per:

- Protesi totali
- Protesi parziali

Concetti di protesi

Analisi del modello CAD:

- analisi sec. TIF con modulo software ceramill d-flow

Montaggio protesico CAD:

Opzioni di progettazione specifiche VITA consentono

- attuazione dei concetti di montaggio: buccale, linguale, morso incrociato e sec. il Prof. Dr. A. Gerber
- integrazione di situazioni occlusali (normocclusione / morso incrociato)
- integrazione di tutte le classi di Angle

Colori

- 6 x colori VITA classical A1–D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

File

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 x forme anteriori superiori*
- 4 x forme anteriori inferiori*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 x forme posteriori superiori*
- 4 x forme posteriori inferiori*

*) Per ogni fila sup./inf. è previsto uno speciale telaio con denti integrati.

VITA VIONIC VIGO®



Descrizione

VITA VIONIC VIGO è una generazione completamente nuova di denti realizzati in polimero composito SE con un design perfezionato per la realizzazione digitale di protesi.

Vantaggi

- Incremento della produttività
Realizzazione economica senza alcun intervento manuale/ rifinitura CAM grazie ad un design dentale perfezionato per il workflow digitale
- Finalizzazione senza perdite di tempo
Finalizzazione veloce della protesi mediante fissaggio adesivo nella base dei denti già sabbiati cervicalmente, senza altri interventi
- Naturalezza con un semplice clic
Riproduzione efficiente della natura con denti preconfezionati con forme/ giochi di luce vitali e montaggi protesici digitali accessibili direttamente
- Sicurezza di processo
Realizzazione digitale sicura grazie ad un sistema di materiali coordinati, inclusa una soluzione esclusiva per il fissaggio preciso dei denti

Caratteristiche dei denti

Forme

- consente una riproduzione dettagliata della forma del dente e della papilla grazie alla conformazione corposa e vitale con liste palatali pronunciate

Caratteristiche particolari

- offre una buona dinamica di luce con eccellente traslucenza, opalescenza e fluorescenza grazie alla stratificazione con struttura 3D e alla pigmentazione romantica.
- presenta un gioco di luci molto naturale grazie alla tessitura superficiale ricca di sfumature

Indicazioni

Per una produzione digitale ad alta efficienza di protesi totali con i consueti sistemi aperti CAM e di stampa 3D

Concetti di protesi

- opzioni illimitate di design personalizzato grazie alle biblioteche VITA con la più ampia gamma di concetti di montaggio che includono classe/posizione (buccale, linguale, morso incrociato, Prof. Dr. A. Gerber)

Colori

VITA classical A1–D4®-/colori Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

File

- 8 x forme anteriori superiori
- 4 x forme anteriori inferiori
- 4 x forme posteriori superiori & inferiori



VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Disco in composito da fresare per la realizzazione di elementi dentali per protesi totali e parziali



Descrizione

Qualità digitale a un livello successivo con VITA VIONIC DENT DISC multiColor. Utilizzabile in un sistema aperto e in modo flessibile per protesi totali e parziali.

Vantaggi

- Resistente all'abrasione e duraturo
- Facile da lavorare e da lucidare
- Andamento cromatico con perfetta corrispondenza allo standard cromatico VITA

Indicazioni

I VITA VIONIC DENT DISC multiColor sono dischi in composito da fresare per la realizzazione di elementi dentali per protesi totali e parziali.

Colori

VITA classical A1–D4® -/colori Bleach: 0 M1, A1, A2, A3, A3,5, B3, D3

Geometrie

Confezione da 1 pz.

Ø 98,4 x h 20 mm

Compatibilità di sistema

Adatto a tutte le macchine **fresatrici aperte** con attacco universale del disco.

VITA VIONIC DENT DISC multiColor è stato convalidato con i seguenti produttori di sistemi partner:

- imes-icore GmbH (CORiTEC® one+, 150i series, 250i series, 350i series, 650i series)
- vhf camfacture AG (R5, S5, K5+, K5, E5)
- Dentsply Sirona (inLab MC X5)
- DGSHAPE/Roland DGA (DWX Linie)

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor Articoli

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor VITA classical A1-D4®


Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA19820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA29820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA359820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADA39820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, B3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADB39820
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, D3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ADD39820

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, 0M1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	AD0M19820

Libreria di denti digitale VITA VIONIC DIGITAL VIGO

Geometrie dentali multifunzionali per la progettazione di protesi

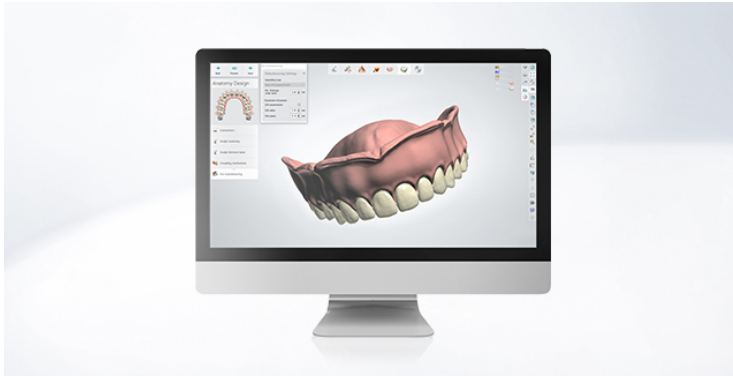

Descrizione

Dati dentali multifunzionali per maggiori possibilità con la banca dati di denti protesici VITA VIONIC DIGITAL VIGO. Esportazione dei dati di progettazione per la stampa 3D o la fresatura di protesi try-in, basi protesiche ed elementi dentali, oppure per la progettazione di protesi in combinazione con i denti protesici prefabbricati VITA VIONIC VIGO.

Compatibilità di sistema

La banca dati di denti protesici VITA VIONIC DIGITAL VIGO è disponibile in 3Shape ed exocad.

Vantaggi

Flessibile

- per protesi totale o parziale
- per lavori fresati e stampati
- 7 concetti protesici, incl. morso incrociato, tutte e 4 le classi di morsi à la più ampia scelta di tipologie di montaggio

Efficiente

- tutto in una banca dati
- facile selezione di forme adatte grazie al design dentale multifunzionale
- adattamento rapido e semplice delle proposte iniziali

Indicazioni

Banca dati di denti protesici per la progettazione di protesi nel software (modulo Denture per protesi complete, 28/14)

Geometrie

La banca dati di denti protesici è disponibile presso i seguenti fornitori di software CAD:

- 3Shape A/S
- exocad GmbH

Libreria di denti digitale VITA VIONIC DIGITAL VIGO Articoli

VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

Denominazione	Cod.
VITA VIONIC® DIGITAL VIGO 2.0 for 3Shape Licenza dell'utente finale per l'utilizzo della libreria digitale VITA (VITA VIONIC DIGITAL VIGO) per l'indicazione di restauri protesici rimovibili. Condizioni di utilizzo disponibili all'indirizzo https://hs.vita-zahnfabrik.com/it/vita-vionic-digital-vigo-terms-of-use .	ADVDV3SV20

Adesivo VITACOLL®



Descrizione

VITACOLL realizza l'adesione affidabile tra denti in resina e materiale per basi. Per la molteplicità dei diversi materiali per basi di protesi, l'odontotecnico responsabile ha spesso difficoltà a riconoscere se questi materiali si uniscono in modo ineccepibile con i denti in resina di sua scelta. Con l'uso di VITACOLL si ha questa sicurezza.

Flacone da 100 ml

Vantaggi

L'adesivo VITACOLL realizza un legame chimico affidabile tra denti in resina e materiali polimerizzabili a caldo e a freddo, nonché materiali iniettabili a base di polimetilmetacrilato, evitando il distacco dei denti dalla base della protesi.

Adesivo VITACOLL® Articoli

Adesivo VITACOLL®

Denominazione	Cod.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

Isolante al silicone VITAFOL® H



Descrizione

VITAFOL H è un isolante al silicone per la protezione di denti in resina e ceramica in fase di realizzazione della protesi.

Vantaggi

- VITAFOL H serve per la protezione di denti in resina e ceramica. Fini modellazioni gengivali restano integre, parti ricoperte con VITAFOL H pulite e non devono più essere rifinite.
- Le parti ricoperte con VITAFOL H non devono più essere isolate rispetto al gesso. In tal modo si evita che l'isolante possa giungere sulle superfici basali dei denti. Nei denti in resina è così possibile evitare la formazione di uno strato di separazione tra denti e materiale per basi.
- Con VITAFOL H i denti sono protetti durante la pressatura e lo smuffolamento.

Isolante al silicone VITAFOL® H Assortimenti

Isolante al silicone VITAFOL® H



Assortimento triplo VITAFOL H A9FG*

Quantità	Contenuto	Materiale
3	70 ml	VITAFOL H pasta
3	15 ml	VITAFOL H indurente
3	80 g	VITAFOL H cristalli adesivi
1	pz.	blocco di miscelazione
1	pz.	pennello
		istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 300 protesi da 14 denti



Assortimento laboratorio VITAFOL H A9FL*

Quantità	Contenuto	Materiale
1	70 ml	VITAFOL H pasta
1	15 ml	VITAFOL H indurente
1	80 g	VITAFOL H cristalli adesivi
1	pz.	blocco di miscelazione
1	pz.	pennello
		istruzioni di impiego

* sufficiente per ca. 100 protesi da 14 denti

Isolante al silicone VITAFOL® H Articoli

Isolante al silicone VITAFOL® H

Denominazione	Cod.
VITAFOL H liquido indurente, 15 ml	A9F15
VITAFOL H cristalli adesivi, 80 g	A9F50
VITAFOL H pasta, 70 ml	A9F90
VITAFOL H blocco di miscelazione stampato, 50 fogli	A9FA
VITAFOL H pennello Nr. 11	A9FP

Mobiletto denti vario



Descrizione

Il mobiletto denti VITA vario offre ampie possibilità di immagazzinaggio, occupa poco spazio ed è la soluzione ottimale per la conservazione di tutti i magazzini di denti VITA.

Il mobiletto si basa su un sistema modulare di nuovo tipo, può essere ampliato in ogni momento con cassette supplementari ed è realizzato in un polimero color grigio neutro, di elevata qualità e resistenza.

I cassette scorrono agevolmente e possono essere estratti completamente grazie alle guide telescopiche bilaterali.

Il mobiletto denti VITA vario è parte del sistema VITA Modulbox, e quindi compatibile con tutti gli elementi modulari.

Selezione

Capacità per ogni cassetto:


72 x 6 = 432 Anteriori in file da 6

48 x 8 = 384 Posteriori in file da 8

Mobiletto denti vario Articoli

Mobiletto denti vario

Denominazione	Cod.
Mobiletto S10 con 10 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Mobiletto S12 con 12 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Mobiletto S2 con 2 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Mobiletto S4 con 4 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Mobiletto S6 con 6 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Mobiletto S8 con 8 cassette: dimensioni esterne: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8

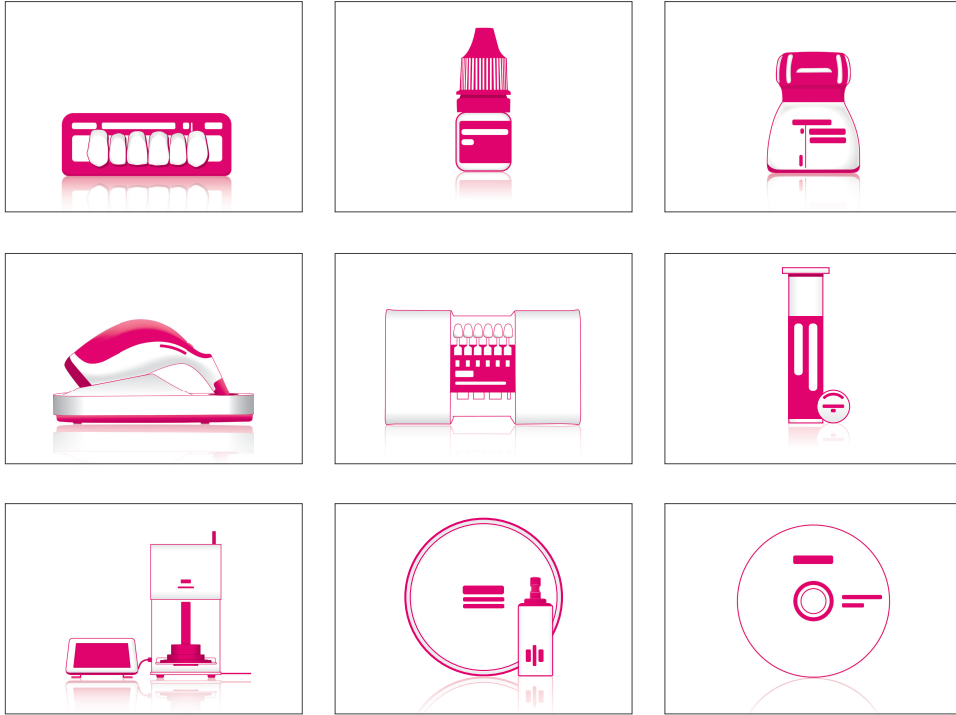

VITA – perfect match.

VITA

VITA ENAMIC®

Definisce ex novo la caricabilità.



Descrizione

- l'esclusiva ceramica ibrida a livello mondiale con struttura a reticolo ceramico e polimerico duale
- disponibile come variante mono- e multicromatica
Varianten in fino a 3 livelli di traslucenza (T, HT, ST)

Vantaggi

- riabilitazioni stabili grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile con caratteristiche di assorbimento delle forze occlusali
- riabilitazioni non/minimamente invasive, perché la ceramica ibrida elastica consente spessori ridotti
- strutture fedeli nel dettaglio, precise e sottili, grazie ad un materiale a doppia struttura con elasticità integrata
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura, senza alcuna cottura

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- ricostruzioni minimamente invasive con spessori ridotti
- corone altamente caricabili in situazioni di spazio limitato
- riabilitazione precisa di piccoli difetti (ad es. otturazioni indirette nell'area cervicale/inlay sottili)
- ricostruzione non/minimamente invasiva di tavolati occlusali (table-top)
- strutture di rivestimento monolitiche per ponti digitali a doppia struttura

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

- **VITA SYSTEM 3D MASTER® , traslucente (T)***
0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D MASTER® , altamente traslucente (HT)****
0M1, 1M1, 1M2*, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D MASTER® , supertraslucente (ST)*****
1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

*) Gamma limitata di colori per VITA ENAMIC IS-14: disponibile in 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

**) Gamma limitata di colori per VITA ENAMIC IS-16: disponibili in 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

***) disponibile nella variante EM-14

VITA ENAMIC® Articoli
VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYST

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-HT, EM-10	EC40M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
0M1-HT, EM-14	EC40M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EC40M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EC41M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EC41M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EC41M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EM-10	EC41M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EC41M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EC41M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EC42M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EC42M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EC42M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EC43M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EC43M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EC43M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M1-T, EM-14	EC4EM3112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-T, EM-14	EC4EM3132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-T, EM-14	EC4EM3192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-T, EM-14	EC4EM3212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EC4EM3282765 12 x 14 x 18 mm
2M1-HT, EM-10	EC4EM4112645 8 x 10 x 15 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M1-HT, EM-14	EC4EM4112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-HT, EM-10	EC4EM4132645 8 x 10 x 15 mm
2M3-HT, EM-14	EC4EM4132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-HT, EM-10	EC4EM4192645 8 x 10 x 15 mm
3M1-HT, EM-14	EC4EM4192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-HT, EM-10	EC4EM4212645 8 x 10 x 15 mm
3M3-HT, EM-14	EC4EM4212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EC4EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EC4EM4282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EC4EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EC4EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EC4EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EC4EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EC4EM7282765 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-HT, EM-10	EN1EM4022645 8 x 10 x 15 mm
0M1-HT, EM-14	EN1EM4022765 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EN1EM3022765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EN1EM4062645 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EN1EM4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EN1EM3062765 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2-HT, EM-10	EN1EM4072645 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EN1EM4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EN1EM3072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EN1EM4122645 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EN1EM4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EN1EM3122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EN1EM4202645 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EN1EM4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EN1EM3202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EN1EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EN1EM4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EN1EM3282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EN1EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EN1EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EN1EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EN1EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EN1EM7282765 12 x 14 x 18 mm

VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm

VITA ENAMIC® multiColor

Blank CAD/CAM in ceramica ibrida



Descrizione

VITA ENAMIC multiColor è un blocchetto in ceramica ibrida per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale con un clic. Questo blank CAD/CAM presenta un andamento cromatico integrato, finemente sfumato dalla zona cervicale a quella incisale.

Vantaggi

- riabilitazioni stabili grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile con caratteristiche di assorbimento delle forze occlusali
- riabilitazioni non/minimamente invasive, perché la ceramica ibrida elastica consente spessori ridotti
- strutture fedeli nel dettaglio, precise e sottili, grazie ad un materiale a doppia struttura con elasticità integrata
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura, senza alcuna cottura

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- riabilitazioni coronali estetiche con vivace gioco di colori / luci
- faccette sottili (No-Prep) per ricostruzioni cosmetiche

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA SYSTEM 3D MASTER® , altamente traslucente (HT)

1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

VITA ENAMIC® multiColor Articoli**VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EC4EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EC4EC4062885 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EC4EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EC4EC4072885 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EC4EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EC4EC4122885 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EC4EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EC4EC4202885 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EC4EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EC4EC4282885 18 x 16 x 18 mm

VITA ENAMIC® multiColor UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC multiColor UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EN1EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EN1EC4062885 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EN1EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EN1EC4072885 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EN1EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EN1EC4122885 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EN1EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EN1EC4202885 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EN1EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EN1EC4282885 18 x 16 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II

Affermato in milioni di casi.



Descrizione

VITABLOCS Mark II: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, monocromi, che si integrano cromaticamente in modo ottimale nella sostanza dentaria residua

Vantaggi

- riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- piccole ricostruzioni estetiche (inlay, onlay, corone parziali)

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

- **VITA SYSTEM 3D MASTER®**
0M1C (für I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- **VITA classical A1-D4®**
A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C

VITABLOCS® Mark II Articoli**VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VIT**

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, I-10	EC4A1CI105 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EC4A1CI125 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EC4A1CI14 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EC4A2CI105 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EC4A2CI125 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EC4A2CI14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, I-10	EC4A35CI105 8 x 10 x 15 mm
A3.5C, I-12	EC4A35CI125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, I-14	EC4A35CI14 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EC4A3CI105 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EC4A3CI125 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EC4A3CI14 12 x 14 x 18 mm
A4C, I-10	EC4A4CI105 8 x 10 x 15 mm
A4C, I-12	EC4A4CI125 10 x 12 x 15 mm
A4C, I-14	EC4A4CI14 12 x 14 x 18 mm
B2C, I-10	EC4B2CI105 8 x 10 x 15 mm
B2C, I-12	EC4B2CI125 10 x 12 x 15 mm
B2C, I-14	EC4B2CI14 12 x 14 x 18 mm
B3C, I-10	EC4B3CI105 8 x 10 x 15 mm
B3C, I-12	EC4B3CI125 10 x 12 x 15 mm
B3C, I-14	EC4B3CI14 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
C2C, I-10	EC4C2CI105 8 x 10 x 15 mm
C2C, I-12	EC4C2CI125 10 x 12 x 15 mm
C2C, I-14	EC4C2CI14 12 x 14 x 18 mm
C3C, I-10	EC4C3CI105 8 x 10 x 15 mm
C3C, I-12	EC4C3CI125 10 x 12 x 15 mm
C3C, I-14	EC4C3CI14 12 x 14 x 18 mm
D3C, I-10	EC4D3CI105 8 x 10 x 15 mm
D3C, I-12	EC4D3CI125 10 x 12 x 15 mm
D3C, I-14	EC4D3CI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VIT

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, I-12	EC40M1CI125 10 x 12 x 15 mm
0M1C, I-14	EC40M1CI14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EC41M1CI105 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EC41M1CI125 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EC41M1CI14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, I-10	EC41M2CI105 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EC41M2CI125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EC41M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EC42M1CI105 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EC42M1CI125 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EC42M1CI14 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M2C, I-10	EC42M2CI105 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EC42M2CI125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EC42M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M3C, I-10	EC42M3CI105 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EC42M3CI125 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EC42M3CI14 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EC43M1CI105 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EC43M1CI125 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EC43M1CI14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EC43M2CI105 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EC43M2CI125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EC43M2CI14 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EC43M3CI105 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EC43M3CI125 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EC43M3CI14 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EC44M2CI105 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EC44M2CI125 10 x 12 x 15 mm
4M2C, I-14	EC44M2CI14 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Techn

VITABLOCS Mark II for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M1C, I-40/19	EC41M1CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, I-40/19	EC41M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, I-40/19	EC42M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, I-40/19	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm

VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, I-10	EN1M0202360 8 x 10 x 15 mm
0M1C, I-12	EN1M0202372 10 x 12 x 15 mm
0M1C, I-14	EN1M0202384 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EN1M0206360 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EN1M0206372 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EN1M0206384 12 x 14 x 18 mm
1M2C, I-10	EN1M0207360 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EN1M0207372 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EN1M0207384 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EN1M0211360 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EN1M0211372 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EN1M0211384 12 x 14 x 18 mm
2M2C, I-10	EN1M0212360 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EN1M0212372 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EN1M0212384 12 x 14 x 18 mm

Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M3C, I-10	EN1M0213360 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EN1M0213372 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EN1M0213384 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EN1M0219360 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EN1M0219372 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EN1M0219384 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EN1M0220360 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EN1M0220372 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EN1M0220384 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EN1M0221360 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EN1M0221372 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EN1M0221384 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EN1M0228360 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EN1M0228372 10 x 12 x 15 mm
4M2C, I-14	EN1M0228384 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, I-10	EN1M0236360 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EN1M0236372 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EN1M0236384 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EN1M0237360 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EN1M0237372 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EN1M0237384 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EN1M0238360 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EN1M0238372 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EN1M0238384 12 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte

Affermato in milioni di casi.



Descrizione

VITABLOCS TriLuxe forte: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con andamento cromatico integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali

Vantaggi

- riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- corone e faccette altamente estetiche in zone visibili

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

- **VITA SYSTEM 3D MASTER®**
0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- **VITA classical A1-D4®**
A1C, A2C, A3C, A3.5C

VITABLOCS® TriLuxe forte Articoli

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, TF-12	EC4A1CTF125 10 x 12 x 15 mm
A1C, TF-14	EC4A1CTF14 12 x 14 x 18 mm
A1C, TF-14/14	EC4A1CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A2C, TF-12	EC4A2CTF125 10 x 12 x 15 mm
A2C, TF-14	EC4A2CTF14 12 x 14 x 18 mm
A2C, TF-14/14	EC4A2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-12	EC4A35CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, TF-14	EC4A35CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-14/14	EC4A35CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3C, TF-12	EC4A3CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3C, TF-14	EC4A3CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3C, TF-14/14	EC4A3CTF1414 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, TF-12	EC40M1CTF125 10 x 12 x 15 mm
0M1C, TF-14	EC40M1CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, TF-12	EC41M1CTF125 10 x 12 x 15 mm
1M1C, TF-14	EC41M1CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, TF-12	EC41M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, TF-14	EC41M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, TF-14/14	EC41M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-12	EC42M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, TF-14	EC42M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-14/14	EC42M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-12	EC43M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, TF-14	EC43M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-14/14	EC43M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, TF-12	EN1MU2366845 10 x 12 x 15mm
A1C, TF-14	EN1MU2366965 12 x 14 x 18mm
A1C, TF-14/14	EN1MU2367085 14 x 14 x 18mm
A2C, TF-12	EN1MU2376845 10 x 12 x 15mm
A2C, TF-14	EN1MU2376965 12 x 14 x 18mm
A2C, TF-14/14	EN1MU2377085 14 x 14 x 18mm
A3C, TF-12	EN1MU2386845 10 x 12 x 15mm
A3C, TF-14	EN1MU2386965 12 x 14 x 18mm
A3C, TF-14/14	EN1MU2387085 14 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-12	EN1MU2396845 10 x 12 x 15mm
A3.5C, TF-14	EN1MU2396965 12 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-14/14	EN1MU2397085 14 x 14 x 18mm

VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2C, TF-12	EN1MU2076845 10 x 12 x 15mm
1M2C, TF-14	EN1MU2076965 12 x 14 x 18mm
1M2C, TF-14/14	EN1MU2077085 14 x 14 x 18mm
2M2C, TF-12	EN1MU2126845 10 x 12 x 15mm
2M2C, TF-14	EN1MU2126965 12 x 14 x 18mm
2M2C, TF-14/14	EN1MU2127085 14 x 14 x 18mm
3M2C, TF-12	EN1MU2206845 10 x 12 x 15mm
3M2C, TF-14	EN1MU2206965 12 x 14 x 18mm
3M2C, TF-14/14	EN1MU2207085 14 x 14 x 18mm

VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M2C, TF-40/19	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, TF-40/19	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, TF-40/19	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm

VITABLOCS RealLife®

Affermato in milioni di casi.



Descrizione

VITABLOCS RealLife: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con struttura 3D integrata per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale nel settore frontale

Vantaggi

- riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- corone frontali altamente estetiche

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA SYSTEM 3D MASTER®

0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C e 3M2C

VITABLOCS RealLife® Articoli

VITABLOCS RealLife® for CEREC®/inLab®

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, RL-14/14	EC40M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M1C, RL-14/14	EC41M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M2C, RL-14/14	EC41M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M1C, RL-14/14	EC42M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, RL-14/14	EC42M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, RL-14/14	EC43M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC

Vetroceramica. Rivoluzionaria.



Descrizione

- generazione di vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio, ad alta resistenza
- disponibile in blocchetti monocromatici in due livelli di traslucenza (T, HT)

Vantaggi

- elevata sicurezza grazie alla matrice vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio
- risultati precisi grazie alla stabilità dei bordi
- lavorazione semplice grazie alla buona lucidabilità e all'elevata stabilità di cottura
- estetica brillante grazie a traslucenza, opalescenza e fluorescenza integrate

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

Molteplici possibilità (estetiche) grazie ad un'ampia gamma di indicazioni:

- corone posteriori
- corone frontali
- corone su impianti
- faccette

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

- **VITA classical A1-D4®**, ad alta traslucenza (HT)
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- **VITA classical A1-D4®**, traslucente (T)
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- **VITA SYSTEM 3D MASTER®**, ad alta traslucenza (HT)
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D MASTER®**, traslucente (T)
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

VITA SUPRINITY® PC Assortimenti

VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA SYSTEM 3D-MASTER® EC4S0TSETC3D

Quantità	Contenuto	Materiale
12	PC	inLab 0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT, 0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

VITA SUPRINITY® PC Starter Set technical VITA SYSTEM 3D-MASTER® EC4S0TSETT3D

Quantità	Contenuto	Materiale
12	PC	inLab 0M1-HT, 1M1-HT, 1M2-HT, 2M2-HT, 3M2-HT, 4M2-HT, 0M1-T, 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®



VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA classical A1-D4® EC4S0TSETC

Quantità	Contenuto	Materiale
16	PC	inLab A1-T - 0M1-HT
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical



**VITA SUPRINITY® PC STARTER SET technical VITA classical A1-D4®
EC4S0STSETT**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	PC	inLab A1-T - 0M1-HT
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

VITA SUPRINITY® PC Articoli

VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-T, PC-14	EC4S010001 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, PC-14	EC4S010004 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, PC-14	EC4S010005 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, PC-14	EC4S010009 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, PC-14	EC4S010016 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, PC-14	EC4S010023 12 x 14 x 18 mm
0M1-HT, PC-14	EC4S010101 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, PC-14	EC4S010104 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, PC-14	EC4S010105 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, PC-14	EC4S010109 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, PC-14	EC4S010116 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, PC-14	EC4S010123 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EC4S010030 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EC4S010031 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EC4S010032 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EC4S010033 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EC4S010036 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EC4S010040 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EC4S010043 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EC4S010130 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EC4S010131 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EC4S010132 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EC4S010133 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EC4S010136 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EC4S010140 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EC4S010143 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
OM1-T, PC-14	EN1S03024445 12 x 14 x 18 mm
OM1-HT, PC-14	EN1S04024445 12 x 14 x 18 mm

VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EN1S03364445 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EN1S03374445 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EN1S03384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EN1S03394445 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EN1S03424445 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EN1S03464445 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EN1S03494445 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EN1S04364445 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EN1S04374445 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EN1S04384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EN1S04394445 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EN1S04424445 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EN1S04464445 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EN1S04494445 12 x 14 x 18 mm



VITA YZ® XT

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ XT sono blanks in ZrO_2 extra-traslucente per la realizzazione di riabilitazioni frontali monolitiche e con rivestimento estetico parziale.

VITA YZ XT è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ XT^{White} (non cromatizzato)
- VITA YZ XT^{Color} (monocromatico, colore naturale)
- VITA YZ XT^{Multicolor} (policromatico, colore naturale)

Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

Indicazioni

VITA YZ XT è indicato per:

- tipo II, classe 4a
- corone singole e ponti fino a 3 elementi completamente anatomici
- strutture per corone singole e ponti fino a 3 elementi in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

Colori

- VITA YZ XT^{White}
non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ XT SHADE LIQUIDS
- VITA YZ XT^{Color}
VITA classical A1-D4®
tutto 16 colori VITA classical A1–D4
- VITA YZ XT^{Multicolor}
VITA classical A1-D4®
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

VITA YZ® XT Articoli

VITA YZ® XT Disc

VITA YZ XT White, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYX6981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYX6981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYX6982000
Ø 98.4 x h 25 mm	EDWYX6982500

VITA YZ XTColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981840
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981846

Denominazione	Cod. 1 pc.
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982051
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982547
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYX6982551

VITA YZ XTMulticolor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981439
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981442
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981839
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981842
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981846
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982239
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982242
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982249

VITA YZ® ST

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ ST sono blanks in ZrO₂ super-traslucente per la realizzazione di riabilitazioni posteriori monolitiche e con rivestimento estetico parziale.

VITA YZ ST è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ ST^{White} (non cromatizzato)
- VITA YZ ST^{Color} (monocromatico, colore naturale)
- VITA YZ ST^{Multicolor} (policromatico, colore naturale)

Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

Indicazioni

VITA YZ ST è indicato per:

- tipo II, classe 5
- corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi** nel settore frontale e posteriore
- strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi** nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

* ponti e strutture per ponti con max. due elementi intermedi contigui

** In Canada VITA YZ ST è autorizzato limitatamente per ponti con max. 6 elementi e max. due elementi intermedi contigui.

Colori

- **VITA YZ ST^{White}**
non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ ST SHADE LIQUIDS
- **VITA YZ ST^{Color}**
VITA classical A1-D4®
tutto 16 colori VITA classical A1–D4
VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M1, 2M1, 3M1
- **VITA YZ ST^{Multicolor}**
VITA classical A1-D4®
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2
VITA SYSTEM 3D-MASTER®
0M1, 1M1, 2M1, 3M1, 4M1

VITA YZ® ST Articoli**VITA YZ® ST Disc**

VITA YZ STWhite, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYS7981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYS7981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYS7982000
Ø 98.4 x h 25 mm	EDWYS7982500

VITA YZ STColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
1M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981406
2M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981411
3M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981419
1M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981806
2M1, 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981811
3M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981819
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981840

Denominazione	Cod. 1 pc.
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981846
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982051
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982547

Denominazione	Cod. 1 pc.
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982551

VITA YZ STMulticolor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
0M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981402
1M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981406
2M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981411
3M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981419
4M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981427
0M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981802
1M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981806
2M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981811
3M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981819
4M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981827
0M1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982202
1M1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982206
2M1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982211
3M1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982219
4M1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982227
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981439
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981442
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981839
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981842
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981846

Denominazione	Cod. 1 pc.
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982239
B1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982241
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982242
C1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982245
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982249

VITA YZ® HT

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ HT sono blanks in ZrO_2 -altamente traslucente per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.

VITA YZ è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ HT^{White} (non cromatizzato)
- VITA YZ HT^{Color} (monocromatico, colore naturale)

Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

Indicazioni

VITA YZ HT è indicato per:

- tipo II, classe 5
- corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- telescopi primari

* ponti e strutture pe r ponti con max. due elementi intermedi contigui

Colori

- **VITA YZ HT^{White}**
non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ HT SHADE LIQUIDS
- **VITA YZ HT^{Color}**
VITA classical A1-D4®
A1, A2, A3
VITA SYSTEM 3D-MASTER®
1M2, 2M2, 3M2

VITA YZ® HT Articoli
VITA YZ® HTWhite

VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4Y14007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4Y14008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55/19	-	EC4Y14009842 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4Y14008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

VITA YZ® HT Disc

Denominazione	Cod.
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDY14981200
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY14981400
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 16 mm, 1 pc.	ECDY14981600
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY14981800
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY14982000
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY14982500
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981407
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981412
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981420
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981807
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981812
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981820
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982007
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982012
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982020
VITA YZ HTCColor 1M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982507
VITA YZ HTCColor 2M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982512
VITA YZ HTCColor 3M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982520
VITA YZ HTCColor A1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981436
VITA YZ HTCColor A2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981437
VITA YZ HTCColor A3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981438
VITA YZ HTCColor A1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981836
VITA YZ HTCColor A2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981837
VITA YZ HTCColor A3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981838

Denominazione	Cod.
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982036
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982037
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982038
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982536
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982537
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982538

VITA YZ[®] T

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



Descrizione

VITA YZ HT sono blanks in ZrO₂-traslucente per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.

VITA YZ T è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ T^{White} (non cromatizzato)
- VITA YZ T^{Color} (monocromatico, colore naturale)

Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

Indicazioni

VITA YZ T è indicato per:

- tipo II, classe 5
- corone completamente anatomiche e ponti* fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- strutture* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- telescopi primari

* ponti e strutture pe r ponti con max. due elementi intermedi contigui

Colori

- **VITA YZ T^{White}**
non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ T COLORING LIQUIDS
- **VITA YZ T^{Color}**
precromatizzato nei colori/livelli di valore LL1 (light)*, LL2 (medium) e LL3 (intense)

*) YZ T^{Color} in geometrie a blocchetto sono disponibili solo in LL1

VITA YZ® T Articoli
VITA YZ® TWhite

VITA YZ TWhite for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3008162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

VITA YZ® TColor

VITA YZ TColor LL1/light for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3617804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3618042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3618162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3618401 65 x 25 x 22 mm	-	-

VITA YZ® T Disc

VITA YZ TWhite, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 12 mm	ECDYW3981200
Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYW3981400
Ø 98.4 x h 16 mm	ECDYW3981600
Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYW3981800
Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYW3982000
Ø 98.4 x h 25 mm	ECDYW3982500

VITA YZ TColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
LL1/light, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981461
LL1/light, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981861
LL1/light, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982061
LL2/medium, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981462
LL2/medium, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981862
LL2/medium, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982062
LL3/intense, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981463
LL3/intense, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981863

VITA CAD-Temp[®] monoColor VITA CAD-Temp[®] monoColor DISC

Soluzioni ottimali per provvisori di riabilitazione.



Descrizione

composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione

Vantaggi

- buona stabilità di lungo periodo grazie a buona resistenza superficiale e resistenza alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca)
- aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche
- realizzazione efficiente di provvisori grazie alla veloce realizzazione CAD/CAM

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi, corone provvisorie nel settore posteriore

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

0M1T (per CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T

**VITA CAD-Temp® monoColor,
VITA CAD-Temp® monoColor DISC Articoli**
VITA CAD-Temp® monoColor for CEREC®/inLab®

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EC40M1TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC40M1TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-40	-	EC41M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-55	EC41M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EC42M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CT-55	EC42M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EC43M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CT-55	EC43M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-

VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm

VITA CAD-Temp® monoColor Universal

VITA CAD-Temp monoColor Universal, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EN1CB2021682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20216810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-40	-	EN1CB2071682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20716810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-55	EN1CB2071801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EN1CB2121682 15,5 x 19 x 39mm	-
2M2T, CT-55	EN1CB2121801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EN1CB2201682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB22016810 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CT-55	EN1CB2201801 15,5 x 19 x 55mm	-	-

VITA CAD-Temp® monoColor DISC

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp monoColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC1M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC2M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC3M2TD98201

VITA CAD-Temp[®] multiColor VITA CAD-Temp[®] multiColor DISC

Soluzioni ottimali per provvisori di riabilitazione.



Descrizione

composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione

Vantaggi

- buona stabilità di lungo periodo grazie a buona resistenza superficiale e resistenza alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca)
- aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche
- realizzazione efficiente di provvisori grazie alla veloce realizzazione CAD/CAM

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- ponti provvisori con fino a 2 elementi intermedi, corone provvisorie nel settore frontale

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

1M2T, 2M2T, 3M2T

**VITA CAD-Temp® multiColor,
VITA CAD-Temp® multiColor DISC Articoli**
VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inL

VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	-	EC41M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CTM-85/40	EC41M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
2M2T, CTM-40	-	EC42M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CTM-85/40	EC42M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
3M2T, CTM-40	-	EC43M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CTM-85/40	EC43M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-

VITA CAD-Temp® multiColor Universal

VITA CAD-Temp multiColor Universal, 2 pcs. / 10 pcs.


Denominazione	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	EN1CA2071922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA20719210 15,5 x 19 x 39mm
2M2T, CTM-40	EN1CA2121922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA21219210 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CTM-40	EN1CA2201922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA22019210 15,5 x 19 x 39mm

VITA CAD-Temp® multiColor DISC

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp multiColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC1M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC2M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC3M2TMD98181

VITA CAD-Waxx

Soluzioni ottimali per wax-up digitali / dime di fresaggio

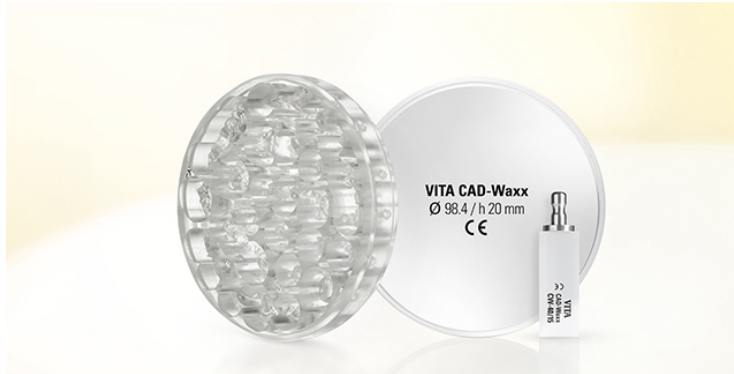

Descrizione

poliacrilato calcinabile senza residui per la realizzazione computerizzata di wax-up e dime chirurgiche

Vantaggi

- ricostruzione economica grazie alla modellazione computerizzata
- formatura e adattamento esatti grazie all'elevata resistenza alla torsione e precisione dimensionale
- fusioni prive di lacune e risultati di pressatura privi di porosità grazie alla completa calcinabilità del materiale CAD-Waxx

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- per la tecnica di pressatura/fusione e la realizzazione di dime chirurgiche

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA CAD-Waxx è trasparente

VITA CAD-Waxx Articoli

VITA CAD-Waxx for inLab®

VITA CAD-Waxx for inLab, 10 pcs.

Denominazione	Cod. 10 pcs.
CW-40/15	EC4CW4010 14 x 15 x 40 mm

VITA CAD-Waxx DISC

VITA CAD-Waxx DISC, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 20 mm	ECCWD98201

VITA ENAMIC® IS

Soluzioni ottimali per riabilitazioni dentali su impianti.



Descrizione

- blocchetti in ceramica ibrida, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio
- disponibili in ceramica ibrida VITA ENAMIC IS (T/HT) per ricostruzioni definitive

Vantaggi

- riabilitazioni stabili su impianti grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- corone-abutment sostenute da impianto (AC) e mesostrutture (MS) definitive

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA ENAMIC IS-14, traslucente (T)

Variante MS con interfaccia S o L in VITA SYSTEM
3D-MASTER: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

VITA ENAMIC IS-16, altamente traslucente (HT)

Variante AC con interfaccia S o L in VITA SYSTEM
3D-MASTER: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

VITA ENAMIC® IS Articoli**VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm

VITA CAD-Temp[®] IS

Soluzioni ottimali per riabilitazioni dentali su impianti.



Descrizione

- blocchetti in composito, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio
- disponibili in composito VITA CAD-Temp IS per riabilitazioni provvisorie

Vantaggi

- realizzazione efficiente di provvisori grazie al processo completamente digitale
- aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche

Indicazioni

Indicazioni raccomandate*

- riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli

*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

Colori

VITA CAD-Temp IS-16

Variante AC con interfaccia S o L in VITA SYSTEM
3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T

VITA CAD-Temp® IS Articoli

VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm

VITA Powder Scan Spray



Descrizione

VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio, di colore blu, nebulizzabile, al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficie dei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto-elettroniche con la tecnica CAD/CAM.

Con VITA Powder Scan Spray si opacizza la superficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner.

VITA Powder Scan Spray Articoli**Accessori Machinable Materials**

Denominazione	Cod.
VITA Powder Scan Spray (priva di biossido di titanio), 75 ml	ECSCAN75V2

VITA Firing Paste



Descrizione

VITA Firing Paste

Pasta refrattaria, pronta per l'uso per la realizzazione semplice e rapida di supporti di cottura individuali soprattutto per la tecnica di pittura e di stratificazione senza struttura, per evitare deformazioni dei restauri in fase di cottura. La consistenza cremosa e morbida assicura una eccellente lavorabilità.

Inlays, onlays, faccette e corone possono essere fissati senza problemi sui perni di platino o direttamente sui supporti di cottura o il cotone refrattario.

Dopo la cottura il materiale si elimina agevolmente dal lavoro.

VITA Firing Paste Articoli

Accessori universali

VITA Firing Paste, 3 x 12 ml / 12 ml

Denominazione		Cod. 3 x 12 ml	Cod. 12 ml
Confezione economica		EFP123V2	-
Confezione normale		-	EFP12V2

VITA ADIVA® IA-CEM

Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari



Descrizione

VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments individuali in titanio e biossido di zirconio.

Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.

VITA ADIVA® IA-CEM Assortimenti**VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET****VITA ADIVA® IA-CEM SET****FAIACEMSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Articoli

VITA ADIVA® IA-CEM

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

VITA Modulbox

Sistema modulare in resina



Descrizione

VITA MODULBOX è un sistema modulare nel formato base A3 per la conservazione duratura, chiara e merceologicamente corretta dei prodotti VITA in laboratorio e studio.

Vedi anche Mobiletto denti vario.

VITA Modulbox Articoli
VITA Modulbox


Denominazione		Cod.
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 20 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB20
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 55 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB55
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 80 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB80
VITA Modulbox base /coperchio senza guide completo di accessori		ZMBBD
Box die scorta VITABLOCS for CEREC con 1 cassetto altezza 80 mm ed 1 inserto Nr. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 1 con 1 cassetto, altezza 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 2 con 2 cassette, altezza 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 3 con 1 cassetto, altezza 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 4 con 2 cassette, altezza 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox elemento intermedio senza guide, completo di 3 tappi per montaggio		ZMBZ

VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS



Descrizione

Liquidi per la cromatizzazione manuale di restauri monolitici in VITA YZ XT White prima del processo di sinterizzazione.

I VITA YZ XT SHADE LIQUIDS sono disponibili in tutti i colori VITA classical A1–D4 e possono essere ulteriormente caratterizzati con i VITA YZ EFFECT LIQUIDS

VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS Assortimenti**VITA YZ® XT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®
EZ0CXK**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ XT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
5	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Brown, Orange, Grey, Blue, Pink
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® XT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®
EZ0CXCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ XT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS Articoli**VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS**

Denominazione	Cod.
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3650
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3750
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3850
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3950
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4050
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4150
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4250
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4350
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4450
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4550
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4650
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4750
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4850
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4950
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX5050
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX5150
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13

VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS



Descrizione

Liquidi per la cromatizzazione individuale di restauri monolitici in VITA YZ ST White prima del processo di sinterizzazione.

Oltre ai 16 colori VITA classical A1–D4 sono disponibili anche i VITA YZ EFFECT LIQUIDS come colori aggiuntivi per la caratterizzazione individuale.

VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS Assortimenti

**VITA YZ® ST SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®
EZOCSC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ ST SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
5	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Brown, Orange, Grey, Blue, Pink
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® ST SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®
EZOCSCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ ST SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS Articoli**VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS**

Denominazione	Cod.
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3650
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3750
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3850
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3950
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4050
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4150
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4250
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4350
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4450
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4550
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4650
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4750
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4850
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4950
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS5050
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS5150
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13

VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS



Descrizione

Liquidi per la cromatizzazione individuale di restauri monolitici in VITA YZ HT prima del processo di sinterizzazione.

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS sono disponibili in 7 colori VITA classical A1 – D4, 7 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER VITA YZ EFFECT LIQUIDS per le aree gengivali, cervicali e incisali.

VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS Assortimenti
**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set classical
EZ0CC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®
EZ0CYC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER
EZ0C3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER®
EZ0CY3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®
EZ0CYCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS Articoli**VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS**

Denominazione	Cod.
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0650
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0750
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2L1.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0850
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY1250
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2050
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2150
VITA YZ HT SHADE LIQUID 4M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3650
VITA YZ HT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3750
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID A4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B1, 50ml, 1pc.	EZ0CY4150
VITA YZ HT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4250
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B3, 50ml, 1pc.	EZ0CY4350
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4450
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C1, 50ml, 1pc.	EZ0CY4550
VITA YZ HT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4650
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C3, 50ml, 1pc.	EZ0CY4750
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4850
VITA YZ HT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D3, 50ml, 1pc.	EZ0CY5050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D4, 50ml, 1pc.	EZ0CY5150
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13

VITA YZ® EFFECT LIQUID



Descrizione

Liquidi effetto per la caratterizzazione individuale di restauri in VITA YZ HT White, VITA YZ ST White e VITA YZ XT White, disponibili in 11 colori.

Con Blue e Grey è possibile personalizzare le aree incisali e delle cuspidi. Orange e Brown possono essere usati per la configurazione di fessure o nelle zone interdentali e dei bordi coronali. Le tre tonalità Light Pink, Pink e Dark Pink permettono di ottimizzare la transizione alla gengiva.

VITA YZ® EFFECT LIQUID Assortimenti

**VITA YZ® EFFECT LIQUID SET classical
EZ0C1AS**

Quantità	Contenuto	Materiale
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Light Pink, Dark Pink
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Grey, Blue
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Orange, Brown
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
2	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

VITA YZ® EFFECT LIQUID Articoli**VITA YZ® EFFECT LIQUID**

Denominazione	Cod.
VITA YZ® EFFECT LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOC17420
VITA YZ® EFFECT LIQUID Grey, 20 ml, 1 pc.	EZOC17520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.	EZOC17620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.	EZOC17720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.	EZOC17820
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.	EZOC17920
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.	EZOC18020
VITA YZ® EFFECT LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.	EZOC18110
VITA YZ® EFFECT LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.	EZOC18350
VITA YZ® EFFECT LIQUID Light Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOC18520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Dark Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOC18620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Orange, 20 ml, 1 pc.	EZOC18720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Brown, 20 ml, 1 pc.	EZOC18820
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	ECOC13

VITA YZ® T COLORING LIQUIDS



Descrizione

Liquidi per la cromatizzazione completa o parziale di strutture fresate in VITA YZ T prima del processo di sinterizzazione. VITA YZ T COLORING LIQUID è disponibile in 4 differenti colori per riprodurre tutti i colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4 in combinazione con la ceramica per rivestimento estetico VITA VM 9.

VITA YZ® T COLORING LIQUIDS Assortimenti

VITA YZ® T COLORING LIQUIDS



VITA YZ T® COLORING LIQUID SET (Complete Set)
EZ0CZ500

Quantità	Contenuto	Materiale
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID intense
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral
4		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID
1		Guida colori VITA YZ T COLORING LIQUID



VITA YZ T® COLORING LIQUID light/pale, 250 ml (One Color Set)
con scodellina 90 ml
EZ0CZ67250

Quantità	Contenuto	Materiale
1	250 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID light/pale
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID

VITA YZ T® COLORING LIQUID medium, 250 ml (One Color Set)
con scodellina 90 ml
EZ0CZ68250

Quantità	Contenuto	Materiale
1	250 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID medium
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID

VITA YZ T® COLORING LIQUID intense, 100 ml (One Color Set)
con scodellina 90 ml
EZ0CZ69100

Quantità	Contenuto	Materiale
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID intense
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID


VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral, 100 ml (One Color Set)
con scodellina 90 ml
EZ0CZ84100

Quantità	Contenuto	Materiale
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID

VITA YZ® T COLORING LIQUIDS Articoli

VITA YZ® T COLORING LIQUIDS



Denominazione		Cod.
Guida colori VITA YZ T COLORING LIQUID		B428V1
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)		E008



VITA – perfect match.

VITA

VITA AMBRIA®



Descrizione

- Sistema di ceramica pressabile a base di disilicato di litio rinforzato con biossido di zirconio che assicura risultati altamente estetici e duraturi e nel contempo efficienza di lavorazione
- Il sistema di ceramica pressabile comprende pellets in ceramica pressabile in tre livelli di traslucenza (T/HT/ST) e due misure (S, L), sistema di cilindri, massa di rivestimento e liquido, nonché pistoni di pressatura

Vantaggi

- Riprodurre un gioco di colori e luci brillante e ricco di sfaccettature grazie ad un materiale di traslucenza, opalescenza e fluorescenza naturali
- Riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie a pellets di pressatura con un'ottima fedeltà cromatica e a componenti di sistema perfettamente coordinati
- Conseguire risultati di pressatura efficientemente precisi grazie allo strato di reazione minimizzato, essendo materiale e massa di rivestimento perfettamente coordinati
- Riabilitazioni di alta stabilità grazie alla ceramica al disilicato di litio rinforzata con biossido di zirconio ad alta resistenza (> 500 MPa)

Indicazioni

Per la realizzazione di ricostruzioni sottili come faccette, inlays/onlays, corone integrali/parziali altamente estetiche e ponti a tre elementi fino al 2. premolare.

VITA AMBRIA® Assortimenti

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

**VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®
LAMSKC**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	A2-T S
1	5 pcs.	A3-T S
4	100 g	VITA AMBRIA® INVEST P (Massa di rivestimento polvere)
1	100 ml	VITA AMBRIA® INVEST F (Liquido per massa di rivestimento)
4		VITA AMBRIA® PLUNGER, pistone monouso Ø 13 mm, 1 pz.
1	100 g	VITA AMBRIA® MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessimetro e base)
2	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		Cotone refrattario, 2 pz.
1	60 ml	misurino
1	12 ml	VITA Firing Paste Confezione normale

VITA AMBRIA® Articoli

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0363
VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0373
VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0383
VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0413
VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0423
VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0463
VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0493
VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0365
VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0375
VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0385
VITA AMBRIA®, A3.5-T, S, 5 pcs.	LAM030S0395
VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0415
VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0425
VITA AMBRIA®, B3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0435
VITA AMBRIA®, C1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0455
VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0465
VITA AMBRIA®, C3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0475
VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0495
VITA AMBRIA®, D3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0505
VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0363
VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0373
VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0383
VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0413
VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0423
VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0463
VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0493
VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0365
VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0375
VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0385
VITA AMBRIA®, A3.5-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0395
VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0415
VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0425
VITA AMBRIA®, B3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0435
VITA AMBRIA®, C1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0455
VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0465

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, C3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0475
VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0495
VITA AMBRIA®, D3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0505

VITA AMBRIA® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0045
VITA AMBRIA®, 1M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0065
VITA AMBRIA®, 1M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0075
VITA AMBRIA®, 2M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0115
VITA AMBRIA®, 2M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0125
VITA AMBRIA®, 3M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0195
VITA AMBRIA®, 3M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0205
VITA AMBRIA®, 4M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0275
VITA AMBRIA®, 4M2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0285
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0045
VITA AMBRIA®, 1M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0065
VITA AMBRIA®, 1M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0075
VITA AMBRIA®, 2M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0115
VITA AMBRIA®, 2M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0125
VITA AMBRIA®, 3M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0195
VITA AMBRIA®, 3M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0205
VITA AMBRIA®, 4M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0275
VITA AMBRIA®, 4M2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0285

VITA AMBRIA® ST

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, ENL-ST, S, 5 pcs.	LAM070S0705
VITA AMBRIA®, ENM-ST, S, 5 pcs.	LAM070S0715
VITA AMBRIA®, ENI-ST, S, 5 pcs.	LAM070S0725

VITA AMBRIA® MO

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, MO0, S, 5 pcs.	LAM130S0915
VITA AMBRIA®, MO1, S, 5 pcs.	LAM130S0925
VITA AMBRIA®, MO2, S, 5 pcs.	LAM130S0935

Accessori per Ceramica pressabile



Descrizione

Massa di rivestimento/Liquido

Massa di rivestimento con legante fosfatico idonea per speed con liquido specifica per pellets di pressatura VITA AMBRIA, per un esatto controllo dell'espansione e fluidità.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: confezione da 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: flacone da 1 litro

Pistone di pressatura


Pistone di pressatura monouso per un semplice impiego, senza perdite di tempo per sabbatura e preriscaldamento.

- VITA AMBRIA PLUNGER: confezione da 50 pz. (diametro 13 mm)

Accessori per Ceramica pressabile Articoli

Accessori per Ceramica pressabile

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA® MUFFLE BASE, composto da 3 ricambi, 100 g	LAM3MB100
VITA AMBRIA® MUFFLE BASE, composto da 3 ricambi, 200 g	LAM3MB200
VITA AMBRIA® MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessore e base), 100 g	LAM3MS100
VITA AMBRIA® MUFFLE SYSTEM, 3 pezzi (anello in silicone, spessore e base), 200 g	LAM3MS200
VITA AMBRIA® INVEST F (Liquido per massa di rivestimento), 1000 ml	LAMIF1000
VITA AMBRIA® INVEST P (Massa di rivestimento polvere), 50 x 100 g	LAMIP10050
VITA AMBRIA® PLUNGER (pistone monouso Ø 13 mm), 50 pz.	LAMP1350

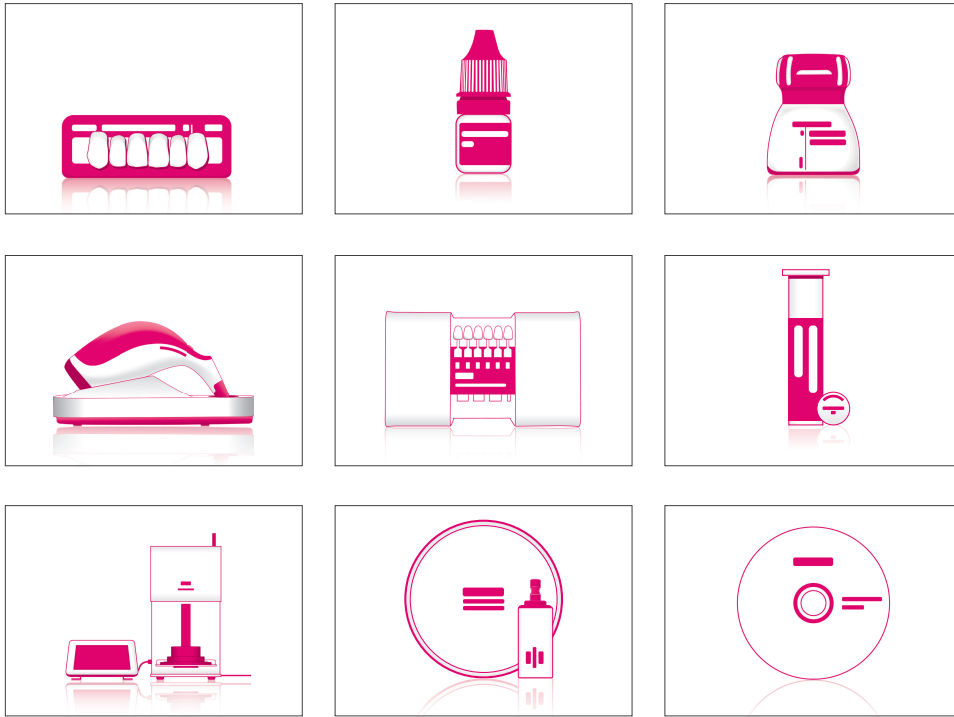

VITA – perfect match.

VITA

VITAVM®13

Per il rivestimento estetico di strutture metalliche con CET convenzionale



Descrizione

VITA VM 13 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, altamente estetica, perfettamente idonea per il CET delle classiche leghe ceramizzabili (ca. 13,8 – 15,2 $\mu\text{m}/\text{mK}$). Indipendentemente dal fatto che le leghe classiche vengano fuse, fresate o sinterizzate.

VITA VM 13 è una reale alternativa alla ceramica integrale – indicata per tutti i casi in cui occorre un'azione di mascheramento della struttura metallica.

La temperatura di cottura (cottura della dentina 880°C) offre ampia sicurezza di lavorazione, specialmente per le leghe con un basso punto di solidus (<1100°C).

I componenti principali sono feldspati di potassio e sodio di elevata purezza, che assicurano brillanti effetti cromatici ed altissimi valori di resistenza a flessione.

Grazie alla sua struttura omogenea e chiusa, il molaggio e la lucidatura di VITA VM 13 sono ottimali, soprattutto in situ. Ne conseguono superfici lisce e perfettamente compatte. Il deposito di placca sulla superficie ceramica è ridotto, agevolando al paziente le misure di igiene della riabilitazione di elevato valore.

VITA VM 13 è un componente di sistema di elevata qualità dell'innovativo concetto VITA VM – la soluzione universale per tutte le indicazioni correnti. Che si tratti di metallo-ceramica, ceramica integrale o composito: le possibilità sono infinite!

Per l'individualizzazioni si possono usare i colori di caratterizzazione VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO.

Vantaggi

- effetto cromatico naturale e dinamica di luce grazie alla struttura microfine
- retrazione minima per ridurre le cotture di integrazione
- eccellente modellabilità per un'applicazione rapida e mirata della ceramica
- gamma completa di masse aggiuntive per effetti eccellenti
- lavorazione efficiente ed economica
- individualizzabile con le VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
- sicurezza di processo grazie all'esperienza pluriennale
- disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-Master e VITA classical A1 – D4

VITAVM®13 Assortimenti
VITAVM®13 VITA classical A1-D4®

VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®
Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP BV13BUK12CV1

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS


VITAVM®13 ONE COLOR KIT A2 POWDER
Assortimento un solo colore per i primi test BV13OCCA2V3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A2
1	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA astina colore A2

VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP BV13BUK12V1

Quantità	Contenuto	Materiale
26	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®13 ONE COLOR KIT 2M2 POWDER
Assortimento un solo colore per i primi test
BV130CK2M2V3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA astina colore 2M2

VITAVM®13 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER
Assortimento un solo colore per i primi test
BV130CK3M2V3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA astina colore 3M2

VITAVM®13 masse aggiuntive
 utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®13 GINGIVA KIT
Masse gengivali di aspetto naturale
BV13GKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 MARGIN KIT
Per la realizzazione di spalle in ceramica
BV13MKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA VM 13 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®13 PROFESSIONAL KIT
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
BV13PKV2

Quantità	Contenuto	Materiale
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 13 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 13 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 13 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Guida colori VITA VM EFFECT CHROMA
1		Guida colori VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Guida colori VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®13 Articoli**VITAVM®13 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
A1	B453015
A2	B453025
A3	B453035
A3.5	B453045
A4	B453055
B1	B453065
B2	B453075
B3	B453085
B4	B453095
C1	B453105
C2	B453115
C3	B453125
C4	B453135
D2	B453145
D3	B453155
D4	B453165

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B4540112	B4540150
A2	B4540212	B4540250
A3	B4540312	B4540350
A3.5	B4540412	B4540450
A4	B4540512	B4540550
B1	B4540612	B4540650
B2	B4540712	B4540750
B3	B4540812	B4540850
B4	B4540912	B4540950
C1	B4541012	B4541050
C2	B4541112	B4541150
C3	B4541212	B4541250
C4	B4541312	B4541350
D2	B4541412	B4541450
D3	B4541512	B4541550
D4	B4541612	B4541650

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4543112	B4543150
A2	ENL	B4543212	B4543250
A3	ENL	B4543312	B4543350
A3.5	END	B4543412	B4543450
A4	END	B4543512	B4543550
B1	END	B4543612	B4543650
B2	END	B4543712	B4543750
B3	END	B4543812	B4543850
B4	END	B4543912	B4543950
C1	END	B4544012	B4544050
C2	END	B4544112	B4544150
C3	ENL	B4544212	B4544250
C4	ENL	B4544312	B4544350
D2	END	B4544412	B4544450
D3	END	B4544512	B4544550
D4	END	B4544612	B4544650

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4545112	B4545150
A2	ENL	B4545212	B4545250
A3	ENL	B4545312	B4545350
A3.5	END	B4545412	B4545450
A4	END	B4545512	B4545550
B1	END	B4545612	B4545650
B2	END	B4545712	B4545750
B3	END	B4545812	B4545850
B4	END	B4545912	B4545950
C1	END	B4546012	B4546050
C2	END	B4546112	B4546150
C3	ENL	B4546212	B4546250
C4	ENL	B4546312	B4546350
D2	END	B4546412	B4546450
D3	END	B4546512	B4546550
D4	END	B4546612	B4546650

VITAVM® 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
0M1	ENL	B4503112	B4503150	-
0M2	ENL	B4503212	B4503250	-
0M3	ENL	B4503312	B4503350	-
1M1	ENL	B4503412	B4503450	-
1M2	ENL	B4503512	B4503550	-
2L1.5	ENL	B4503612	B4503650	-
2L2.5	ENL	B4503712	B4503750	-
2M1	ENL	B4503812	B4503850	-
2M2	ENL	B4503912	B4503950	B45039250
2M3	ENL	B4504012	B4504050	B45040250
2R1.5	ENL	B4504112	B4504150	-
2R2.5	ENL	B4504212	B4504250	-
3L1.5	ENL	B4504312	B4504350	-
3L2.5	ENL	B4504412	B4504450	-
3M1	ENL	B4504512	B4504550	-
3M2	ENL	B4504612	B4504650	B45046250
3M3	ENL	B4504712	B4504750	B45047250

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
3R1.5	ENL	B4504812	B4504850	-
3R2.5	ENL	B4504912	B4504950	-
4L1.5	END	B4505012	B4505050	-
4L2.5	END	B4505112	B4505150	-
4M1	END	B4505212	B4505250	-
4M2	END	B4505312	B4505350	-
4M3	END	B4505412	B4505450	-
4R1.5	END	B4505512	B4505550	-
4R2.5	END	B4505612	B4505650	-
5M1	END	B4505712	B4505750	-
5M2	END	B4505812	B4505850	-
5M3	END	B4505912	B4505950	-

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
0M1	ENL	B4506112	B4506150	-
0M2	ENL	B4506212	B4506250	-
0M3	ENL	B4506312	B4506350	-
1M1	ENL	B4506412	B4506450	-
1M2	ENL	B4506512	B4506550	-
2L1.5	ENL	B4506612	B4506650	-
2L2.5	ENL	B4506712	B4506750	-
2M1	ENL	B4506812	B4506850	-
2M2	ENL	B4506912	B4506950	B45069250
2M3	ENL	B4507012	B4507050	B45070250
2R1.5	ENL	B4507112	B4507150	-
2R2.5	ENL	B4507212	B4507250	-
3L1.5	ENL	B4507312	B4507350	-
3L2.5	ENL	B4507412	B4507450	-
3M1	ENL	B4507512	B4507550	-
3M2	ENL	B4507612	B4507650	B45076250
3M3	ENL	B4507712	B4507750	B45077250
3R1.5	ENL	B4507812	B4507850	-
3R2.5	ENL	B4507912	B4507950	-
4L1.5	END	B4508012	B4508050	-
4L2.5	END	B4508112	B4508150	-
4M1	END	B4508212	B4508250	-
4M2	END	B4508312	B4508350	-
4M3	END	B4508412	B4508450	-

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
4R1.5	END	B4508512	B4508550	-
4R2.5	END	B4508612	B4508650	-
5M1	END	B4508712	B4508750	-
5M2	END	B4508812	B4508850	-
5M3	END	B4508912	B4508950	-

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
OP0	B4525012	-
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	-

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

VITAVM®13 masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EE1	B4509112
EE2	B4509212
EE3	B4509312
EE4	B4509412
EE5	B4509512
EE6	B4509612
EE7	B4509712
EE8	B4509812
EE9	B4509912
EE10	B4510012
EE11	B4510112

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EC1	B4512112
EC2	B4512212
EC3	B4512312
EC4	B4512412
EC5	B4512512
EC6	B4512612
EC7	B4512712
EC8	B4512812
EC9	B4512912
EC10	B4513012
EC11	B4513112

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EL1	B4514112
EL2	B4514212
EL3	B4514312
EL4	B4514412
EL5	B4514512
EL6	B4514612

VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EP1	B4515112
EP2	B4515212
EP3	B4515312

VITA VM 13 MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MM1	B4516112
MM2	B4516212
MM3	B4516312

VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
E01	B4517112
E02	B4517212
E03	B4517312
E04	B4517412
E05	B4517512

VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
COR1	B4522112
COR2	B4522212
COR3	B4522312

VITA VM 13 GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
G1	B4523112
G2	B4523212
G3	B4523312
G4	B4523412
G5	B4523512

VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
CP1	B4524112
CP2	B4524212
CP3	B4524312
CP4	B4524412
CP5	B4524512

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
W0	B4525912	B4525950

VITA VM 13 MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
M1	B4526112
M4	B4526412
M5	B4526512
M7	B4526712
M8	B4526812
M9	B4526912

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
GOL	B4527112
GOD	B4527312

VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
C01	B4528112
C02	B4528212
C03	B4528312

VITA VM 13 SUN OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
S01	B4529112
S02	B4529212
S03	B4529312

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominazione	Cod. 7 g
W0	B453597

VITA VM 13 SUN DENTINE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
SD1	B4536112
SD2	B4536212
SD3	B4536312

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
G0L	B453715
G0D	B453735

VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
C01	B453815
C02	B453825
C03	B453835

VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
S01	B453915
S02	B453925
S03	B453935

VITA VMK Master®

Per il rivestimento estetico di strutture metalliche con CET convenzionale



Descrizione

VITA VMK Master è una ceramica feldspatica naturale per il rivestimento estetico delle classiche leghe ceramizzabili (ca. 13,8 – 15,2 µm/mK).

Indipendentemente dal fatto che le leghe classiche vengano fuse, fresate o sinterizzate.

Lavorazione precisa e sicura.

Versatilità magistrale, perfetta per l'uso quotidiano e l'estetica - questa è VITA VMK Master.

Vantaggi

- materiale senza compromessi per quanto riguarda sicurezza ed estetica
- lavorazione precisa e sicura e quindi di facile apprendimento
- caratteristiche di lavorazione di eccellenza, come ad es. modellabilità migliorata, semplicità di impiego e retrazione minima
- classico schema di stratificazione dentina-smalto
- ampia gamma di masse aggiuntive per individualizzazione
- restauri altamente estetici grazie ai colori brillanti
- disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-Master e VITA classical A1 – D4

VITA VMK Master® Assortimenti

VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT A2
Assortimento un solo colore per i primi test
BVMKCOCSA2V2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA VMK Master® STARTER SET classical
Assortimento due colori
BVMKSSC

Quantità	Contenuto	Materiale
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2 - A3
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA astina colore A2
1		VITA astina colore A3

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master® ONE COLOR KIT 2M2
Assortimento un solo colore per i primi test
BVMKOC2M2V2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Assortimento due colori
BVMKSS3D

Quantità	Contenuto	Materiale
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2 - OP3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA astina colore 2M2
1		VITA astina colore 3M2

VITA VMK Master® Zusatzmassen

utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITA VMK Master® ADDITIONAL SET

Masse aggiuntive per restauri altamente individualizzati
BVMKAS

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T1 - T8
8	12 g	VITA VMK Master DENTINE MODIFIER DM1 - DM8
6	12 g	VITA VMK Master LUMINARY LM1 - LM6
6	12 g	VITA VMK Master MARGIN MN, M1 - M5
1	12 g	VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	12 g	VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT OT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1		Guida colori VITA VMK MASTER TRANSLUCENT
1		Guida colori VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA
1		Guida colori VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY



VITA VMK Master® GINGIVA SET POWDER

Masse gengivali di aspetto naturale
BVMKGS

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA VMK Master GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		Guida colori VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA

VITA VMK Master® Articoli**VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®**

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
A1	B483015
A2	B483025
A3	B483035
A3.5	B483045
A4	B483055
B1	B483065
B2	B483075
B3	B483085
B4	B483095
C1	B483105
C2	B483115
C3	B483125
C4	B483135
D2	B483145
D3	B483155
D4	B483165

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
A1	B4840112	B4840150	B48401250
A2	B4840212	B4840250	B48402250
A3	B4840312	B4840350	B48403250
A3.5	B4840412	B4840450	-
A4	B4840512	B4840550	-
B1	B4840612	B4840650	-
B2	B4840712	B4840750	-
B3	B4840812	B4840850	-
B4	B4840912	B4840950	-
C1	B4841012	B4841050	-
C2	B4841112	B4841150	-
C3	B4841212	B4841250	-
C4	B4841312	B4841350	-
D2	B4841412	B4841450	-
D3	B4841512	B4841550	-
D4	B4841612	B4841650	-

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B4843112	B4843150
A2	B4843212	B4843250
A3	B4843312	B4843350
A3.5	B4843412	B4843450
A4	B4843512	B4843550
B1	B4843612	B4843650
B2	B4843712	B4843750
B3	B4843812	B4843850
B4	B4843912	B4843950
C1	B4844012	B4844050
C2	B4844112	B4844150
C3	B4844212	B4844250
C4	B4844312	B4844350
D2	B4844412	B4844450
D3	B4844512	B4844550
D4	B4844612	B4844650

VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
A1	EN1	B4845112	B4845150	B48451250
A2	EN1	B4845212	B4845250	B48452250
A3	EN1	B4845312	B4845350	B48453250
A3.5	EN2	B4845412	B4845450	B48454250
A4	EN2	B4845512	B4845550	-
B1	EN2	B4845612	B4845650	B48456250
B2	EN2	B4845712	B4845750	B48457250
B3	EN2	B4845812	B4845850	-
B4	EN2	B4845912	B4845950	-
C1	EN2	B4846012	B4846050	B48460250
C2	EN2	B4846112	B4846150	B48461250
C3	EN1	B4846212	B4846250	B48462250
C4	EN1	B4846312	B4846350	-
D2	EN2	B4846412	B4846450	B48464250
D3	EN2	B4846512	B4846550	-
D4	EN2	B4846612	B4846650	-

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
0M1	EN1	B4803112	B4803150	-
0M2	EN1	B4803212	B4803250	-
0M3	EN1	B4803312	B4803350	-
1M1	EN1	B4803412	B4803450	B48034250
1M2	EN1	B4803512	B4803550	B48035250
2L1.5	EN1	B4803612	B4803650	B48036250
2L2.5	EN1	B4803712	B4803750	-
2M1	EN1	B4803812	B4803850	B48038250
2M2	EN1	B4803912	B4803950	B48039250
2M3	EN1	B4804012	B4804050	-
2R1.5	EN1	B4804112	B4804150	-
2R2.5	EN1	B4804212	B4804250	B48042250
3L1.5	EN1	B4804312	B4804350	-
3L2.5	EN1	B4804412	B4804450	-
3M1	EN1	B4804512	B4804550	-
3M2	EN1	B4804612	B4804650	B48046250
3M3	EN1	B4804712	B4804750	-

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
3R1.5	EN1	B4804812	B4804850	-
3R2.5	EN3	B4804912	B4804950	-
4L1.5	EN1	B4805012	B4805050	-
4L2.5	EN1	B4805112	B4805150	-
4M1	EN1	B4805212	B4805250	-
4M2	EN3	B4805312	B4805350	-
4M3	EN3	B4805412	B4805450	-
4R1.5	EN1	B4805512	B4805550	-
4R2.5	EN3	B4805612	B4805650	-
5M1	EN1	B4805712	B4805750	-
5M2	EN3	B4805812	B4805850	-
5M3	EN3	B4805912	B4805950	-

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	B4806112	B4806150
0M2	B4806212	B4806250
0M3	B4806312	B4806350
1M1	B4806412	B4806450
1M2	B4806512	B4806550
2L1.5	B4806612	B4806650
2L2.5	B4806712	B4806750
2M1	B4806812	B4806850
2M2	B4806912	B4806950
2M3	B4807012	B4807050
2R1.5	B4807112	B4807150
2R2.5	B4807212	B4807250
3L1.5	B4807312	B4807350
3L2.5	B4807412	B4807450
3M1	B4807512	B4807550
3M2	B4807612	B4807650
3M3	B4807712	B4807750
3R1.5	B4807812	B4807850
3R2.5	B4807912	B4807950
4L1.5	B4808012	B4808050
4L2.5	B4808112	B4808150
4M1	B4808212	B4808250
4M2	B4808312	B4808350
4M3	B4808412	B4808450

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
4R1.5	B4808512	B4808550
4R2.5	B4808612	B4808650
5M1	B4808712	B4808750
5M2	B4808812	B4808850
5M3	B4808912	B4808950

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
OP0	B4825012	B4825050	-
OP1	B4825112	B4825150	B48251250
OP2	B4825212	B4825250	B48252250
OP3	B4825312	B4825350	B48253250
OP4	B4825412	B4825450	-
OP5	B4825512	B4825550	-

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
OP0	B483505
OP1	B483515
OP2	B483525
OP3	B483535
OP4	B483545
OP5	B483555

**VITA VMK Master® Zusatzmassen
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4**
VITA VMK Master TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
T1	B4809112	-	-
T2	B4809212	-	-
T3	B4809312	-	-
T4	B4809412	B4809450	B48094250
T5	B4809512	-	-
T6	B4809612	-	-
T7	B4809712	-	-
T8	B4809812	-	-

VITA VMK Master DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
DM1	B4812112
DM2	B4812212
DM3	B4812312
DM4	B4812412
DM5	B4812512
DM6	B4812612
DM7	B4812712
DM8	B4812812

VITA VMK Master LUMINARY, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
LM1	B4814112
LM2	B4814212
LM3	B4814312
LM4	B4814412
LM5	B4814512
LM6	B4814612

VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
PLT1	B4815112

VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
OT1	B4817112

VITA VMK Master WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
WIN	B4818112	B4818150	B48181250

VITA VMK Master ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

VITA VMK Master CERVICAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
CE1	B4820112
CE2	B4820212
CE3	B4820312

VITA VMK Master CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
COR1	B4822112
COR2	B4822212

VITA VMK Master GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
G1	B4823112
G2	B4823212
G3	B4823312
G4	B4823412
G5	B4823512

VITA VMK Master NECK, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
N1	B4824112
N2	B4824212
N3	B4824312
N4	B4824412
N5	B4824512

VITA VMK Master WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
WO	B4825912	B4825950

VITA VMK Master MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MN	B4826012
M1	B4826112
M2	B4826212
M3	B4826312
M4	B4826412
M5	B4826512

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
GOL	B4827112
GOD	B4827312

VITA VMK Master WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominazione	Cod. 7 g
WO	B483597

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominazione	Cod. 5 g
GOL	B483715
GOD	B483735

VITA NP BOND

Efficace ammortizzatore CET tra ceramica e lega metallica



Descrizione

Bonder per una maggiore sicurezza e migliore estetica nel rivestimento di leghe non nobili. Grazie al legame affidabile tra struttura metallica e ceramica di rivestimento estetico (ad es. VITA VMK MASTER e VITA VM 13) VITA NP BOND aiuta ad evitare errori, conseguenti a tensioni relative al CET tra leghe e ceramiche.

VITA NP BOND (NP: Non-Precious: ingl. non nobile) migliora il legame tra struttura metallica e ceramica specialmente nel caso di leghe non nobili e conferisce maggior sicurezza all'odontotecnico nella realizzazione di rivestimenti stabili nel lungo periodo e altamente estetici.

Vantaggi

- Efficace ammortizzatore CET tra ceramica e lega metallica, soprattutto nel caso di leghe non nobili, per un legame stabile tra struttura e ceramica
- Maggiore sicurezza cromatica
- Risparmio di tempo perchè non occorre cottura WASH OPAQUE
- Dopo la cottura del Bonder la struttura superficiale è migliore e quindi l'applicazione dell'opaco è più semplice, agevole e uniforme

VITA NP BOND Articoli

VITA NP BOND

Denominazione	Cod.
VITA NP BOND PASTE, 5 g	BNPB5

VITA LUMEX® AC

Fedeltà cromatica ottimale. Dinamica di luce eccellente. Lavorazione precisa



Descrizione

- VITA LUMEX AC è un sistema di rivestimento costituito da vetroceramica rinforzata con leucite e con una innovativa formula merceologica per risultati cromaticamente fedeli, vitali e affidabili
- VITA LUMEX AC comprende:
 - masse GINGIVA, OPAQUE, OPAQUE DENTINE, DENTINE, ENAMEL e diverse masse effetto (ad es. OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE e molte altre.)
- componenti di sistema specifici, come pennelli, portalavori per cottura, massa glasura, ecc.

Vantaggi

- Riprodurre in sicurezza il colore dei denti ed un gioco naturale di colori e luci, grazie a masse ceramiche con un'ottima fedeltà cromatica ed un'eccellente dinamica di luce
- Lavorare in modo preciso ed efficiente ceramica di rivestimento grazie a caratteristiche di modellazione ottimali, eccellente stabilità di forma e impiego universale per tutte le ceramiche strutturali
- Realizzare riabilitazioni durature grazie all'elevata resistenza alla rottura imputabile ad una matrice in vetroceramica rinforzata con leucite e ad un legame sicuro con la struttura

Indicazioni

VITA LUMEX AC è un sistema di vetroceramica rinforzata con leucite per il rivestimento di tutti i correnti materiali strutturali in ceramica integrale (biossido di zirconio, ceramica a base di disilicato di litio e feldspatica) e in titanio. Per la realizzazione di ricostruzioni senza struttura (ad es. faccette).

Indicazioni

Settori di impiego:

- Rivestimento totale e parziale di biossido di zirconio
- Rivestimento totale e parziale di disilicato di litio
- Rivestimento totale e parziale di titanio grado 1 - 5
- Rivestimento parziale di ceramica feldspatica
- Ricostruzioni senza struttura

Materiali:

- Strutture in biossido di zirconio (CET ca. 10,0 -10,5 x 10-6 K-1)
- Strutture in vetroceramica (CET ca. 9,0 -10,5 x 10-6 K-1)
- Strutture in biossido di zirconio (CET ca. 9,0 -10,5 x 10-6 K-1)

VITA LUMEX® AC Assortimenti

VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®

**VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA classical A1-D4®
BLPWKC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH B4 - A2
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

**VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4®
Per stratificazione standard
BLSKCV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - D4
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pennello Nr. 3/0 sintetico
1		pennello stratificante Nr. 8 sintetico
1		Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni)

VITA LUMEX® AC STARTER KIT VITA classical A1-D4®

Per il primo approccio

BLSTKCV1

Quantità	Contenuto	Materiale
4	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
4	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, waterdrop, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino
2	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pennello Nr. 3/0 sintetico
1		pennello stratificante Nr. 8 sintetico
1		Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni)

VITA LUMEX® AC masse aggiuntive



VITA LUMEX® AC CUT-BACK KIT

Per Cut-back e microrivestimenti

BLCBK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA LUMEX® AC EXPERT KIT
Per stratificazione individualizzata
BLEK

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut
5	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino, sand, sesame
5	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER cloudy-white, caramel, honey, copper, brown
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC MAMELON saffron, honey-melon
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



VITA LUMEX® AC GINGIVA KIT
Per la ricostruzione di parti gengivali
BLGK

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA LUMEX AC GINGIVA pale-papilla, light-rose, nectarine, grapefruit, rosewood, purple, deep-red, dark-red
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
BLPWK3D

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH LL 1 - LL 5
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Per stratificazione standard
BLSKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
29	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
29	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		pennello Nr. 3/0 sintetico
1		pennello stratificante Nr. 8 sintetico
1		Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni)

VITA LUMEX® AC Articoli**VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®**

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B5343112	B5343150
A2	B5343212	B5343250
A3	B5343312	B5343350
A3.5	B5343412	B5343450
A4	B5343512	B5343550
B1	B5343612	B5343650
B2	B5343712	B5343750
B3	B5343812	B5343850
B4	B5343912	B5343950
C1	B5344012	B5344050
C2	B5344112	B5344150
C3	B5344212	B5344250
C4	B5344312	B5344350
D2	B5344412	B5344450
D3	B5344512	B5344550
D4	B5344612	B5344650

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B5345112	B5345150
A2	B5345212	B5345250
A3	B5345312	B5345350
A3.5	B5345412	B5345450
A4	B5345512	B5345550
B1	B5345612	B5345650
B2	B5345712	B5345750
B3	B5345812	B5345850
B4	B5345912	B5345950
C1	B5346012	B5346050
C2	B5346112	B5346150
C3	B5346212	B5346250
C4	B5346312	B5346350
D2	B5346412	B5346450
D3	B5346512	B5346550
D4	B5346612	B5346650

VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	B5346712	B5346750
A2	B5346812	B5346850
A3	B5346912	B5346950
A3.5	B5347012	-
A4	B5347112	-
B1	B5347212	B5347250
B2	B5347312	-
B3	B5347412	-
B4	B5347512	-
C1	B5347612	-
C2	B5347712	-
C3	B5347812	-
C4	B5347912	-
D2	B5348012	-
D3	B5348112	-
D4	B5348212	-

VITA LUMEX® AC masse aggiuntive

VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
smoky-white	B5309112
light-blonde	B5309212
misty-rose	B5309312
sunlight	B5309412
sun-intense	B5309512
waterdrop	B5309612
deep-blue	B5309712
foggy-grey	B5309812

VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
cloudy-white	B5312112
caramel	B5312212
honey	B5312312
copper	B5312412
brown	B5312512

VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
arctic-white	B5314112
cream	B5314212
cappuccino	B5314312
sand	B5314412
sesame	B5314512

VITA LUMEX AC PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
shell	B5315112

VITA LUMEX AC MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
saffron	B5316112
honey-melon	B5316212

VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
opal-neutral	B5317112
opal-sky	B5317212
opal-azure	B5317312

VITA LUMEX AC ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
clear	B5318112	B5318150
light	B5319112	B5319150
medium	B5319212	B5319250
intense	B5319312	B5319350
fog	B5320112	B5320150

VITA LUMEX AC CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
neutral	B5322112
desert	B5322212

VITA LUMEX AC GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
pale-papilla	B5323112
light-rose	B5323212
nectarine	B5323312
grapefruit	B5323412
rosewood	B5323512
purple	B5323612
deep-red	B5323712
dark-red	B5323812

VITA LUMEX AC MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
straw-yellow	B5326112
corn-yellow	B5326212

VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
ivory	B5351112

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	B5303112	B5303150
0M2	B5303212	B5303250
0M3	B5303312	B5303350
1M1	B5303412	B5303450
1M2	B5303512	B5303550
2L1.5	B5303612	B5303650
2L2.5	B5303712	B5303750
2M1	B5303812	B5303850
2M2	B5303912	B5303950
2M3	B5304012	B5304050
2R1.5	B5304112	B5304150
2R2.5	B5304212	B5304250
3L1.5	B5304312	B5304350
3L2.5	B5304412	B5304450
3M1	B5304512	B5304550
3M2	B5304612	B5304650
3M3	B5304712	B5304750
3R1.5	B5304812	B5304850
3R2.5	B5304912	B5304950
4L1.5	B5305012	B5305050
4L2.5	B5305112	B5305150
4M1	B5305212	B5305250
4M2	B5305312	B5305350
4M3	B5305412	B5305450
4R1.5	B5305512	B5305550
4R2.5	B5305612	B5305650
5M1	B5305712	B5305750
5M2	B5305812	B5305850
5M3	B5305912	B5305950

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	B5306112	B5306150
0M2	B5306212	B5306250
0M3	B5306312	B5306350
1M1	B5306412	B5306450

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
1M2	B5306512	B5306550
2L1.5	B5306612	B5306650
2L2.5	B5306712	B5306750
2M1	B5306812	B5306850
2M2	B5306912	B5306950
2M3	B5307012	B5307050
2R1.5	B5307112	B5307150
2R2.5	B5307212	B5307250
3L1.5	B5307312	B5307350
3L2.5	B5307412	B5307450
3M1	B5307512	B5307550
3M2	B5307612	B5307650
3M3	B5307712	B5307750
3R1.5	B5307812	B5307850
3R2.5	B5307912	B5307950
4L1.5	B5308012	B5308050
4L2.5	B5308112	B5308150
4M1	B5308212	B5308250
4M2	B5308312	B5308350
4M3	B5308412	B5308450
4R1.5	B5308512	B5308550
4R2.5	B5308612	B5308650
5M1	B5308712	B5308750
5M2	B5308812	B5308850
5M3	B5308912	B5308950

VITA LUMEX AC OPAQUE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
opaque-0	B5325012
opaque-1	B5325112
opaque-2	B5325212
opaque-3	B5325312
opaque-4	B5325412
opaque-5	B5325512

VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g
LL 0	B5353012	B5353050
LL 1	B5353112	B5353150
LL 2	B5353212	B5353250
LL 3	B5353312	B5353350
LL 4	B5353412	-
LL 5	B5353512	-

VITAVM®11

Ceramica a struttura microfine per l'individualizzazione di VITA SUPRINITY PC*



Descrizione

VITA VM 11 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, a basso punto di fusione, sviluppata specialmente per l'individualizzazione di restauri in ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio. L'adattamento ottimale dei due CET garantisce un legame sicuro e privo di tensioni.

In combinazione con VITA SUPRINITY PC, per l'elevata bagnabilità superficiale della nuova vetroceramica, la stratificazione non richiede cotture di Liner o wash. Si può procedere immediatamente con la stratificazione.

L'elevata traslucenza e la calda cromaticità di VITA VM 11 insieme all'effetto opalescente di VITA SUPRINITY PC assicurano risultati altamente estetici e giochi cromatici vitali.

Vantaggi

- effetto cromatico naturale e dinamica di luce grazie alla struttura microfine
- eccellente legame per risultati sicuri
- semplicità d'uso per risultati rapidi, altamente estetici
- caratteristiche di cottura superiori, stabilità di forma anche dopo numerose cotture
- eccellente modellabilità per un'applicazione rapida e mirata della ceramica
- lavorazione efficiente ed economica
- individualizzabile con VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
- sicurezza di processo grazie all'esperienza pluriennale
- disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-Master e VITA classical A1 – D4

Avvertenza

* utilizzabile anche per CELTRA® e CELTRA® CAD FC. CELTRA è un marchio registrato della DeguDent GmbH.

VITAVM®11 Assortimenti

VITAVM®11 VITA classical A1-D4®



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA classical A1-D4®
BV11DKC**

Quantità	Contenuto	Materiale
8	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, A1 - A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
BV11DK**

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1 - 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

VITAVM®11 Articoli**VITAVM®11 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g
A1	ENL	B4945112
A2	ENL	B4945212
A3	ENL	B4945312
A3.5	END	B4945412
B2	END	B4945712
C2	END	B4946112
D2	END	B4946412

VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g
0M1	ENL	B4906112
1M1	ENL	B4906412
1M2	ENL	B4906512
2M2	ENL	B4906912
3M2	ENL	B4907612
4M2	END	B4908312

VITAVM®11 masse aggiuntive**utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4**

VITA VM 11 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EE1	B4909112
EE3	B4909312
EE5	B4909512
EE7	B4909712
EE8	B4909812
EE9	B4909912
EE11	B4910112

VITA VM 11 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EC1	B4912112
EC5	B4912512
EC11	B4913112

VITA VM 11 EFFECT PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EP1	B4915112

VITA VM 11 MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MM1	B4916112
MM3	B4916312

VITA VM 11 EFFECT OPAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
E01	B4917112
E02	B4917212
E03	B4917312
E05	B4917512

VITA VM 11 WINDOW, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
WIN	B4918112

VITA VM 11 ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
ENL	B4919112
END	B4919212

VITA VM 11 NEUTRAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
NT	B4920112

VITA VM 11 SUN DENTINE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
SD1	B4936112
SD2	B4936212
SD3	B4936312

VITAVM®9

Ceramica feldspatica naturale a struttura microfine per il rivestimento estetico di strutture in biossido di zirconio e VITABLOCS Mark II



Descrizione

VITA VM 9 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, altamente estetica, perfettamente idonea al CET di strutture in biossido di zirconio (ca. 10,5, con ad es. VITA YZ) – indipendentemente dal fatto che sia bianco, cromatizzato o traslucido.

VITA VM 9 è inoltre indicata per l'individualizzazione di restauri in VITABLOCS Mark II.

I componenti principali sono feldspati di potassio e sodio di elevata purezza, che assicurano effetti cromatici brillanti e ottime caratteristiche fisiche, come ad es. altissimi valori di resistenza a flessione.

Grazie alla sua struttura omogenea e chiusa, il molaggio e la lucidatura di VITA VM 9 è ottimale, soprattutto in situ. Ne conseguono superfici lisce e perfettamente compatte. Il deposito di placca sulla superficie ceramica è ridotto, agevolando al paziente le misure di igiene della riabilitazione di elevato valore.

VITA VM 9 è un componente di sistema di elevata qualità dell'innovativo concetto VITA VM – la soluzione universale per tutte le indicazioni correnti. Che si tratti di metallo-ceramica, ceramica integrale o composito: le possibilità sono infinite!

Per l'individualizzazioni si possono usare i colori di caratterizzazione VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO.

Vantaggi

- effetti cromatici naturali e dinamica di luce grazie alle caratteristiche fisiche ottimali imputabili alla struttura microfine
- eccellente legame per risultati sicuri e successo nel lungo periodo
- retrazione minima per ridurre le cotture di integrazione
- eccellente modellabilità per un'applicazione rapida e mirata della ceramica
- gamma completa di masse aggiuntive per eccellenti effetti ottici
- individualizzabile con VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
- sicurezza di processo grazie all'esperienza pluriennale
- disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-Master e VITA classical A1 – D4

VITAVM®9 Assortimenti

VITAVM®9 VITA classical A1-D4®



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®

Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP BV9BUK12CV1

Quantità	Contenuto	Materiale
16	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT A2

Assortimento un solo colore per i primi test BV9OCCA2V4

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITAVM®9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Assortimento integrativo per la stratificazione anatomica BUILD UP BV9BUK12V1

Quantità	Contenuto	Materiale
26	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



VITAVM®9 ONE COLOR KIT 2M2
Assortimento un solo colore per i primi test
BV9OCK2M2V5

Quantità	Contenuto	Materiale
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITAVM®9 masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC
Masse aggiuntive per l'individualizzazione di VITABLOCS
BV9EKC2

Quantità	Contenuto	Materiale
1		VITABLOCS Mark II Sample Set VITA SYSTEM 3D-MASTER
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO2
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Supporto di cottura W a nido d'ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)



VITAVM®9 GINGIVA KIT
Masse gengivali di aspetto naturale
BV9GKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
5	12 g	VITA VM 9 GINGIVA G1 - G5
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 MARGIN KIT
Solo per piccole correzioni nella zona marginale
BV9MKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
6	12 g	VITA VM 9 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN



VITAVM®9 PROFESSIONAL KIT
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
BV9PKV2

Quantità	Contenuto	Materiale
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 9 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		Guida colori VITA VM EFFECT CHROMA
1		Guida colori VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON
1		Guida colori VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL

VITAVM®9 Articoli**VITAVM®9 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4243112	B4243150
A2	ENL	B4243212	B4243250
A3	ENL	B4243312	B4243350
A3.5	END	B4243412	B4243450
A4	END	B4243512	B4243550
B1	END	B4243612	B4243650
B2	END	B4243712	B4243750
B3	END	B4243812	B4243850
B4	END	B4243912	B4243950
C1	END	B4244012	B4244050
C2	END	B4244112	B4244150
C3	ENL	B4244212	B4244250
C4	ENL	B4244312	B4244350
D2	END	B4244412	B4244450
D3	END	B4244512	B4244550
D4	END	B4244612	B4244650

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
A1	ENL	B4245112	B4245150
A2	ENL	B4245212	B4245250
A3	ENL	B4245312	B4245350
A3.5	END	B4245412	B4245450
A4	END	B4245512	B4245550
B1	END	B4245612	B4245650
B2	END	B4245712	B4245750
B3	END	B4245812	B4245850
B4	END	B4245912	B4245950
C1	END	B4246012	B4246050
C2	END	B4246112	B4246150
C3	ENL	B4246212	B4246250
C4	ENL	B4246312	B4246350
D2	END	B4246412	B4246450
D3	END	B4246512	B4246550
D4	END	B4246612	B4246650

VITAVM® 9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	ENL	B4203112	B4203150
0M2	ENL	B4203212	B4203250
0M3	ENL	B4203312	B4203350
1M1	ENL	B4203412	B4203450
1M2	ENL	B4203512	B4203550
2L1.5	ENL	B4203612	B4203650
2L2.5	ENL	B4203712	B4203750
2M1	ENL	B4203812	B4203850
2M2	ENL	B4203912	B4203950
2M3	ENL	B4204012	B4204050
2R1.5	ENL	B4204112	B4204150
2R2.5	ENL	B4204212	B4204250
3L1.5	ENL	B4204312	B4204350
3L2.5	ENL	B4204412	B4204450
3M1	ENL	B4204512	B4204550
3M2	ENL	B4204612	B4204650
3M3	ENL	B4204712	B4204750

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
3R1.5	ENL	B4204812	B4204850
3R2.5	ENL	B4204912	B4204950
4L1.5	END	B4205012	B4205050
4L2.5	END	B4205112	B4205150
4M1	END	B4205212	B4205250
4M2	END	B4205312	B4205350
4M3	END	B4205412	B4205450
4R1.5	END	B4205512	B4205550
4R2.5	END	B4205612	B4205650
5M1	END	B4205712	B4205750
5M2	END	B4205812	B4205850
5M3	END	B4205912	B4205950

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
0M1	ENL	B4206112	B4206150
0M2	ENL	B4206212	B4206250
0M3	ENL	B4206312	B4206350
1M1	ENL	B4206412	B4206450
1M2	ENL	B4206512	B4206550
2L1.5	ENL	B4206612	B4206650
2L2.5	ENL	B4206712	B4206750
2M1	ENL	B4206812	B4206850
2M2	ENL	B4206912	B4206950
2M3	ENL	B4207012	B4207050
2R1.5	ENL	B4207112	B4207150
2R2.5	ENL	B4207212	B4207250
3L1.5	ENL	B4207312	B4207350
3L2.5	ENL	B4207412	B4207450
3M1	ENL	B4207512	B4207550
3M2	ENL	B4207612	B4207650
3M3	ENL	B4207712	B4207750
3R1.5	ENL	B4207812	B4207850
3R2.5	ENL	B4207912	B4207950
4L1.5	END	B4208012	B4208050
4L2.5	END	B4208112	B4208150
4M1	END	B4208212	B4208250
4M2	END	B4208312	B4208350
4M3	END	B4208412	B4208450

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 12 g	Cod. 50 g
4R1.5	END	B4208512	B4208550
4R2.5	END	B4208612	B4208650
5M1	END	B4208712	B4208750
5M2	END	B4208812	B4208850
5M3	END	B4208912	B4208950

VITAVM®9 masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EE1	B4209112
EE2	B4209212
EE3	B4209312
EE4	B4209412
EE5	B4209512
EE6	B4209612
EE7	B4209712
EE8	B4209812
EE9	B4209912
EE10	B4210012
EE11	B4210112

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EC1	B4212112
EC2	B4212212
EC3	B4212312
EC4	B4212412
EC5	B4212512
EC6	B4212612
EC7	B4212712
EC8	B4212812
EC9	B4212912
EC10	B4213012
EC11	B4213112

VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EL1	B4214112
EL2	B4214212
EL3	B4214312
EL4	B4214412
EL5	B4214512
EL6	B4214612

VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EP1	B4215112
EP2	B4215212
EP3	B4215312

VITA VM 9 MAMELON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
MM1	B4216112
MM2	B4216212
MM3	B4216312

VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
E01	B4217112
E02	B4217212
E03	B4217312
E04	B4217412
E05	B4217512

VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominazione	Cod. 12 g	Cod. 50 g	Cod. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

VITA VM 9 EFFECT BONDER, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB3	B4221312
EB4	B4221412
EB5	B4221512

VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
COR1	B4222112
COR2	B4222212
COR3	B4222312

VITA VM 9 GINGIVA, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
G1	B4223112
G2	B4223212
G3	B4223312
G4	B4223412
G5	B4223512

VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
CP1	B4224112
CP2	B4224212
CP3	B4224312
CP4	B4224412
CP5	B4224512

VITA VM 9 MARGIN, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
M1	B4226112
M4	B4226412
M5	B4226512
M7	B4226712
M8	B4226812
M9	B4226912

VITA VM 9 ADD-ON, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
ADD1	B4229112
ADD2	B4229212
ADD3	B4229312
ADD4	B4229412
ADD5	B4229512
ADD6	B4229612
ADD7	B4229712
ADD8	B4229812

VITA VM 9 SUN DENTINE, 12 g

Denominazione	Cod. 12 g
SD1	B4236112
SD2	B4236212
SD3	B4236312

VITAVM® LC

Composito fotopolimerizzabile a microparticelle per uso extra-orale in protesi fissa e mobile



Descrizione

VITAVM® LC & VITAVM® LC flow

Semplicità di impiego. Economia ed estetica del risultato. Versatilità: la linea di prodotti VITA VM LC soddisfa tutti i requisiti per la realizzazione extraorale di restauri con un composito di rivestimento estetico.

Che si usi l'affermato composito in pasta, le masse flow a bassa viscosità o una combinazione di masse: con VITA VM LC si ottengono sempre risultati brillanti. Molto simile alla ceramica – e sempre con sistema.

Vantaggi

- Due varianti di lavorazione per possibilità praticamente illimitate
- Perfetto per tutte le indicazioni
- Estetica brillante con un'ottima riproduzione del colore sulla base delle ricette cromatiche VITA originali
- Caratteristiche merceologiche di prima classe
- Sistema di prodotti modulare per possibilità di configurazione ottimali

Indicazioni

Indicazioni:

- Rivestimento totale e parziale di strutture metalliche: corone, ponti, corone telescopiche e sovrastrutture su impianti
- Inlay, faccette

Settori di impiego:

- Individualizzazione e stratificazione di VITA ENAMIC
- Rivestimento di strutture in ZrO2 parzialmente stabilizzato con ittrio (CET ca. 10,5 · 10-6 · K-1) come ad es. VITA YZ
- Individualizzazione di denti in resina VITA
- Riproduzione di parti gengivali
- Rivestimento estetico di protesi fisse e parzialmente mobili (secondo indicazioni del produttore) in
 - polieterechetone caricato con max. 20% di ceramica (PEEK), ad es. BioHPP/Bredent
 - polimero PEEK-OPTIMA® LT1, ad es. Juvora, InnoBlanc Medical

Provvisori di riabilitazione:

- Individualizzazione e stratificazione di provvisori di riabilitazione in VITA CAD-Temp
- Corone e ponti frontali a 3 elementi in VITA VM LC privi di metallo

Colori

Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER® e VITA classical A1-D4®

VITAVM® LC Assortimenti

VITAVM® LC VITA classical A1-D4®



VITAVM®LC combi TEST KIT A3

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE paste / ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCCTKA3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		VITA astina colore A3



VITAVM®LC flow TEST KIT A3

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCFTKA3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		VITA astina colore A3


VITAVM®LC paste TEST KIT A3
Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive paste)
CVLCPTKA3

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		VITA astina colore A3

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITAVM®LC combi TEST KIT 2M2
Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE paste / ENAMEL & masse aggiuntive flow)
CVLCCTK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		VITA astina colore 2M2
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa

VITAVM®LC flow TEST KIT 2M2

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive flow)

CVLCFTK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		VITA astina colore 2M2



VITAVM®LC paste TEST KIT 2M2

Assortimento un solo colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive paste)

CVLCPTK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Manico portapennelli bianco
1		Pennellini monouso, 50 pz.
1		VITA astina colore 2M2
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL

VITAVM®LC masse aggiuntive

utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®LC flow CHROMA KIT

Kit per intensificazione cromatica cervicale/corpo

CVLCFCHK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC flow GINGIVA KIT
Kit per ricostruzione gengivale
CVLCFGK

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1 - G5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
CVLCFPKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1 - EE2, EE5 - EE7, EE9, EE11 - EE12
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL



VITAVM®LC paste GINGIVA KIT
Kit per ricostruzione gengivale
CVLCPGK

Quantità	Contenuto	Materiale
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
4	4 g	VITA VM LC GINGIVA G1 - G2, G4 - G5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL

VITAVM® LC PRIMER

VITA VM LC PRIMER I, 5 ml
CVMLP014

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

VITA VM LC PRIMER II, 5 ml
CVMLP024

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

**VITA VM®LC PRIMER SET
CVMLPSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITAVM® LC Articoli
VITAVM® LC VITA classical A1-D4®

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
A1	ENL	C444314
A2	ENL	C444324
A3	ENL	C444334
A3.5	END	C444344
A4	END	C444354
B2	ENL	C444374
B3	END	C444384
B4	END	C444394
C1	END	C444404
C2	ENL	C444414
C3	END	C444424
C4	END	C444434
D2	END	C444444
D3	END	C444454
D4	END	C444464

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
A1	ENL	C44431F4
A2	ENL	C44432F4
A3	ENL	C44433F4
A3.5	END	C44434F4
A4	END	C44435F4
B2	END	C44437F4
B3	END	C44438F4
B4	END	C44439F4
C1	END	C44440F4
C2	ENL	C44441F4
C3	END	C44442F4
C4	END	C44443F4
D2	END	C44444F4
D3	END	C44445F4
D4	END	C44446F4

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
A1	C443013
A2	C443023
A3	C443033
A3.5	C443043
A4	C443053
B2	C443073
B3	C443083
B4	C443093
C1	C443103
C2	C443113
C3	C443123
C4	C443133
D2	C443143
D3	C443153
D4	C443163

VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®
VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
0M1	ENL	C440314
1M1	ENL	C440344
1M2	ENL	C440354
2L1.5	ENL	C440364
2L2.5	ENL	C440374
2M1	ENL	C440384
2M2	ENL	C440394
2M3	ENL	C440404
2R1.5	ENL	C440414
2R2.5	ENL	C440424
3L1.5	ENL	C440434
3L2.5	ENL	C440444
3M1	ENL	C440454
3M2	ENL	C440464
3M3	ENL	C440474
3R1.5	ENL	C440484
3R2.5	ENL	C440494
4L1.5	END	C440504

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
4L2.5	END	C440514
4M1	END	C440524
4M2	END	C440534
4M3	END	C440544
4R1.5	END	C440554
4R2.5	END	C440564
5M1	END	C440574
5M2	END	C440584
5M3	END	C440594

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 4 g
0M1	ENL	C44031F4
1M1	ENL	C44034F4
2M1	ENL	C44038F4
2M2	ENL	C44039F4
2M3	ENL	C44040F4
3M2	ENL	C44046F4
3M3	ENL	C44047F4
3R2.5	ENL	C44049F4

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
0M1	C445013
1M1	C445043
1M2	C445053
2L1.5	C445063
2M1	C445083
2M2	C445093
2M3	C445103
3L1.5	C445133
3M2	C445163
3M3	C445173
3R2.5	C445193
4M2	C445233

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Denominazione	Cod. 10 g
---------------	-----------

Denominazione	Cod. 10 g
0M1	C4400110
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

VITAVM® LC masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
CP1	C442414
CP2	C442424
CP3	C442434
CP4	C442444
CP5	C442454

VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
EE12	C441024
EE2	C440924
EE6	C440964
EE9	C440994

VITA VM LC ENAMEL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
END	C441924
ENL	C441914

VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
CP1	C44241F3
CP2	C44242F3
CP3	C44243F3
CP4	C44244F3
CP5	C44245F3

VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
EE1	C44091F3
EE11	C44101F3
EE12	C44102F3
EE2	C44092F3
EE5	C44095F3
EE6	C44096F3
EE7	C44097F3
EE9	C44099F3

VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
END	C44192F4
ENL	C44191F4

VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
G1	C44231F3
G2	C44232F3
G3	C44233F3
G4	C44234F3
G5	C44235F3

VITA VM LC flow NEUTRAL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
NT	C44201F4

VITA VM LC flow WINDOW, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
WIN	C44181F3

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
GOL	C443713

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE, 10 g


Denominazione	Cod. 10 g
GOL	C4427110

VITA VM LC GINGIVA, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
G1	C442314
G2	C442324
G4	C442344
G5	C442354

VITA VM LC NEUTRAL, 4 g

Denominazione	Cod. 4 g
NT	C442014


Denominazione		Cod.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID, 5 ml Liquido per opaco		CVML0L5

VITA VM LC PAINT, 2 g

Denominazione	Cod. 2 g
PT1	C444012
PT12	C444122
PT13	C444132
PT15	C444152
PT17	C444172
PT19	C444192
PT3	C444032
PT5	C444052
PT8	C444082
PT9	C444092

VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
PRE	C445913

Denominazione		Cod.
VITAVM®LC PAINT KIT Masse ad alta intensità cromatica		CVLCPAKV4

VITAVM® LC PRIMER

VITA VM LC PRIMER è un adesivo per compositi fotopolimerizzanti da rivestimento estetico.



Descrizione

VITA VM LC PRIMER è un adesivo per il condizionamento della superficie.

Come sistema adesivo a due fasi, VITA VM LC PRIMER offre un'adesione affidabile tra materiali compositi e materiali per restauri dentali.

VITA VM LC PRIMER I & II possono essere utilizzati anche singolarmente, a seconda dei materiali. Il loro potenziale adesivo si sviluppa però pienamente quando vengono utilizzati in combinazione. A questo proposito si rimanda alle nostre indicazioni raccomandate.

VITA VM LC PRIMER completa il composito fotopolimerizzabile a microparticelle VITA VM LC per la creazione extra-orale di restauri.

Vantaggi

- Vantaggio economico grazie alla varietà delle indicazioni
- Affidabilità grazie all'elevata adesione
- Sicurezza di processo grazie alla facilità d'uso

Indicazioni

- Adesione di superfici di strutture in metallo (leghe non nobili, leghe nobili, titanio) a resine/compositi a base di (met)acrilato
- Adesione di superfici di strutture in ZrO₂ a resine/compositi a base di (met)acrilato
- Adesione di compositi/resine reticolate come VITA CAD Temp o di polimeri ad alte prestazioni (PEEK, PEKK)

VITAVM® LC PRIMER Assortimenti

VITAVM® LC PRIMER

VITA VM LC PRIMER I, 5 ml

CVMLP014

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

VITA VM LC PRIMER II, 5 ml

CVMLP024

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITA VM® LC PRIMER SET

CVMLPSET

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

VITAVM®CC

Materiale polimerizzabile a freddo, autopolimerizzante, privo di sostanze di carica per la realizzazione extraorale



Descrizione

VITA VM CC è un materiale polimerizzabile a freddo, privo di sostanze di carica. E' il materiale ideale per la realizzazione extraorale di riabilitazioni provvisorie.

VITA VM CC si distingue per le eccellenti caratteristiche di lavorazione. La lavorazione è facilitata in modo particolare dall'ottima impastabilità e dall'eccellente scorrevolezza.

L'agevole lucidabilità e la struttura omogenea del materiale riducono nettamente il deposito di placca. La superficie liscia del provvisorio conferisce al paziente una sensazione piacevole ed assicura elevato confort d'uso.

Vantaggi

- Eccellente scorrevolezza
- Ottima miscelabilità
- Agevole lucidabilità
- Stabilità cromatica superiore rispetto a sistemi paragonabili
- Ottima stabilità e ridotto rischio di fratture grazie alla correlazione ideale tra resistenza a flessione e modulo di elasticità
- Forte riduzione del deposito di placca
- Indurimento privo di bolle, con o senza pressione

Indicazioni

- Corone e ponti provvisori
- Fissaggio di denti in resina ad es. su scheletrati
- Riparazioni
- Copertura di attacchi in protesi combinata

Colori

Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1-D4

VITAVM® CC Assortimenti

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®



VITA VM CC ONE COLOR KIT A2
Assortimento un solo colore per i primi test
CVCCOCKA2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE A2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA astina colore A2

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITAVM® CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Assortimento introduzione per la stratificazione BASIC
CVCCBK16

Quantità	Contenuto	Materiale
16	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITAVM® CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Assortimento introduzione Small per la stratificazione BASIC
CVCCBK5

Quantità	Contenuto	Materiale
5	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



VITA VM CC ONE COLOR KIT 2M2
Assortimento un solo colore per i primi test
CVCCOCK2M2

Quantità	Contenuto	Materiale
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 2M2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Misurino, in plastica
1		VITA astina colore 2M2

VITAVM®CC masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4



VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali
CVCCPK

Quantità	Contenuto	Materiale
5	30 g	VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6

VITAVM® CC Articoli

VITAVM® CC VITA classical A1-D4®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 30 g	Cod. 100 g
A1	ENL	C4743130	C47431100
A2	ENL	C4743230	C47432100
A3	ENL	C4743330	C47433100
A3.5	END	C4743430	C47434100
A4	END	C4743530	C47435100
B2	END	C4743730	C47437100
B3	END	C4743830	C47438100
B4	END	C4743930	-
C1	END	C4744030	-
C2	END	C4744130	C47441100
C3	ENL	C4744230	C47442100
C4	ENL	C4744330	-
D2	END	C4744430	-
D3	END	C4744530	C47445100
D4	END	C4744630	-

VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominazione	Corrispondenza smalto	Cod. 30 g	Cod. 100 g
0M1	ENL	C4703130	C47031100
1M1	ENL	C4703430	C47034100
2L1.5	ENL	C4703630	C47036100
2M1	ENL	C4703830	C47038100
2M2	ENL	C4703930	C47039100
2M3	ENL	C4704030	C47040100
3L1.5	ENL	C4704330	C47043100
3L2.5	ENL	C4704430	C47044100
3M1	ENL	C4704530	C47045100
3M2	ENL	C4704630	C47046100
3M3	ENL	C4704730	C47047100
3R1.5	ENL	C4704830	C47048100
3R2.5	ENL	C4704930	C47049100
4L1.5	END	C4705030	C47050100
4M2	END	C4705330	C47053100
5M1	END	C4705730	C47057100

VITAVM® CC masse aggiuntive
utilizzabile per VITA SYSTEM 3D-MASTER e Colorazione VITA classical A1- D4

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g

Denominazione	Cod. 30 g
EL2	C4714230
EL3	C4714330
EL4	C4714430
EL5	C4714530
EL6	C4714630

VITA VM CC WINDOW, 30 g


Denominazione	Cod. 30 g
WIN	C4718130

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g

Denominazione	Cod. 30 g	Cod. 100 g
ENL	C4719130	C47191100
END	C4719230	C47192100

Denominazione	Cod.
VITA VM CC LIQUID, 100 ml	CVCCCL100
VITA VM CC LIQUID, 30 ml	CVCCCL30

Accessori per Rivestimento estetico

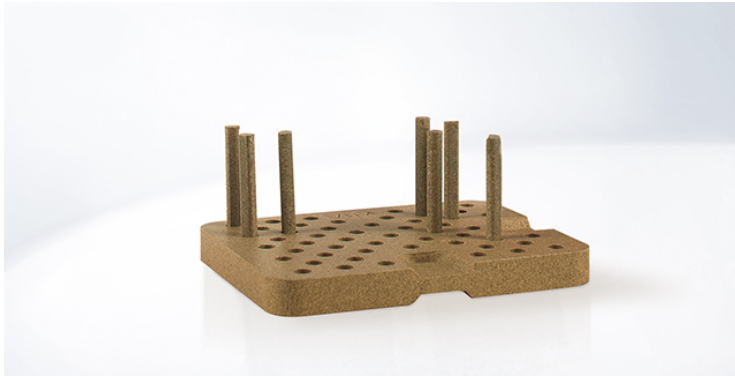

Descrizione

Gi accessori per ceramica di rivestimento facilitano la lavorazione di questi materiali.

Accessori per Rivestimento estetico Assortimenti










Accessori per Rivestimento estetico



VITA CERAMIC SAMPLE KIT

BCST

Quantità	Contenuto	Materiale
1		Supporti di cottura G, 1 pezzo
1	5 ml	VITA quarzo in polvere
1		VITA Ceramic Sample Tool

Accessori per Rivestimento estetico Articoli
Accessori per Rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
Supporti di cottura G (confezione da 2 basi e 20 perni) 56 x 45 x 6 mm, con 52 fori per perni		B009N
Cotone refrattario, 2 pz.		B017N
Perni, per supporto di cottura G (confezione da 50 pz.)		B023
Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione		B055
VITA Modisol® Pennarello isolante con 2 punte (ceramica contro gesso)		B075N
Pennello di applicazione Nr. 3, in martora rossa		B087
Pennello per colori di caratterizzazione Nr. E 0		B093
Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti		B201N
Perni di platino per supporto di cottura W, 6 pz.		B207N
Spatola di miscelazione, in plastica per PASTE OPAQUE		B227
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230
Piastra di miscelazione VITA INTERNO in resina (Ø 144 mm, con incavi) Deckel ohne Bedruckung		B252
Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)		B255V1
Pennello piatto, per PASTE OPAQUE		B297
Guida colori VITA VM EFFECT CHROMA EC1-EC11		B414
Guida colori VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL EE1-EE11, EP1-EP3		B416
Guida colori VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11		B419
Guida colori VITA VM INDIVIDUAL per la realizzazione di campioni colore individuali		B423

Denominazione		Cod.
Guida colori VITA VMK MASTER TRANSLUCENT T1-T8, OT1, PLT1		B431
Guida colori VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD		B432
Guida colori VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY DM1-DM8, LM1-LM6		B433
Guida colori VITA VMK MASTER STANDARD N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2		B434
Guida colori VITA VM 9 ADD-ON ADD1 - ADD8		B435
VITA AKZENT Plus Campionario colori		B436
Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in resina (Ø 144 mm con incavi)		B437
Guida colori VITA VM GINGIVA / MARGIN G1-G5, GOL, GOD, M1-M9		B439
Guida colori VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON EL1-EL6, E01-E05, MM1-MM3		B440
VITA INTERNO Campionario colori		B444

Denominazione		Cod.
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical		B455
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore 3D-MASTER		B458






Liquidi per Rivestimento estetico



Descrizione





Liquidi per modellare per una stabilità ottimale durante la stratificazione di ceramiche dentali.

Liquidi per Rivestimento estetico Articoli
Liquidi per Rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
VITA MODELLING LIQUID 30M, 250 ml Per impastare le masse dentina e smalto delle ceramiche VITA con temperature di cottura superiori a 900°C per tempi di modellazione prolungati		B30M250
VITA MODELLING LIQUID 30M, 50 ml Per impastare le masse dentina e smalto delle ceramiche VITA con temperature di cottura superiori a 900°C per tempi di modellazione prolungati		B30M50
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID, 50 ml Liquido Anti-Greening per leghe ad elevato tenore d argento (Ag > 30%)		BHSML50
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 250 ml		BLML250
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 50 ml		BLML50
VITA MODELLING FLUID, 250 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse VITA VM 13, VMK Master e TITANKERAMIK		BMF250
VITA MODELLING FLUID, 50 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse VITA VM 13, VMK Master e TITANKERAMIK		BMF50
VITA MODELLING FLUID RS, 250 ml Liquido speciale per tempi di modellazione lunghi Per impastare tutte le masse dentine, smalto e aggiuntive. La sua consistenza oleosa consente una modellazione prolungata di masse umide assicurando nel contempo una buona stabilità. Questo liquido è l'ideale per restauri estesi e ponti a più elementi.		BMFRS250
VITA MODELLING FLUID RS, 50 ml Liquido speciale per tempi di modellazione lunghi Per impastare tutte le masse dentine, smalto e aggiuntive. La sua consistenza oleosa consente una modellazione prolungata di masse umide assicurando nel contempo una buona stabilità. Questo liquido è l'ideale per restauri estesi e ponti a più elementi.		BMFRS50
VITA VM MODELLING LIQUID, 250 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL e EFFECT VITA VM 7, VM 9, VM 13		BML250N
VITA VM MODELLING LIQUID, 50 ml Liquido per modellare standard Per impastare le masse BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL e EFFECT VITA VM 7, VM 9, VM 13		BML50N
VITA OPAQUE FLUID, 250 ml Per mescolare opachi e bonder Per impastare gli opachi VITA VMK Master e TITANKERAMIK		BOF250

Denominazione		Cod.
VITA OPAQUE FLUID, 50 ml Per mescolare opachi e bonder Per impastare gli opachi VITA VMK Master e TITANKERAMIK		BOF50
VITA VM PASTE FLUID, 15 ml Per modificare la consistenza di OPAQUE PASTE e COLOR OPAQUE PASTE Per impastare OPAQUE PASTE VITA VM 13 e VM 15		BPF15V1
VITA PASTE OPAQUE LIQUID, 15 ml Per modificare la consistenza degli opachi e bonder in pasta VITA		BPOL15
Isolante per monconi VITA, 16 ml Isolante (ceramica verso gesso) per le tecniche ceramiche VITA (eccetto Titankeramik)		BSI16
VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID, 50 ml liquido speciale per miscelare ceramica a basso punto di fusione Liquido per miscelare VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, SUN DENTINE, ENAMEL e masse aggiuntive		BVMLF50
VITA VM OPAQUE FLUID, 250 ml Per impastare opaque powder Per impastare le masse VITA VM 13 e VM 15 OPAQUE		BVMOF250
VITA VM OPAQUE FLUID, 50 ml Per impastare opaque powder Per impastare le masse VITA VM 13 e VM 15 OPAQUE		BVMOF50

Liquidi per Resina per rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
VITA AKZENT LC CLEANER, 25 ml		CALCC25
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Liquido detergente		CVMLC50
VITA VM LC GEL, 20 ml Dispersione strato bloccante		CVMLG20
VITA VM LC MODELLING LIQUID, 10 ml Liquido per modellare		CVMLM10
Modeling liquid Liquido per modellare		CVMLM30
VITA VM LC SEPARATOR, 30 ml Isolante per modelli		CVMLS30

Accessori per Resina per rivestimento estetico





Descrizione

Gi accessori per composito di rivestimento facilitano la lavorazione di questi materiali.

Accessori per Resina per rivestimento estetico Articoli

Accessori per Resina per rivestimento estetico

Denominazione		Cod.
Misurino, in plastica		C006
VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 8,5 x 11 cm		C014
Misurino, 0,1 ml / Spatola di miscelazione 2 facciate		C017
VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm		C018
Manico portapennelli bianco		FCPHW
Pennellini monouso, 50 pz.		FCPS

VITA SPRAY-ON



Descrizione

VITA SPRAY-ON permette la nebulizzazione di opachi in polvere su strutture metalliche.

L'opaco viene applicato in modo uniforme mediante una pistola nebulizzatrice collegata ad aria compressa. Opachi già approntati possono essere conservati negli appositi flaconi fino ad esaurimento.

Sono compresi raccordi di diverso diametro per l'allacciamento ad impianti di aria compressa.

Vantaggi

- notevole risparmio di tempo
- strato di opaco uniforme e complessivamente molto sottile
- adesione ottimale dell'opaco alle strutture metalliche
- notevole riduzione dei costi

VITA SPRAY-ON Assortimenti

VITA SPRAY-ON

VITA SPAY-ON Sortiment / Assortment
B101V3

Quantità	Contenuto	Materiale
13		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP0
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP1
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP2
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP3
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP4
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, OP5
1		VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto, WO
1		Etichettas VITA classical A1-D4 (16 pz.)
1		VITA SPRAY-ON Coperchi adattatori completi di guarnizioni, 6 pz.
1		VITA SPRAY-ON Pistola nebulizzatrice con cappuccio di protezione
1		VITA SPRAY-ON Ago di ricambio per pistola nebulizzatrice
1		VITA SPRAY-ON guide in teflon per ago, 2 pz.
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		VITA SPRAY-ON Supporto combinato per pistola nebulizzatrice
1		VITA SPRAY-ON Tubo aria compressa con anima flessibile
1		VITA SPRAY-ON Tubo di collegamento, a spirale
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Flacone dispensatore vuoto
1		VITA SPRAY-ON Pennarello (resistente all'alcool)
1		VITA SPRAY-ON Riduttore di pressione completo di supporto a muro

VITA SPRAY-ON Articoli**VITA SPRAY-ON**

Denominazione	Cod.
VITA SPRAY-ON Flacone di vetro vuoto	B103
VITA SPRAY-ON Coperchi adattatori completi di guarnizioni, 6 pz.	B104
VITA SPRAY-ON Pistola nebulizzatrice con cappuccio di protezione	B105N
VITA SPRAY-ON Ago di ricambio per pistola nebulizzatrice	B106
VITA SPRAY-ON Riduttore di pressione completo di supporto a muro	B107N
VITA SPRAY-ON Supporto combinato per pistola nebulizzatrice	B108
VITA SPRAY-ON guide in teflon per ago, 2 pz.	B109N
VITA SPRAY-ON Tubo aria compressa con anima flessibile	B110
VITA SPRAY-ON Tubo di collegamento, a spirale	B111
VITA SPRAY-ON Liquid, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid, 250 ml	B113
VITA SPRAY-ON Flacone dispensatore vuoto, 250 ml	B114
VITA SPRAY-ON Cappuccio di protezione per pistola nebulizzatrice	B115N
VITA SPRAY-ON Pennarello (resistente all'alcool)	B116
VITA SPRAY-ON Guarnizioni per cavo adattatore, 10 pz.	B210

VITA Modulbox

Sistema modulare in resina




Descrizione

VITA MODULBOX è un sistema modulare nel formato base A3 per la conservazione duratura, chiara e merceologicamente corretta dei prodotti VITA in laboratorio e studio.

Vedi anche Mobiletto denti vario.

VITA Modulbox Articoli
VITA Modulbox


Denominazione		Cod.
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 20 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB20
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 55 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB55
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 80 mm e 2 campi di descrittivi		ZMB80
VITA Modulbox base /coperchio senza guide completo di accessori		ZMBBD
Box die scorta VITABLOCS for CEREC con 1 cassetto altezza 80 mm ed 1 inserto Nr. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 1 con 1 cassetto, altezza 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 2 con 2 cassette, altezza 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 3 con 1 cassetto, altezza 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Kompletbox Nr. 4 con 2 cassette, altezza 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox elemento intermedio senza guide, completo di 3 tappi per montaggio		ZMBZ

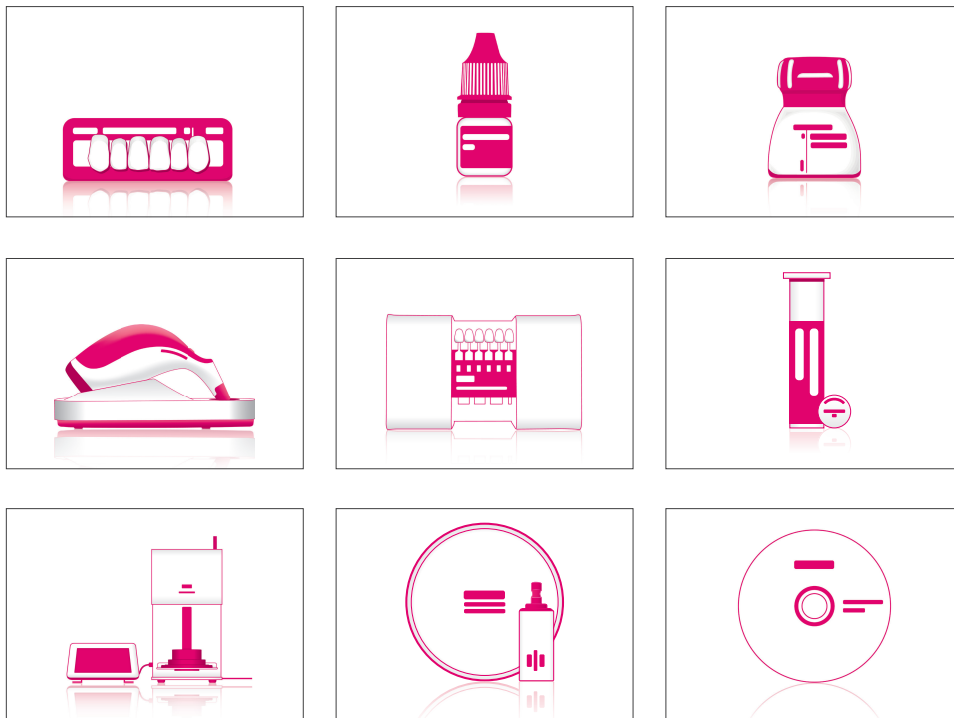

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus

Ottimizzato. Semplice. Completo.



Descrizione

Nuovi settori di impiego richiedono materiali nuovi e versatili. Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente e caratterizzare in modo semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.

Che si tratti della cromatizzazione interna di un restauro, di una caratterizzazione superficiale o di una leggera velatura - con i nuovi supercolori fluorescenti VITA AKZENT Plus il lavoro riesce sicuro e semplice.

I supercolori VITA AKZENT Plus offrono differenti opzioni di lavorazione e settori di impiego.

I supercolori BODY STAINS per lasura e GLAZE sono disponibili anche come spray, che assicura una stesura uniforme e omogenea su ampie superfici senza dispersioni. La nuova speciale testina nebulizzatrice consente un'applicazione mirata.

Vantaggi

Per tutti i tipi di materiali ceramici dentali, dalle ceramiche di stratificazione e pressatura, ai blocchetti in ceramica feldspatica come ad es. VITABLOCS fino a restauri monolitici. E' indicato per tutti i materiali ceramici dentali e per tutti i CET.

Disponibile in tre versioni:

POWDER:

per flessibilità ed economia illimitate

PASTE:

Paste pronte per l'uso di consistenza uniforme e pigmentazione omogenea

SPRAY:

masse glasura e per lasura pronte per l'uso, facili da applicare

VITA AKZENT® Plus Assortimenti

VITA AKZENT® Plus Powder



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER
BAPKCS3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical
BAPKCS**

Quantità	Contenuto	Materiale
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

**VITA AKZENT® PLUS MINI KIT
BAPKSKV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

**VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
BAPKV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Piastra di miscelazione inkl. campionario colori VITA AKZENT Plus
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		Misurino, 0,1 ml / Spatola di miscelazione 2 facciate
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA AKZENT® Plus Paste



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER
BAPKPCS3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical
BAPKPCSC**

Quantità	Contenuto	Materiale
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

**VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKPV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pennello piatto, per PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA AKZENT® Plus Articoli

VITA AKZENT® Plus Powder

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
BS01	B505013
BS02	B505023
BS03	B505033
BS04	B505043
BS05	B505053

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
CHROMA A	B5050A3
CHROMA B	B5050B3
CHROMA C	B5050C3
CHROMA D	B5050D3
CHROMA IO	B5050IO3
CHROMA L	B5050L3
CHROMA M2	B5050M23
CHROMA M3	B5050M33
CHROMA R	B5050R3

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)
ES01	B505513
ES02	B505523
ES03	B505533
ES04	B505543
ES05	B505553
ES06	B505563
ES07	B505573
ES08	B505583
ES09	B505593
ES10	B505603
ES11	B505613
ES12	B505623
ES13	B505633
ES14	B505643

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20

VITA AKZENT® Plus Paste

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
BS01	B505014
BS02	B505024
BS03	B505034
BS04	B505044
BS05	B505054

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A4
CHROMA B	B5050B4
CHROMA C	B5050C4
CHROMA D	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO4
CHROMA L	B5050L4
CHROMA M2	B5050M24
CHROMA M3	B5050M34
CHROMA R	B5050R4

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 4 g (Paste)
ES01	B505514
ES02	B505524
ES03	B505534
ES04	B505544
ES05	B505554
ES06	B505564
ES07	B505574
ES08	B505584
ES09	B505594
ES10	B505604
ES11	B505614
ES12	B505624
ES13	B505634
ES14	B505644

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA AKZENT® Plus Spray

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

VITA INTERNO®

Per la riproduzione di effetti cromatici in profondità



Descrizione

Con le masse VITA INTERNO il ceramista ha una nuova e sofisticata metodica per una riproduzione ancora più perfetta degli effetti cromatici di profondità. Soprattutto i contrasti cromatici presenti nel bordo incisale del dente naturale possono essere riprodotti in maniera eccellente con le masse INTERNO. Grazie all'elevata fluorescenza - come in natura - i colori risultano più luminosi ed il trasporto della luce viene incrementato.

Le masse VITA INTERNO sono indicate per **tutte** le ceramiche di rivestimento VITA.

Vantaggi

- di impiego universale per tutte le ceramiche di rivestimento VITA
- miscelabili tra loro
- le anomalie presenti nei denti naturali sono la matrice cromatica di queste masse, ed è pertanto possibile usarle in larga misura senza complicate miscele
- resistenti e cromaticamente stabili

VITA INTERNO® Assortimenti**VITA INTERNO®****VITA INTERNO KIT
BISETV3**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA INTERNO in resina (Ø 144 mm, con incavi)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA INTERNO® Articoli

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Denominazione	Cod.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA AKZENT® LC

Riprodurre in sicurezza effetti cromatici individuali



Descrizione

- VITA AKZENT LC è un sistema fotopolimerizzabile di supercolori / glasura per la caratterizzazione di tutti i restauri indiretti in composito, polimero e ceramica ibrida.
- I VITA AKZENT LC EFFECT STAINS comprendono 14 colori per una riproduzione di effetti individuali.
- I VITA AKZENT LC CHROMA STAINS sono supercolori su misura per un'attuazione sicura delle correzioni cromatiche.
- Il sistema comprende inoltre una massa glasura, pennello, piastra di miscelazione e liquido detergente.

Vantaggi

- Riprodurre in modo sicuro e naturale tutte le sfaccettature cromatiche della dentatura naturale residua grazie a colori effetto versatili e brillanti
- I colori Chroma consentono modifiche cromatiche semplici col solo pennello per un controllo sistematico e pianificabile della cromaticità del manufatto protesico
- Applicare effetti cromatici individuali in modo preciso e su superfici estese in modo altamente efficiente grazie ai colori effetto e Chroma con viscosità specifiche
- Realizzare manufatti protesici con una resa cromatica duratura e brillante ed un'elevata brillantezza grazie a colori con resistenti all'abrasione e alle decolorazioni

Indicazioni

VITA AKZENT LC

- è di uso universale per la caratterizzazione di restauri in ceramica ibrida, compositi CAD/CAM e per rivestimento estetico, basi protesiche in poliacrilati per stampa 3D, nonché denti protesici in composito
- impiego versatile per tutti i restauri indiretti realizzati nei materiali sopra citati ad es. corone e faccette CAD/CAM, ponti con rivestimento estetico in composito, protesi parziali/totali e provvisori

Colori

Disponibile in 14 colori Effetto e 4 colori Chroma

VITA AKZENT® LC Assortimenti

VITA AKZENT® LC

VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKIT3D

Quantità	Contenuto	Materiale
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA classical A1-D4®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKITC

Quantità	Contenuto	Materiale
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC STANDARD KIT
Supercolori per la riproduzione di effetti
CALCSKIT

Quantità	Contenuto	Materiale
6	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC Articoli
VITA AKZENT® LC

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2.5 ml	B5150A25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2.5 ml	B5150B25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2.5 ml	B5150C25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2.5 ml	B5150D25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2.5 ml	B5150L25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2.5 ml	B5150M225
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2.5 ml	B5150M325
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2.5 ml	B5150R25
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, white, 2.5 ml	B5155125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, cream, 2.5 ml	B5155225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, lemon, 2.5 ml	B5155325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, sun, 2.5 ml	B5155425
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, orange, 2.5 ml	B5155525
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, russet, 2.5 ml	B5155625
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, khaki, 2.5 ml	B5155725
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, pink, 2.5 ml	B5155825
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2.5 ml	B5155925
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, purple, 2.5 ml	B5156025
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, blue, 2.5 ml	B5156125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2.5 ml	B5156225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey, 2.5 ml	B5156325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, black, 2.5 ml	B5156425
VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml	B515905



VITA – perfect match.

VITA

VITA VACUMAT® 6000 M

Forno per ceramica Premium con dettagli sorprendenti e affidabilità convincente



Descrizione

VITA VACUMAT 6000 M è un'unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori. È idonea per tutte le cotture ceramiche. Il forno conquista per qualità ed estetica ad altissimo livello. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e confort al massimo grado. La costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. Due piani di raffreddamento integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori. Il design moderno con laccatura di alta qualità in sei moderni colori, attira lo sguardo sul posto di lavoro.

Vantaggi

- La muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed un'unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti
- protezione automatica contro la formazione di acqua di condensa nella camera di cottura (**VITA AntiCon**)
- taratura automatica della temperatura con una precisione di $\pm 1^\circ\text{C}$ ad ogni avvio di programma (**VITA AutoAdjust**)
- funzione automatica di decontaminazione (VITA SpecialClean)
- Con un'unica unità di comando **VITA vPad excellence** gestione di fino a **quattro forni**
- Con **VITA MultiPump** alimentazione del vuoto fino a **quattro forni** con un'unica pompa - esclusivo
- Con **VITA Energy Efficiency** risparmio fino al 70% di costi energetici
- **istruzioni di impiego integrate**
- **controllo Service** automatico **del ciclo**
- **a menu intelligente**

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre l'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

VITA VACUMAT® 6000 M**Funzioni tecniche**


- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contatore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili
- raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by







Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	330 mm
Altezza	444 mm
Peso	13 kg (laccato)
Esecuzione	laccato antracite
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un'unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D65000).
Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto (230 V) con custodia insonorizzante di serie
- pannelli laterali in 6 colori per individualizzare VITA VACUMAT 6000 M
- VITA MultiPump alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa
- Set cifre (Nr. 1-4)

VITA VACUMAT® 6000 M Articoli**VITA VACUMAT® 6000 M**

Denominazione		Cod.
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d'argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230

Denominazione		Cod.
VITA VACUMAT 6000 M laccata (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000M220
VITA VACUMAT 6000 M laccato blu cielo (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MHB220
VITA VACUMAT 6000 M laccato rosso carminio (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MKR220
VITA VACUMAT 6000 M, laccato bianco (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MRW220
VITA VACUMAT 6000 M laccato blu turchese (230 V) * Accessori 1 zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 istruzioni d'uso		DV6000MTB220
VITA VACUMAT 6000 M laccato nero intenso (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MTS220

Forni vuoto accessori universalmente

Denominazione		Cod.
Set pannelli laterali (colore blu) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47002
Set pannelli laterali (colore verde menta) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47003
Set pannelli laterali (colore rosa) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47004
Set pannelli laterali (colore albicocca) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47005
Set pannelli laterali (colore bianco) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) utilizzabile come blocco appunti per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47006
Set pannelli laterali (colore grigio scuro) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47007

VITA V60 i-Line® PLUS

Senza compromessi. Potente.



Descrizione

Il forno VITA V60 i-Line PLUS si concentra su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e semplicità d'impiego. Con il suo design intramontabile, il nuovo forno coniuga qualità comprovata e tecnologia moderna a un prezzo interessante.

Vantaggi

- **Grandissima semplicità d'uso** grazie al touchdisplay e alla guida a menu autoesplicativa in combinazione con un design minimalistico.
- **Plug & play**: nessun dispendioso procedimento di montaggio – è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro!
- **Made in Germany**: ingegneria avanzata e qualità ottimali.
- **Qualità VITA**: utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità con un solo obiettivo: affidabilità senza compromessi!
- **Semplicità di manutenzione**: costruzione modulare e agevole accesso a tutti i componenti soggetti ad usura semplificano la manutenzione e riducono i costi.
- **Altissime prestazioni tecniche**: un animale da lavoro. Estremamente robusto, protezione incorporata contro le variazioni di corrente e muffola in quarzo VITA di lunghissima durata.
- **Ridotto all'essenziale**: un concetto di forno classico e collaudato, che rinuncia espressamente a costose funzioni aggiuntive. Questo forno si concentra su funzioni base e affidabilità assoluta.

VITA V60 i-Line® PLUS**Funzioni tecniche**


- Massima precisione della temperatura (più / meno 2°C) per risultati di cottura ottimali
- Confort d'uso per risparmiare tempo, ingombro contenuto
- 2 piani di appoggio laterali
- Camera di cottura equipaggiata con materiale isolante di alta qualità
- Muffola in quarzo
- Termosonda (platino / rodio)
- Taratura automatica della temperatura


Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	420 mm
Altezza	570 mm
Peso	18 kg
Custodia	lamiera d'acciaio, laccata
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura cottura massima	Max. 1200°C
Allacciamento elettrico	230 Volt, 50 Hz o 100/110 Volt, 50/60Hz
Potenza assorbita	Max. 1,5 kW
Classificazione	Classe di sicurezza 1
Display	7 Pollici

Accessori (a pagamento):

- Pompa per vuoto: 230/240 Volt, 50/60Hz, 115 Volt, 50/60 Hz o 100 Volt, 50/60 Hz.
- VITA V60 i-Line TOOLBOX (DTOOL)

VITA V60 i-Line® PLUS Articoli**VITA V60 i-Line®**

Denominazione		Cod.
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d'argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230

Denominazione		Cod.
VITA V60 i-Line® PLUS (230 V) Accessori: 1 zoccolo di cottura 1 cavo di rete 1 cavo di collegamento per pompa per vuoto 1 tubo per vuoto 2 piani di appoggio laterali 1 Istruzioni d'uso		DV60IP220

VITA V60 i-Line® accessori

Denominazione	Cod.
VITA V60 i-Line® TOOLBOX * Scatola di metallo con: 1 foglio di lavagna bianca 1 matita stagnola 1 Pinza (25 cm) 1 confezione di supporti di cottura G 1 confezione di supporti di cottura A+B+C	DTOOL

VITA SMART.FIRE®

L'efficiente unità di cottura per riabilitazioni chairside



Descrizione

VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside. Selezione del materiale e avvio del programma si effettuano in un'unica operazione. Per semplificare le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati. Grazie alla costruzione compatta, l'unità di cottura ha un ingombro particolarmente ridotto e si posiziona agevolmente in qualsiasi studio.

Vantaggi

- Uso intuitivo grazie alla scelta del materiale e all'avvio del programma in un'unica operazione
- Chiara guida a menu con simboli programmi autoesplicativi
- Programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Confort d'uso grazie alla costruzione particolarmente compatta
- Funzionamento affidabile grazie alla tecnica di cottura di lunga durata
- Custodia resistente con superfici sigillate

Indicazioni

Unità di cottura VITA SMART.FIRE

- Unità di cottura da studio di ingombro ridotto e uso confortevole
- Tecnica di cottura robusta, di lunga durata per un funzionamento affidabile
- Custodia resistente con superfici sigillate per una facile detersione
- Cassetto Service integrato per avere a portata di mano gli accessori, ad es. il supporto di cottura
- Taratura completamente automatica della temperatura per risultati affidabili

Accessori VITA SMART.FIRE

- Set accessori integrato nell'unità di cottura per il massimo confort operativo

VITA SMART.FIRE®**Funzioni tecniche**

- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contatore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili

Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	300 mm
Altezza	340 mm
Peso	13 kg
Esecuzione	Polyurethan
Diametro camera di cottura	80 mm
Altezza camera di cottura	43 mm
Temperatura camera di cottura	1050°C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	950 W (230 V), max. 1100 W (100 V, 110 V)
Classificazione	classe di protezione 1


Accessori VITA SMART.FIRE







- 2x perni di platino
- 1x Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm)
- 1x supporto di cottura
- 1x pinza
- 1x piano di raffreddamento

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- pompa per vuoto (230 V) con custodia insonorizzante di serie


VITA SMART.FIRE® Articoli**VITA SMART.FIRE®**

Denominazione		Cod.
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d'argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230

Denominazione		Cod.
VITA SMART.FIRE (230 V) * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220
VITA SMART.FIRE Art Line (230 V) - Customized * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220C
VITA SMART.FIRE Art Line (230 V) - Design 1 * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D1
VITA SMART.FIRE Art Line (230 V) - Design 2 * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D2
VITA SMART.FIRE Art Line (230 V) - Design 3 * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D3
VITA SMART.FIRE Art Line (230 V) - Design 4 * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D4
VITA SMART.FIRE Art Line (230 V) - Design 5 * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D5

VITA VACUMAT® 6000 MP

Forno combinato di cottura e pressatura di livello premium

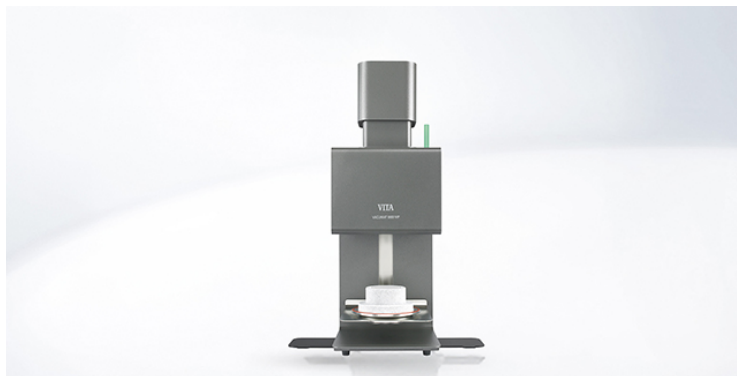

Descrizione

VITA VACUMAT 6000 MP è progettato per fornire risultati di pressatura sicuri e affidabili. Questa unità di cottura e pressatura combinata riunisce tutti i pregi di un moderno forno di cottura e di pressatura e le sue dimensioni compatte dettano un nuovo standard. VITA VACUMAT 6000 MP comprende tutti i programmi e funzioni del VITA VACUMAT 6000 M.

E' inoltre indicato per tutti i materiali pressabili presenti sul mercato e per i diversi sistemi di cilindri. Il riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti impedisce pressature errate e danni alla resistenza dovuti all'insufficiente inserimento di pellet (VITA PressControl).

Vantaggi

- La muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed un'unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti
- protezione automatica contro la formazione di acqua di condensa nella camera di cottura (**VITA AntiCon**)
- taratura automatica della temperatura con una precisione di +/-1° C ad ogni avvio di programma (**VITA AutoAdjust**)
- funzione automatica di decontaminazione (**VITA SpecialClean**)
- tecnica di pressatura sicura **VITA CPress** sviluppata da VITA
- controllo automatico della corsa di pressatura e riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti con **VITA PressControl**
- raffreddamento rapido controllato e programma notturno a basso consumo energetico (**VITA Energy Efficiency**)
- Con un'unica unità di comando **VITA vPad** gestione di fino a **quattro forni**
- Con **VITA MultiPump** alimentazione del vuoto fino a **quattro forni** con un'unica pompa - assolutamente unico - un sistema brevettato da VITA
- Con **VITA Energy Efficiency** risparmio fino al 70% di costi energetici

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre l'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

VITA VACUMAT® 6000 MP**Funzioni tecniche**


- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contatore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili
- raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by


Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	325 mm
Altezza	630 mm
Peso	18,7 kg (laccato)
Esecuzione	laccato antracite
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un'unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D65000).
Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto (230 V) con custodia insonorizzante di serie
- pannelli laterali in 6 colori per individualizzare VITA VACUMAT 6000 MP
- VITA MultiPump alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa
- Set cifre (Nr. 1-4)

VITA VACUMAT® 6000 MP Articoli**VITA VACUMAT® 6000 MP**

Denominazione		Cod.
VITA SET di controllo temperatura per il controllo della temperatura dei forni per ceramica contenente 6 zoccoli di ceramica e 3 barrette d'argento, lunghezza 70 mm e Ø 1,5 mm		B230

Denominazione		Cod.
VITA VACUMAT 6000 MP laccata (230 V) * Accessori 1 zoccoli di cottura 1 zoccolo di cottura-pressatura 1 inserto di pressatura universale 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 2 confezioni di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 regolatore di pressione da installare sulla pompa per vuoto 1 tubo per dispositivo di pressatura, tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MP220

Forni vuoto accessori universalmente

Denominazione		Cod.
Set pannelli laterali (colore blu) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47002
Set pannelli laterali (colore verde menta) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47003
Set pannelli laterali (colore rosa) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47004
Set pannelli laterali (colore albicocca) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47005
Set pannelli laterali (colore bianco) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) utilizzabile come blocco appunti per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47006
Set pannelli laterali (colore grigio scuro) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47007

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS



Descrizione

Sviluppato e prodotto integralmente in Germania, il forno di sinterizzazione VITA ZYRCOMAT 6100 MS garantisce la consueta qualità e affidabilità VITA. Offre tre diverse modalità di sinterizzazione liberamente selezionabili: HighSpeed, convenzionale e definita dall'utilizzatore, assicurando quindi flessibilità. Studiato per i materiali VITA e per tutti i materiali strutturali a base di ZrO_2 e Al_2O_3 presenti sul mercato, questo forno ad alta temperatura detta parametri per quanto riguarda funzionamento orientato all'utilizzatore ed ergonomia. Un indicatore di stato a LED e segnali acustici liberamente regolabili informano a distanza e con sicurezza sullo stato di cottura. Anche il sistema di aerazione è innovativo: grazie alla costruzione intelligente il calore è convogliato in modo da evitare la parte elettronica. Nel lungo periodo termoelementi e parte elettronica sono così soggetti a minori sollecitazioni.

Vantaggi

- **distribuzione termica omogenea** nella camera di sinterizzazione
- **taratura completamente automatica** e precisione garantita della temperatura (**VITA Autoadjust**)
- lunga durata ed esercizio con consumo di corrente durevolmente contenuto (**VITA Energy Efficiency**)
- sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali più diffusi, come biossido di zirconio bianco e ad elevata traslucenza, cromatizzato industrialmente o manualmente in tutte le modalità per risultati di cottura costanti e convincenti
- sinterizzazione HighSpeed meno di 60 minuti (**VITA HighSpeed**)
- sinterizzazione HighSpeed di strutture per ponti fino a 14 elementi
- sinterizzazione di tutti i materiali strutturali dentali a base di ZrO_2 e Al_2O_3
- sinterizzazione rispettosa dei materiali grazie al raffreddamento controllato a 400 °C in tutte le modalità
- preessiccazione a bassa temperatura integrata (**VITA PreDry**) con passaggio fluido al processo di sinterizzazione
- possibilità di ampliamento modulare del sistema per maggiore **flessibilità e produttività**
- sinterizzazione fino a 80 unità su due livelli

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre l'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS**Funzioni tecniche**


- Programmi Service e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura all'avvio di ogni programma , controllo della temperatura
- Protezione contro le interruzioni di corrente, Controllo lift
- 4 termoelementi in siliciuro di molibdeno ad alte prestazioni per una distribuzione omogenea della temperatura - sostituibili singolarmente
- Taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma
- Precisione della temperatura +/- 2 °C
- Elettronica di alta qualità che garantisce tempi e programmi di sicuri
- Camera di cottura dotata di materiali isolanti di alta qualità

Dati tecnici	
Larghezza	315 mm
Profondità	500 mm
Altezza	470 mm
Peso	27 kg (laccato)
Esecuzione	laccato antracite
Diametro camera di cottura	Diametro utile 90 mm
Altezza camera di cottura	Altezza utile 70 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1600 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- Programma FDS (Firing Data System) - Software PC per la gestione ed archiviazione dei dati di cottura
- Per la gestione multiforno con un'unità di comando VITA vPad (a partire dal 2. forno) occorre 1 Switchbox (Cod. D65000). Lo Switchbox è indicato per il collegamento di max. 4 forni.
- Pannelli laterali in 3 colori per individualizzare VITA ZYRCOMAT 6100 MS
- Set cifre magnetiche (Nr. 1-4)

VITA ZYRCOMAT® 6100 MS Articoli**VITA ZYRCOMAT® 6100 MS**

Denominazione		Cod.
VITA ZYRCOMAT 6100 MS laccato (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Pinza (25 cm) 1 Base di sinterizzazione MS 1 Confezione da 150 g sfere di ZrO2 1 LED indicatore di stato da inserire 1 Istruzioni d'uso		DZY6100MS220

VITA ZYRCOMAT® MS accessori speciali

Denominazione	Cod.
Set pannelli laterali (colore blu) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS	D53000
Set pannelli laterali (colore verde menta) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS	D53001
Set pannelli laterali (colore bianco) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) utilizzabile come blocco appunti per VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS	D53002
Set ricambio anelli controllo temperatura	D66003
Set controllo temperatura per VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS	DTKALSETMS

VITA vPad excellence

Salutiamo il futuro.



Descrizione

Unità di comando per:

- VITA VACUMAT 6000 M
- VITA VACUMAT 6000 MP
- VITA ZYRCOMAT 6000 MS
- VITA ZYRCOMAT 6100 MS

Vantaggi

Hardware:

- 10" Touch-Display da 10" di ultima generazione
- Lettore carte SD per gestire fotografie
- Due porte USB per il trasferimento dati
- Base di appoggio regolabile per un'operatività ottimale sull'apparecchio
- 3 GB di memoria per dati clienti (programmi di cottura, foto, file PDF)

Software:

- Modalità forni multipli fino a 4 forni
- Prima messa in funzione guidata
- Gestione profilo
- Desktop configurabili liberamente
- Programmi di cottura per i materiali VITA ed i materiali CAD/CAM più diffusi preinstallati
- Istruzioni di impiego integrate per tutti i materiali VITA
- Creare nuovi programmi di cottura o modificare programmi di cottura esistenti
- Funzione di assistenza digitale
- Memorizzazione dei dati di cottura per sistemi di qualità
- Capacità WiFi
- VITA FURNACE App (gratuita nel Google Play Store)
- Trasferimento dati
- Visore foto e PDF incorporato
- Salvaschermo
- Multilingue

VITA vPad excellence**Funzioni tecniche**

- numerosi programmi di servizio e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, termosonda e monitoraggio vuoto, raffreddamento rapido, programma notturno, protezione contro le interruzioni di corrente, contatore di esercizio per apparecchiatura e muffola, decontaminazione automatica
- controllo funzioni con registrazione corsa lift, vuoto preliminare e principale, svolgimento di temperature e tempi
- memorizzazione, messa in sicurezza e protezione antintrusione per profili utente e programmi individuali
- aggiornamento software e trasferimento dati su altre unità di comando vPad e PC tramite USB-stick
- controllo e visualizzazione errori
- posizioni lift per preessiccazione, raffreddamento e raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by liberamente programmabili
- scelta lingue

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	150 mm
Altezza	200 mm
Peso	1,6 kg
Esecuzione	plastica
Classificazione	classe di protezione1

Temperatura di esercizio: 10° C - 35° C


Umidità dell'aria per l'esercizio: max. 80% umidità relativa

Settore di impiego: omologato solo per uso all'interno di locali

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di 2 o più forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA ZYRCOMAT 6000 MS, VITA ZYRCOMAT 6100 MS o VITA VACUMAT 6000 MP con un'unità di controllo VITA vPad excellence è necessario 1 switchbox (cod. D65000).

VITA vPad excellence Articoli**VITA vPad excellence**

Denominazione		Cod.
VITA vPad excellence * Accessori 1 cavo di allacciamento 1 Istruzioni d uso		DVPADEXV1

VITA vPad comfort

Semplice. Affermato. Affidabile.



Descrizione

Unità di comando per:

- VITA VACUMAT 6000 M
- VITA VACUMAT 6000 MP
- VITA ZYRCOMAT 6000 MS
- VITA ZYRCOMAT 6100 MS

Vantaggi

Hardware:

- Display TFT da 10" di ultima generazione
- Una porta USB per il trasferimento dati
- Base di appoggio regolabile per un'operatività ottimale sull'apparecchio
- 3 GB di memoria per dati clienti (programmi di cottura, foto, file PDF)

Software:

- Programmi di cottura per i materiali VITA ed i materiali CAD/CAM più diffusi preinstallati
- Istruzioni di impiego integrate per tutti i materiali VITA
- Creare nuovi programmi di cottura o modificare programmi di cottura esistenti
- Memorizzazione dei dati di cottura per sistemi di qualità
- Trasferimento dati
- Visore foto e PDF incorporato
- Salvascermo
- Multilingue

VITA vPad comfort

Funzioni tecniche

- numerosi programmi di servizio e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, termosonda e monitoraggio vuoto, raffreddamento rapido, programma notturno, protezione contro le interruzioni di corrente, contatore di esercizio per apparecchiatura e muffola, decontaminazione automatica
- controllo funzioni con registrazione corsa lift, vuoto preliminare e principale, svolgimento di temperature e tempi
- memorizzazione, messa in sicurezza e protezione antintrusione per profili utente e programmi individuali
- aggiornamento software e trasferimento dati su altre unità di comando vPad e PC tramite USB-stick
- controllo e visualizzazione errori
- posizioni lift per preessiccazione, raffreddamento e raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by liberamente programmabili
- scelta lingue

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	150 mm
Altezza	200 mm
Peso	1,6 kg
Esecuzione	plastica
Classificazione	classe di protezione1

Temperatura di esercizio: 10° C - 35° C


Umidità dell'aria per l'esercizio: max. 80% umidità relativa

Settore di impiego: omologato solo per uso all'interno di locali

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura

VITA vPad comfort Articoli**VITA vPad comfort**

Denominazione		Cod.
VITA vPad comfort * Accessori 1 cavo di allacciamento 1 Istruzioni d uso		DVPADCV1

Pompa per vuoto




Descrizione

Pompa per vuoto VITA con custodia insonorizzante per un vuoto stabile e aria compressa costante

Pompa per vuoto

Dati tecnici	220 V / 50 Hz
Potenza	80 W
Peso	5,2 kg
Vuoto finale	30 mbar
portata	20 l/min
livello di rumore	52 dB
Larghezza	13,5 cm
Profondità	31 cm
Altezza	20,4 cm
Garanzia	2 Anni

Pompa per vuoto Articoli**Pompa per vuoto**

Denominazione		Cod.
Pompa per vuoto (220 V)		DVPU220

Pompa per vuoto II

Denominazione	Cod.
Pompa per vuoto II (200-240V)	DVPURM220

Accessori per VITA Forni






Descrizione

Nell'ampia gamma di optional potete scegliere set di pannelli laterali da individualizzare, piani di appoggio, pompa per vuoto, zoccoli ed altri accessori per un perfetto setup.

Accessori per VITA Forni Articoli**Accessori per VITA Forni di cottura**

Denominazione	Cod.
Memory Stick per VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T, VACUMAT 6000 M/MP	D42300
Piano di raffreddamento	D62100
pinza	D62102
Supporti di cottura tondo	D62103
Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm), 2 pz.	D62104S

Accessori per Forno di sinterizzazione

Denominazione		Cod.
Forni pinza per VITA ZYRCOMAT		D53003
Supporti base di sinterizzazione VITA, 4 pz.		D53295
Confezione da 150 g sfere di ZrO ₂ per cotture di sinterizzazione VITA YZ		E38002
Confezione singola base di sinterizzazione Ø 74 mm per VITA ZYrcomat T		E38006
Confezione singola crogiuolo di sinterizzazione Ø 80 mm per VITA ZYrcomat T		E38010
Confezione completa base e crogiuolo di sinterizzazione per VITA ZYrcomat T		E38011
Confezione singola base di sinterizzazione grande Ø 92 mm per VITA ZYrcomat T		E38012
Confezione singola crogiuolo di sinterizzazione grande Ø 100 mm per VITA ZYrcomat T		E38013
Confezione completa base e crogiuolo di sinterizzazione grande per VITA ZYrcomat T		E38014
Base di sinterizzazione per VITA ZYRCOMAT MS		E38015

Pezzi di ricambio per apparecchi



Pezzi di ricambio per apparecchi Articoli**Pezzi di ricambio per forni vuoto e vPads**

Denominazione	Cod.
Zoccolo di cottura-pressatura universale (100 g & 200 g)	D23294U
Inserito di pressatura universale (100 g & 200 g)	D23294US
Zoccoli di cottura - pressatura Nr. 1: 38 x 15 mm per für VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P1
Zoccoli di cottura - pressatura Nr. 2: 54 x 15 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P2
Zoccoli di cottura - pressatura Nr. 3: 67 x 15 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P3
Zoccoli di cottura - pressatura dischi Nr. 1: 36 x 5 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS1
Zoccolo di cottura per VITA SMART.FIRE	D62035
Muffola di cottura (230 V) per VITA SMART.FIRE	D62039
Zoccolo di cottura per VITA VACUMAT 30, 40, 40 T, 50, 200, 250, 300, 4000P, 4000 PT, ATMOMAT, VITA V60 i-Line, VITA VACUMAT 6000 M	D23294

Pezzi di ricambio per forni atmosferico

Denominazione	Cod.
Muffola di cottura (230 V) per VITA ATMOMAT, VACUMAT 40, 40 T, 4000 P, 4000 PT, 6000M, 6000MP	D32261
Temoelemento per VITA ZYRCOMAT 6000 MS + 6100 MS	D53041

VITA MultiPump



Descrizione

Per l'alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa.


Da ordinare come accessorio per la pompa per vuoto a partire dal secondo forno. Da utilizzare solo in combinazione con VITA vPad excellence.

Contenuto set base:

2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per due unità di cottura.

Dimensioni: 244,5 x 172,0 x 73,0 mm

VITA MultiPump Articoli**VITA MultiPump**

Denominazione		Cod.
VITA MultiPump		D61000

VITA MultiPump accessori

Denominazione	Cod.
VITA MultiPump ausiliare accessori 2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per 3. e 4. unità di cottura	D61004

VITA SWITCHBOX




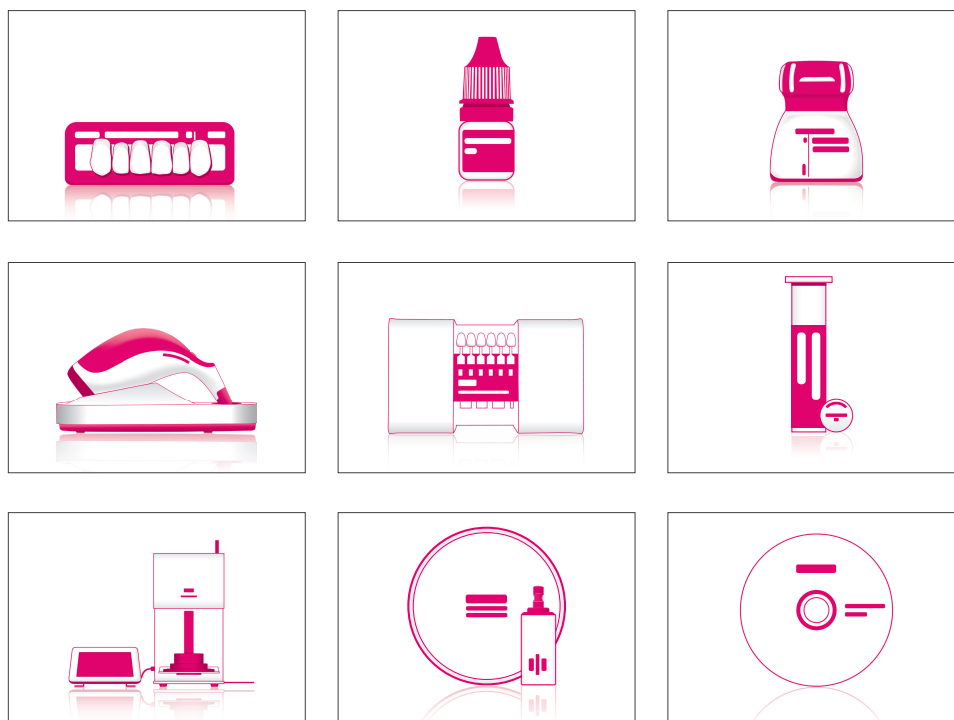
Descrizione

Per la gestione di 2 o più forni.

Fino ad un massimo di 4 forni.

VITA SWITCHBOX Articoli**VITA SWITCHBOX**

Denominazione		Cod.
VITA SWITCHBOX II * Per la gestione di 2 o più forni. Fino ad un massimo di 4 forni		D65000



VITA – perfect match.

VITA

VITA CERAMICS Polishing Set

Per la prelucidatura e la lucidatura a specchio di tutti i materiali ceramici



Descrizione

I VITA CERAMICS Polishing Set sono stati appositamente sviluppati per la lucidatura in due fasi di tutti i materiali ceramici dentali in studio e laboratorio. I set contengono rispettivamente 6 gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.

Vantaggi

Per tutte le ceramiche:

Ceramica feldspatica, vetroceramica, ossidoceramica:

con un unico set si possono lucidare tutti i tipi di ceramica.

Lucidatura semplice, prestazione eccellente:

Questi strumenti convincono per le buone prestazioni di rimozione e lucidatura, anche in presenza di fessure pronunciate. Per maggiore sicurezza gli strumenti Clinical sono sterilizzabili.

Utilizzo prolungato:

VITA CERAMICS Polishing Set sono particolarmente performanti e duraturi grazie all'elevato contenuto in diamante e all'ampio volume utile.

Contenuto

VITA CERAMICS Polishing Set clinical:

Comprende complessivamente sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio. Tutti gli strumenti sono sterilizzabili.

VITA CERAMICS Polishing Set technical:

Comprende complessivamente sei strumenti per manipolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.


VITA CERAMICS Polishing Set Articoli

VITA CERAMICS Polishing Set

Denominazione	Cod.
VITA CERAMICS Polishing Set clinical	ECEPSETC
VITA CERAMICS Polishing Set technical	ECEPSETT
Gommino a lenticolare technical, VI-H16D Lucidatura a specchio (crema), 3 pz.	ERHH16D3
Gommino a lenticolare technical, VI-H16Dmf Prelucidatura (grigio), 3 pz.	ERHH16DMF3
Gommino a Brush technical, VI-DT-H17D Lucidatura a specchio (crema), 3 pz.	ERHH17D3
Gommino a Brush technical, VI-DT-H17Dmf Prelucidatura (grigio), 3 pz.	ERHH17DMF3
Gommino a fiamma technical, VI-H1D Lucidatura a specchio (crema), 6 pz.	ERHH1D6
Gommino a fiamma technical, VI-H1Dmf Prelucidatura (grigio), 6 pz.	ERHH1DMF6
Gommino a Brush clinical, VI-DT-W14D Lucidatura a specchio (crema), 3 pz.	ERWW14D3
Gommino a Brush clinical, VI-DT-W14Dmf Prelucidatura (grigio), 3 pz.	ERWW14DMF3
Gommino lenticolare clinical, VI-W18D Lucidatura a specchio (crema), 6 pz.	ERWW18D6
Gommino lenticolare clinical, VI-W18Dmf Prelucidatura (grigio), 6 pz.	ERWW18DMF6
Gommino a calice clinical, VI-W7D Lucidatura a specchio (crema), 6 pz.	ERWW7D6
Gommino a calice clinical, VI-W7Dmf Prelucidatura (grigio), 6 pz.	ERWW7DMF6

VITA ENAMIC® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio della ceramica ibrida VITA ENAMIC

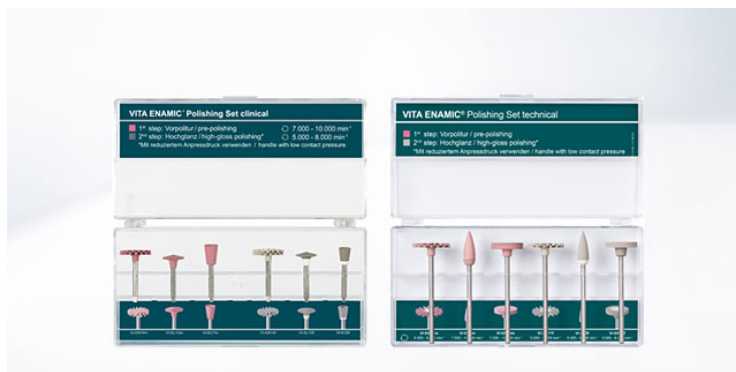

Descrizione

I VITA ENAMIC Polishing Sets sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in ceramica ibrida in studio e laboratorio. I sets contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio. Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza eccellente.

Vantaggi

Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano elevata capacità di asportazione. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA ENAMIC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

Contenuto

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:



Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Comprende sei strumenti per manipolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA ENAMIC® Polishing Set Articoli

VITA ENAMIC® Polishing Set

Denominazione		Cod.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Gommino a Brush technical, VI-EB17f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.		ERHEB17F3
Gommino a Brush technical, VI-EB17m Prelucidatura (rosa), 3 pz.		ERHEB17M3
Gommino a ruota technical, VI-ER15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHER15F6
Gommino a ruota technical, VI-ER15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHER15M6
Gommino a fiamma technical, pointe, VI-ES5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHES5F6
Gommino a fiamma technical, VI-ES5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHES5M6
Gommino a Brush clinical, VI-EB14f Lucidatura a specchio (grigio), 3 pz.		ERWEB14F3
Gommino a Brush clinical, VI-EB14m Prelucidatura (rosa), 3 pz.		ERWEB14M3
Gommino a calice clinical, VI-EC6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWEC6F6
Gommino a calice clinical, VI-EC7m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWEC7M6
Gommino lenticolare clinical, VI-EL10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWEL10F6
Gommino lenticolare clinical, VI-EL10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Per prelucidatura e lucidatura a specchio di VITA SUPRINITY PC



Descrizione

I VITA SUPRINITY Polishing Set sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente e merceologicamente corretta di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) in studio e laboratorio. I set contengono diversi gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.

Con questi strumenti si possono lucidare superfici occlusali, cuspidi, fessure e punti di contatto dei restauri nel pieno rispetto del materiale. Come risultato finale con questi strumenti si ottengono superfici con un grado di lucentezza brillante.

Vantaggi

Risultati finali eccellenti:

Con questi strumenti si ottengono superfici eccellenti e resistenti al deposito di placca. Centricità di rotazione esatta, granulometrie appositamente studiate e geometrie individuali degli strumenti garantiscono risultati di alta precisione.

Impiego semplice e sicuro:

Gli strumenti assicurano una buona capacità di asportazione ben controllabile e contemporaneamente usura contenuta. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida. Per maggiore sicurezza gli strumenti clinical sono sterilizzabili.

Trattamento rispettoso del materiale:

Con questi strumenti sviluppati appositamente per VITA SUPRINITY PC è garantita una finitura rispettosa del materiale. In tal modo si riduce anche il rischio di microfessure.

Contenuto

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:



Comprende sei strumenti per contrangolo, di cui tre per la prelucidatura e tre per la lucidatura a specchio.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Comprende otto strumenti per manipolo, di cui quattro per la prelucidatura e quattro per la lucidatura a specchio.

VITA SUPRINITY® Polishing Set Articoli

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Denominazione		Cod.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Gommino lenticolare technical, L16f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHL16F6
Gommino lenticolare technical, L16m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHL16M6
Gommino Longpin technical, LPf Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHLPF6
Gommino Longpin technical, LPm Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHLPM6
Gommino a ruota technical, R15f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHR15F6
Gommino a ruota technical, R15m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHR15M6
Gommino a fiamma technical, S5f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERHS5F6
Gommino a fiamma technical, S5m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERHS5M6
Gommino a calice clinical, C6f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWC6F6
Gommino a calice clinical, C6m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWC6M6
Gommino lenticolare clinical, L10f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWL10F6
Gommino lenticolare clinical, L10m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWL10M6
Gommino a fiamma clinical, S4f Lucidatura a specchio (grigio), 6 pz.		ERWS4F6
Gommino a fiamma clinical, S4m Prelucidatura (rosa), 6 pz.		ERWS4M6

Paste lucidanti VITA

Paste diamantate per la lucidatura a specchio extraorale di materiali ceramici e a base polimerica



Descrizione

VITA Polish Hybrid è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC, composito e polimero.

VITA Polish Cera è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio.

Vantaggi

- Con entrambe le paste per lucidare si conseguono risultati rapidi e sicuri di lucidatura a specchio. La tessitura superficiale non viene modificata.
- Le particelle diamantate sono specifiche per le rispettive classi di materiali. Il tal modo si tempera la superficie e riducono i depositi di placca.



Contenuto

La pasta per lucidare VITA Polish Hybrid è ottimale per la lucidatura della ceramica ibrida VITA ENAMIC in combinazione con i gommini dei VITA ENAMIC Polishing Set clinical e technical.

La pasta per lucidare VITA Polish Cera è ottimale per la lucidatura di VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA e VITA YZ in combinazione con i gommini dei VITA SUPRINITY Polishing Set clinical e technical.

Paste lucidanti VITA Articoli

Paste lucidanti VITA

Denominazione		Cod.
VITA Polish Cera, 18 g		B459
VITA Polish Hybrid, 12 g		C020



VITA – perfect match.

VITA

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

Il sistema di fissaggio adesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento della sostanza dentaria e del materiale di restauro



Descrizione

Il sistema di fissaggio adesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento della sostanza dentaria e del materiale di restauro.

Per il fissaggio di tutti i restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

Vantaggi

- Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.
- Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.
- Set a doppio tray, in formato normalizzato per avere tutti i componenti a portata di mano.

Contenuto

VITA ADIVA® TOOTH-ETCH

Acido fosforico in gel al 37% per la mordenzatura dello smalto dentario per il fissaggio adesivo di restauri in ceramica e composito alla sostanza dentaria. Indicato per le tecniche di mordenzatura totale (Total-Etch) e di mordenzatura selettiva (Selective-Etch).

VITA ADIVA® T-BOND I+II

Sistema Bonding a indurimento duale. VITA ADIVA T-BOND consente un buon legame tra composito di fissaggio e smalto nonché dentina mordenzati.

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5% per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida per realizzare un ancoraggio micromeccanico tra restauro e composito di fissaggio. Solo per uso extraorale!

VITA ADIVA® C-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sinterizzati in biossido di zirconio e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sabbiati in titanio, leghe non nobili, leghe nobili e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® F-CEM

Composito di fissaggio adesivo, a indurimento duale, per il fissaggio definitivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE Assortimenti
VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET
**VITA ADIVA FULL-ADHESIVE SET
FAFASV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA F-CEM A2 Universal
1	trasparen te	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso
1	3 ml	VITA ADIVA TOOTH-ETCH
2	20 pz.	Cannule di applicazione monouso blu per TOOTH-ETCH, rosse per CERA ETCH
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND I
1	5 ml	VITA ADIVA T-BOND II
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA F-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
A2 Universal	FAFCEMA25
A3	FAFCEMA35
Translucent	FAFCEMT5
White opaque	FAFCEMW05

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Ceramic primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer per metalli	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 pz.

Denominazione	Cod. 10 pz.
3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso, trasparente	FAOP3V1

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adesivo a indurimento duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) acido fosforico in gel al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer per biossido di zirconio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento del materiale di restauro



Descrizione

Il sistema di fissaggio autoadesivo con componenti perfettamente coordinati per il condizionamento del materiale di restauro.

Per il fissaggio di tutti i restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

Vantaggi

- Fissaggio adesivo affidabile di molteplici materiali restaurativi con adesivi specifici per i singoli materiali.
- Procedimento sicuro grazie alla chiara presentazione del set di fissaggio con componenti disposti sistematicamente e codificati cromaticamente.
- Set a doppio tray, in formato normalizzato per avere tutti i componenti a portata di mano.

Contenuto

VITA ADIVA® CERA-ETCH

Acido fluoridrico in gel al 5 % per la mordenzatura di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica e ceramica ibrida per realizzare un ancoraggio micromeccanico tra restauro e composito di fissaggio. Solo per uso extraorale!

VITA ADIVA® C-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® ZR-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sinterizzati in biossido di zirconio e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® M-PRIME

Agente adesivo che genera un legame chimico tra restauri sabbiati in titanio, leghe non nobili, leghe nobili e composito di fissaggio.

VITA ADIVA® S-CEM

Composito di fissaggio autoadesivo, a indurimento duale, per il fissaggio definitivo di restauri in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.

VITA ADIVA® OXY-PREVENT

Gel alla glicerina, colore neutro, per impedire la formazione dello strato di dispersione. Utilizzabile anche come pasta try-in.

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE Assortimenti**VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET****VITA ADIVA SELF-ADHESIVE SET
FASASV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA S-CEM A2 Universal
1	trasparen te	VITA ADIVA OXY-PREVENT 3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso
1	3 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	20 pz.	Cannule di applicazione monouso rosse per CERA ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA M-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 4:1

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSIONS

VITA ADIVA S-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
A2 Universal	FASCEMA25
Translucent	FASCEMT5

VITA ADIVA® COMPONENTS

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA CERA-ETCH, 3 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE3
VITA ADIVA CERA-ETCH, 6 ml acido fluoridrico in gel al 5%	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME, 5 ml Ceramic primer	FACP5
VITA ADIVA M-PRIME, 5 ml Primer per metalli	FAMP5

VITA ADIVA OXY-PREVENT, 10 pz.

Denominazione	Cod. 10 pz.
3 ml inkl. 1 Confezione Cannule di applicazione monouso, trasparente	FAOP3V1

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA T-BOND SET (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) Sistema Adesivo a indurimento duale	FATBS
VITA ADIVA TOOTH-ETCH, 3 ml (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE) acido fosforico in gel al 37%	FATE3
VITA ADIVA ZR-PRIME, 5 ml Primer per biossido di zirconio	FAZRP5

VITA ADIVA® ACCESSORIES

Denominazione	Cod.
VITA ADIVA Mixing-Trays, 25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA Microbrush, 25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA FULL-ADHESIVE)	FATM11
VITA ADIVA T-Mixer 4:1, 15 pcs. (only for VITA ADIVA SELF-ADHESIVE)	FATM41

VITA ADIVA® TE-CEM



Descrizione

VITA ADIVA TE-CEM è un cemento-resina a indurimento duale per il fissaggio provvisorio.

E' disponibile nel colore Translucent.

VITA ADIVA® TE-CEM Articoli**VITA ADIVA® TE-CEM**

VITA ADIVA TE-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Translucent	FATECEM5

VITA ADIVA® IA-CEM

Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari



Descrizione

VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments individuali in titanio e biossido di zirconio.

Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.


VITA ADIVA® IA-CEM Assortimenti**VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET****VITA ADIVA® IA-CEM SET****FAIACEMSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

VITA ADIVA® IA-CEM Articoli**VITA ADIVA® IA-CEM**

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05

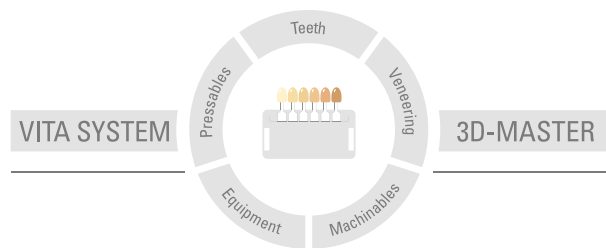

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 11/2023

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik