
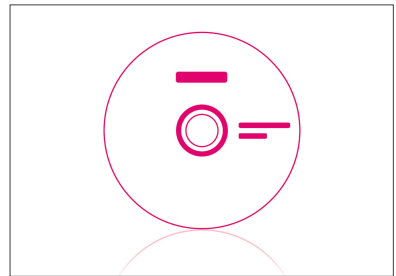
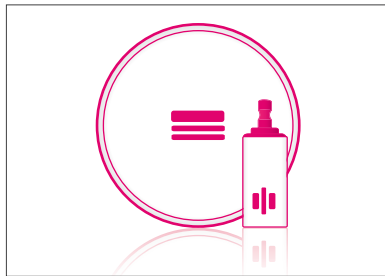
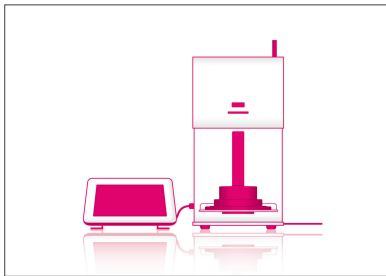


# VITA Kompendium April 2024

## Charakterisierung

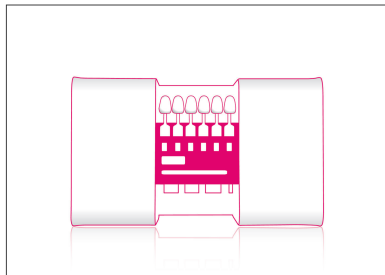

VITA – perfect match.

**VITA**



---

VITA – perfect match.

**VITA**

### VITA AKZENT® Plus

Optimiert. Einfach. Alles.



#### Produktbeschreibung

Neue Einsatzgebiete erfordern neue, vielseitige Materialien. Mit VITA AKZENT Plus Malfarben können Anwender unabhängig vom WAK der Restauration einfach und effizient alle Arten von dentalkeramischen Werkstoffen farblich optimieren.

Egal ob Sie Ihre Restauration intern kolorieren oder oberflächlich charakterisieren und fein lasieren: Mit den neuen fluoreszierenden VITA AKZENT Plus Malfarben gelingt dies leicht und ohne großen Aufwand.

Die VITA AKZENT Plus Malfarben sind je nach Verarbeitungspräferenz, Gewohnheit und Einsatzgebiet als Pulver und gebrauchsfertige Pasten erhältlich.

Die lasierenden BODY STAINS und GLAZE gibt es zusätzlich als Spray, welches durch gleichmäßiges Auftragen eine großflächige, einheitliche Oberflächenbehandlung ohne Streuverlust sicherstellt. Der neue, spezielle Sprühkopf steht für gezieltes Applizieren.

#### Vorteile

Für alle Arten von dentalkeramischen Werkstoffen, von Schicht- und Presskeramiken, Feldspatkeramikblocks wie z.B. VITABLOCS bis hin zu monolithischen Restaurationen. Es eignet sich für alle dentalkeramischen Werkstoffe und für jeden WAK.

Verfügbar in drei Anwendungsformen:

#### POWDER:

für uneingeschränkte Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

#### PASTE:

gebrauchsfertige Pasten mit gleichmäßiger Konsistenz und homogener Pigmentierung

#### SPRAY:

gebrauchsfertige, leicht zu applizierende Glasur- und Lasurfarben

## VITA AKZENT® Plus Sortimente

### VITA AKZENT® Plus Powder



#### VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER BAPKCS3D

Anzahl	Inhalt	Material
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster 3D-MASTER



#### VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical BAPKCS

Anzahl	Inhalt	Material
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster classical

#### VITA AKZENT® PLUS MINI KIT BAPKSKV1

Anzahl	Inhalt	Material
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Farbmusterscheibe
1		VITA AKZENT Plus Anmischplatte-Kristallglas (70 x 95 mm)
1		Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch

**VITA AKZENT® Plus POWDER KIT  
BAPKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Anmischplatte inkl. Farbmusterscheibe
1		VITA Glasspatel für Malfarben
1		Messlöffel, 0,1 ml / Anrührspatel 2-seitig
1		Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch

**VITA AKZENT® Plus Paste**



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER  
BAPKPCS3D**

Anzahl	Inhalt	Material
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical  
BAPKPCS3C**

Anzahl	Inhalt	Material
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster classical

### VITA AKZENT® Plus PASTE KIT BAPKPV1

Anzahl	Inhalt	Material
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Flachpinsel, für PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Farbmusterscheibe
1		VITA AKZENT Plus Anmischplatte-Kristallglas (70 x 95 mm)
1		VITA Glasspatel für Malfarben
1		Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch

## VITA AKZENT® Plus Artikel

### VITA AKZENT® Plus Powder

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder)

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g (Powder)
BS01	B505013
BS02	B505023
BS03	B505033
BS04	B505043
BS05	B505053

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder)

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g (Powder)
CHROMA A	B5050A3
CHROMA B	B5050B3
CHROMA C	B5050C3
CHROMA D	B5050D3
CHROMA IO	B5050IO3
CHROMA L	B5050L3
CHROMA M2	B5050M23
CHROMA M3	B5050M33
CHROMA R	B5050R3

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder)

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g (Powder)
ES01	B505513
ES02	B505523
ES03	B505533
ES04	B505543
ES05	B505553
ES06	B505563
ES07	B505573
ES08	B505583
ES09	B505593
ES10	B505603
ES11	B505613
ES12	B505623
ES13	B505633
ES14	B505643

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20

### VITA AKZENT® Plus Paste

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 4 g (Paste)

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g (Paste)
BS01	B505014
BS02	B505024
BS03	B505034
BS04	B505044
BS05	B505054

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 4 g (Paste)

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A4
CHROMA B	B5050B4
CHROMA C	B5050C4
CHROMA D	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO4
CHROMA L	B5050L4
CHROMA M2	B5050M24
CHROMA M3	B5050M34
CHROMA R	B5050R4



### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 4 g (Paste)

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g (Paste)
ES01	B505514
ES02	B505524
ES03	B505534
ES04	B505544
ES05	B505554
ES06	B505564
ES07	B505574
ES08	B505584
ES09	B505594
ES10	B505604
ES11	B505614
ES12	B505624
ES13	B505634
ES14	B505644

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

### VITA AKZENT® Plus Spray

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

### VITA INTERNO®

#### Zur Wiedergabe von Charakteristika im Inneren des Zahnes



#### Produktbeschreibung

Die im natürlichen Zahn vorkommenden Anomalien sind farbliches Vorbild für die VITA INTERNO Farben. Mit diesen Massen lassen sich natürliche Farbeffekte nachgestalten und keramische Arbeiten farblich dem natürlichen Vorbild perfekt angleichen.

Besonders die im Inzisalbereich natürlicher Zähne auftretenden Farbeffekte lassen sich mit VITA INTERNO naturnah reproduzieren.

Sie können entweder pur oder eingemischt in Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel oder in die Transluzenzmassen eingesetzt werden.

Für folgende Produkte sind VITA INTERNO Massen universell einsetzbar: VITA VM 7, VM 9, VM 11, VM 13, VM 15, VITA VMK Master und VITA TITANKERAMIK.

#### Vorteile

- Feinkörnig: Dadurch lassen sich VITA INTERNO Massen hervorragend in die Keramikmassen einschweben
- Farbintensiv: Ihre Farbintensität ermöglicht Farbeffekte, die durch die darüberliegenden Massen hindurch wirken und ein Chroma aus der Tiefe der Verblendung erzeugen
- Stark fluoreszierend: Die Fluoreszenz erzeugt die hohe Leuchtkraft der Farben und verstärkt den Lichttransport innerhalb der Keramik
- Untereinander mischbar: Durch Mischen lassen sich INTERNO Massen mit anderen INTERNO Massen abtönen und zusätzlich farblich individualisieren
- Mit allen VITA Keramikmassen mischbar: Gemischt mit den Keramikmassen erhöhen sie deren Fluoreszenz und damit die natürliche Leuchtkraft der Keramik bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen

**VITA INTERNO® Artikel**

**VITA INTERNO®**

VITA INTERNO, 3 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

## VITA AKZENT® LC

### Individuelle Farbeffekte verlässlich reproduzieren



#### Produktbeschreibung

- VITA AKZENT LC ist ein lichthärtendes Malfarben-/ Glasursystem zur extraoralen Charakterisierung aller indirekten Versorgungen aus Komposit, Polymer und Hybridkeramik.
- Die VITA AKZENT LC EFFECT STAINS umfassen 14 Farben für eine individuelle Effektreproduktion.
- Die VITA AKZENT LC CHROMA STAINS sind maßgeschneiderte Farben zur verlässlichen Umsetzung von Farbkorrekturen.
- Das System bietet zusätzlich eine Glasurmasse, Pinsel, Mischpalette und Reinigungsflüssigkeit.

#### Vorteile

- Verlässlich-naturgetreu alle farblichen Facetten der natürlichen Bezahnung reproduzieren dank mannigfaltiger, brillanter Effektfarben
- Spielend einfach Farbmodifikationen per Pinselstrich umsetzen durch Chromafarben zur planbaren, systematischen Steuerung der Chromazität des Zahnersatzes
- Individuelle Farbeffekte punktgenau applizieren und Farben hocheffizient flächig auftragen dank Effekt- und Chromafarben mit ideal abgestimmten Viskositäten
- Versorgungen mit beständig brillanter Farbwiedergabe sowie hoher Glanzstabilität herstellen dank Farben mit guter Verschleiß- und Verfärbungsbeständigkeit

#### Indikation

VITA AKZENT LC

- ist universell für die Charakterisierung von Zahnersatz aus Hybridkeramik, CAD/CAM- und Verblendkompositen, 3D-Druck Acrylpolymeren sowie Kunststoffprothesen anwendbar
- lässt sich vielseitig für alle indirekten Restaurationen aus o. g. Werkstoffen einsetzen:  
z. B. CAD/CAM-gefertigte Kronen, kunststoffverblendete Brückenversorgungen, Total-/Teilprothesen sowie Langzeitprovisorien

#### Farben

Erhältlich in 14 Effektfarben und 4 Chromafarben

## VITA AKZENT® LC Sortimente

### VITA AKZENT® LC

#### VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®

##### Malfarben für Effektreproduktion & Farbkorrektur

##### CALCEKIT3D

Anzahl	Inhalt	Material
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Porzellan Anmischplatte weiß mit Deckel, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pinzel Nr. 1 Korrekturpinzel, Rotmarder
1		Flachpinzel für CHROMA STAINS

#### VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA classical A1-D4®

##### Malfarben für Effektreproduktion & Farbkorrektur

##### CALCEKITC

Anzahl	Inhalt	Material
8	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, dark-red, purple, grey, black
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C)
1	2.5 ml	VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D)
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Porzellan Anmischplatte weiß mit Deckel, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pinzel Nr. 1 Korrekturpinzel, Rotmarder
1		Flachpinzel für CHROMA STAINS


**VITA AKZENT® LC STANDARD KIT**  
**Malfarben für Effektreproduktion**  
**CALCSKIT**

Anzahl	Inhalt	Material
6	2.5 ml	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 ml	VITA AKZENT LC CLEANER
1		VITA Porzellan Anmischplatte weiß mit Deckel, 5,5 x 3,5 cm
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pinzel Nr. 1 Korrekturpinzel, Rotmarder
1		Flachpinzel für CHROMA STAINS

## VITA AKZENT® LC Artikel

### VITA AKZENT® LC

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2.5 ml	B5150A25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2.5 ml	B5150B25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2.5 ml	B5150C25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2.5 ml	B5150D25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2.5 ml	B5150L25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2.5 ml	B5150M225
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2.5 ml	B5150M325
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2.5 ml	B5150R25
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, white, 2.5 ml	B5155125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, cream, 2.5 ml	B5155225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, lemon, 2.5 ml	B5155325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, sun, 2.5 ml	B5155425
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, orange, 2.5 ml	B5155525
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, russet, 2.5 ml	B5155625
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, khaki, 2.5 ml	B5155725
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, pink, 2.5 ml	B5155825
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2.5 ml	B5155925
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, purple, 2.5 ml	B5156025
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, blue, 2.5 ml	B5156125
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2.5 ml	B5156225
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey, 2.5 ml	B5156325
VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, black, 2.5 ml	B5156425
VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml	B515905

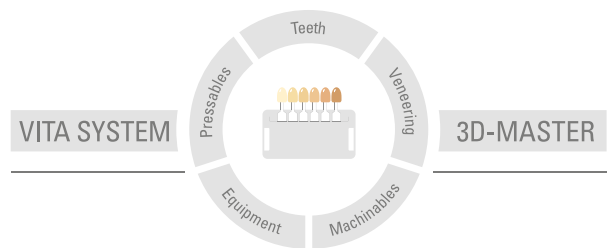

Stand dieser Information: 04-2024

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)